




Splashy

Bruksanvisning

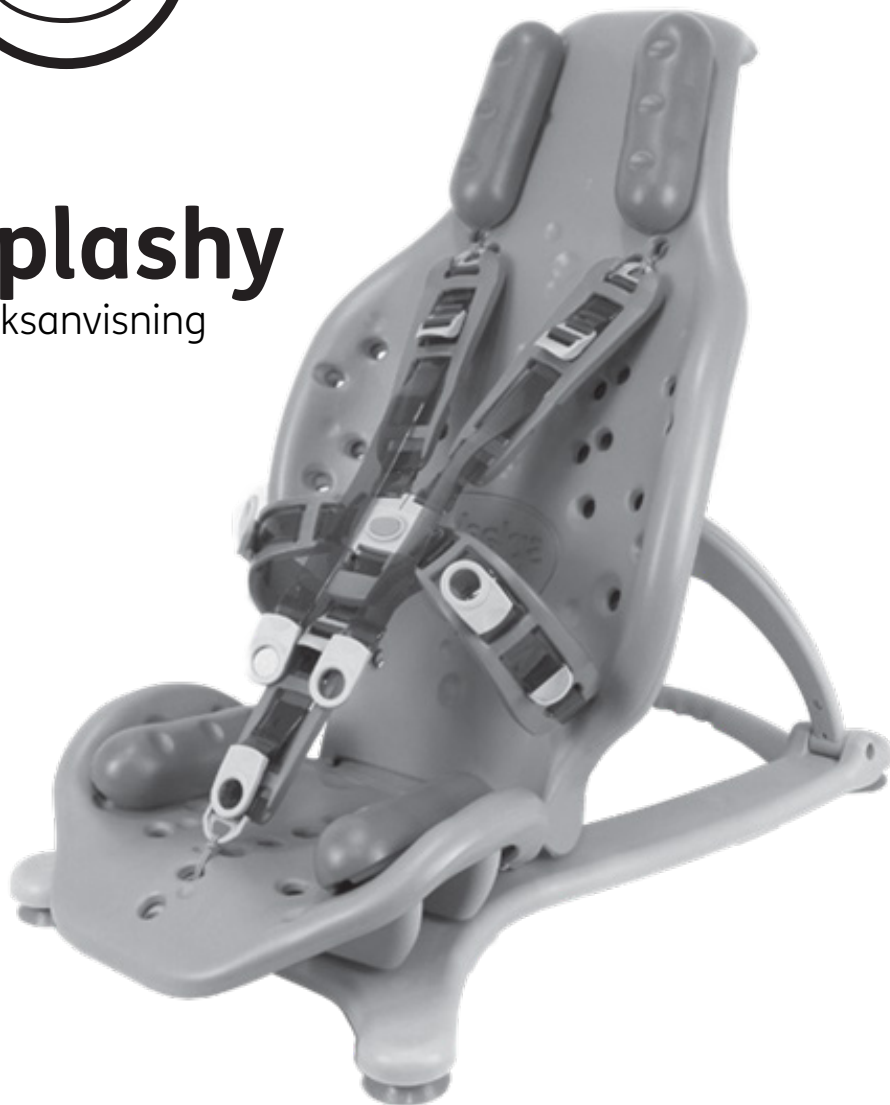

Family Freedom

Norsk

Vennligst les alle instruksjoner nøye før du bruker Splashy.
Alle instruksjoner finnes også på vår nettside: **www.fireflyfriends.com** samt videoer og ofte stilte spørsmål.

Innhold

01 Tiltent bruk	4
02 Sertifisering	5
03 Advarsler og forsiktighetsregler	5
04 Vilkår for garanti	7
05 Sikkerhetsinformasjon	7
06 Forholdsregler og kontraindikasjoner	8
07 Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon	9
08 Produktinspeksjon og service	11
09 Viktige retningslinjer	12
10 Gjenbruke Firefly-produkter	12
11 Instruksjoner for bruk	13
12 Størrelseinformasjon	33
13 Symboler	34

AVSNITT 01: Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk

Badestøtter er ment for å støtte personer som har milde til komplekse posturale behov som forstyrrer evnen til å sitte uten ekstern støtte. Alle enheter er ment å brukes i badekar eller dusj for å lette personlig pleie. Splashy kan i tillegg brukes utendørs til rekreasjonsformål som bruk på en strand eller badeland.

Indikasjoner for bruk

Splashy er ment for å gi støtte til barn med nedsatt funksjonsevne som trenger hode- og kroppsstøtte mens de sitter i badekaret. For struktur, sikkerhet og støtte er det viktig at Splashy til enhver tid er festet til gulvbasen. Splashy er designet for barn i alderen fra ca. 1-8 år og med maksimal brukervekt på 30 kg (66 lbs).



Barn bør aldri etterlates uten tilsyn i Splashy, da de kan risikere å drukne eller skade seg.

Vi anbefaler at en voksen fullfører produktinspeksjoner i samsvar med avsnitt 08 i denne bruksanvisningen for å sikre at produktet er trygt å bruke. Firefly Friends Ltd. og James Leckey Design Ltd. kan ikke akseptere noe ansvar dersom produktet brukes utenfor tiltenkt bruk. Hvis du er i tvil, kontakt Firefly kundeservice på UK 0800 318265 eller ROI 1800 626020.

Daglige aktiviteter som er testet og godkjent av Firefly Friends Ltd. og James Leckey Design Ltd. er:

1. I badekar eller i dusjen.
2. For vannlekeaktiviteter.

Bruk av Splashy utenfor badet (i hagen eller på stranden) bør vurderes først. Vær oppmerksom på at Splashy er festet til gulvbase hvor låsen kan påvirkes av små partikler som jord, sand eller gress. Hvis Splashy kommer i kontakt med slikt, er det viktig å skylle grundig etter bruk. Se avsnitt 05 for sikkerhetsinformasjon og avsnitt 07 for ytterligere veiledning om rengjøring og vedlikehold.

AVSNITT 02: Sertifisering

Splashy er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse I i henhold til EU og UK regelverk. Som produsent, erklærer James Leckey Design Limited at dette produktet er i samsvar med Medical Device Regulation (2017/745), UK Medical Device Regulations 2002, Medical Device Directive (93/42 EEC) og EN 12182:2012 hjelpemidler for personer med funksjonshemming, generelle krav og testmetoder.

Merknad til brukeren og/eller pasienten:

Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten og myndighetene i området der brukeren og/eller pasienten bor.

Merk:

Generelle brukerråd.

Ved å ikke følge disse instruksjonene kan føre til fysisk skade, skade på produktet eller skade på miljøet!

AVSNITT 03: Advarsler og forsiktighetsregler

Garantien for Splashy gjelder kun når produktet brukes i henhold til tiltenkt bruk og ved å følge produsentens spesifikasjoner. Det gis ett års garanti for dette produktet.

Advarsel og veltfare:

- Aldri bruk Splashy på ujevnt underlag.
- Kontroller at seteryggen er sikret før brukeren settes i Splashy og at sikkerhetsstroppene for føttene settes på så snart brukeren har satt seg.

- Aldri etterlat et barn uten tilsyn i Splashy.

Advarsel daglige kontroller:

- Splashy skal kontrolleres daglig før bruk for å sikre at alle seler og seteelementer er godt festet.
- Inspiser alltid produktet visuelt før bruk. Hvis du er i tvil, stopp å bruke produktet umiddelbart. Hvis du mistenker eller vet at produktet eller en del er defekt, stopp å bruke produktet. Kontakt vår kundeserviceavdeling eller din lokale forhandler så snart som mulig.

Advarsel fingerklemmingsfare:

- Vær forsiktig når du monterer eller justerer posisjonen til setekomponentene, at fingrene ikke kommer i klem.
- Pleieren skal ikke berøre noen bevegelige ledd som ikke er låst.

Advarsel fingerfellefare:

- Pass på at fingrene til pleieren eller barnet ikke blir klemt i mellomrommet mellom setet og rammen.

Advarsel brukersikkerhet:

- Før du plasserer brukeren i produktet, må du justere produktet og kontrollere stabiliteten.
- Brukeroverføringer inn og ut av produktet må gjøres med egnet utstyr og personell.
- Sørg for at brukeren er sikret med selene så snart de er satt i produktet. Det bør utvises forsiktighet ved justeringer av seteryggen slik at man ikke setter fingre i klem mellom setet og rammen. Aldri forlat et barn uten tilsyn i Splashy.
- Risiko for velt!
Hvis beltene må løsnes under aktiviteten, kan barnet skli ned eller, på grunn av manglende brystkontroll, velte med ansiktet fremover.

- Merk drukningsrisiko ved tilbaketent ryggstøtte.
- Hvis brukeren viser noen form for ubehag, ta barnet ut av produktet umiddelbart.

Advarsel rengjøring:

- Rengjør produktet regelmessig for å forhindre oppbygging av smuss. Oppsamlet smuss kan slite på setet og forårsake korrosjon i rammen. Bruk kun ikke-slipende husholdningsrengjøringsmidler og fuktige kluter.

Advarsel vannslange/kraftvasker:

- Ikke bruk vannslange eller kraftvasker på rammekomponentene, rammen er ikke forseglet mot vann og kan bli skadet av vanninntrengning.

Advarsel oppbevaring:

- Produktet bør holdes unna alle direkte varmkilder, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske- og gassvarmere.

Advarsel ved bruk:

- Ved bruk av Splashy etter lagring, la den få akklimatisere seg til romtemperatur før bruk.

Advarsel ved resirkulering:

- Kun resirkuler Splashy ved å følge reglene i ditt område.

AVSNITT 04: Vilkår for garanti

Garantien for Splashy gjelder kun når produktet brukes i henhold til tiltenkt bruk og ved å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen. Det gis ett års garanti fra produsenten.

Varer kan returneres til oss ved garanti, reparasjon eller erstatning opptil 12 måneder fra mottak. Når du kontakter oss, avtaler vi henting av varene for vår regning, og når de er returnert til oss, vil vi reparere eller erstatte varen og returnere tilbake innen 14 dager. I alle tilfeller er det kundens ansvar å sørge for at varene som returneres er forsvarlig pakket, fortrinnsvis i originalemballasje.

AVSNITT 05: Sikkerhetsinstruksjoner

1. Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
2. Barn bør aldri forlates i Splashy uten tilsyn.
3. Hvis du bruker Splashy på stranden, la aldri barnet være uten tilsyn.
4. Kontroller at alle komponentene er forsvarlig montert i henhold til bruksanvisningen før bruk. Splashy må til enhver tid være montert til gulvbasen og stå på en fast og jevn overflate. Bruk aldri Splashy på en skrånende overflate.
5. Maksimal brukervekt for Splashy er 30 kg (66 lbs). **Dette bør aldri overskrides.**
6. Splashy inneholder deler som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn. Kontroller at alle komponentene er stramme og godt festet før bruk.
7. **Ikke** modifier eller bruk andre komponenter enn Firefly-godkjente komponenter på noe tidspunkt. Dette kan sette barnet i fare og kan også gjøre garantien ugyldig.
8. Når du bruker Splashy i miljøer hvor det er jord, sand, gress eller små komponenter, sørg alltid for at du rengjør festet der setet er montert til gulvbasen etter hver bruk. For å montere gulvbasen til setet, se avsnitt 11.2.6.
9. La Splashy tørke grundig etter bruk, før du oppbevarer den. Splashy bør holdes unna alle direkte varmekilder, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske- og gassvarmere.
10. Rengjør produktet regelmessig i samsvar med avsnitt 07 i denne bruksanvisningen.
11. Gjennomfør vedlikeholdskontroller med jevne mellomrom for å sikre at produktet er i god stand. Splashy bør ikke brukes hvis noen deler er defekte.
12. Hvis du er i tvil om sikker bruk av Splashy eller gulvbasen, eller hvis noen deler er defekte, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt

Firefly kundeservice på UK 0800
318265 eller ROI 1800 626020.

13. Eventuelle artikler som leveres med Splashy bør ikke brukes uten tilsyn.



Unnlatelse av å følge disse instruksjonene,
kan sette deg eller barnet ditt i fare

AVSNITT 06: Forholdsregler og kontraindikasjoner

Forholdsregler

- Faste ryggdeformiteter som skoliose eller kyfose.
- Alvorlige muskelkontrakturer.
- Alvorlig muskel- eller skjelettasymmetri inkludert hofteluksasjon.
- Progressive og muskelsvinnende forhold.
- Høy risiko eller nylig historie med benbrudd.
- Høy risiko for trykkrelatert skade eller åpne sår.
- Sterke, ukontrollerte bevegelsesmønstre.
- Dårlig kontrollert anfallsaktivitet.
- Barn som er avhengig av perkutan endoskopisk gastrostomi.

- Medisinsk ustabilitet inkludert kompromittert åndedretts- eller kardiovaskulær funksjon.
- Avhengig av tredjeparts livsoppretholdende apparater som oksygentanker.
- Betydelige lærevansker og/eller atferdsproblemer.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner knyttet til badeutstyr. Instruksjoner for bruk indikerer at for alle produkter skal aldri brukes etterlates uten tilsyn.

Alle forholdsregler og kontraindikasjoner tas etter foreldres eller terapeutens skjønn.

AVSNITT 07: Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon

Hvordan vedlikeholde

- Når du rengjør Splashy anbefaler vi at du kun bruker varmt vann og et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Bruk aldri organiske løsemidler eller rensesvæsker.
- Ikke vask i vaskemaskin eller damprens Splashys skumkomponenter, da det kan føre til at skummet mister sin form og kan deformeres.
- Vi anbefaler at du ikke bruker noen form for foreskrevet medisinkrem i badevannet da det kan ødelegge materiellet på Splashy.
- Tørk av badekarets overflate for rester eller smuss før du fester gulvstøtten, og sørg for at gummiføttene er godt festet til badekarbunnen.
- For å fjerne sand, jord, gress eller små partikler som kan kile seg fast mellom gulvstøtten og setet, kan lett banking gjøre at partiklene faller ut. Skyll grundig for å sikre at det ikke samler seg partikler inne i koblingene.
- Hvis Splashy skulle komme i kontakt med saltvann, skyll alle delene grundig med friskt, rent vann.

5-punktssele

Splashys 5-punktssele kan tas av og rengjøres med såpevann.

Gulvstøtteenhet


1. Sørg for at bunnen av gulvstøtteenheten er rengjort etter hver bruk for å sikre at den griper fast i bunnen av badekaret.
2. Såpe og vann kan brukes til daglig rengjøring.
3. Ikke bruk løsemidler til å rengjøre gulvbaseteenheten.

Splashy setebase, ryggstøtte og støtter


1. Såpe og vann kan brukes til daglig rengjøring.
2. EVA-skumdekslene tas av og vaskes med jevne mellomrom for å unngå oppsamling av smuss.

Splashys EVA-skumtrekk kan tas av og vaskes ca. hver andre måned


1. EVA-trekket er festet med åtte kroker. To på seteryggen og seks på setebunnen.
2. Løsne alle kroker for hånd (ikke bruk verktøy).
3. Vask med såpevann.
4. Sørg for at trekkene er helt tørre før de settes på igjen.
5. Sørg for at alle kroker er festet når du setter trekket på igjen.

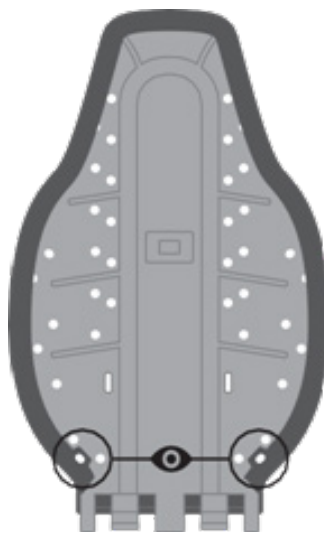

Krokplasseringer

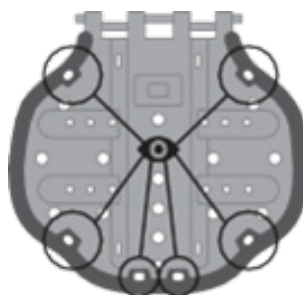

Hvis Splashy brukes i miljøer utenfor badet (som f. eks stranden eller hagen) er det viktig å skylle den etter hver bruk slik at den er fri for partikler/hindringer som kan påvirke mekanismene. For å koble gulvbasen til setet, se avsnitt 11.2.6

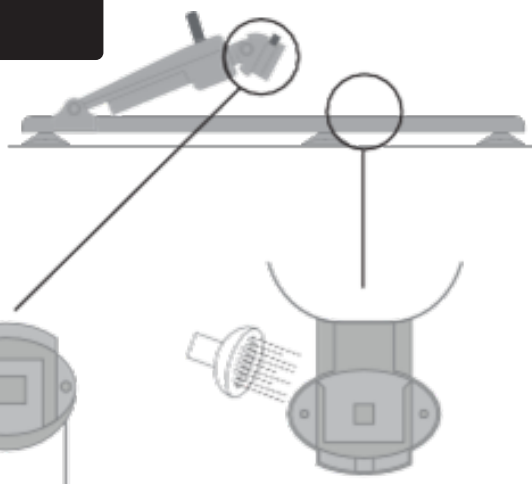

AVSNITT 08: Produktinspeksjon og service

Vi anbefaler at det utføres ulike kontroller av Splashy før hver bruk for å sikre at produktet er trygt.

Anbefalte kontroller er:

1. Forsikre deg om at Splashy-ryggstøtten og setebasen er **satt riktig sammen** som beskrevet i avsnitt 11 i denne bruksanvisningen.
2. Sjekk at Splashy er **riktig festet til gulvbaseenheten** og sørg for at den er stabil og sikker i badekaret før du setter barnet oppi Splashy.
3. Sørg for at 5-punktsselen og støtteputene er **godt festet** til Splashy ved hjelp av festene.
4. Sjekk 5-punktsselen og sidestøttene for **tegn på slitasje**.
5. Sjekk spenner og låser for sprekker eller skader.
6. Kontroller at Splashy, gulvbaselåsene og koblingene er fri for skitt og rusk og **uten tegn til slitasje**.



Hvis du er i tvil om sikker bruk av ditt Firefly-produkt, eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet og kontakt vår kundeserviceavdeling så snart som mulig.

For alle tjenesterelaterte problemer, se nettsiden til Firefly: **www.fireflyfriends.com** eller kontakt Firefly på: **customer.enquiries@fireflyfriends.com**

AVSNITT 09: Viktige retningslinjer

Sørg for at Splashy sitter trygt i badekaret. Len ryggstøtten bakover til midtstilt stilling for barn som kan hjelpe til med forflytning eller som løftes opp i badekaret. Vennlist se avsnitt 11.6.

Fullt tilbaketilt stilling bør brukes for barn som skal heises inn i badekaret. Dette bør gjøre overføringen til Splashy enklere.

Vi anbefaler at du monterer 5-punktsselen og sidestøttene til Splashy før du setter barnet i setet, men du kan gjøre justeringer mens barnet sitter i badekaret. Vær oppmerksom og overvåk barnet ditt nøye mens du gjør endringer på Splashy.

Å løfte et barn inn og ut av badekaret er en aktivitet som kan forårsake skade på ryggen. Vi anbefaler deg å søke råd fra din terapeut med hensyn til trygge løft av barnet ditt.

AVSNITT 10: Gjenbruke Firefly-produkter

Før du utsteder et produkt på nytt, anbefales det at det desinfiseres ved å bruke en av følgende prosedyrer:

Merk: Rengjør alltid produktet først for å fjerne akkumulert smuss før desinfisering/rensing.

1. Der det er mulig, anbefaler vi bruk av automatisk "fogger" desinfeksjonsmiddel som brukes til å dekke produktets overflater fullstendig med et desinfeksjonsmiddel. Produsentens instruksjoner for det valgte systemet bør henvises til før bruk og følges nøyaktig.
2. Der et automatisert desinfeksjonssystem ikke er tilgjengelig, bør alle produktoverflater tørkes over med desinfiserende servietter eller flytende desinfeksjonsmiddel på en myk klut. Egnede produkter er 70% IPA, 70% alkohol eller fortynnet blekemiddel. Produsentens instruksjoner for det valgte produktet bør følges. Produkttrekk og tekstiler bør rengjøres grundig i samsvar med avsnitt 07, rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon, i denne bruksanvisningen.



Sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. Hvis du er i tvil om fortsatt sikker bruk av Firefly-produktet ditt eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet og kontakt vår kundeserviceavdeling så snart som mulig på UK 0800 318265 eller ROI 1800 626020.



Splashy duck skal brukes under direkte oppsyn av en voksen

AVSNITT 11: Instruksjoner for bruk

11.1 Splashy deler

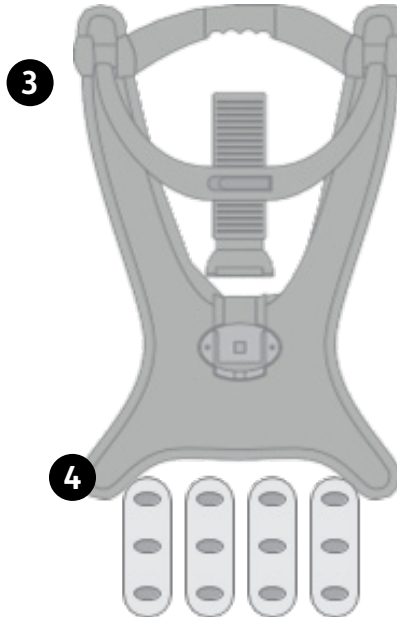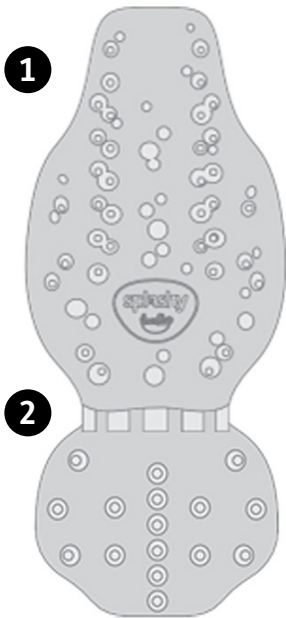

Din Splashy leveres med følgende deler:

- 1** 1x Ryggstøtte
- 2** 1x Setebase
- 3** 1x Gulvbasenhet
- 4** 4x Sidestøtter
- 5** 1x Lyskestropp & 4x selestropper



11.2 Montere Splashy

- Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører en “tørrtrening” med ditt barn i Splashy mens de har på seg lette klær for å sikre riktig plassering av sele og sidestøtter.
- Sørg for at badekaret ditt er rent før du plasserer gulvbasen i badekaret.
- Din Splashy **MÅ** monteres **FØR** du fyller badekaret med vann. Vi anbefaler at du fyller badekaret med lunkent vann for å unngå skade på Splashy.
- Se avsnitt 11.6 for veiledning om hvordan du justerer ryggen på Splashy.

11.2.1 Plassere gulvstøtten


Gulvstøtten skal alltid plasseres på en fast og solid overflate. Når du plasserer gulvstøtten, er det viktig at alle gummiføtter er i kontakt med overflaten.




Gummiføttene kan justeres for å tilpasses kurvede badekar. Du kan gjøre dette ved å rotere føttene med eller mot klokken avhengig av ønsket justering.



Gummiføttene kan flyttes inn i den smalere delen av gulvstøtten, avhengig av bredden på badekaret. Du må sørge for at de speiler hverandre.

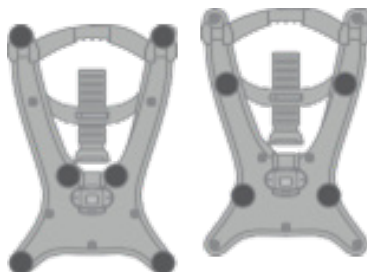

Når gulvstøtten er på plass, sørg for at ryggstøtten er satt i høyeste posisjon.

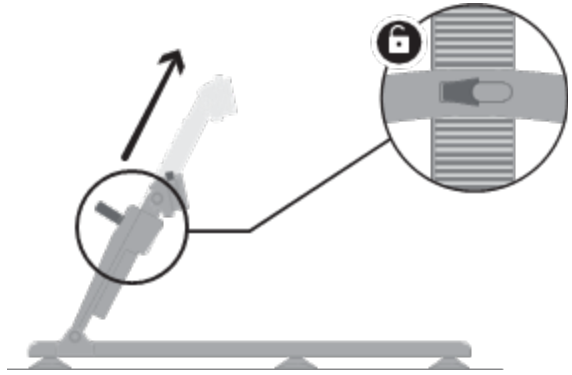

11.2.2 Montere Splashy-setet

Gulvstøtten skal alltid plasseres på en fast og solid overflate. Når du plasserer gulvstøtten, er det viktig at alle gummiføtter er i kontakt med overflaten.


1

Før du fester Splashy på gulvstøtten, må ryggstøtten og setebasen monteres.

2

Hold ryggstøtten på Splashy opp vertikalt med sporene på toppen. Bruk den andre hånden til å sette setebasen inn i sporene på ryggstøtten.


Snu setebasen i motsatt retning for å låse de sammen. Når de er låst, setter du inn hengselsklaffen under ryggstøttedekselet.

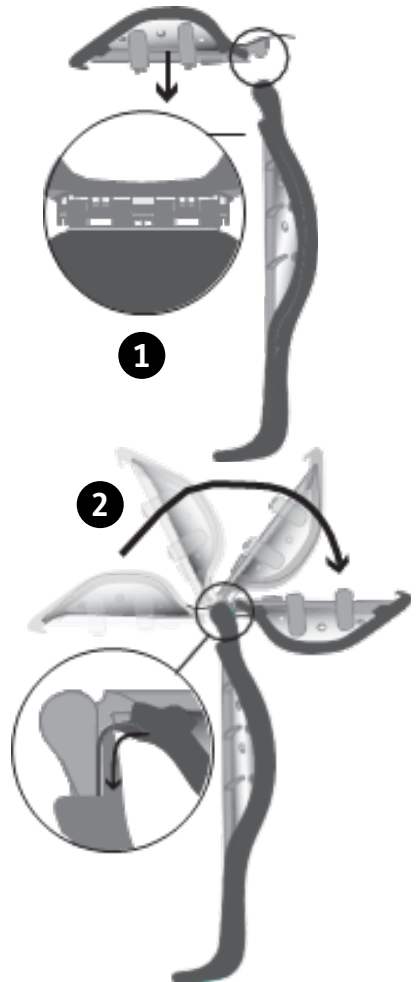


11.2.3 Feste og konfigurere seler og sidestøtter

1 For å feste støttene på Splashy setebase og ryggstøtte, plasserer du den relevante stangen gjennom hullet.


2 Sikre ved å vri bryteren sidelengs under setet.

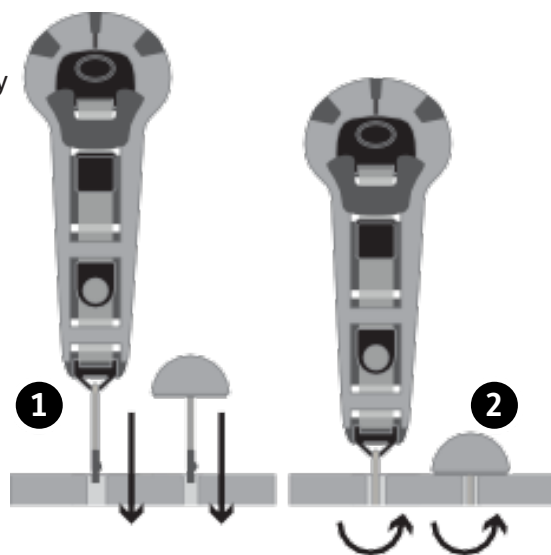

For å feste skulder- og sidestøtte, se bilde.

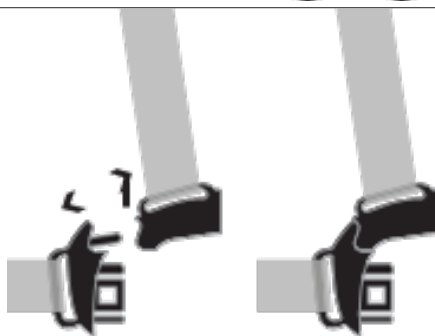


For å sikre at du plasserer stroppene på riktig side av Splashy, skal spennen se ut som på bildet.

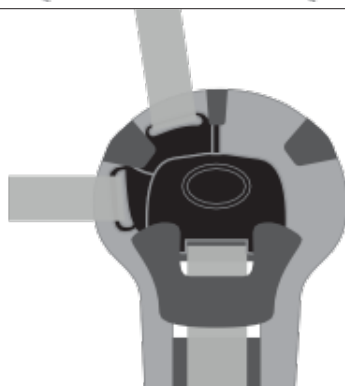

11.2.4 Konfigurere 5-punktssele


- 1 Sett inn knappen på lyskestrappen i Splashy setebasen.
- 2 Sett inn knappen på venstre skulderstropp gjennom hullet i riktig høyde for barnet.
- 3 Sett inn knappen på venstre sidestropp på sidepanelene til ryggstøtten.
- 4 Gjenta prosessen for høyre skulder- og sidestropper.
- 5 Når alle stroppene er sikkert på plass, kobler du alle stroppene sammen med spennen for å lage en 5-punktssele.
- 6 Stroppene kan justeres ved å løsne klemmen som strammer eller løsner stroppene. Sørg for at klemmen er låst når justeringen er gjort.

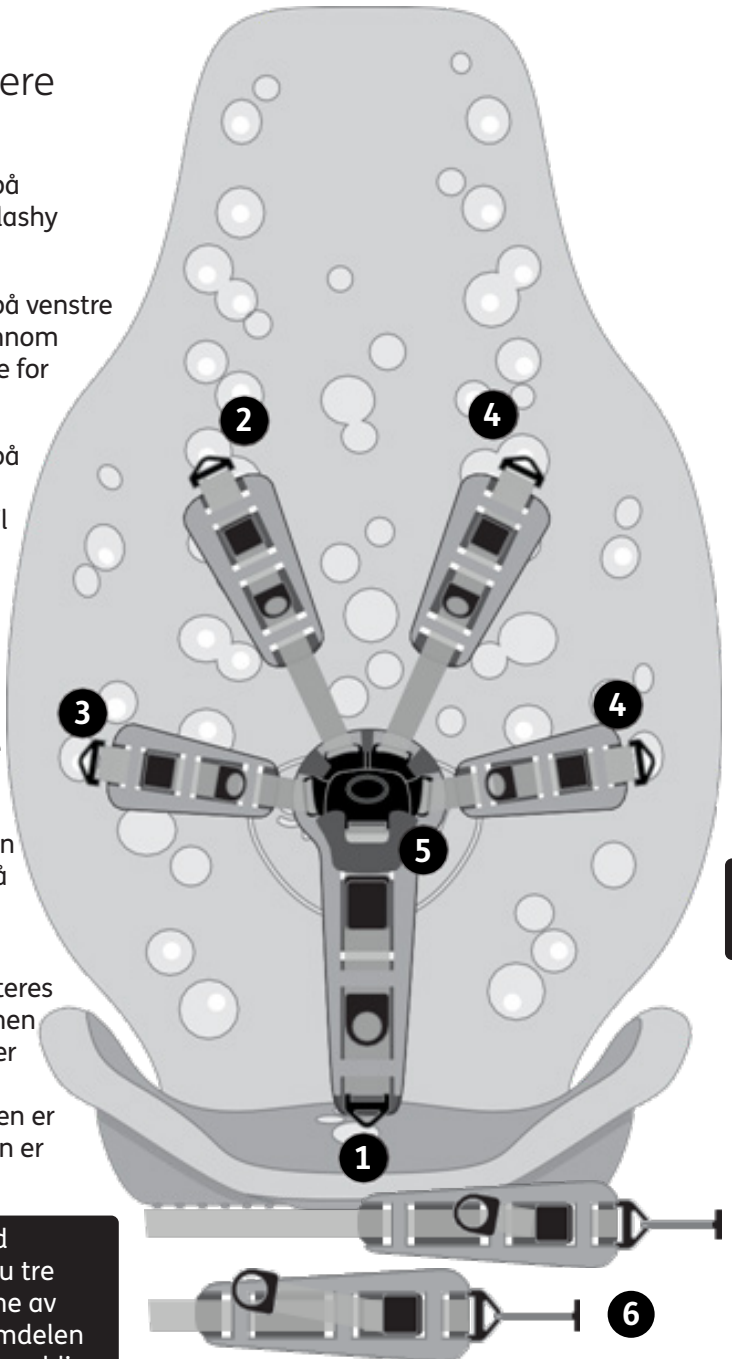

Tips - Når du er fornøyd med justeringen, kan du tre den gjenværende delen av stroppen gjennom skumdelen av selen for å holde det ryddig.

11.2.5 Konfigurere 3-punktssele

- 1** Sett inn knappen på venstre sidestropp inn på et hull på sidepanelet på ryggstøtten.
- 2** Repeter prosessen for høyre sidestropp.
- 3** Når alle stroppene er sikkert på plass, kobler du alle stroppene sammen med spennen for å lage en 3-punktssele.

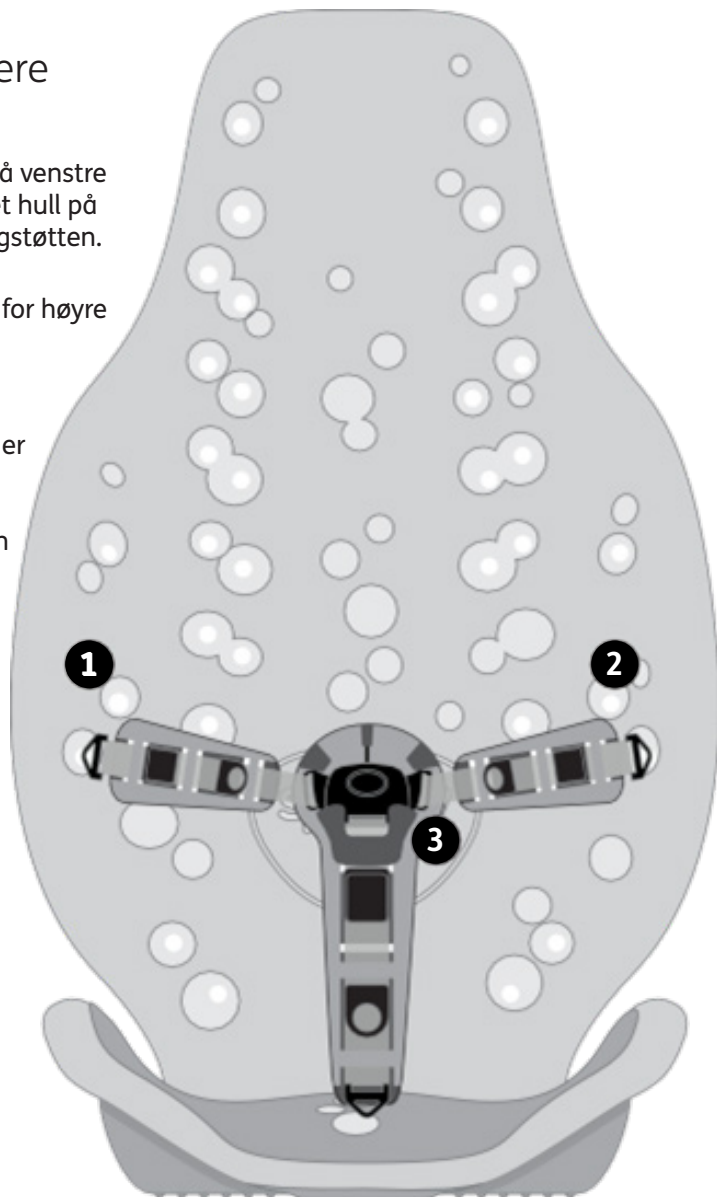


Ikke juster konfigurasjonen fra en 5-punktssele til en 3-punktssele mens barnet sitter i Splashy.

11.2.6 Tilpasse Splashy-sete til gulvstøtten

- 1** Senk Splashy med setebasen flatt på gulvbasen.
- 2** For å sørge for at setebasen er sentralt justert med gulvstøtten, flytt setebasen fremover slik at setebasen glir inn i låsekanalen.
- 3** Når setebasen låser seg i gulvstøtten, vil du høre et klikk som betyr at den er låst.




Lytt etter et klikk når du kobler både setebasen og seteryggen til gulvstøtten.

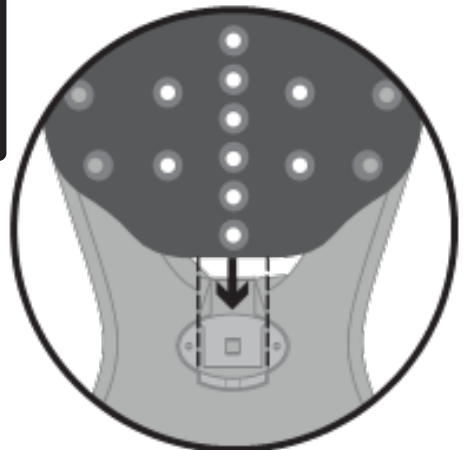

Før du fester nedfellsarmen til ryggstøtten, sørg for at den er på høyeste stilling.


Med en hånd på Splashy, bruk den andre hånden til å trykke på den uthevede knappen og dytt festet inn i ryggstøtten.

Når den er festet riktig, hører du et klikk.

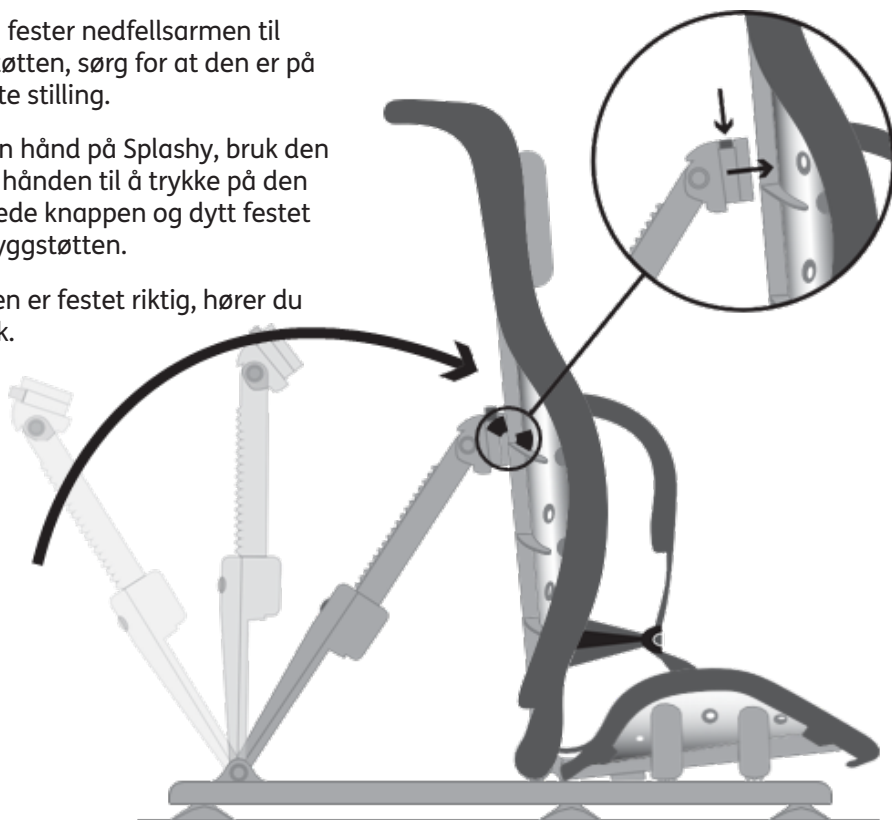

Dette bildet viser hvordan badesetet skal se ut når det er ferdig montert.

Det er nå trygt å sette barnet ditt i Splashy.

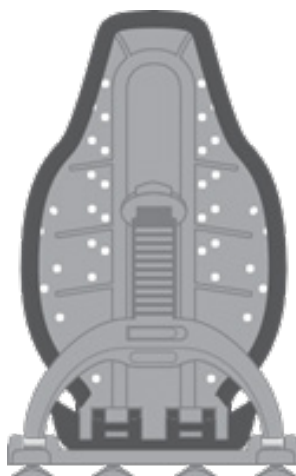


11.3 Sidestøtter

Når barnet ditt sitter trygt i Splashy ved hjelp av selen, kan du sette på sidestøttene for ekstra støtte.

Støttene brukes som hodestøtte på dette bildet, men de kan brukes som polstring, antisklistøtte og/eller benføringer.

Hvis du føler at barnet ditt trenger ytterligere støtte når det bruker Splashy, kan ekstra støtter kjøpes som tilbehør fra Firefly sin nettside.

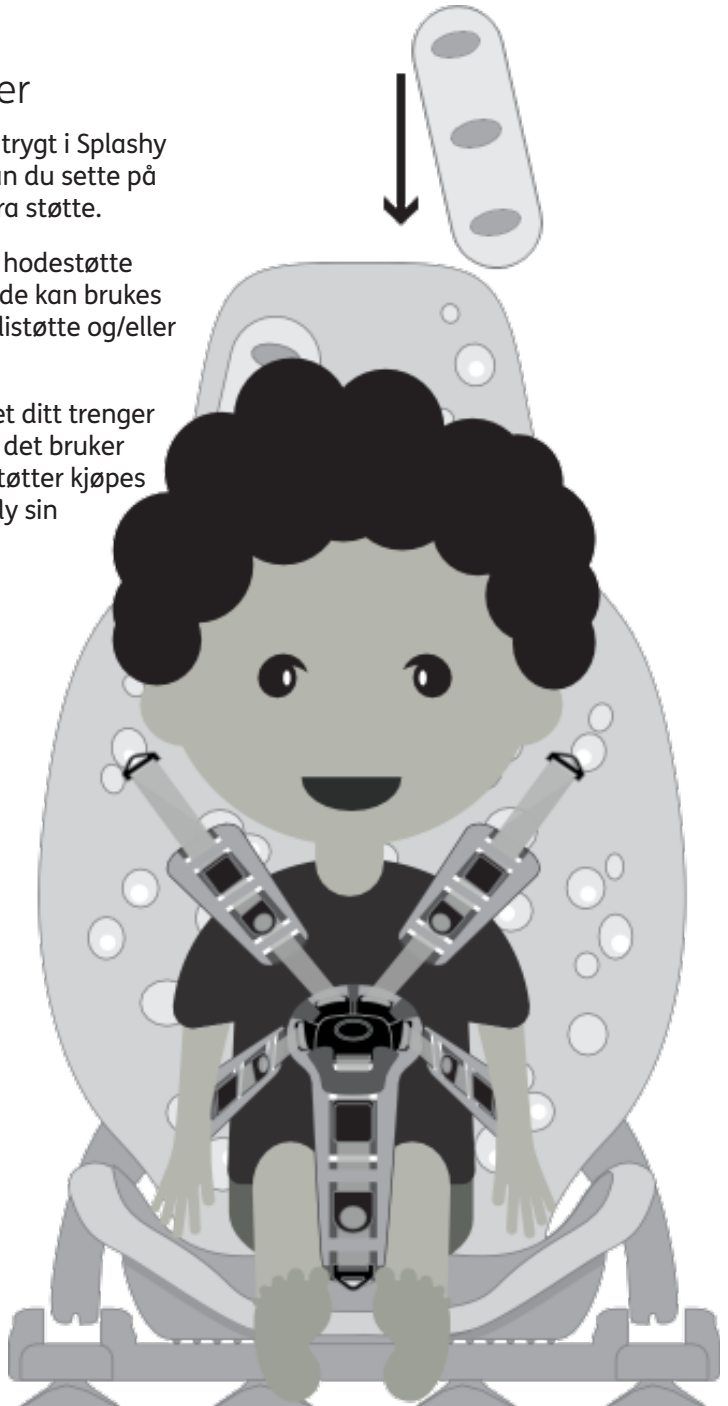

11.3.1 Justere sidestøttene for å gi støtte på forskjellige steder

Sidestøttene kan brukes som:





1. **Hodestøtte** - plasser støtten på høyre og venstre side av barnets hode.

2. **Nakkestøtte** - Plasser støtten på langsiden bak barnets nakke.

3. **Mellom lår** - Plasser en støtte mellom bena (forhindrer kryssing av ben).

4. **Benføring** - Plasser støtter på høyre og venstre side av barnets ben (forhindrer at bena faller utenfor siden av badesetet).

5. **Antiskli** - Plasser en støtte på bunnen av badesetet foran barnets bakdel (forhindrer at barnet slik fremover i setet). Noen barn kan synes det er mer komfortabelt å sitte i Splashy når en støtte er plassert der.

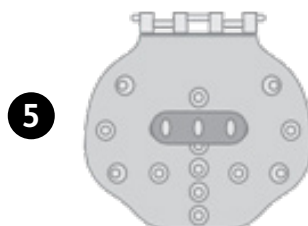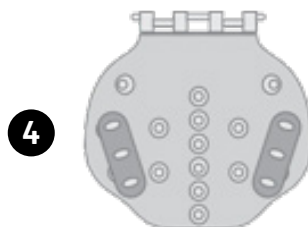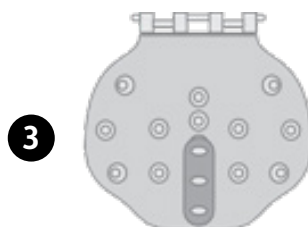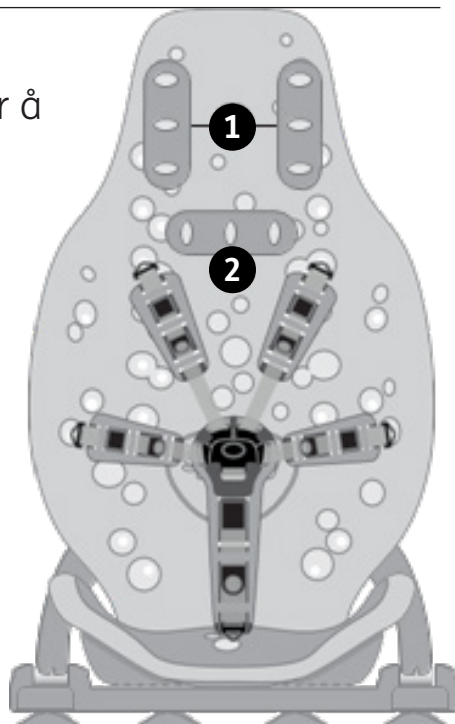

11.4 Justere selen for vask

Fjern en skulderstropp som vil lage en 4-punktssele og gjøre tilgang for vasking enklere.

For å fjerne skulderstroppen, slipp hekten fra baksiden av ryggstøtten.




Fjern en skulderstropp som vil lage en 4-punktssele og gjøre tilgang for vask ved i nedre halvdel.

For å fjerne sidestroppen, slipp hekten fra baksiden av ryggstøtten.



11.5 Forkortning av side- og skulderstropper

I noen tilfeller vil du kanskje redusere størrelsen på side- og skulderstroppene for å passe til et mindre barn som bruker Splashy.

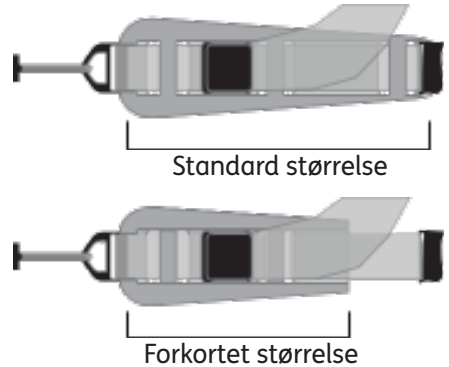


1 Når du har mottatt din Splashy, vil stroppene se ut slik som på bildet. For å justere stroppene slik at de blir mindre, følg disse instruksjonene.



2 Fjern den uthevede delen av stroppen fra polstringen.



3 Brett den tynnere enden av polstringen bakover og sørg for at åpningene er på linje.

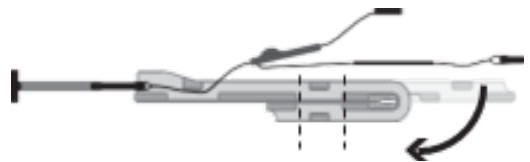

4 Før stroppene gjennom den første åpningen på den doble polstringen.




5 Når den er trukket helt gjennom, mater du den opp gjennom den andre åpningen og stram.



11.5.1 Forkortning av lyskestropp


I noen tilfeller kan det være lurt å redusere størrelsen på lyskestroppen for å passe mindre barn som bruker Splashy.

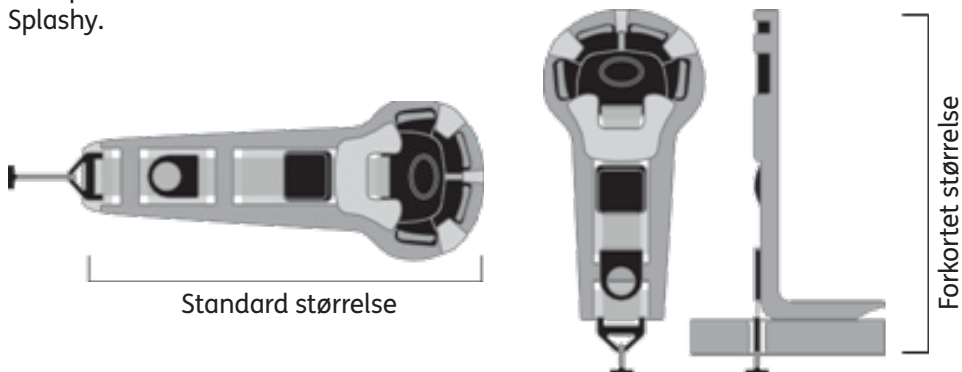

1 Lyskestroppen vil se ut slik som på bildet ved levering. For å justere stroppene til en mindre innstilling, vennligst følg disse instruksjonene.

2 Fjern den uthevede delen av stroppen fra polstringen.

3 Brett polstringen bakover for å lage en mindre lyskestropp og trekk tilbake gjennom hullet i setebasen.

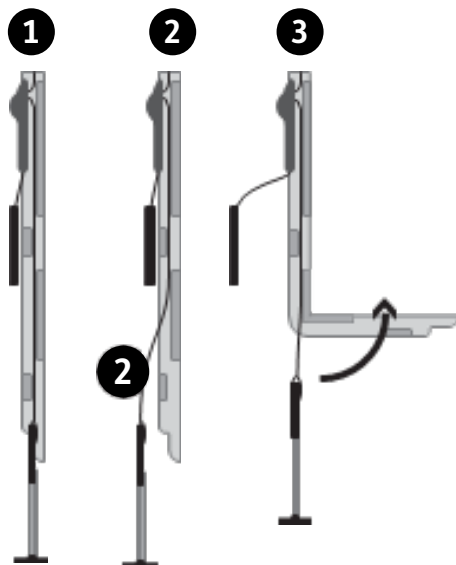

11.6 Anbefalte lenestillinger

Oppreist stilling - hvis barnet ditt har god sittetoleranse og kroppskontroll, kan de kanskje sitte i en oppreist stilling.



Midt tilbakeleent stilling - vi anbefaler at Splashy plasseres i en midtstilt tilbakeleent stilling hvis barnet ditt blir løftet opp i badesetet.



Fullt tilbakeleent stilling - vi anbefaler at Splashy plasseres i fullt tilbakeleent stilling for enkel forflytning hvis barnet ditt heises inn i badesetet.




11.6.1 Bruke Splashy recline-funksjonen

Når barnet ditt sitter trygt i Splashy, kan Splashy recline-funksjonen brukes.


Vær forsiktig når du endrer lenevinkelen. Du bør gjøre denne bevegelsen så jevn som mulig for å gjøre det behagelig for barnet.

For å få Splashy i en mer oppreist stilling, plasser den ene hånden på håndtak **A** på toppen av ryggstøtten for støtte, og den andre hånden på den grønne knappen på ryggjusteringen.

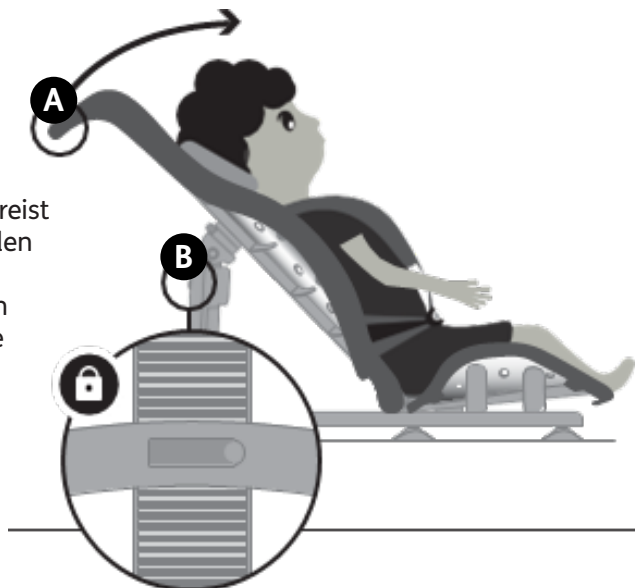

Slipp knappen og sett badesetet i en oppreist stilling som passer for barnet ditt.

Fest klipsen på ryggjusteringen. Du vil høre et klikk når den er riktig festet.

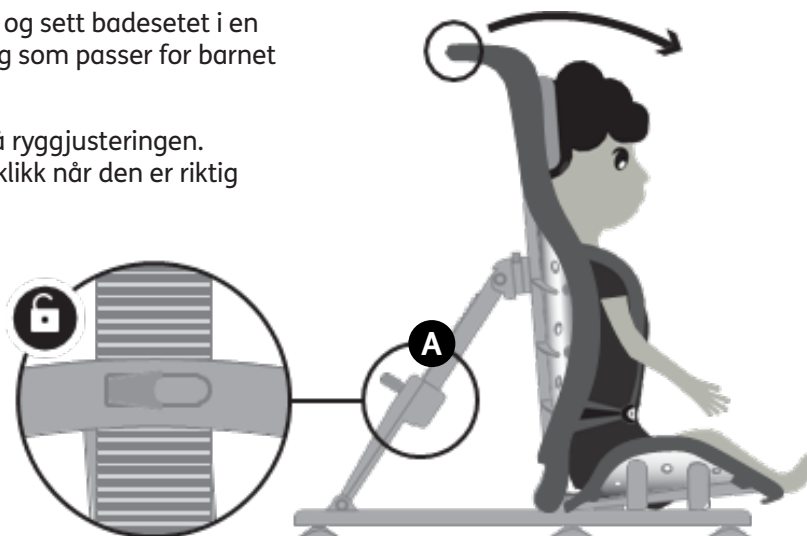

11.7 Ta ut Splashy fra badekaret etter bruk og demontering


Ikke ta ut Splashy fra badekaret før du har demontert setebasen fra gulvstøtten, da dette kan belaste tilkoblingene.

Ta barnet ut av Splashy og tøm badekaret.





Se avsnitt 9 for veiledning om hvordan du gjør dette trygt.

For å demontere Splashy fra gulvstøtten, trykk på den grønne knappen på ryggjusteringen og trekk ryggstøtten fremover.

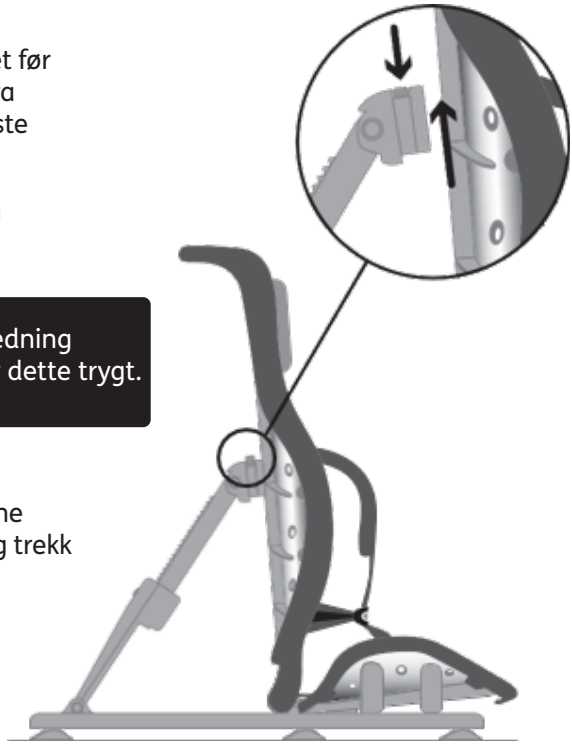


For å frigjøre setebasen, trekk i den grønne plasttappen **A**, skyv, og løft Splashy av gulvstøtten.

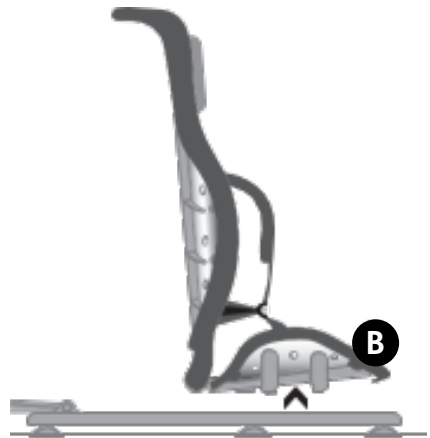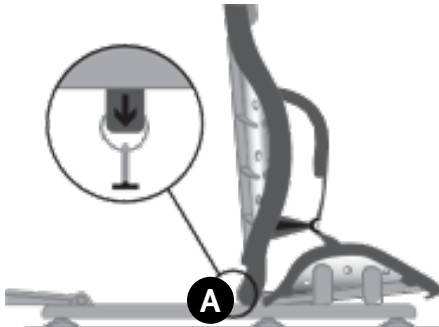


Pass på at du ikke presser rammen fra badekaret, da dette kan belaste koblingene.

For å fjerne gulvstøtten fra badekaret, skyv hånden forsiktig under gummiføttene slik at de løsner. **(Ikke bruk verktøy).**

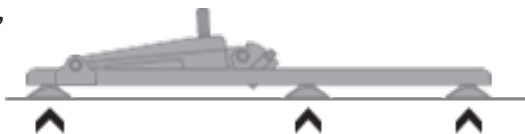

Plasser Splashy på siden og løsne setebasen fra ryggstøtten ved å bøye setebasen tilbake for å frigjøre hengslemekanismen.

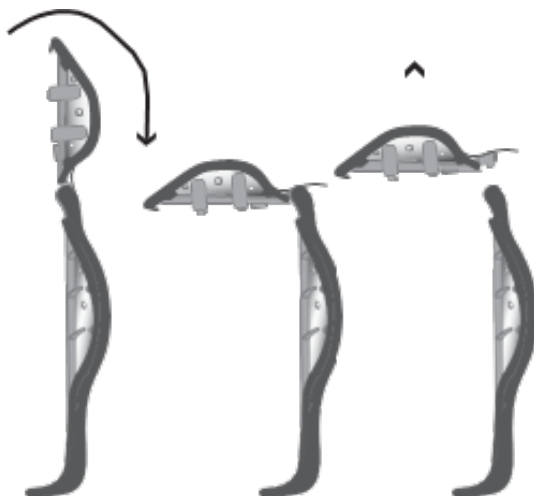

Ved å ikke følge disse instruksjonene, kan det føre til at garantien ikke er gyldig.

11.8 Tømming og tørking

Tørk alltid Splashy godt før du oppbevarer den for senere bruk.


Gulvstøtten kan tørkes av. (Se avsnitt 07 for ytterligere veiledning).

For tørkeformål kan det være lettere å hoppe over det siste trinnet i avsnitt 11.7 og beholde setebasen, ryggstøtten og gulvstøtten som én enhet i henhold til eksemplet nedenfor.





For å oppbevare gulvstøtten når den ikke er i bruk, skyv lenearmen ned til laveste stilling og legg den flatt som vist på trinn 2 nedenfor.

Trykk på den grønne knappen på lenearmen og trekk ryggstøtten forover for å frigjøre setet.

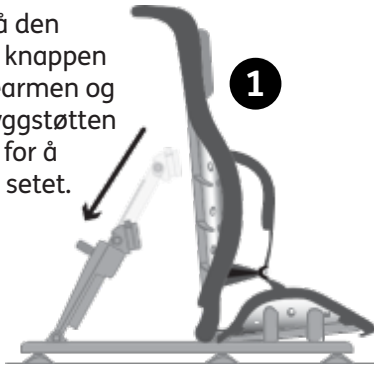

Fold lenearmen fremover som vist med pilen.

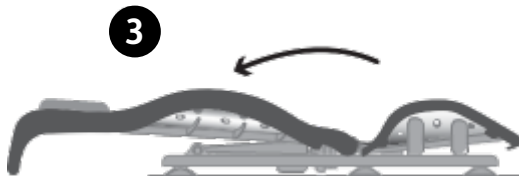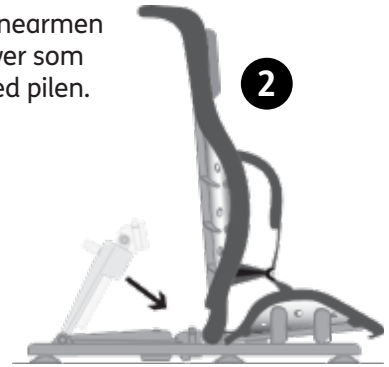


Legg ryggstøtten tilbake på gulvstøtten som vist



Bruk borrelås-stroppene for å holde gulvstøtten flatt mot Splashy-setet

11.9 Gulvstøtte - føtter for utendørs bruk

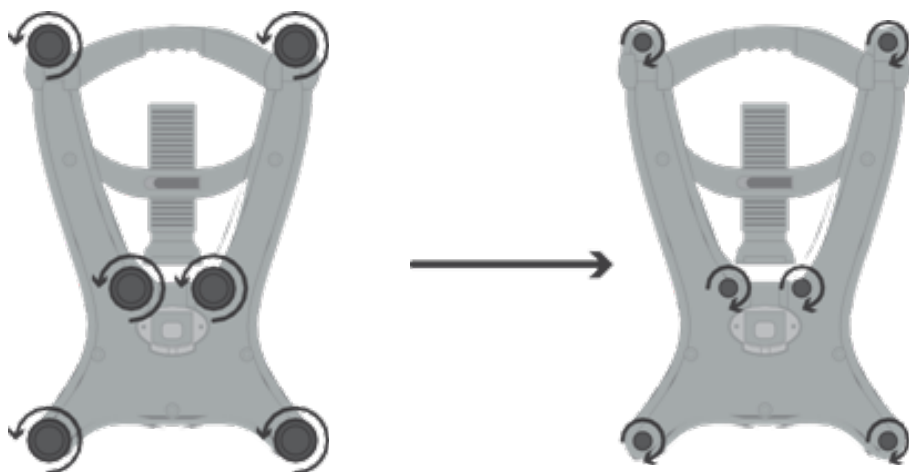

1 Fjern de 6 sugekoppene fra gulvstøtten.

2 Sett på utendørsføttene ved å skru de inn med klokken.



3 Sørg for at alle føttene sitter godt og at gulvstøtten ligger flatt.



Ikke bruk føtter til utendørs bruk i badekaret/dusjen. Vennligst bruk de originale sugekoppene.

AVSNITT 12: Størrelse informasjon

Splashy teknisk informasjon	
Høyde seterygg	61 cm (24 inches)
Bredde seterygg	38,5 cm (15 inches)
Setebase dybde	30 cm (12 inches)
Setebase bredde	35 cm (14 inches)
Gulvstøtte bredde	42 cm (16,5 inches)
Gulvstøtte høyde	63 cm (24 inches)
Maks. vekt	30 kg (66lbs)
Alder	1-8 år

AVSNITT 13: Symboler

Symbol	Betydning
	Medisinsk utstyr
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE merking
	Advarsel
	Produsent
	Produktkode
	Serienummer
	Maks. vekt
	Produksjonsdato
	Lateksfri
	Unik enhetsidentifikasjon

Notater



FireflyFriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: (+44)28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com

USA Distributor / Canadian Distributor

FireflyFriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: 0044(0)28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



fireflyfriends.com



Date of Preparation: May 2021

LS591-05