



BRUKSANVISNING



Hjelpemiddelspecialisten as

SYMMETRIKIT
POSTURAL CARE



HH a division of The Helping Hand Company

Vi håper du er fornøyd med ditt nye **PRIMO** Posisjoneringsystem. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å bruke, rengjøre og justere systemet.

PRIMO Posisjoneringsystem har mange funksjoner, inkludert;

- *Komfortabel: Babymyke materialer med temperaturregulering og trykkpleie "built in".*
- *Klar til bruk: Dag eller natt*
- *Bærbar: Kompakt og lett*
- *Enkel å bruke: Svært enkelt*
- *Trening*
- *Hygienisk: Vaskbare og "Tørk av"-materialer*

Tilpass: Enkel å bruke, juster og oppgrader



Symmetrikit Postural Care har levert nattposisjoneringsløsninger i over 20 år.

PRIMO er designet for å tilby et allsidig system for tidlig posisjonering, for å hjelpe terapeuter å tilby et posisjoneringssystem til familier som er enkelt å bruke både på dagtid og om natten.

PRIMO overholder følgende britiske standarder:

- *Brennbarhet*
- *Pustende**
- *Hardhet*
- *Airflow*

Møbler og innredning (Brannsikkerhet) Forskrifter 2010. EN597-2, BS1877-8 1974, BS7177, BS6807 & BS4578

**ALLE Primo PU (WIPE DOWN)
DELER MÅ BRUKES MED DE HVITE
AVSTANDSDEKSELENE**



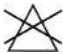
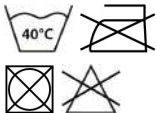
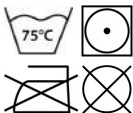

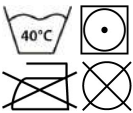
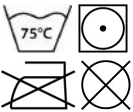
PRIMO deler - skreddersy din **PRIMO** med vårt utvalg av tilbehør

	Beskrivelse/ Art. nr.	Size (cm)
	Primo madrass (PR1000GB) Grå PU ytre med Airmantle	109 x 54 x 4
	Velcrolaken (PR2000GB)	107 x 52
	CoolOverlaken (PR3000GB)	119 x 94
	Hodepute (PR4000GB) Luftgjennomtrengelig pute med CoolOverpute som standarddel CoolOvertrekk (PR4000CVGB)	25 x 20
	Primo sidestøtter (PR4201GB) CoolOvertrekk (PR4201CVGB)	10 x 8 x 8
	Primo Pølle liten (PR4350GB) CoolOvertrekk (PR4350CVGB)	30 x 6 x 6
	Primo pølle solid (PR4203GB) CoolOvertrekk (PR4203CVGB)	30 x 6 x 6
	Stor Solid Skumrull (PR4208GB) CoolOvertrekk (PR4208CVGB)	80 x 6 x 6
	Primo hestesko liten (PR4301GB) CoolOvertrekk (PR4301CVGB)	37 x 28
	Primo hestesko oppdelt (PR4100GB) CoolOvertrekk (PR4100CVGB)	40 x 45 x 6
	Primo knestøtte (PR4405GB) CoolOvertrekk (PR4405CVGB)	30 x 6 x 8
	Primo stropper par (PR9000GB)	1.5m
	Primo stropper (PR9010GB)	2m

For å bestille flere **PRIMO** tilbehør eller trekk, kontakt Symmetrikit
Sales på 01531 635388 eller via sales@symmetrikit.com

RENGJØRING

For å vedlikeholde din **PRIMO** på best mulig måte, vennligst se rengjørings- og vedlikeholdsdetaljene nedenfor

Primo madrass 	Tørk av med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk blekemiddel eller biologiske rengjøringsmidler.
Velcrolaken 	Vaskemaskin på 40°C eller lavere med et mildt vaskemiddel. Må ikke strykes, tørkes i tørketrommel eller blekes.
CoolOverlaken 	Vaskemaskin på 75°C eller mindre med mildt vaskemiddel. Tørketromles på svak varme. Må ikke strykes eller renses.
Puter PU 	<i>Inkludert hodepute, sidestøtter, laken & Solid skumrull, hestesko og knestøtte:</i> Tørk av med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk blekemiddel eller biologiske rengjøringsmidler.
Avstandsdel  CoolOver 	Vaskemaskin på 40°C eller lavere med mildt vaskemiddel. Tørketromles på lav varme. Må ikke strykes eller renses. Vaskemaskin på 75°C eller lavere med mildt vaskemiddel. Tørketromles på lav varme. Må ikke strykes eller renses.

OPPSETT

MERK: Ikke bruk din PRIMO uten veiledning fra kvalifisert helsepersonell og godta gjennomgangsdatoer som anbefalt.

Sette ditt system opp:

1: Velcrolakenet er festet til madrassen med knepplås.

2: CoolOver overmadrass er festet til Velcrolakenet med knepplås.



MERK: CoolOver overmadrass er større enn madrassen og Velcrolakenet for at støttene skal kunne settes på og dekket helt.

SIKKERHETSSTROPPER

Hvis **PRIMO** systemet skal brukes i en krybbe eller seng, setter man på sikkerhetsstropper som er tilgjengelig i 1,5m eller 2m lengde.



Påfør hver ende av stroppen på kanten av Velcrolakenet og trekk gjennom overflødige stropper for å feste. Stroppene kan sikres på plass ved hjelp av magnetspennen eller fjernes helt ved å reversere påføringsprosessen.

MERK: Sørg for at overflødige stropper er gjemt trygt bort under madrassen.



EKSEMPEL PÅ OPPSETT - UTEN COOLOVERLAKEN



EKSEMPEL PÅ OPPSETT - MED COOLOVERLAKEN

EKSEMPLER PÅ OPPSETT

Det er mange måter **PRIMO** kan settes opp for å gi postural støtte og komfort, og kan justeres for å passe behov som endres etterhvert.



MERK: Rådfør deg med kvalifisert helsepersonell for bekreftelse for bruk.

TILBEHØR

CoolOvertrekk er valgfritt for alle trekk og puter. Hodeputen leveres med et CoolOvertrekk som standard.

De fleste trekkene og putene er utformet for å brukes UNDER CoolOver overmadrass, men Large Solid Skumrull, Hestesko oppdelt, Hodepute og knestøtter kan også brukes på TOPPEN av CoolOver overmadrassen avhengig av individuelle krav.



MERK: Når alle posisjoneringsstøttene er på plass, legg overflødig trekk under overmadrassen.



Snakk med kvalifisert helsespesonell når du har vokst
ut av din **PRIMO** for informasjon om ditt neste
Symmetrisleep posisjoneringssystem



SYMMETRISLEEP: *Fra nyfødt til voksen*



Symmetrikit Postural Care

Bromyard Road, Ledbury, Herefordshire HR8 1NS

01531 635388

sales@symmetrikit.com



Hjelpemiddelspesialisten as

www.symmetrisleep.co.uk



PR9200_2