

# HURTIGGUIDE

## UTSKIFTING AV LITHIUMBATTERI

Bruksanvisningen til EI-Innebandykjelkestolen må leses og forstås før du følger denne hurtigguiden.



### 1. UTSKIFTING AV BATTERI

For å sette inn lithiumbatteriet, må rammen til EI-Innebandykjelken fjernes som avbildet. I tillegg må det brukes ett lithiumbatteri inkl. støpsel og et separat støpsel. Bruk kun batterier og kontakter som er godkjent av IMMO A/S.



### 2. SETT INN BATTERI

Sett batteriet inn i batterirammen. Batteriets håndtak, ledninger og kontakter skal plasseres slik at de stikker frem. Pass på at ledninger og kontakter ikke kommer i klem mellom batteriet og batteriinnsatsen.



### 3. KOBLE TIL BATTERI OG SEPARAT KONTAKT

Batteriets kontakt kobles sammen med kontakten på toppen av batteriinnsatsen i rammen. Det spiller ingen rolle hvilke av kontaktene på rammen batteriet tilkobles. Den separate kontakten tilkobles den andre kontakten. Forsikre deg om at begge kontaktene klikker helt sammen med rammene på oversiden av batterikontakten.



### 4. FIKSERING AV BATTERI

På toppen og bunnen av batteriinnsatsen er den en stropp som skal klikkes sammen via trykkspennen på den. Plasser batteriets ledninger under stroppen slik at disse holdes på plass. Når trykkspennen klikkes sammen, strammes stroppen så batteriet holdes på plass.



### 5. BATTERIET ER NÅ KORREKT TILKOBLET

Rammen monteres på EI-Innebandykjelkestolen, og stolen er nå klar bruk.



### 6. FRAKOBLING AV BATTERI

For å koble fra og ta ut batteriet, følg stegene over i bakvendt rekkefølge: Fjern stolrammen, løsne stropp og åpne trykkspennen, fjern den separate kontakten fra rammen, fjern batterikontakten fra rammen og fjern batteriet fra batteriinnsatsen.

**ADVARSEL:** Ikke koble den separate kontakten til batterikontakten. Dersom man gjør dette, vil batteriet kortslutte.