

HURTIGGUIDE

EL-INNEBANDYKJELKE LITHIUM OPPLADING



1. ÅPNE BATTERIDEKSELET

Skru ut begge stjerneskrueene på batteridekselet. Fjern batteridekselet, og plasser det ved siden av stolen sammen med stjerneskrueene.



2. FRAKOBLING AV BATTERI

Ta tak, med en hånd på hvert av de oransje grepene. Via ett rett trekk mot stolens front trekkes støpselet løst. Plasser pluggen på stolens fotplate.

OBS: Batteriet må ikke løftes i kontakten.



3. TILKOBLING AV LADER

Den medfølgende laderen kobles til batteriets kontakt. Vær sikker på at begge kontaktene klikker riktig sammen. Koble laderkontakten til et strømuttak. Kontroller at lysdiodene i laderen lyser.



4. FRAKOBLING AV LADER

Når laderen lyser grønt, er laderen fulladet og stolen er klar til bruk.

Slå av stikkkontakten og trekk ut laderen. Koble laderen fra stolen.



5. TILKOBLING AV BATTERI

Sett batterikontakten inn i stolens integrerte koblingsenhet. For riktig tilkobling må de røde kontaktene vende oppover når de settes inn. Forsikre deg om at det er strøm på ved å skru på styrespaken (joystick).



6. SETT PÅ BATTERIDEKSEL

Plasser kablene slik at de ikke kommer i klem mellom batteridekslet og stolsetet. Plasser batteridekslet ved siden av stolens monteringshull. Sett inn stjerneskrueene og stram dem.