


# Bruksanvisning

Les bruksanvisningen nøye før du bruker ISO-Basen.

## ISO-BASE

**BASIC PLATE (uten snufunksjon) med ISOFIX-tilkobling**

**for Carrot 3/Carrot XL**

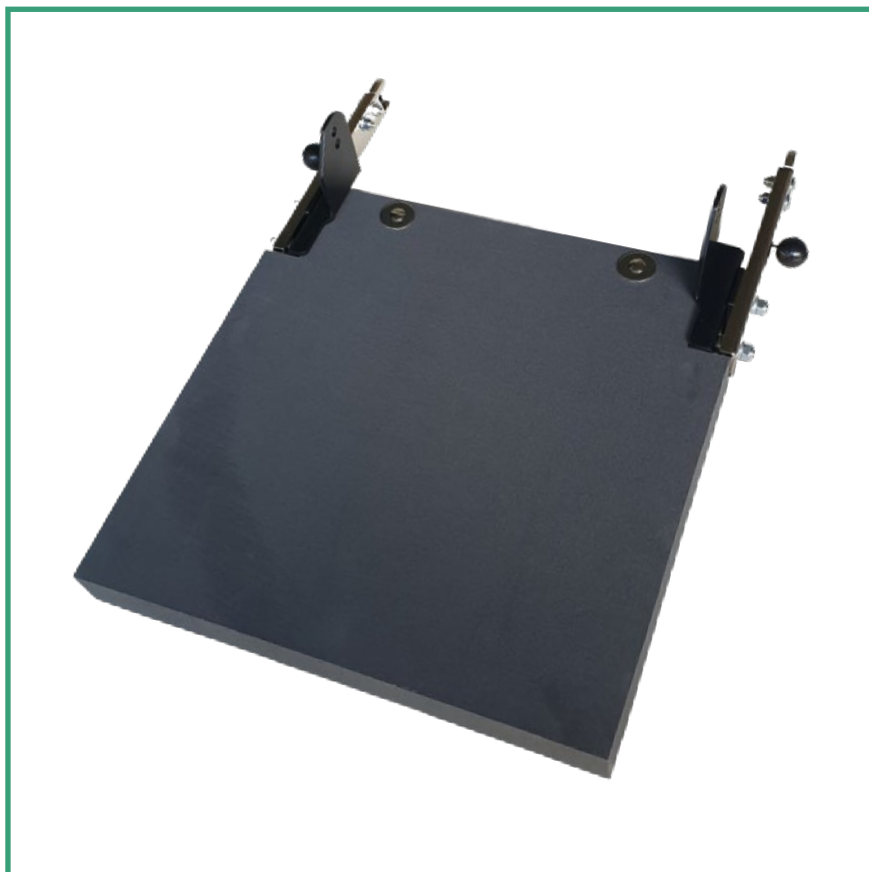

## Kjære foreldre

Takk for tilliten dere viser oss og for at dere har kjøpt vårt produkt. Med ISO-Base har dere valgt et høykvalitetsprodukt. På grunn av sin ekstremt solide konstruksjon kan den brukes i mange år. Installasjonen bør utføres av deres autoriserte forhandler! De bør instruere dere om hvordan produktet skal brukes før det tas i bruk, slik at dere kan håndtere vårt produkt enkelt og trygt, og dermed ha mye glede av det.

## Viktig informasjon!

Sørg for at disse instruksjonene følger med produktet. Ved ytterligere spørsmål vil teamet vårt hjelpe deg når som helst på: (06721) 906 0, eller med en videosamtale. Vi ser frem til alle forslag dere måtte ha for å forbedre dette produktet via e-post til: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de).

## Ha en god tur med ISO-Base

Hilsen

Andrea Staus og RehaNorm-teamet

### Produsent:

RehaNorm GmbH & Co. KG,  
Am Ockenheimer Graben 50,  
55411 Bingen  
Tyskland

Telefon +49 67 21/90 60,  
Fax +49 67 21/90 66 6,  
E-post: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)  
[www.rehanorm.de](http://www.rehanorm.de)

## Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	2
Forberedelse.....	2
Advarsel og sikkerhetsinstruksjoner.....	3
Egenskaper .....	4
Installasjon .....	5
Feste Carrot 3/Carrot XL til ISO-Base .....	5
Feste til bilsete med ISOFIX-tilkobling.....	6
Fjerne ISO-Basen.....	6
Stell og vedlikehold.....	6
Teknisk data.....	6
Garanti.....	7

## Forberedelse

### Levering

Vennligst sjekk produktet ved mottak for å sikre at det er komplett og fri for defekter og sjekk for transportskader. Sjekk varene i nærvær av personen som har levert det. Hvis det oppdages transportskader, vennligst informer de som har levert produktet om manglene. Send en skriftlig klage til ansvarlig fagforhandler.

### Sikkerhetstiltak før bruk

For sikker bruk av ISO-Basen, vennligst les og følg bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsreglene. Riktig bruk av produktet krever nøyaktig og nøye instruksjon av brukeren eller led-sager. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Bruksanvisningen skal alltid være med deg når du gir eller låner ut produktet til andre. Et garantikravskjema er vedlagt på siste side. Oppbevar den på et trygt sted slik at du kan bruke den ved tilfelle av en defekt.

### Sikker avhending

For å bevare og beskytte miljøet, forhindre forurensning og for å forbedre gjenbruken av råmateriale (resirkulering), resirkuler materialene separat ved slutten av produktets livssyklus.



Resirkuler emballasjematerialet i henhold til lokale kildesorteringsregler.

**Ikke etterlat emballasjematerialet uten tilsyn, da det er potensielle farekilder.**

### Plassering av bruksanvisningen

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted og sørg for at denne følger med produktet hvis det brukes igjen. Hvis du mister bruksanvisningen, kan du når som helst laste ned den nyeste versjonen fra [www.rehanorm.de](http://www.rehanorm.de).

## Advarsel og sikkerhetsinstruksjoner



**Merk! Alvorlige og til og med dødelige skader kan oppstå hvis følgende instruksjoner ikke følges!**

Følgende bilseter er **ikke** egnet for bruk med ISO-Base:

- Bilseter uten ISOFIX-tilkobling
- Bilseter som er festet sidelengs eller bakovervendt
- Bilseter som er mindre enn 40 cm dype
- Bilseter med utbulning på setet, noe som kan føre til ustabil feste
- Bilseter med 2-punktsselle

### Hva du bør være oppmerksom på før du bruker ISO-Base

Vennligst transporter barnet med 5-/4-punktsselen til Carrot 3/Carrot XL-festet og 3-punktssikkerhetsbeltet (sikringssystemet) til bilen. Endring av produktet er ditt ansvar. Vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår som følge av feil konvertering. Kun medreisende person skal betjene produktet. Kun egnet for bruk i kjøretøy som er utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelter. Under installasjonen, sørg for at ingen deler av ISO-Basen fanges under et bevegelig sete eller i døren under normal bruk av kjøretøyet.

En feilmontert ISO-Base kan føre til høy risiko for død eller skade. Bruk kun for barn med spesielle behov og kun med bilsetene beskrevet ovenfor. Vi anbefaler at setet plasseres bak frontpassasjer.

Regelmessige kontroller er nødvendig ved kjøring på dårlige veier, samt før og etter en reise.

Bruksanvisningen skal alltid følge med produktet. Ikke glem dette hvis du overlater det til andre.

Sørg for at ISOFIX-tilkoblingen mellom ISO-Basen og bilsetet er riktig koblet til. Dette gjelder også når du kjører uten et barn i bilsetet og selv om det ikke er montert bilsete på ISO-Basen, uten låsing kan ISO-Base skade passasjerene ved en ulykke.

Ikke bruk et bilsete som ikke har ISOFIX-tilkobling for å ivareta sikkerheten til barnet.

Sikre bagasjen din slik at den ikke skader deg i tilfelle ulykke.

Forlat aldri barnet uten tilsyn i bilen.

### Når du ikke bør bruke ISO-Base

Ikke bruk ISO-Basen hvis du ikke kan feste den på riktig måte som beskrevet i bruksanvisningen eller hvis ISO-Basen ikke er godt festet på begge sider selv etter den er festet.

Ikke bruk produktet uten en ISOFIX-tilkobling av bilsetet. Ikke bruk andre belter eller seteformer enn de som er beskrevet i bruksanvisningen.

For å ivareta sikkerheten, ikke bruk produktet hvis det har vært involvert i en ulykke.

Ikke bruk ISO-Base hvis den er festet til passasjeretet og hindrer deg i å betjene girspaken eller håndbremsen.

Ikke bruk et sikkerhetsbelte som er skadet.


## Hva bør også legges merke til

ISOFIX-tilkoblingene kan ikke løses enkelt. Men du bør fortsatt være oppmerksom på at ingen håndterer det feil. Hvis du har ytterligere spørsmål angående bruken av dette produktet eller reparasjon, ikke nøl med å kontakte din forhandler.

## Egenskaper

### Produktoversikt

Illustrasjonen nedenfor viser navnene på de viktigste komponentene og begrepene du finner når du leser denne bruksanvisningen.

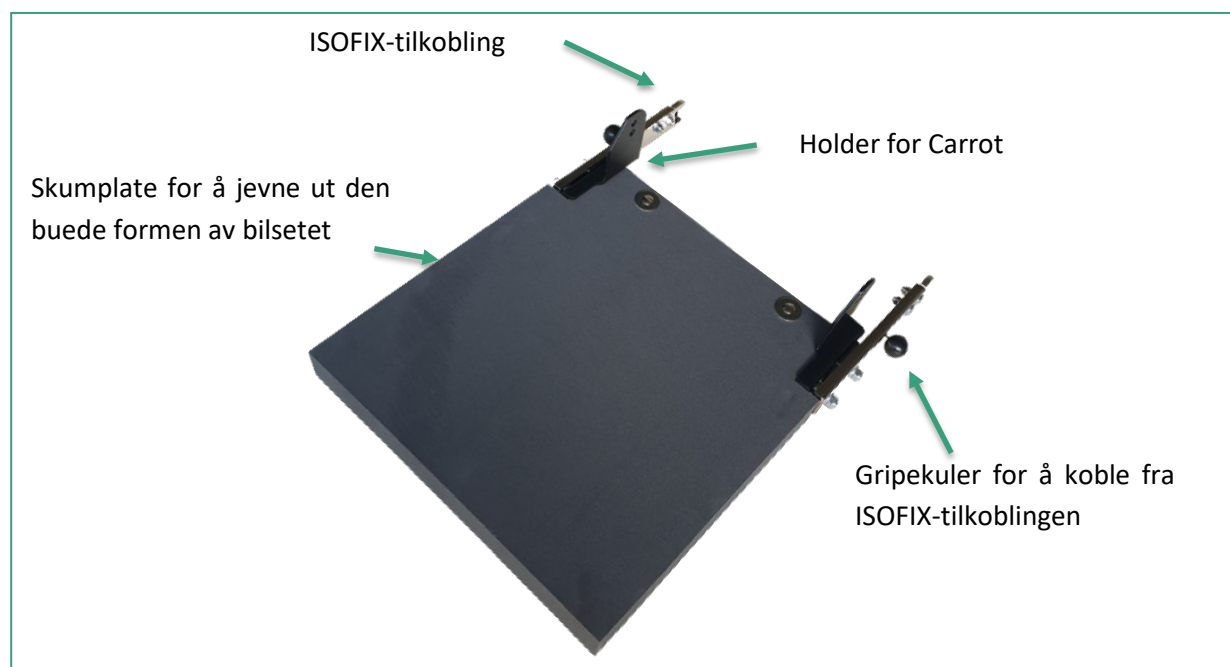

### Leveringsomfang



- ISO-Base
- Unbrakoskruer M6 x 30 mm (2 deler)
- Avstandsstykke plast M6 15 x 5 x 6,3 mm (2 deler)



# Installasjon

## Feste Carrot 3/Carrot XL til ISO-Base

- Først løsner og fjerner du stjerneskruen **(A)** mellom setet og ryggen på Carrot 3/Carrot XL.
- Plasser Carrot 3/Carrot XL på ISO-Basen slik at den sitter mellom brakettene til ISOFIX-tilkoblingen.
- Fest Carrot 3/Carrot XL til ISO-Basen med stjerneskruen **(A)**, som holder setet og ryggen på Carrot sammen.
- Bruk det nederste hullet for å feste Carrot 3 og det øverste hullet for å feste Carrot XL.
- Sett inn avstandsstykkene i plast **(B)** mellom festet på ISO-Basen og Carrot-rammeseksjonen på enden av seteseksjonen til høyre og venstre mellom rammeseksjonen og ISO-Basen.
- Stram skruene godt fra begge sider.

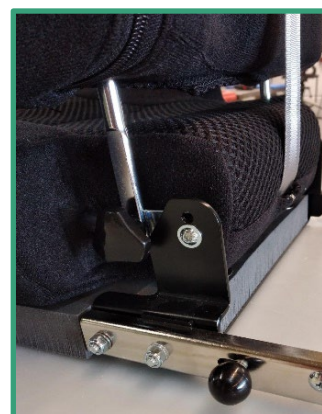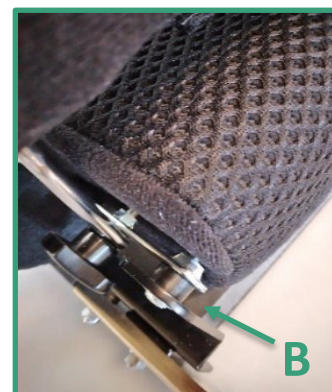

## Feste til bilsete med ISOFIX-tilkobling

- Plasser ISO-Basen med det festede Carrot 3/Carrot XL på bilsetet. Sørg for at ISOFIX-tilkoblingen til ISO-Basen og kjøretøyet er i samme høyde.
- Sett ISO-Basen inn i ISOFIX-tilkoblingen til bilsetet til det klikker på plass på begge sider. ISO-Basen er nå koblet riktig til bilen.
- Fest deretter hodestøtten til Carrot 3/Carrot XL til hodestøtten på kjøretøyet ved hjelp av den øvre festestroppen.



## Fjerne ISO-Basen

- Lås opp trykklåsene til ISO-Basen ved å trykke på trykknappene på begge sider.
- Trekk ut ISOFIX-tilkoblingen. Du kan nå løfte ISO-Basen sammen med Carrot 3/Carrot XL ut av kjøretøyet.

## Stell og vedlikehold

### Stell

For å opprettholde funksjonell pålitelighet og produktets utseende, må det vedlikeholdes regelmessig. La aldri smuss tørke, men fjern det alltid med vann og en myk klut eller svamp. Ikke bruk høytrykksvasker til rengjøring.

### Vedlikehold

Utfør en daglig visuell inspeksjon og kontroller ISO-Basen regelmessig for manglende deler, løse skruer og funksjonsfeil. Ved defekt eller funksjonsfeil, vennligst kontakt forhandleren direkte.

## Teknisk data

### Produktmål

L x B x H: 41,7 x 30,5 x 8,2 cm

Vekt: 1 kg

## Garanti

### Garantiperiode

Garantien for dette produktet er **24 måneder** fra kjøpsdato. Vennligst oppbevar salgsdokumentene med kjøpsdato. For å gjøre garantikravet gjeldende, vennligst kontakt din forhandler som vil gjøre alle ytterligere nødvendige tiltak for deg.

### Garantibegrensninger

Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av uaktsomhet, feil bruk eller ved bruk av uoriginale deler eller feil håndtering fordi bruksanvisningene ikke er fulgt. Skader forårsaket av en ulykke er også ekskludert. Et garantikrav er også ugyldig hvis navnet og stempelet til forhandler som du mottok ISO-Basen fra, ikke finnes på garantiskjemaet, eller hvis du ikke kan fremvise garantiskjemaet.

### Skjema for garantikrav

Produkt modellnummer:	<b>ISO-Base basic plate</b>
Navn, fornavn:	
Gate- og husnummer:	
By:	
Postnummer:	
Telefonnummer:	
E-post adresse:	
Kjøpsdato:	
Distributør:	