

# JEETRIKE BRUKSANVISNING





Gratulerer med din nye Jeetrike offroad hånds sykkel!

Denne modellen gir deg en oppreist sittestilling og den har bakhjulsdrift. Sykkelen har full uavhengig fjæring på alle tre hjulene, noe som gjør at den øker stabilitet og komfort i røft terreng. Takket være fjæringen så har den veldig kort akselavstand som øker bakhjulets grep samtidig som rammen blir stivere. Sykkelen har meget god fremkommelighet og god svingradius. Jeetrike er egnet for nesten alle personer med forskjellig type funksjons-hemminger.

<b>Innhold:</b>	<b>Side:</b>
Motor/Display:.....	3
Gir:.....	3
Bremser:.....	4
Setet:.....	4
Leggstøtte:.....	4
Demping:.....	4
Batteri:.....	5
Teknisk data:.....	5

## Motor/Display:

Jeetrike er utstyrt med en børsteløs 250W sentermotor. Motoren reagerer på kraft og overfører kraften til fronthjulet. Motoren sørger for en jevn kraft i forhold til kraften som man påfører pedalene.

**Motoren** har 9 forskjellige nivåer av kraft. For å endre nivå på kraft fra 1-9, så benytter man knappene på konsollen lenger ned på styrearmen. Her skrur man også motoren av og på ved å holde knappen i midten inne i ett par sekunder.



**Oppstartshjelp:** Ha motoren på i ønsket nivå på motor. Hold deretter inne (-)- knappen og motoren vil hjelpe deg i gang. Et (P)-symbol vil dukke opp på skjermen.

**Lys i display:** Er det ønske om lys i displayet, så skrur dette på ved å holde (+)-knappen inne i noen sekunder. For å skru av lyset igjen, gjøres samme operasjon.



**Gir** er festet på styrehåndtaket og har 8 forskjellige nivåer. Du velger gir ved å presse girspakene mot eller fra deg.



**Bremser** er hydrauliske skivebremser som håndteres fra styrehåndtak på sykkelen.

Jeetrike har dobbelt bremsesystem på forhjulene. Parkeringsbremsen fungerer slik at man trykker inn bremsehåndtaket og fester løkken fra håndtaket rundt for å låse bremsen.



Pass på at bremsene er rene og fungerer godt før man starter å sykle. Eventuelt urene skivebremser kan ha innvirkning på bremseeffekten.

**Setet** gir en oppreist sittestilling. Ryggvinkel kan justeres med skruer som er festet nederst på ryggdelen.

**Leggstøtten** er justerbar og forlenges ved bruk av håndskruer som er festet i rammen for der bena plasseres.



**Demping:** Jeetrike er utstyr med tre uavhengige dempere. Demperne kan uavhengig gjøres stivere eller mykere slik at det passer best for hver bruker. Bak-demperen er også mulig å låse når man sykler, hvis man ikke har behov for demping på bakhjulet.

Husk at et dempet bakhjul gjør at motoren bruker mer kraft med tanke på framdrift. Velg full demping når underlaget krever det.



**Batteriet** er festet på rammen under setet. Det har en lysende av/på knapp for å aktivere batteriet.

Batteriet er avtakbart og bør lades inne i romtemperatur.

Batteriene bør lades etter bruk og ikke ha nivå lavere enn tre prikker. Batteriet skal lades hver måned hvis det ikke er i bruk, ellers så kan batteriet bli ødelagt.



NB! Ikke lagre batteriet kaldere enn 10° C eller varmere enn 25° C.

### **Teknisk data:**

<b>Rammemateriale:</b>	CNC Aluminium
<b>Demping foran:</b>	Dobbel
<b>Demping bak:</b>	Avansert Multilink-fjæring
<b>Dempere:</b>	Rock Shox Monarch XX/RL
<b>Styresystem:</b>	Kombinert styring og sykling for bedre kontroll
<b>Hjelpemotor:</b>	Baffang sentermotor 250W med hjelpestart
<b>Batteri:</b>	11 Ah, 36 V
<b>Girsystem:</b>	Shimano Alfine 8
<b>Sete/fotstøtte:</b>	Justerbart karbon-fiber-sete og fotstøtte i aluminium
<b>Bremser:</b>	Hydraulisk Shimano XT
<b>Skivebremser:</b>	180 mm
<b>Hjuldimensjon:</b>	L=197 cm B=101 cm H=99 cm
<b>Vekt:</b>	41 kg



Hjelpemiddelspecialisten as

**Hjelpemiddelspecialisten AS**

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no