

OPS POSISJONERINGSSYSTEM MONTERINGSSANVISNING



Monteringsanvisning OPS-posisjoneringssystem

1

Før hovedstroppen mellom rygg og hode støtte og mellom rygg og setepute, før den lukkes bak på ryggen med sikkerhetslåsen. Stram til stroppen.



2

Dekk setedelen med plasttrekket (som hindrer borrelåsen i å feste seg i hverandre) mellom ryggdelen og setedelen på bilsetet.



3

Dra setedelen noe oppover magen, slik at den brede delen kommer fri fra lårene og skrittet.



4

Stram og posisjoner skuldreselene.
Fest de på setedelen.



5

Dra magebeltet fra høyre over mot venstre,
plasser deretter den venstre delen over igjen
ved å dra dette mot høyre.
Fest med sikkerhetsspennen.



6

Dra plasttrekket fra setedelen ut i bakkant
på bilsetet (mellom sete og rygg)



7

Fest setedelen med borrelås til hovedstroppen på baksiden av bilsetet



Merk:

- OPS kan vaskes i maskin på 30° C
- Må ikke sentrifugeres
- Må ikke tørkes i tørketrommel
- Personer posisjonert med OPS må alltid sikres med bilens eget 3-punkts belte



Hjelpemiddelspesialisten as

Hjelpemiddelspesialisten AS

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no