

- Komfortabel
- Portabel
- Hygienisk
- Sikker

August 2024



PRIMO

24-TIMERS POSISJONERING FOR DE MINSTE

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Vi introduserer tidlig posisjonering

Hjelpemiddelspecialisten AS har levert det markedsledende posisjoneringssystemet Symmetrisleep til det norske markedet i snart 14 år. Sammen med vår produsent introduseres Primo, for å kunne dekke de spesifikke behovene til de aller minste. Primo tilbyr en løsning for liggende posisjonering, dag og natt. Primo kan benyttes i en eksisterende barneseng, sprinkleseng, reiseseng eller til og med på gulvet for aktiv terapi og lek i løpet av dagen.

Hvorfor posisjonere liggende?

Allerede i begynnelsen av livet kan det være behov for å motvirke eller forsinke utviklingen av feilstillinger. Om man da kan få støtte om natten i en liggende, symmetrisk posisjon, vil det gi en positiv effekt overført til dagtid. Liggende posisjonering har en bred aksept som et hjelpemiddel for å bedre total posisjonering, funksjonsnivå og finmotorikk.

Vellykkede resultater

Symmetrisleep-systemene har blitt utviklet i tett samarbeid med terapeuter, familier og brukere. Vi har lang erfaring i å levere både enkle og omfattende posisjoneringsløsninger, og er daglig i kontakt med mennesker som forteller om positive endringer i komfort, kroppsfasing, bevegelse og tonus.



Primo er lett og enkel i bruk. Åpne glidelåsen på bagen og systemet er klart til bruk. Borrelåssystemet gjør at støtteelementene som plasseres under Cooloverlakenet ikke endrer seg fra forrige bruk.

Legg barnet ned på den innebygde, temperatur-regulerende madrassen og begynn posisjoneringen.



Vi har brukt vår unike temperaturregulerende teknologi, CoolOver og trykkavlastende materialer for å forsikre oss om at Primo er så komfortabel som mulig for det unge barnet. Primo er enkel å holde ren. Alle trekk er vaskbare i maskin og kan kaldtørkes. Madrassen, putene og støttene er vanntette, og kan tørkes av med en fuktig klut og milde desinfiserende midler.

Primo og regulering av kroppstemperatur

Dersom hudtemperaturen øker vil små kapsler i vårt CoolOver TR3 laken begynne å absorbere varme, og holde barnet avkjølt. Skulle hudtemperaturen bli for lav vil varme fra kapslene utløses tilbake til barnet. Slik tilbyr Primo aktiv regulering av barnets kroppstemperatur. Om barnet svetter ved normale temperaturer, vil sammensetningen i lakenet trekke fuktighet vekk fra huden og fordele den for fordampning. Denne overlegne fukttransporten hjelper til med å holde huden tørr for maksimal komfort.



Primo overmadrass fungerer også som reisebag for hele systemet. Åpnet vil denne kunne festes med stropper til alle typer barnesenger om det er behov.

På overmadrassen festes først et borrelåslaken med knappfester i både hode- og fotenden. På denne kan man plassere sidestøtter, knestøtter og pøller for en fastere posisjonering.

Fest deretter på CoolOver lakenet på samme måte som borrelåslakenet og plasser nødvendige puter slik det er mest hensiktsmessig. Alle støtter som er montert «fast» på borrelåslakenet kan også plasseres løst på CoolOver lakenet.



Primo artikler:

| Art. nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|-----------|---------|----------------------------|
| PR1000GB* | 312137 | Overmadrass |
| PR3000GB* | 312121 | Cooloverlaken |
| PR2000GB* | 312122 | Borrelåslaken |
| PR4201GB* | 279521 | Sidestøtter (par) |
| PR4405GB* | 244828 | Knestøtte |
| PR4350GB | 312144 | Pølle liten (myk) |
| PR4203GB | 312145 | Pølle liten (fast) |
| PR4208GB | 269712 | Pølle stor (fast) |
| PR4301GB | 247600 | Hesteskopute liten |
| PR4100GB | 244827 | Hesteko lang (segmentert) |
| PR4000GB | 269714 | Hodepute med Coolovertrekk |
| PR9010GB | 312176 | Festestropper 2,0 m (par) |
| PR9000GB | 312175 | Festestropper 1,5 m (par) |

* *Hjelpemiddelspecialisten AS anbefaler disse artiklene som et minimum i et Primo startsett.*

Ved behov kan også andre elementer fra vårt Symmetrisleep system benyttes sammen med Primo, spesielt når barnet begynner å bli større. Under ser du en oversikt over aktuelle artikler.

Aktuelle Symmetrisleep artikler:

| Art. nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|---------------|---------|--|
| SA7370 | 211782 | Knestøtte spedbarn |
| SA7340 | | Knestøtte barn |
| SA5520R | 312153 | Kneblokk Small (rullende) |
| SA5520S | 312118 | Kneblokk Small (fast) |
| SA7445 | 163632 | Benstøtte for sideleie str. S |
| SA7200 | 163629 | Sidestøtter str S (par) |
| SA7165P | 163630 | Sidestøttepolster str. S (par) |
| SA7220 | 163649 | Sidestøtter str. M (par) |
| SA7175P | 163652 | Sidestøttepolster str. M (par) |
| SA7720CUCPUGB | 312164 | Lowzone hesteskopute str. S |
| SA7720CVTR3GB | 312183 | Coolover trekk til hesteskopute str. S |
| SA7800CUCPUGB | 312168 | Lowzone pølle str. S |
| SA7800CVTR3GB | 312187 | Coolover trekk til pølle str. S |
| SA7500CUCPUGB | 312167 | Lowzone kvadratpute str. S |
| SA7500CVTR3GB | 312186 | Coolover trekk til kvadratpute str. S |

Se hele vårt Symmetrisleep sortiment til barn, ungdom og voksne på www.hm-spes.no

