

HM HYGIENESTØP

BRUKSANVISNING



Innhold

1. Vedlikehold og rengjøring.....	3
2. Bruk av setet.....	4
3. Resirkulering.....	5
4. Gjenvinning.....	5

Produktet er produsert av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadresse: Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping

Besøksadresse: Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Telefon: 011-161800

E-post: info@anatomicsitt.com

Webside: anatomicsitt.com

Facebook: facebook.com/anatomicsitt

Kontaktinformasjon

Hjelpemiddelspecialisten AS
Rosenholmveien 22
1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70


E-post: firmapost@hm-spes.no

Webside: www.hm-spes.no

1. Vedlikehold og rengjøring

Fôret (det blå materialet nærmest kroppen) skal håndvaskes. Du kan for eksempel bruke en myk svamp. Fôret må tørkes i romtemperatur og må ikke plasseres mot en direkte varmekilde. Det må ikke tørkes i et tørkeskap eller tørketrommel, da det kan miste formen sin.

Plastinnlegget vaskes med en svamp eller myk børste. Du kan bruke mildt vaske- eller desinfeksjonsmiddel om nødvendig.

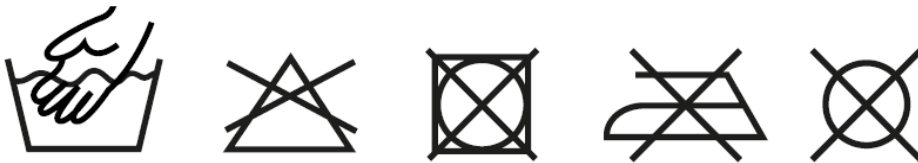

For plassering av seler og hoftebelter fra Anatomic Sitt AB, følg anbefalingene for fastsydde vaskeråd (maskinvask 60°C.)

Kontroll av slitasje

Kontroller posisjonerings- og festestroppene regelmessig, spesielt ved festepunktene.



Observer!

Setet er tilpasset brukeren. Vær derfor obs på rødhet og trykkmerker etc.




Observer!

Om du ikke er fornøyd med sitsen eller om problemer oppstår, vennligst kontakt din helsearbeider, hjelpemiddelsentral eller Hjelpemiddelspesialisten AS. Kontaktinformasjon til helsearbeider og hjelpemiddelsentral finnes på etiketten "Spesialtilpasset produkt".

2. Bruk av setet



1. Kontroller at setet er godt festet til understellet og at den har riktig helning.
2. Pass på at hndbremsen er låst og at rullerstolen står på et stabilt underlag.
3. Start med å /tilte vippe setet så langt bakover som mulig før brukeren plasseres i setet.
4. Plasser brukeren i sitsen. Pass på at brukeren kommer skikkelig inn i setet. Kontroller med hånden ved baken. Bekkenet skal være i en så rett posisjon som mulig. Etterjuster ved behov.

5. Fikser bekkenet med hoftebeltet. Om belteputer finnes skal de plasseres med fokus på siden som brukeren vrir/spenner utover først. Plasser hoftebeltet over hoften se fig.1. Juster beltets posisjon ved hjelp av de bakre båndene/innfestingen, dette gjøres for få beltespennen sentrert på brukeren. Juster hoftepolstrene slik at de ligger på hoftekammen. Stram til beltet. Beltet skal sitte stramt slik at bekkenet holdes på plass. Tommelfingerregel: du skal akkurat få plass til en finger mellom hoftekam og polster. Sjekk at spennen er lukket.

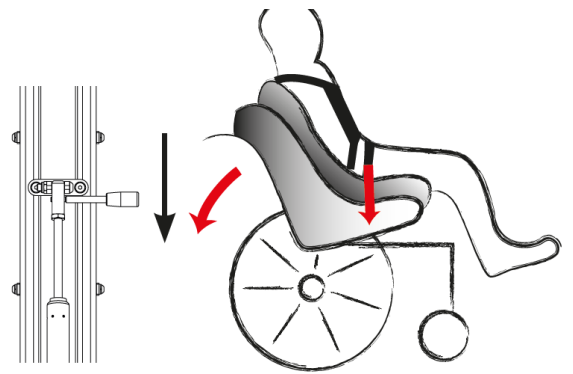

For å tilte, skyv spaken på baksiden av ryggprofilen nedover.

Bilde 1

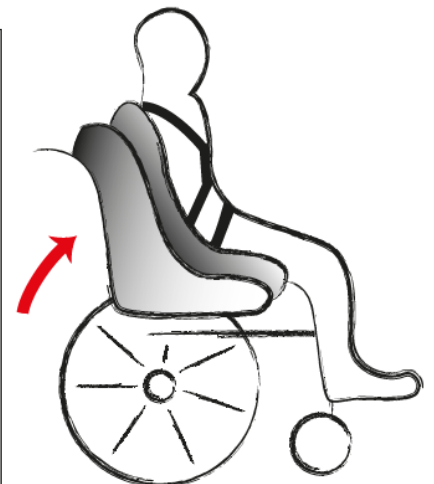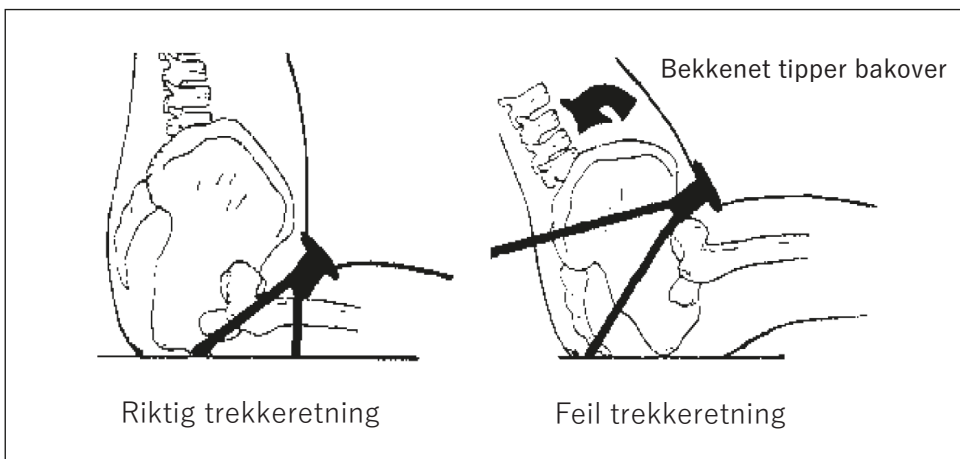

6. Fikser sele og evt. andre belter.
7. Tilt tilbake stolen i normal stilling. Bruk tiltfunksjonen i løpet av dagen for å skape variasjon i trykkfordelingen på kroppen.
8. Skjekk at alle støtter sitter korrekt og stabilt.

OBS!

Mange brukere orker bare å sitte i en aktiv stilling i korte perioder. Gjennom å endre fra aktiv sitting til hvilestilling flere ganger om dagen får brukeren en mer behagelig sitteopplevelse og trykket vil også fordeles. Dette forhindrer begynnende sittesår.

3. Resirkulering

Kontroller alle bevegelige deler med fokus på slitasje. Bytt ved behov.

Om du kjenner deg usikker kan du kontakte oss på telefon 66 81 60 70 eller via e-post: firmapost@hm-spes.no

4. Gjenvinning

En oppbrukt del eller produkt demonteres og skrotes. Delene skal separeres etter materialtype og leveres inn på lokal gjenvinningstasjon.

SE

Anatomic Sitt AB (produsent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besøksadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt



Hjelpemiddelspecialisten as

Hjelpemiddelspecialisten AS

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no