

NO



Zitzi
Sharky Pro

Bruksanvisning

Bruksanvisning, monterings-/justeringsinstruksjoner,
service og vedlikehold samt avfallshåndtering



Denne bruksanvisningen refererer til sittesystem Zitzi Sharky Pro med tilbehør. For fullstendig oversikt over tiltenkt tilbehør se produktets bestillingsunderlag.

Innholdsfortegnelse

Produsent	4	Hoftebelte	34
Spesialtilpasning	4	Ankelstøtter	35
Introduksjon	5	Armstøtte fra sete	36
Innledning	5	Armstøtte fra rygg, fast	38
Korrespondanse - merking	5	Armstøtte fra rygg, utsvingbar	40
CE-merking - klassifisering	5	Overarmsstøtte	42
Samsvarserklæring	5	Håndbøyle	43
Tiltenkt bruk	5	Bord, fast	44
Symboler	6	Bord, utsvingbart	45
Produktmerking	7	Bord, forsterket monteringsbrakett	46
Sikkerhetsinstruksjoner	8	Støttebord	47
Opplæring og kvalifikasjoner	8	Fotstøtte	48
Advarsler/Forholdsregler	9	Hel fotstøtte	49
Kontroller før bruk	10	Fotstøttebrakett	50
Begrensninger	10	Fotbrett dobbelstag	52
Gjenværende risiko	11	Leggstøtte	54
Kombinasjoner	11	Kjørebøyle	56
Avvik/hendelser	11	Korsryggstøtte/Korsryggstøtte med pumpe	57
Teknisk data	12	Varmepolster	58
Tilpasning og spesialtilpasning	13	Oppsummering og oppfølging	59
Monterings- og justeringsinstruksjoner	14	Transport i kjøretøy	60
Montering av sittesystem	15	Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner	61
Adaptersystem	16	Kontroller før bruk	61
Fast montering	17	Service og utbedrende vedlikehold	62
Planskive	18	Resirkulering	63
Sittedel	20	Avfallshåndtering	66
Oversikt av rygginnstillinger	24	Garanti og retur	66
Lås- og justerbar flexfunksjon	25	Revisjon	67
Bryststøtte	26		
Bekkenstøtte	28		
Hoftestøtte	29		
Hodestøtte	30		
Posisjoneringsseler	32		

Produsent

Produktet er produsert av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøksadresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Nettside	anatomicsitt.com
Instruksjonsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Følg oss på	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Spesialtilpasning



Kryss av i ruten ved eventuell spesialtilpasning av produktet.

CE-merkingen slutter å gjelde for spesialtilpassede produkter.



Introduksjon

Innledning

Gratulerer med valg av hjelpemiddel. Vi håper du vil få stor glede av å bruke dette produktet. For at du skal få mest ut av produktet på en trygg og sikker måte, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye. Dette gjelder alle personer i brukerens nærhet.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.anatomicsitt.com. Revisjon er på forsiden sammen med datoen.

Korrespondanse - merking

På produktetiketten finnes produktets artikkelnummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numrene skal angis ved korrespondanse med Anatomic Sitt angående produktene. Du finner serienummeret på baksiden av sitteplaten.

CE-merking - klassifisering

Hjelpemiddelet med dets tilbehør er et CE-merket medisinteknisk produkt, klasse I i henhold til klassifiseringsreglene i vedlegg VIII (EU) 2017/745.

Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravet for medisintekniske produkter i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisintekniske produkter. Se aktuell EU-samsvarserklæring om overrenstemmelse for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/ dokument

Tiltenkt bruk

Zitzi Sharky er et modulært dynamisk sittesystem for ungdommer og voksne med sitteproblemer hvor sete- og ryggstøtten har flere instillingsmuligheter og kan utstyres med diverse tilbehør for å oppnå en bestemt sittestilling. Sittesystemet er ment å brukes med understell. Zitzi Sharky er et gjenbrukbart produkt.

Symboler

	<p>Dette symbolet finnes i bruksanvisningen og gjør leseren oppmerksom på f.eks viktig sikkerhetsinformasjon m.m.</p>	<p>Angir batchnummeret til produksjonen slik at batch kan identifiseres.</p>
	<p>Dette symbolet indikerer eventuell klemfare.</p>	<p>Angir at produktet er et medisinteknisk produkt.</p>
	<p>Instruksjoner og tips som forenkler bruken av produktet.</p>	<p>Angir produsentens referansenummer/ artikkelnummer slik at det medisintekniske produktet kan identifiseres.</p>
	<p>Angir at bruksanvisningen alltid bør leses før bruk. Nettadresse indikerer hvor dokumentet befinner seg elektronisk.</p>	<p>Angir produsentens serienummer slik at et spesifikt medisinteknisk produkt kan identifiseres.</p>
	<p>Angir at bruksanvisningen må leses for å få viktig sikkerhetsinformasjon om f.eks advarsler som ikke finnes på det medisintekniske produktets etikett.</p>	<p>Unik produktidentifikator som muliggjør entydig identifikasjon av spesifikke medisintekniske produkter.</p>
	<p>Angir produsenten av det medisintekniske produktet iht. definisjon i (EU) MDR 2017/745. Kan også brukes sammen med produksjonsdato.</p>	<p>Indikerer at produktet er CE-merket i henhold til gjeldende EU-direktiver.</p>
	<p>Angir datoen da det medisintekniske produktet ble produsert.</p>	

Produktmerkning

Etikett på hovedprodukt

MD Zitzi Sharky Pro str. 2 (uten rygg) std. <i>Sharky Pro size2 (without back), std.</i>	→	Produktnavn
REF 153006 2023-11-15 SN 53460	→	Strekkode (EAN-13 eller REF samt SN)
7 322471 530064 Maxlast 130 kg	→	Maks. belastningsvekt
Anatomic Sitt i Norrköping AB CE  Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping	→	UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)
www.anatomicsitt.com  UDI (UDI=GTIN+(21)SN) (01)7322471530064(21)53460	→	UDI= GS1-128

Etikett på tilbehør

MD Bord utsvingbart transparent kpl. str. 4 (str) - Zitzi <i>Table, turn-up, size 4 - Zitzi</i>	→	Produktnavn
REF 153075 2023-11-14 LOT FM713127	→	Strekkode (EAN-13 eller REF samt LOT)
7 322471 530750		
Anatomic Sitt i Norrköping AB CE  Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping	→	UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)
www.anatomicsitt.com  UDI (UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322471530750(10)FM713127	→	UDI= GS1-128

Sikkerhetsinstruksjoner

Opplæring og kvalifikasjoner

- Montering, service og resirkulering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Vedtak om tilpasning/spesialtilpasning skal gjøres av kompetent medisinsk personell og utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Innstillinger, justeringer samt utprøving av hjelpemiddelet skal alltid utføres av kvalifisert medisinsk personell (fagperson på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om bruker og hjelpemiddel skal alltid være til stede for å prøve ut produktet og foreta en risikovurdering før førstegangsbruk.

Advarsler/Forholdsregler

-  Les alltid bruksanvisningen før bruk.
-  Innstillinger skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Det er kun tillatt å gjøre innstillinger på den måten som beskrives i denne bruksanvisningen.
-  Sjekk produktets funksjonalitet før det leveres ut til bruker.
-  Den som foreskriver hjelpemiddelet er ansvarlig for å instruere brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø hvordan produktet anvendes på en sikker måte. Funksjonskontroller alltid produktet før bruk.
-  Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om brukeren skal balansere det valgte setet for å sikre at eventuell tipperisiko utelukkes.
-  Justeringer skal kun utføres slik som beskrevet i denne bruksanvisningen.
-  Etter all monterings- justerings eller servicearbeid skal alle festeskruer og muttere kontrolleres og strammes.
-  Sørg alltid for at sittesystemet sitter ordentlig fast i understellet før brukeren plasseres i sittesystemet! En sikkerhetsstropp leveres med setet med hensikt å strammes fra setets ryggprofil og rundt understellets kjørebøyle. Denne sikkerhetsstroppen må alltid brukes ved transport i kjøretøy. Sørg for at denne stroppe er stabil og stram.
-  Bruk aldri fotplaten ved inn- og utstigning fra hjelpemiddelet.
-  Overbelast aldri hjelpemiddelet, se avsnitt "Begrensninger for gjeldende maksimal belastning".
-  Vær oppmerksom på at dersom brukeren tar tak i gjenstander utenfor hjelpemiddelet eller lener seg for langt ut fra hjelpemiddelet, kan det oppstå en forskyvning av tyngdepunktet som kan føre til økt risiko for å velte.
-  Løft alltid i understellet - aldri i sitteenheten.
Aldri løft hjelpemiddelet med brukeren i.
-  Utfør aldri service mens produktet brukes.
-  La aldri brukeren være uten tilsyn når hjelpemiddelet er i bruk.
-  Sjekk alltid brukeren for rødhet eller trykkmerker etter bruk av hjelpemiddelet.

Kontroller før bruk

Inspeksjon og kontroll skal utføres før hver bruk i henhold til punktene nedenfor:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt håndskruer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel for mobilitet og låsing.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Dersom det oppdages feil og mangler, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp.

Begrensninger

Maks. vekt

Den høyeste belastningsvekten er 130 kg og gjelder for samtlige størrelser. Med belastningsvekt menes den maksimale vekt som sittesystemet kan utsettes for, for eksempel bruker og evt. annen vekt. Maks. belastningsvekt for transport i kjøretøy er 75 kg.

Levetid

Forventet levetid for produktet er 5 år ved normal bruk i henhold til produktets tiltenkte bruk, forutsatt at instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Den faktiske levetiden varierer imidlertid avhengig av hvor ofte og intensivt produktet brukes, men det anbefales å ikke overstige 10 år.

Gassfjærer

Om produktet skal lagres over en lengre periode, vurder følgende:

Gassfjærer bør brukes regelmessig for å opprettholde sin funksjon. Når produktet ikke brukes må gassfjæren aktiveres minst en gang hver 6. måned. I tillegg bør de lagres på en slik måte at gassfjærstangen er rettet nedover, ellers kan gassfjærens forsegling gå i stykker og den slutter å fungere.

Gjenstående risiko

Vær oppmerksom på at produktet og dets tilbehør er riktig innstilt slik at brukeren ikke opplever ubehag eller får skader under bruk. Hvis dette skjer, foreta justeringer eller installer passende tilbehør.

Kombinasjoner

For å opprettholde CE-merkingen på en sikker måte må hjelpemiddelet brukes sammen med produkter, tilbehør og reservedeler levert av Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingskjema for mulige tilbehør og reservedeler.

Produktet kan imidlertid utstyres med CE-merkede belter/seler og hodestøtte/nakkestøtte fra annen leverandør med CE-merking beholdt dersom punktene nedenfor er oppfylt:

- Det skal fremgå klart av tredjeparts dokumentasjon at kombinasjonen er mulig og godkjent (at tredjeparts produkt er beregnet for bruk på manuelle rullestoler eller modulære sittesystem og at tredjeparten godkjenner bruken på andres sittesystem).
- Att sittesystemets originale festepunkter benyttes og at belter/seler og hodestøtter/nakkestøtter festet til festene beregnet på dette sittesystemet fra Anatomic Sitt AB. Festene må passe til gjeldende tredjepartsprodukt. Ingen justering/tilpasning skal gjøres på noen av produktene for å muliggjøre kombinasjonen.
- Monteringsanvisninger for hodestøtter og belter/seler fra Anatomic Sitt AB skal følges og finnes under avsnittet "Monterings- og justeringsinstruksjoner i denne bruksanvisningen. Ingen andre produkter eller tilbehør kan derfor festes til tredjepartsproduktet.

Merk at det alltid skal gjennomføres en risikovurdering når produkter fra ulike leverandører kombineres. Produktet må aldri bli farlig for brukeren eller personer i nærheten.


Avvik/hendelser

Ved funksjonsfeil, kontakt hjelpemiddelsentral eller forhandler/produsent.

Dersom det inntreffer en hendelse som kunne ha ført til alvorlig skade, må det rapporteres til Anatomic Sitt AB og landets kompetente myndighet. Produktet skal også sendes til Anatomic Sitt i nåværende tilstand for videre undersøkelse.

Teknisk data

Sharky Pro

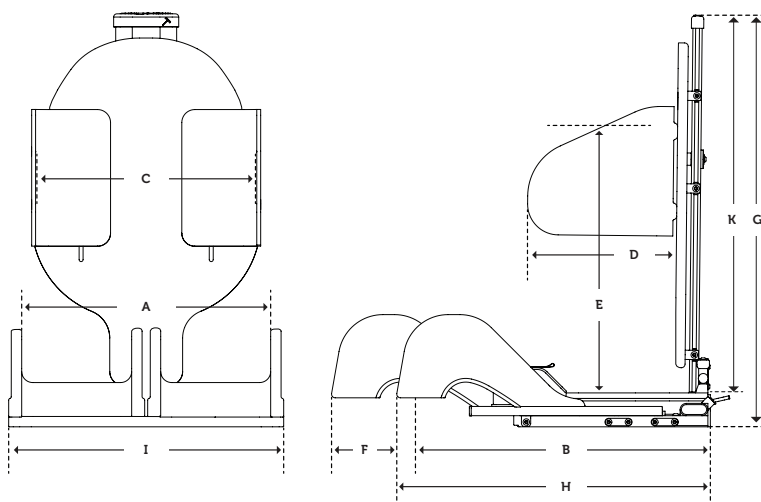


Brukerdata

	Størrelse 1	Størrelse 2
Brukerlengde	150 - 180 cm	170 - 195 cm
Maks. brukervekt	130 kg*	130 kg*
Setebredde (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 50 cm
Setedybde (B)	36 - 47 cm	45 - 55 cm
Brystbredde (C)	27 - 35 cm	30 - 38 cm
Brystdybde (D)	21 cm	25 cm
Akselhøyde (E)	35 - 50 cm	40 - 55 cm
Benlengdeforskjell (F)	10 cm	10 cm
Abduksjon/Adduksjon	18° / 9°	18° / 9°
Høyde (G)	72 cm	77 cm
Lengde (H)	52 - 62 cm	62 - 72 cm
Bredde (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Vekt	14 kg	15 kg
Ryggvinkel	-10° / +30°	-10° / +30°
Ryggplate Bredde x Høyde	35 x 54 cm	36 x 60 cm
Ryggprofil Lengde (K)	67 cm	72 cm

* Krasjgodkjenning gjelder brukervekt opp til 75 kg.

HOFTESTØTTE str. 3

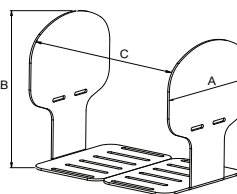

Størrelse: A x B = 18 x 21 cm



Breddejustering C



Hoftestøtte:	Std.	Rett
Sharky 1 (SB=36)	22-32	32-39
Sharky 1 (SB=39)	25-35	35-42
Sharky 1 (SB=42)	28-38	38-45
Sharky 2 (SB=43)	26-32	36-39
Sharky 2 (SB=46)	29-35	39-42
Sharky 2 (SB=50)	32-38	42-45

(SB=setebredde, Alle mål i cm)


FOTSTØTTE

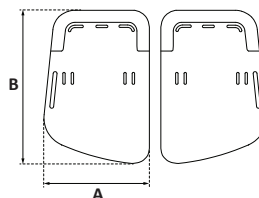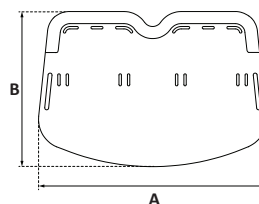

	A x B
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	180 x 305 mm

Fotstøtte størrelse **3 4**
Fotstøttestag profilengde (cm) 35 40


BORD

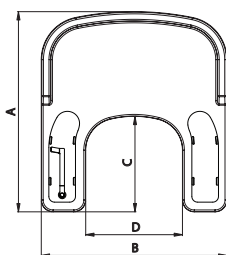

Bord	MÅL			
	A	B	C	D
Str. 3	570	570	280	340 mm
Str. 4	660	600	320	385 mm
Str. 5	660	650	320	435 mm


Støttebord	MÅL			
	A	B	C	D
Str. 3	490	580	300	340 mm
Str. 4	540	640	330	380 mm
Str. 5	620	740	380	440 mm

STØTTEBORD

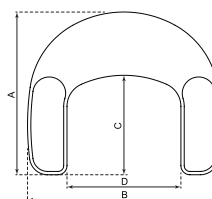

FOTBRETT

Fotbrett str. 3 passer str. 3 fotstøtte osv.

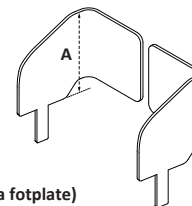

A (høyde fra fotplate)
str. 3 210 mm
str. 4 240 mm

Tilpasning og spesialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet endres på noe vis må en vurdering gjøres på om det er en tilpasning eller spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammene for produktets CE-merking. Alt annet er spesialtilpasning. Tilpasninger kan kun gjøres av en kvalifisert fagperson og skal alltid utføres på en profesjonell måte.

Tillatte tilpasninger innenfor rammen av CE-merking

Lengden på fotstøtteprofilen kan forkortes for å passe brukeren bedre.

Lengden på ryggprofilen kan forkortes. Profilen må aldri være kortere enn at samtlige fester til ryggplaten kan monteres på denne.

Risikoanalyse


Merk at en risikoanalyse alltid skal gjøres, både ved tilpasning og ved spesialtilpasning av et hjelpemiddel. Produktet må aldri være farlig for brukeren eller personer i dets nærhet, til bruk etter tilpasning.

Merking

Ved merking skal det fremkomme om at det er en tilpasning til en spesifikk bruker, slik at det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruksjoner

Montering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddel-sentral eller tilsvarande). Instruer brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø om produktets funksjoner for at hjelpemiddelet skal kunne brukes på en sikker måte.

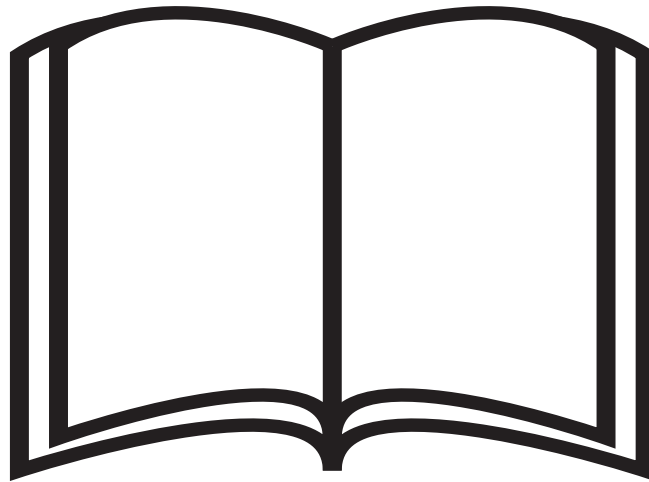

Verktøy



Verktøysnøkkelen du behøver for å gjøre justeringer er integrert i toppen av ryggprofilen som du finner på baksiden av stolen. (4 mm unbrakonøkkel)



Montering av sittesystem

Montering på understell

Det er forskjellige måter å montere sittesystemet på et understell. De ulike alternativene er forklart nedenfor. Velg den måten som passer deg best.

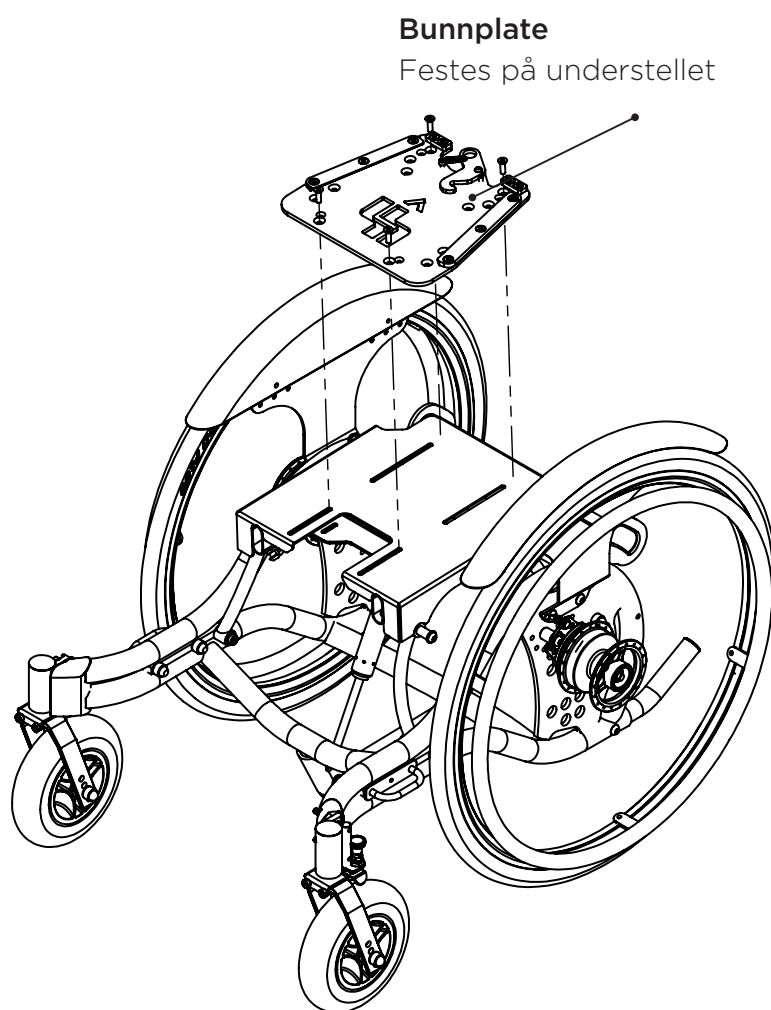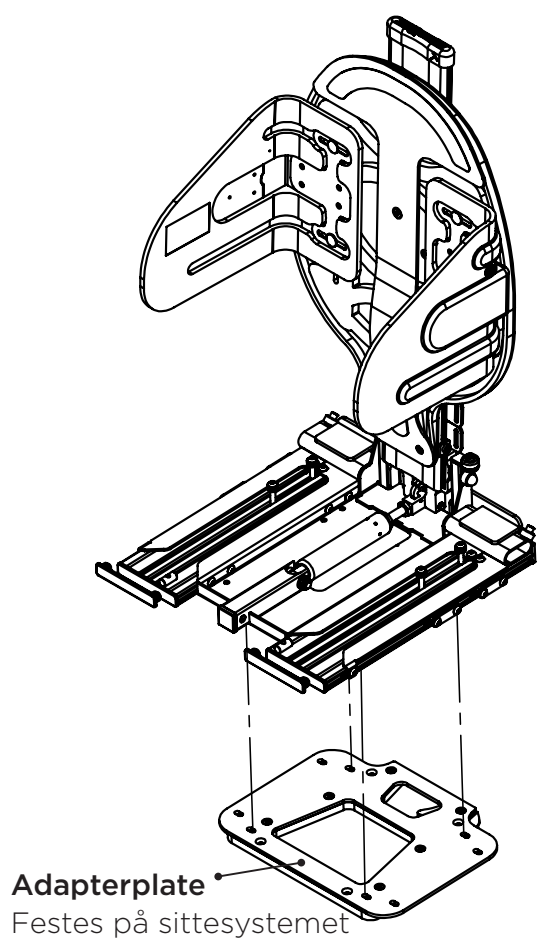


Adaptersystem

Montering med adaptersystem

Begynn med å montere bunnplaten (A) på understellet ved å skru den fast med de medfølgende skruene, skivene og mutrene (B).

Monter deretter adapterplaten (C) ved å skyve tønnemutrene (D) inn i sporene på undersiden av sittesystemet. Stram til skruene (E) når ønsket posisjon er nådd.

Når adapterplate og bunnplate er montert på sittesystemet og understellet, kan disse kombineres. Sittesystemet er riktig festet når en klikklyd høres.

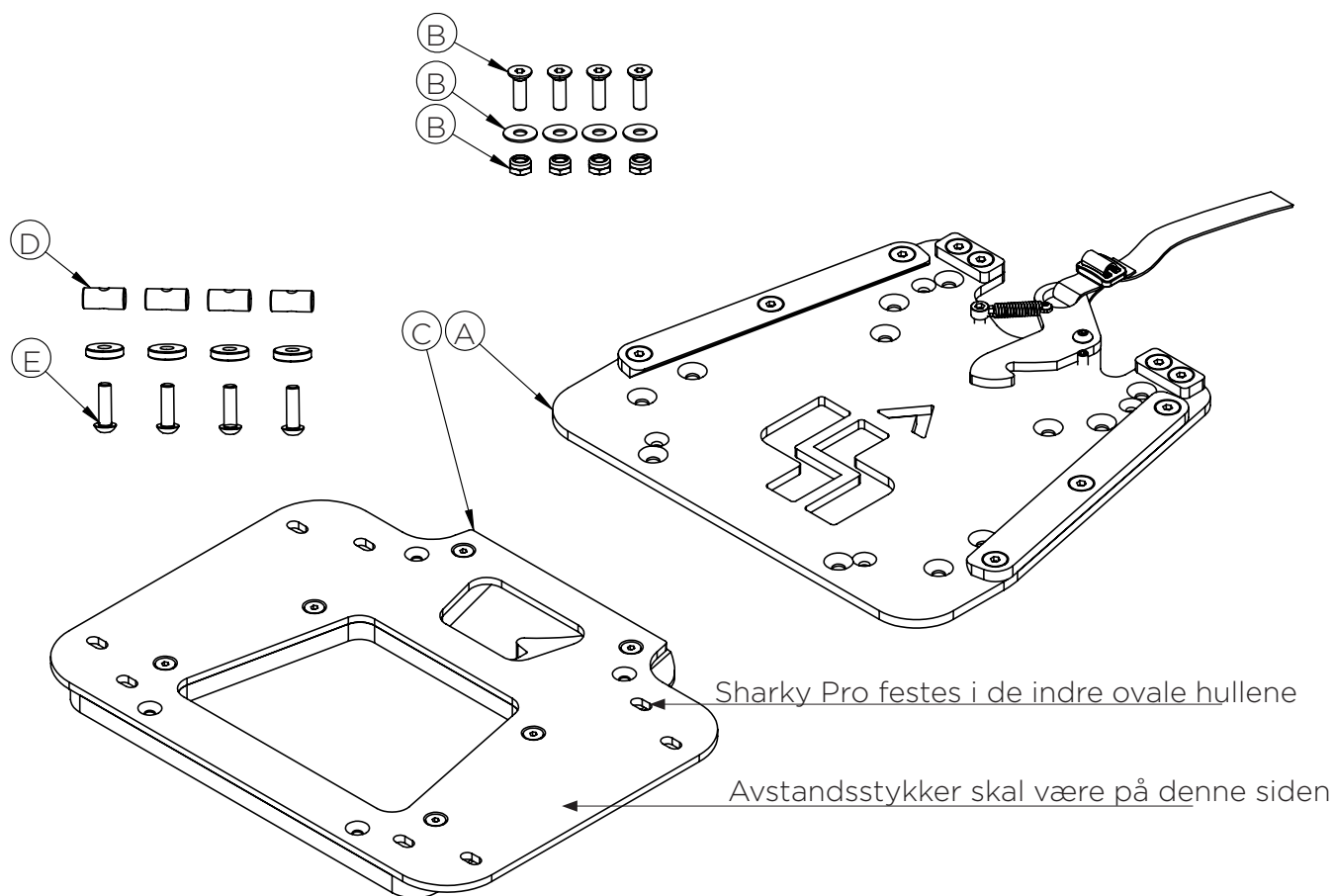

Pass på at sittesystemet er godt festet til understellet før bruk.




Ved bruk av Adaptersystem Pro (153047) skal sikkerhetsstroppen på baksiden av sittesystemet alltid brukes og strammes rundt kjørebøylen eller tilsvarende på understellet (se bilde). Pass på at stroppen er stram og festet slik at den ikke kan skli av.



Fast montering

Fast montering betyr å feste sittesystemet direkte til understellet. Montering med denne metoden må gjøres med det medfølgende monteringssettet.

I bunnen av sittesystemet er det to forskjellige hullmønstre for fast montering på understellet. Velg det hullmønstret som er best egnet for en balansert montering.

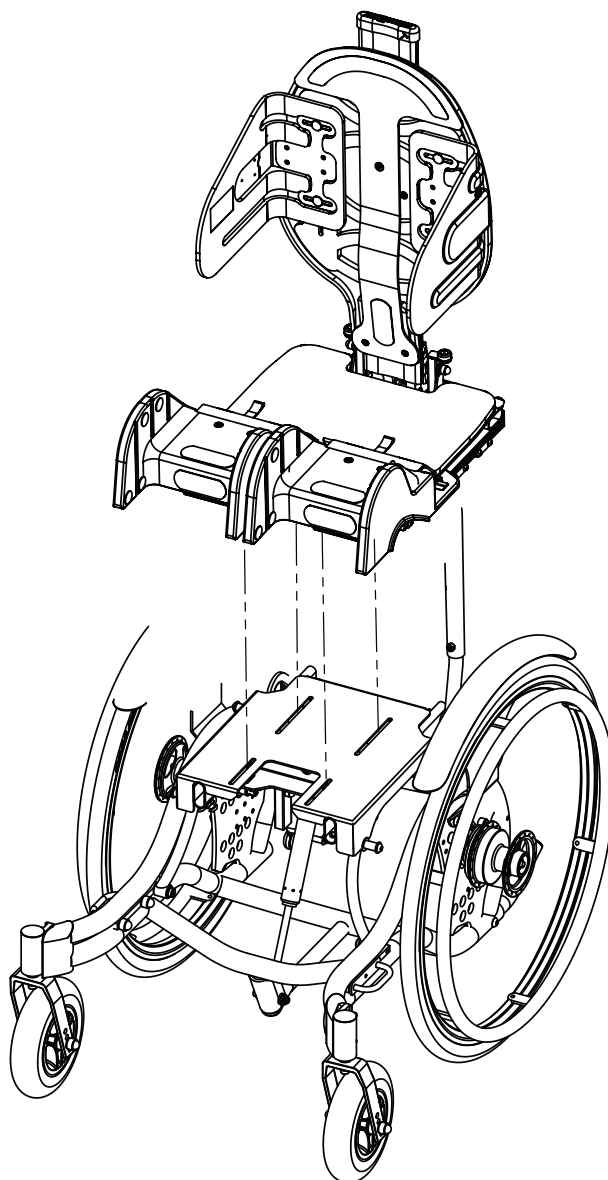

Aldri bruk andre skruer enn de som følger med.
Dette er sikkerhetsdetaljer. Ønskes andre dimensjoner, kontakt Anatomic Sitt AB.



Før sittesystemet monteres på understellet, må plansetet demonteres.

Planskive

Montering av planskive

Et plansete innebærer at man erstatter sittedelen men en planskive. Montering med denne metoden må gjøres med det vedlagte monteringssettet i henhold til beskrivelsen nedenfor.


Fjern endestykkene (I) fra profilene og sett inn tønnemutrene (A) i profilens ytre spor og fest skruene (B) gjennom hullene (C) i planskiven. Ikke stram skruene (B) helt.

Sett de lengre skruene (D) med skivene (E) gjennom de bakre hullene (G) i profilen. Møt deretter på motsatt side av skruene med tønnemutrene (H). Ikke stram skruene (D) helt.

Skyv deretter den flate seteplaten inn i setebunnen i spor 2 til ønsket posisjon og stram skruene (B) og (D). Sett deretter endestykkene (I) tilbake i profilene.




Aldri bruk andre skruer enn de som følger med. Dette er sikkerhetsdetaljer. Ønskes andre dimensjoner, kontakt Anatomic Sitt AB.

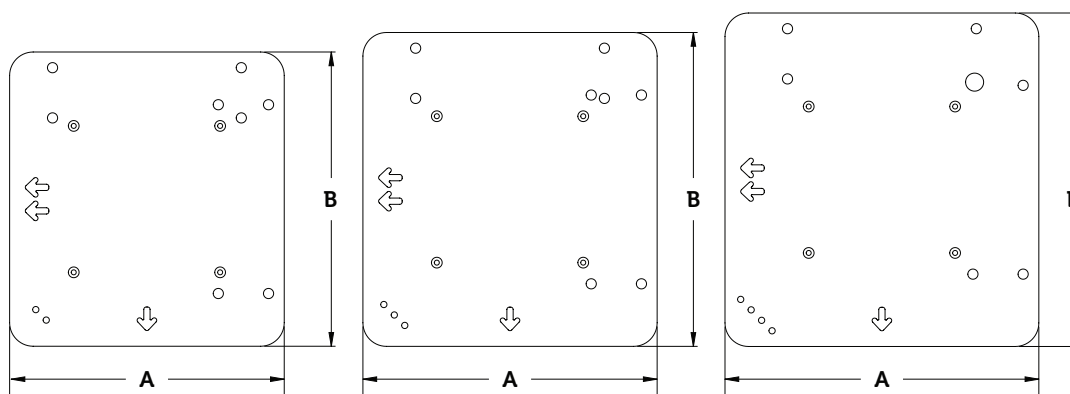

Planskive
Artnr. 153190
(AxB)
350 x 375 mm

Planskive
Artnr. 153191
(AxB)
375 x 400 mm

Planskive
Artnr. 153192
(AxB)
400 x 425 mm

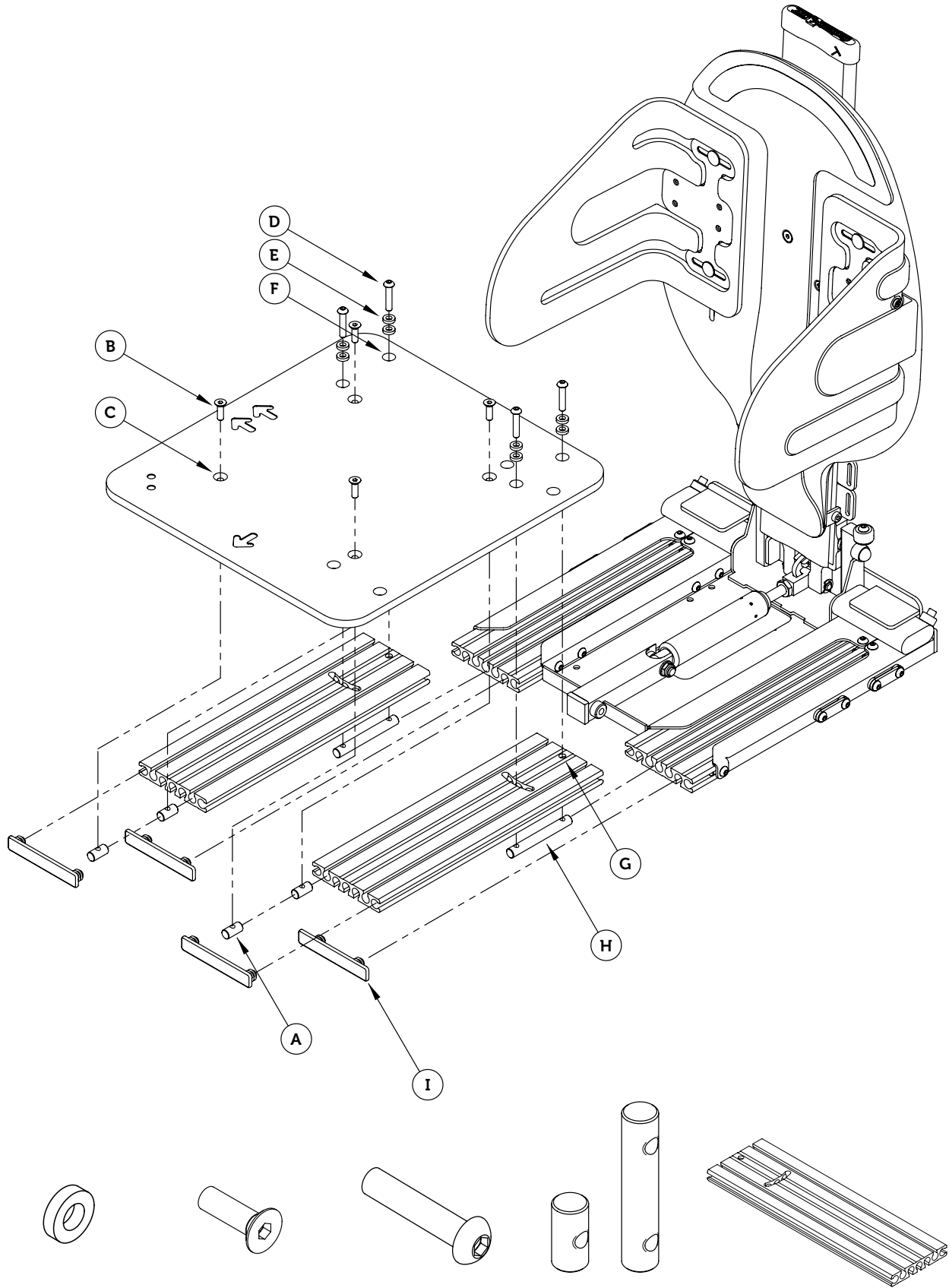

M6x3 Skive
8 stk

M6x16 Innfelt
4 stk

M6x35 Buet
4 stk

Tønnemutter
4 stk/2 stk

Profiler
2 stk

Justering av sittedel

Setedybde, benlengdeforskjell og eventuell abduksjon/adduksjon av bendelerne justeres enkelt. Start med å fjerne setepolstringen og fjern den bakre seteplaten (A) for å få riktig tilgang til justeringsskrue (B).





Du trenger aldri å skru skrue helt ut for å justere bendelerne, det er nok å løsne dem litt.

Setebreddejustering

For å øke eller redusere setebredden må posisjonen til bendelerne på profilen endres. For å fjerne bendeleren fra seteprofilen må du først fjerne endestykket som er plassert i forkant av seteprofilen. Løsne deretter skrue (B) på bendeleren med justeringsnøkkelen. Når du har løsnet skrue (B) litt, trekker du hele bendeleren ut av seteprofilen og flytter den så til ønsket spor.

For maksimal sittebredde setter du tønnemutteren i spor 3, og for minimal sittebredde setter du tønnemutteren i spor 1. Bendelerne leveres forhåndsinnstilt i spor 1.

Stram skrue (B) når du har nådd ønsket posisjon. Den bakre skruen på bendeleren kan i enkelte tilfeller måtte løsnes litt (C).

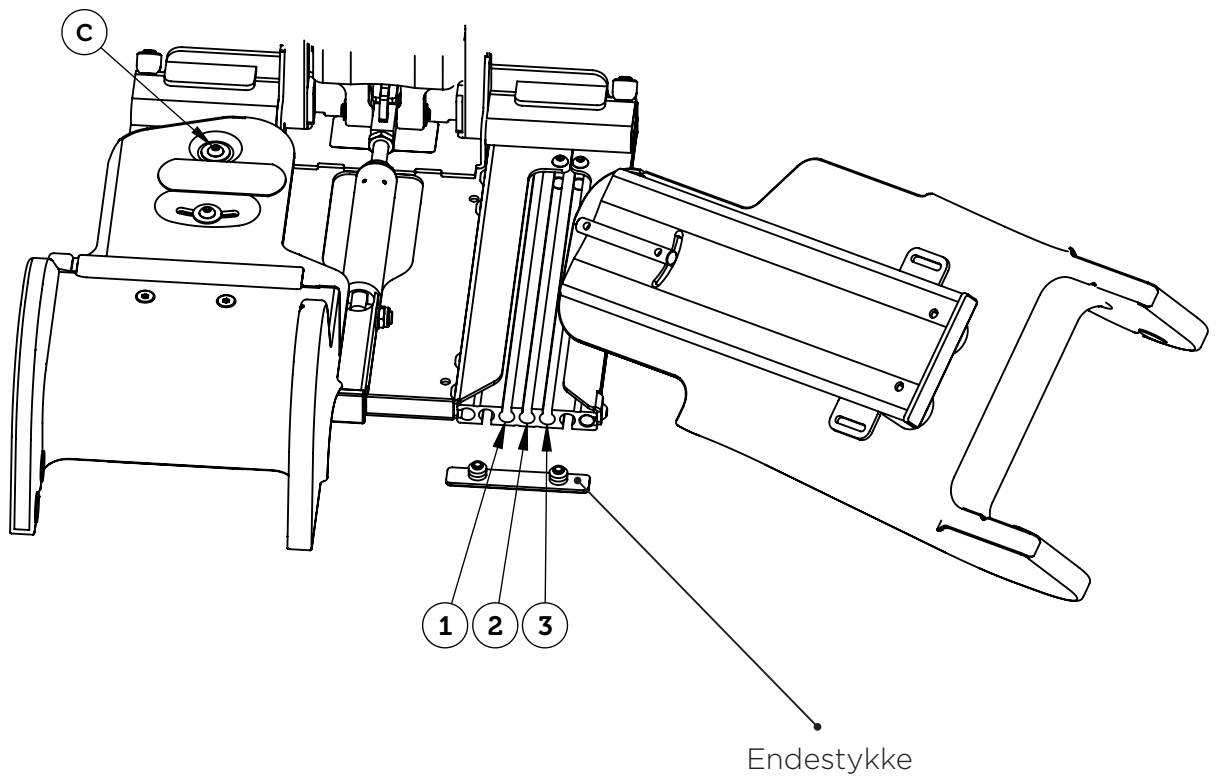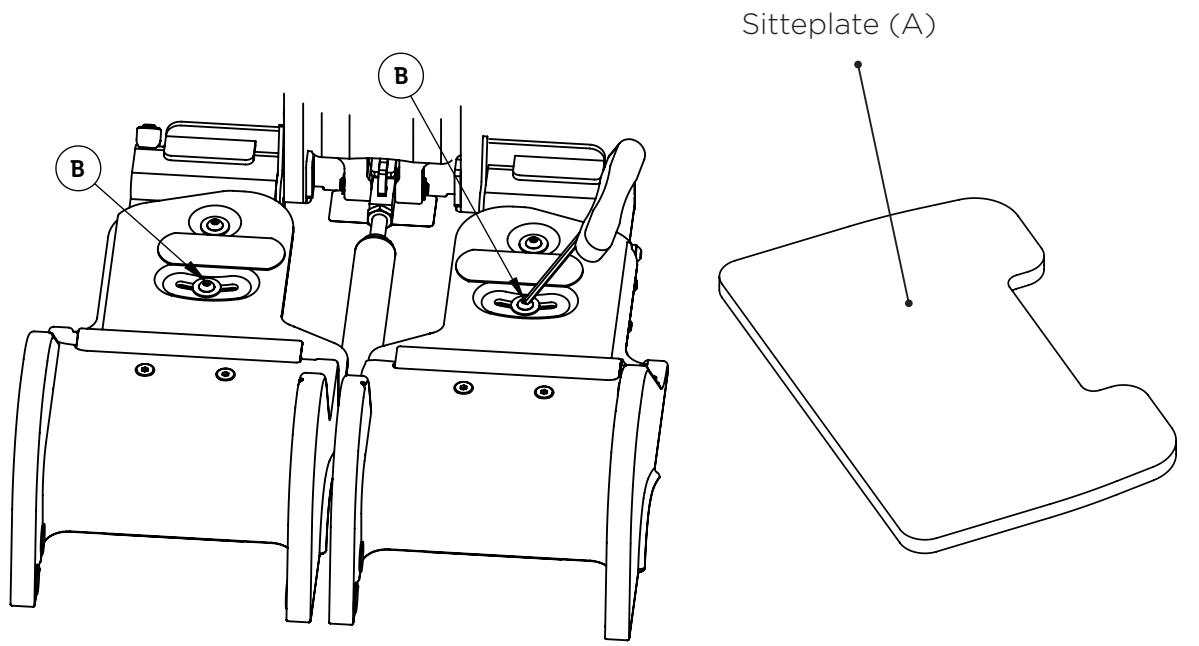

Benlengdeforskjell/sittedybde

Løsne den fremre skruen (A) på settefronten med verktøysnøkkelen. Trekk settefronten til ønsket posisjon og stram skruen.



Pass på at du ikke justerer settefronten utenfor det godkjente justeringsområdet i henhold til målopplysningen (B). Spor (C) markerer maksimal justering (se bilde).

Sittegruppsjustering

Ved justering av setedybden bør også setegropens justering inkluderes. Løsne bendelerens fremre skruer (D) med justeringsnøkkelen og trekk sittegruppsjusteringen til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (D).




For å få en god startposisjon ved innstilling av sittedybde kan fargeskalaen på setebunnen og dybdejusteringsplaten (E) brukes som hjelp. Hvis setedybden justeres til for eksempel 43 cm (grått felt), bør også setegropens justering utvides til det grå feltet, da blir størrelsen på setegropen riktig innstilt. Finjuster alltid innstillingene i henhold til hver brukers forutsetninger.

Abduksjon, adduksjon og windswept

For å justere bendelerne til en av disse posisjonene, løsne skruen (A) med justeringsnøkkelen og flytt deretter bendeleren til ønsket posisjon. Stram skruen (B).



Du trenger aldri å skru skruene helt ut for å justere bendelerne, det er nok å løsne dem litt.

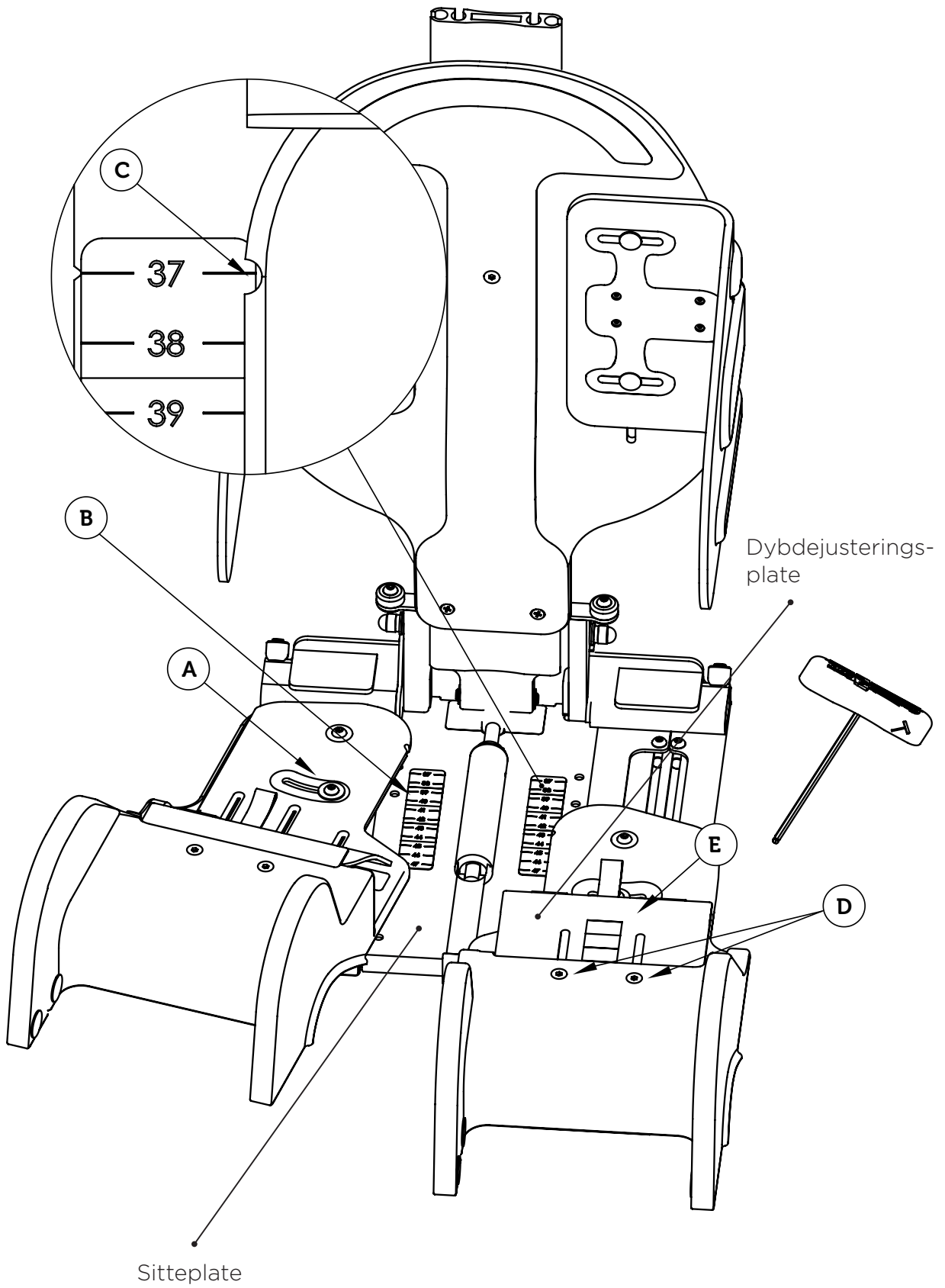

Oversikt over rygginnstillinger

Montering av rygg

Ryggens innfestning består av fire (4) skruer (A) og to (2) tønnemutre. Monter og senk ryggprofilen på tønnemutrene og aktuatorhuset og stram de fire (4) skruene (A) med justeringsnøkkelen. Ryggen havner automatisk i riktig posisjon ved hjelp av de ferdigmonterte stopperne i ryggprofilen.

Justering av rygghøyde

For å justere rygghøyden, løsne skruene (B) på begge sider av ryggprofilen med justeringsnøkkelen og juster deretter til ønsket høyde. Når du er fornøyd med innstillingen, stram skruene (B) igjen. Løsne også gantergrepet (E)

Justering av ryggvinkel

Plasser låsen (C) i aktiveringsposisjon ved å løfte den opp og deretter skyve den inn på hakket.

For å justere vinkelen på ryggstøtten, trykk låsen ned. Da aktiverer gassfjæren ryggen slik at du kan stille den i ønsket posisjon. Når du har nådd ønsket vinkel, slipp låsen igjen og du beholder innstilt ryggvinkel.



Husk å alltid holde i ryggen når du aktiverer gassfjæren.

Justering av bryststøtte

For å justere bredden og høyden på bryststøtten, løsne skrue (D) og juster deretter til ønsket høyde og bredde. Stram skrue (D) når du har nådd ønsket posisjon.

Justering av korsryggstøtte


Løsne skrue (E) og trykk på toppen av korsryggstøtten som er plassert bak ryggpolsteret til ønsket korsryggsdybde er nådd. Hold korsryggstøtten i posisjonen og stram deretter skrue (E).



Rygghøyden må kanskje justeres for at korsryggstøtten skal havne i riktig posisjon.




Fjern ryggpolsteret for å se korsryggstøtten bedre under justering.

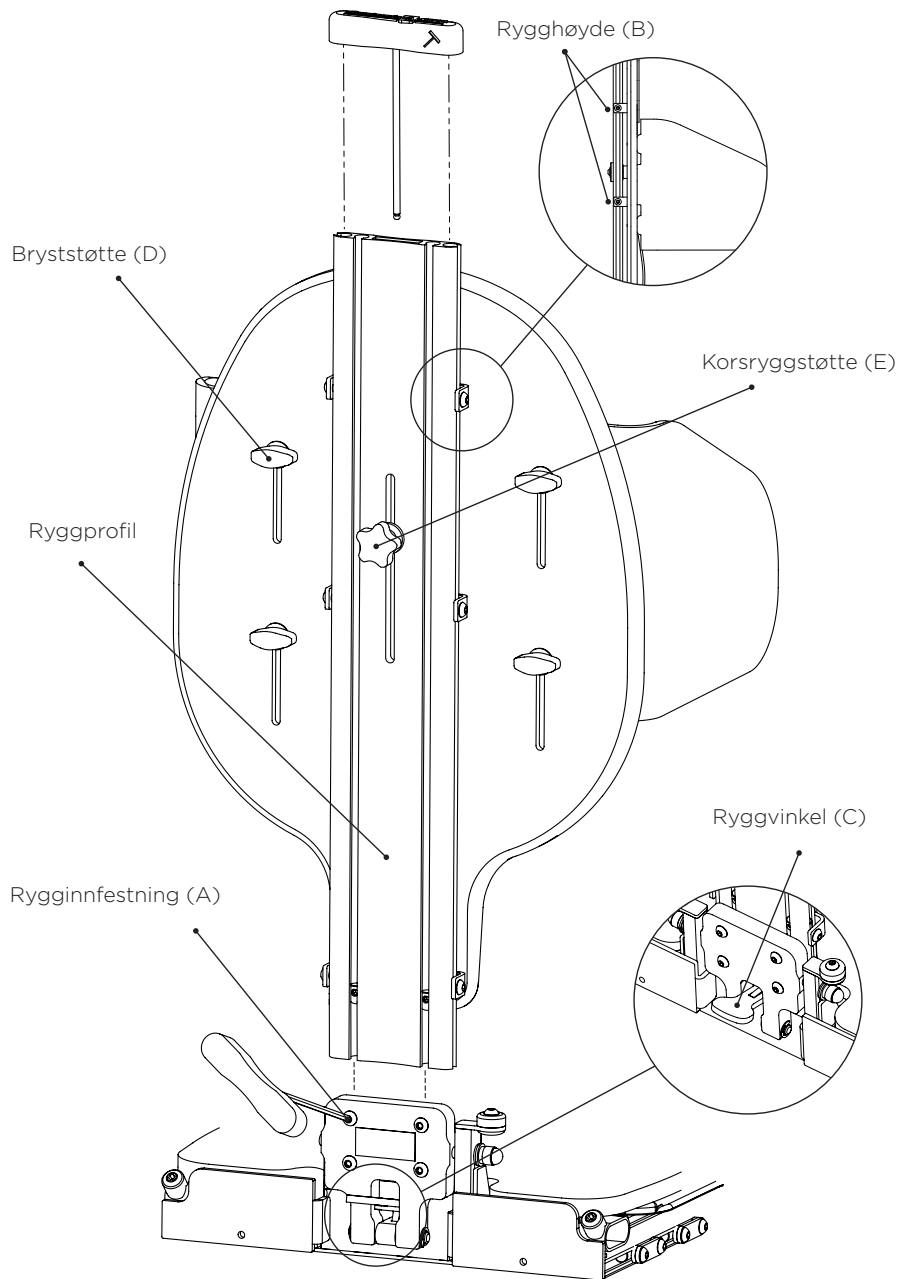

Lås- og justerbar flexfunksjon (på sittedel MLD - Sharky+)

Vri skruen med klokken (A) for å låse flexfunksjonen i ryggen og fest den.

For å aktivere flexfunksjonen, skru skruen mot klokken (B), du kan også stille inn hvor langt ryggen skal bevege seg avhengig av hvor langt skruen er skrudd ut.

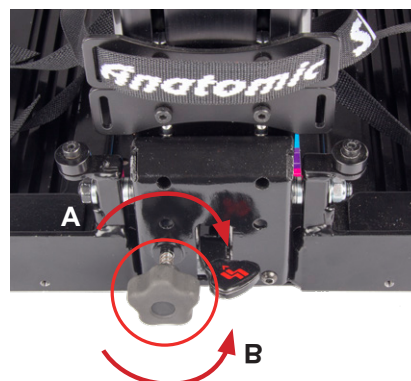

Bryststøtte

Montering av bryststøtte

Monter bryststøtten ved hjelp av skrue (A), skive (B) og gantergrep (C).


Sett inn skrue (A), bryststøttevingen (D) og sporet i ryggplaten (E). Møt deretter med skive (B) og håndskruer (C) på motsatt side av ryggplaten (E).

Alternative bryststøtter

Som et alternativ til de faste bryststøttene finnes også utsvingbare bryststøtter, omsluttende bryststøtter og forsterkede bryststøtter. Disse monteres på samme måte som beskrevet ovenfor.

Utsvingbare bryststøtter

Åpne den utsvingbare bryststøtten ved å trykke på den røde knappen.


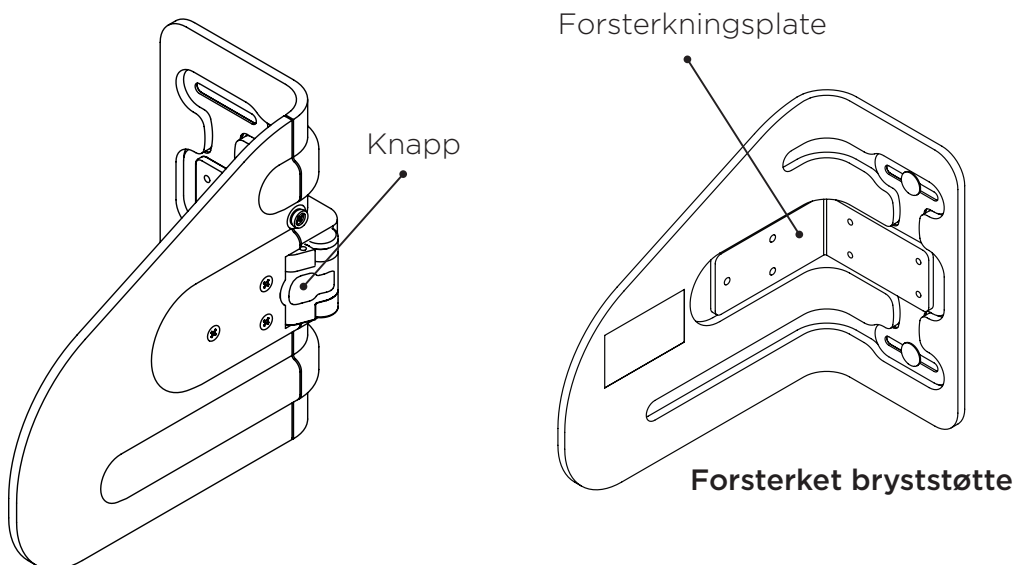


Omsluttende bryststøtter

Åpne den utsvingbare bryststøtten ved å trykke på den røde knappen. For å dybdejustere de omsluttende bryststøttene, løsne de fire skruene på siden.



Ryggjør
(ved valg av forsterket rygg)

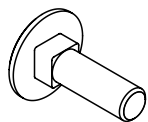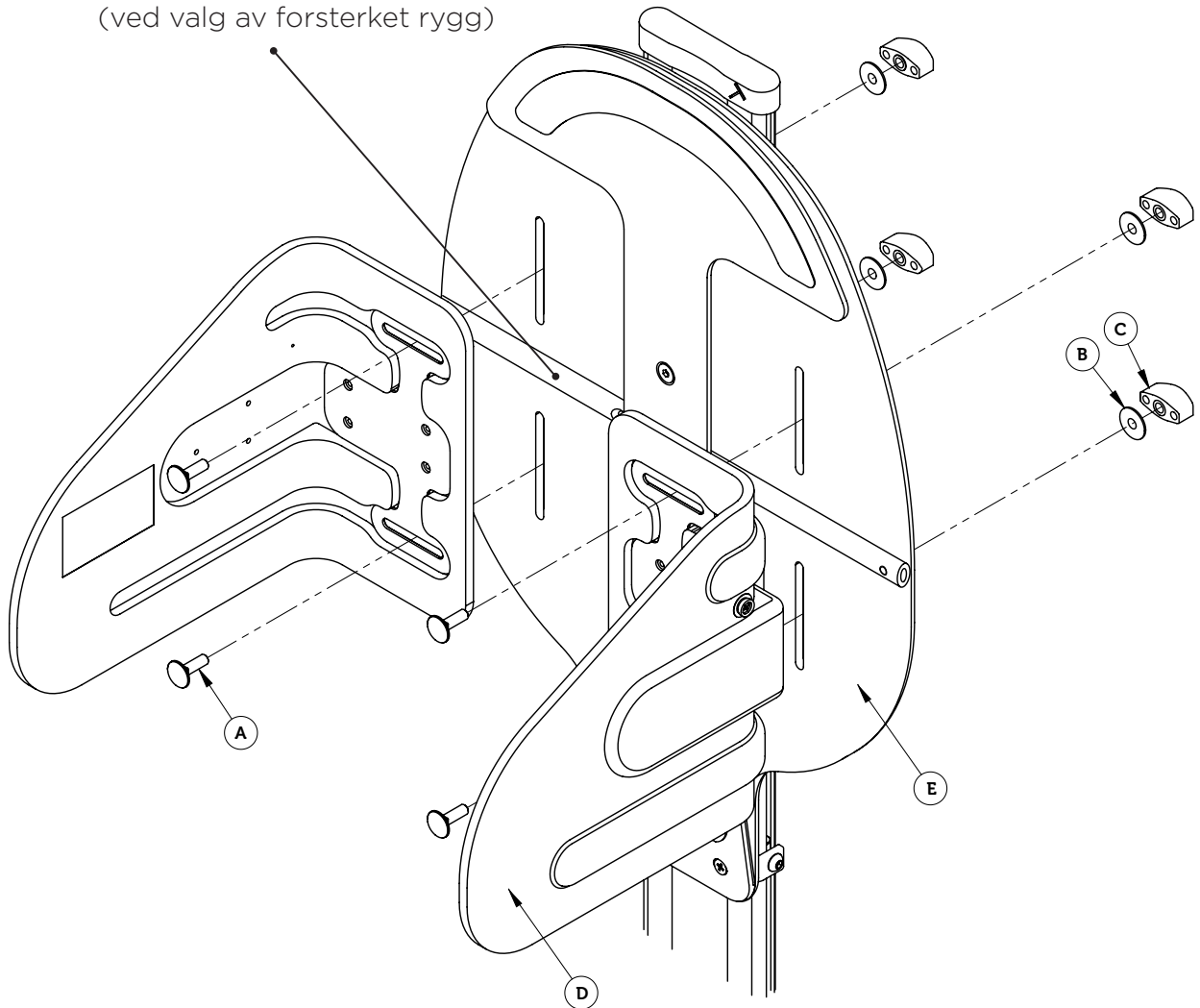

Skrue (A)
4 stk



Skive (B)
4 stk



Gantergrep (C)
4 stk

Bekkenstøtte

Montering av bekkenstøtte



Før du kan montere bekkenstøtten, må du fjerne beskyttelsesdekselet (A).

Skrut ut skruen (B) og løft av dekselet.

Monter bekkenstøtten der beskyttelsesdekselet (A) var og fest med skruen (B).

Justering av bekkenstøtte

For å justere vinkelen på bekkenstøtten, løsne skruen (B), (C) eller (D) avhengig av innstillingene du ønsker å gjøre. For å justere høyden på bekkenstøtteplaten, skru ut skruene (E) og flytt platen til ønsket posisjon. Skru deretter inn skruen (E) igjen.

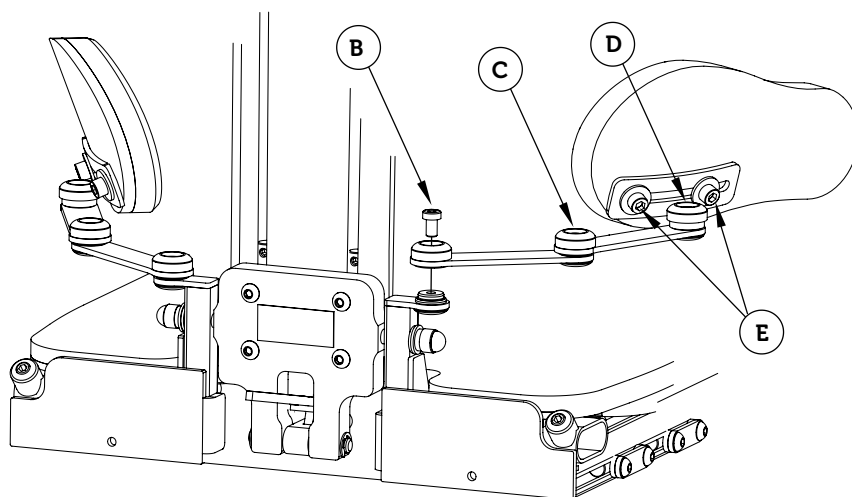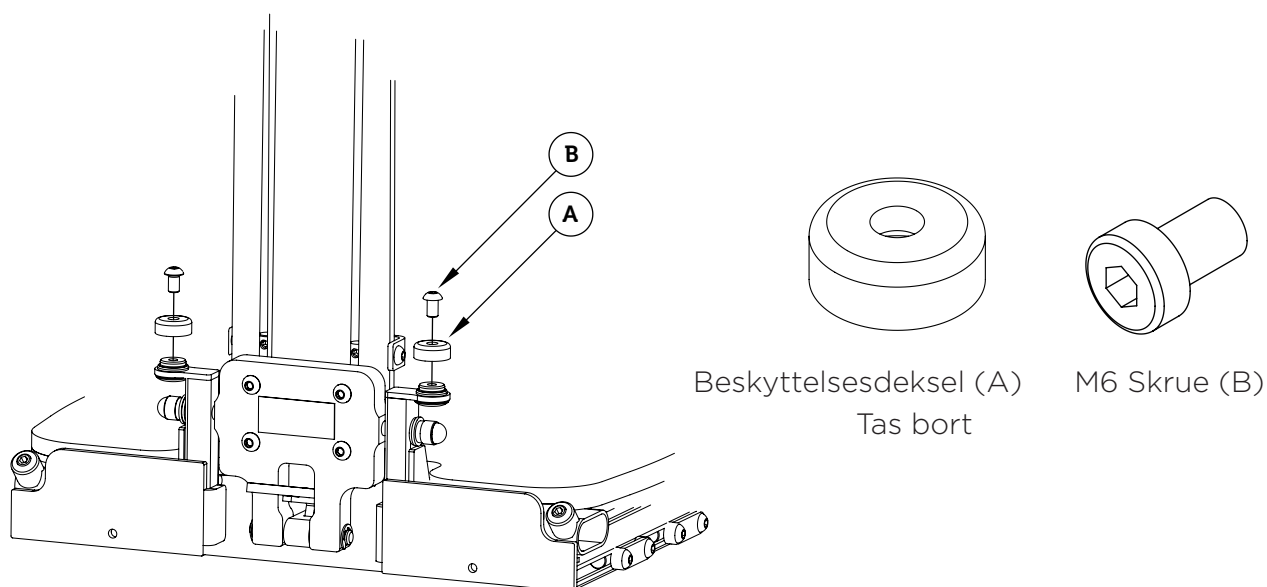


Hoftestøtte

Montering av hoftestøtte

Skruløs de to skruene som fester bendelaren til basen. Monter deretter hoftestøtten (med de to skruene du fjernet) mellom bendelaren og basen som vist på bildet (melom de to sorte profilene for Sharky) slik at hoftestøtten ligger mot basen.

Velg hvilke spor i hoftestøtten du bruker avhengig av hvor langt framover/bakover du vil plassere støtten, juster deretter støtten sideveis før du strammer skruene ordentlig.

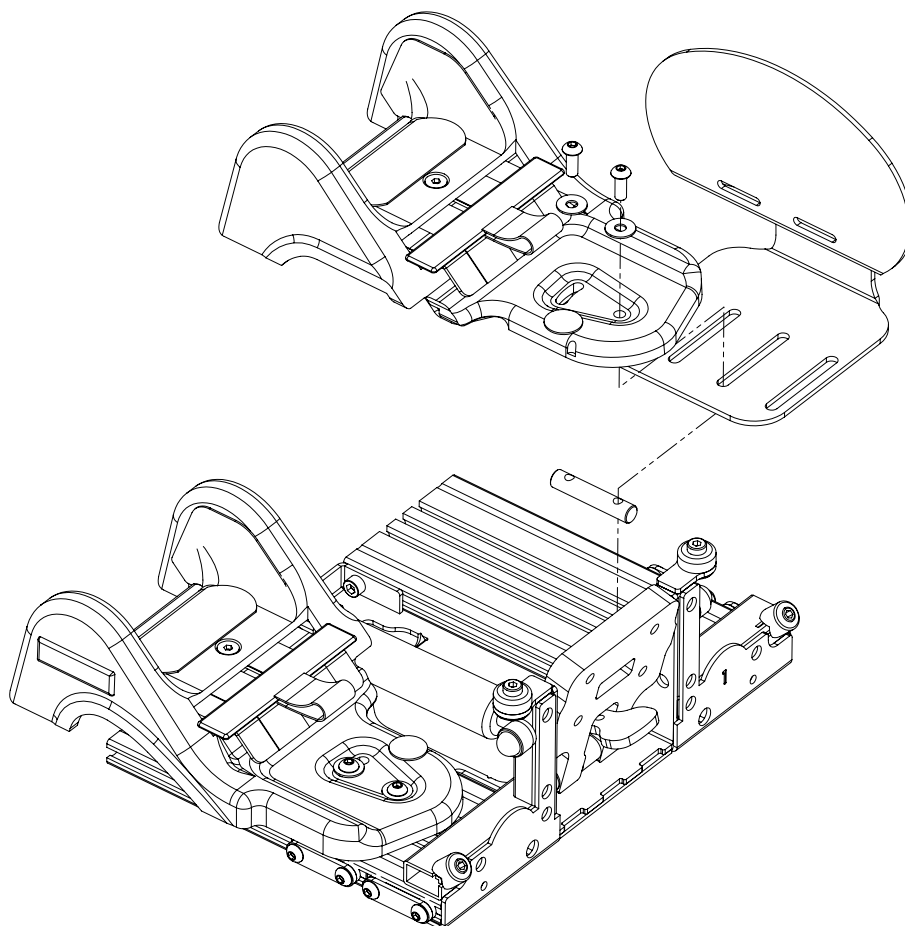

Hodestøtte

Montering av hodestøttefeste

Før montering av hodestøtten kan utføres, må du først fjerne justeringsnøkkelen og eventuelle andre deler som kan være i veien.

Skyv hodestøttebrakettens tønnemuttere (A) inn i sporet på ryggprofilen. Når du har oppnådd ønsket posisjon, stram de fire skruene (B).

Montering av hodestøtte

Skyv hodestøttebraketten inn i hodestøttefestet (C) og stram deretter gantergrepet (D) når du har oppnådd ønsket posisjon.

Høydejustering av hodestøttefeste

For å justere høyden, løsne skruene (B) litt og flytt deretter hodestøttebraketten til ønsket posisjon. Stram skruene (B).

Justering av hodestøtte


Ved justering av treleddet hodestøtte, løsne skrue (E) i leddet du ønsker å justere. Når du har nådd ønsket posisjon, stram skrue (E) igjen.

For å justere høyden på hodestøtten, løsne gantergrepet (D) og flytt hodestøtten til ønsket posisjon. Stram deretter gantergrepet (D).

Montering av pannebåndsfeste

Før montering av pannebåndsfestet kan utføres, må hodestøtteplaten (H) demonteres. For å demontere hodestøtteplaten, løsne begge skruene (I).

Monter deretter pannebåndsbraketten i hullet (F) med medfølgende monteringsdetaljer. Se egen bruksanvisning ved ettermontering av pannebåndet.

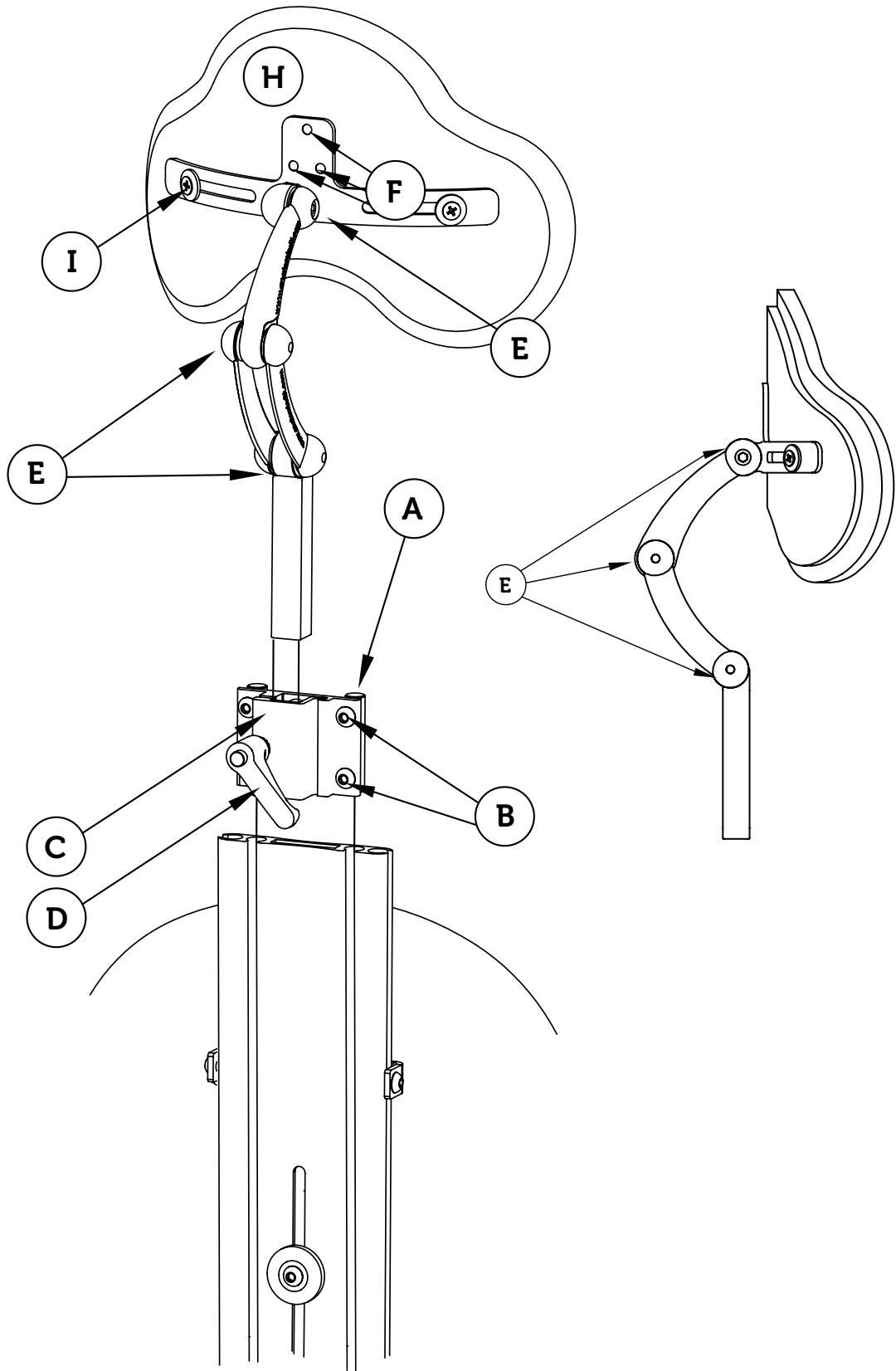

Posisjoneringsseler

Montering av øvre beslag

Ta av justeringsnøkkelen og skyv deretter inn tønnemutter (A) på det øvre monteringsbeslaget (D) i ryggprofilens spor. Når du har oppnådd ønsket høyde på beslaget, stram skruene. Sett tilbake justeringsnøkkelen i ryggprofilen.

Justering av øvre beslag

For å justere høyden og vinkelen på den øvre braketten, løsne skruene litt og flytt deretter beslaget til ønsket posisjon. Stram skruene.

Montering av nedre beslag

Før montering av det nedre beslaget (C) kan utføres, må du først fjerne justeringsnøkkelen og eventuelle andre deler som kan være i veien. Disse delene kan for eksempel være hodestøtte, øvre festebreketter og kjørebøyle.


Skyv det nedre beslagets tønnemutter inn i sporet på ryggprofilen. Når du har oppnådd ønsket posisjon, stram skruene (B). Sett eventuelt sammen delene du fjernet igjen for å kunne montere det nedre beslaget.


Justering av nedre beslag

For å justere høyden på det nedre beslaget, løsne skruene (B) litt og flytt deretter beslaget til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (B).


Montering av alternativt nedre beslag

For et lavere feste av selen kan et alternativt nedre beslag (F) brukes. Disse monteres med medfølgende skrue i eksisterende hull på setebasen.

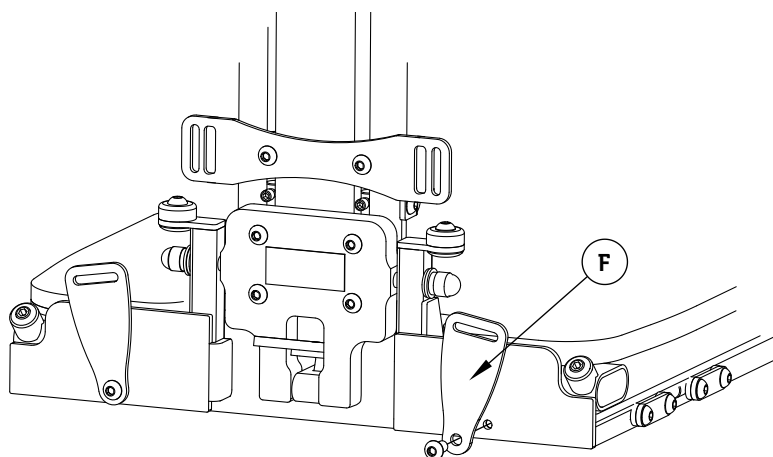


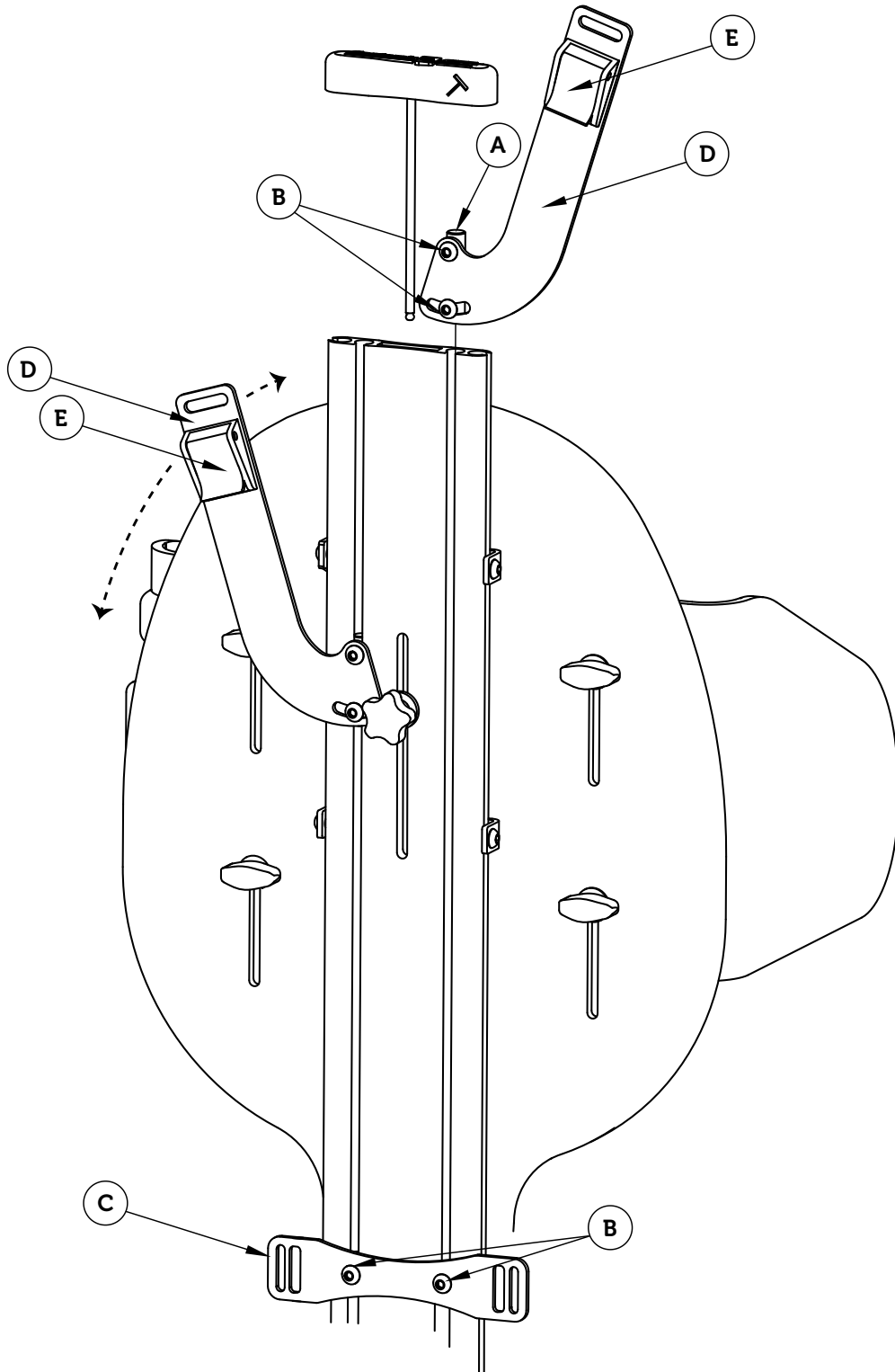

Tønnemutter (A)
4 stk

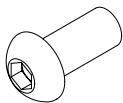

M6 Skrue (B)
6 stk

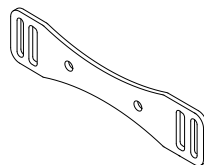

Nedre beslag (C)
Inngår som standard



Nedre beslag (F)
Alternativt 2 stk



Hoftebelte

Justering av hoftebeltefeste

For å flytte posisjonen til hoftebeltefestet, løsne skruene (A) litt og juster til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (A).

Montering av hoftebelte

Når hoftebeltet skal monteres i hoftebeltefestene, bruker du tri-glidespenne. For montering i henhold til tri-glidemetoden, gjør som vist på bildet.

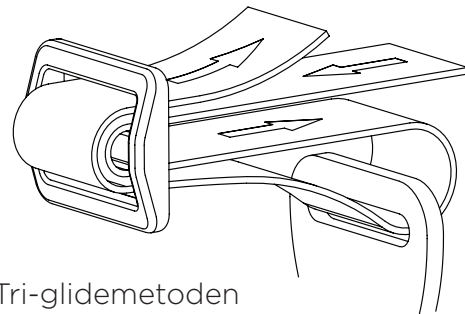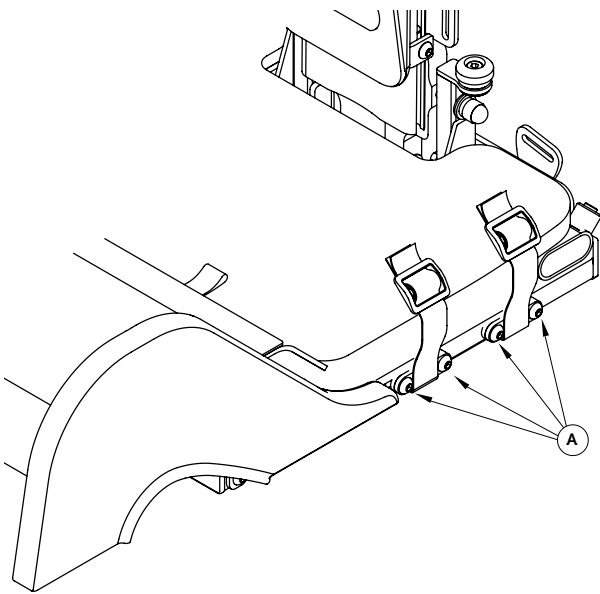

Tri-glidemetoden




Pass på at stroppen ikke kommer i klem mellom avstandsstykket og festet.

Ankelstøtter

Fotplaten er klargjort for montering av ankelstøtten. Montering av ankelstøtter på hel justerbar og delt justerbar fotstøtte gjøres under den justerbare fotplaten.



Kontroller at reimen
ikke vrir seg på
ankelstøtten

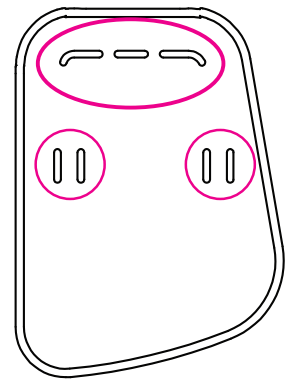

Armstøtte fra sete

Montering av armstøtte fra sete

Skyv armstøtten inn i det angitte røret på siden av sittebasen. Når du har oppnådd ønsket breddeposisjon på armstøtten, stram låseskruer (A).

Breddejustering

For å endre bredden på armstøtten, løsne skruer (A) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruen.

Høydejustering

Hvis du ønsker å justere høyden på armstøtten, løsner du gantergrepet (B) og flytter deretter armstøtten til ønsket høyde. Stram deretter gantergrepet (B).

Vinkeljustering opp/ned

Hvis du ønsker å justere vinkelen på armstøtten, løsner du gantergrepet (C) og flytter deretter armstøtten til ønsket vinkel. Stram deretter gantergrepet (C).


Vinkeljustering sideveis

Hvis du ønsker å justere platen sideveis og vinkel, løsne skruene (D) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (D).

Montering av skålformede armstøtter

Armstøttene skal monteres som vist med de høye sidene utover, vekk fra kroppen.



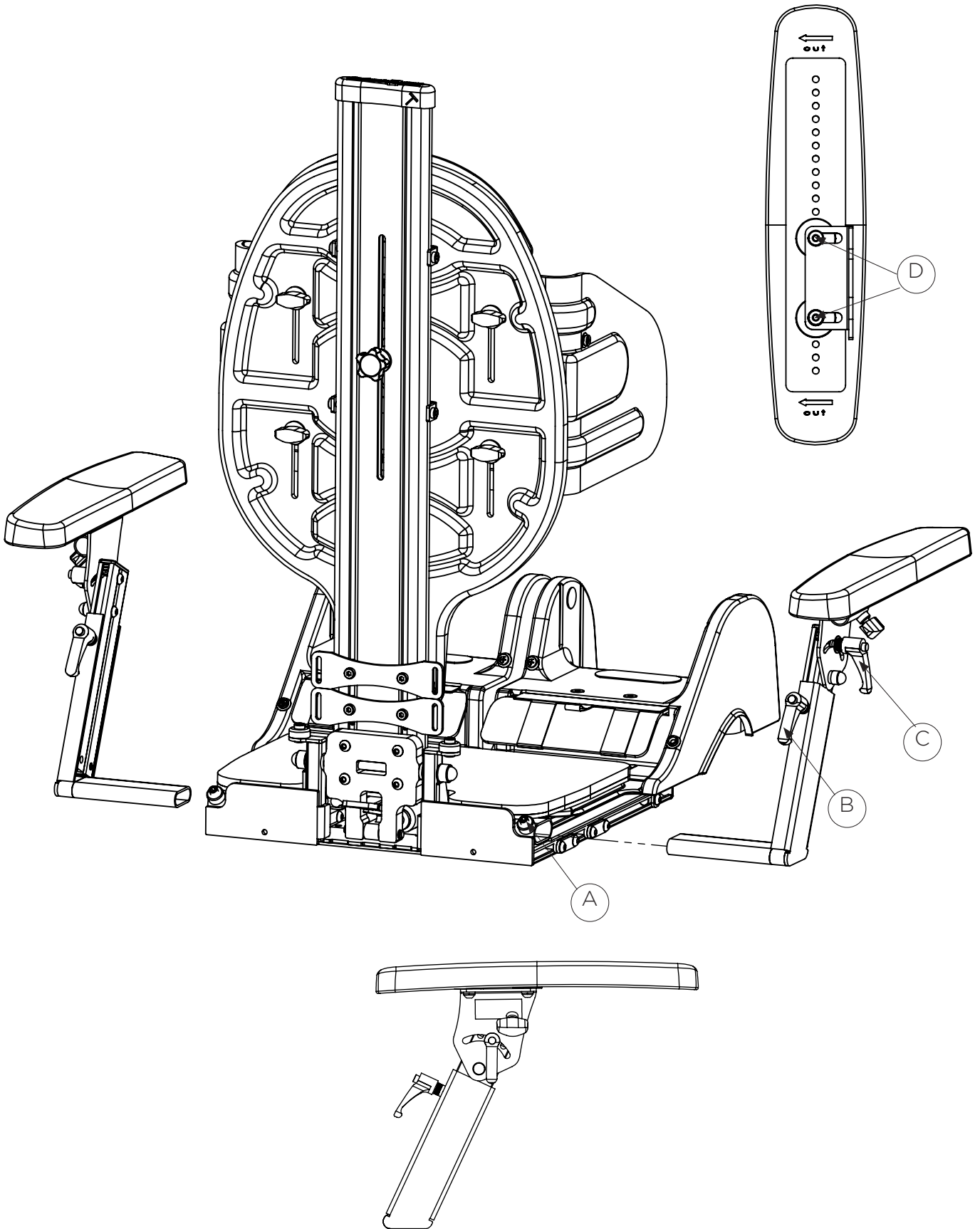

Armstøtte fra rygg, fast

Montering av armstøtte fra rygg

Før montering av armstøtte fra rygg kan utføres må du først fjerne justeringsnøkkelen og eventuelle andre deler som kan være i veien. Disse delene kan for eksempel være hodestøtte, øvre festebraketter og kjørebøyle.

Skyv armstøttebeslagets tønnemutter inn i ryggprofilens spor. Når du har oppnådd ønsket posisjon, stram skruene (A). Monter eventuelt delene du fjernet for å kunne montere armstøttebeslaget.

Høydejustering

For å justere høyden på armstøtten, løsne skruene (A) litt og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (A).

Breddejustering


For å endre bredden på armstøtten, løsne skruer (B) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruen.

Vinkeljustering opp/ned

Hvis du vil justere vinkelen på armstøtten, løsner du gantergrepet (C) og flytt deretter armstøtten til ønsket vinkel. Stram deretter gantergrepet (C).

Vinkeljustering sideveis

Hvis du ønsker å justere platen sideveis og vinkel, løsne skruene (D) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (D).

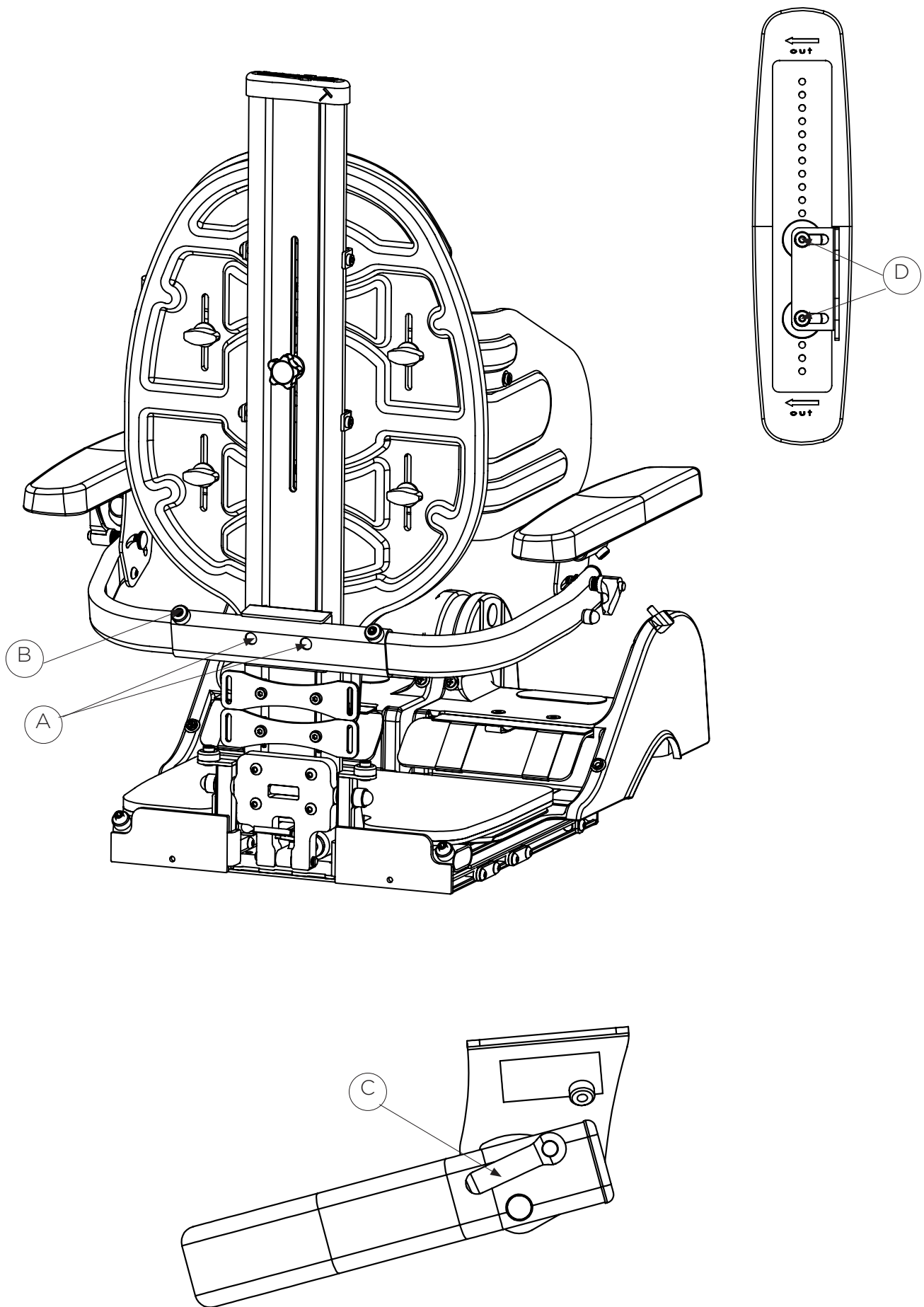

Armstøtte fra rygg, utsvingbar

Montering av utsvingbare armstøtter fra rygg

Før montering av armstøtte fra rygg kan utføres, må du først fjerne justeringsnøkkelen og eventuelle andre deler som kan være i veien. Disse delene kan for eksempel være hodestøtte, festebraketter og kjørebøyle.

Skyv armstøttebeslagets tønnemuttre inn i ryggprofilens spor. Når du har oppnådd ønsket posisjon, stram skruene (A). Monter eventuelt delene du fjernet for å kunne montere armstøttebeslaget.

Høydejustering

For å justere høyden på armstøtten, løsne skruene (A) litt og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (A).

Breddejustering

For å endre bredden på armstøtten, løsne skrue (B) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruen.

Vinkeljustering opp/ned




Hvis du vil justere vinkelen på armstøtten, løsner du gantergrepet (C) og flytt deretter armstøtten til ønsket vinkel. Stram deretter gantergrepet (C).

Vinkeljustering sideveis

Hvis du ønsker å justere platen sideveis og vinkel, løsne skruene (D) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (D).

Den utsvingbare funksjonen

For å svinge armstøtten til siden, trekk låseskruen (E) ned og trekk armstøtten til siden. Pass på at du hører et klikk når du trekker armstøtten tilbake. Muligheten for å vinkeljustere gjøres med trehullsposisjonen til låseskruen.

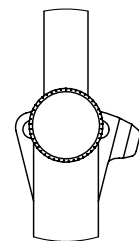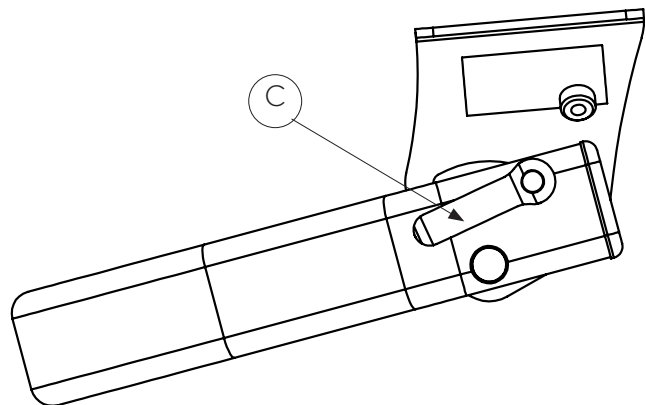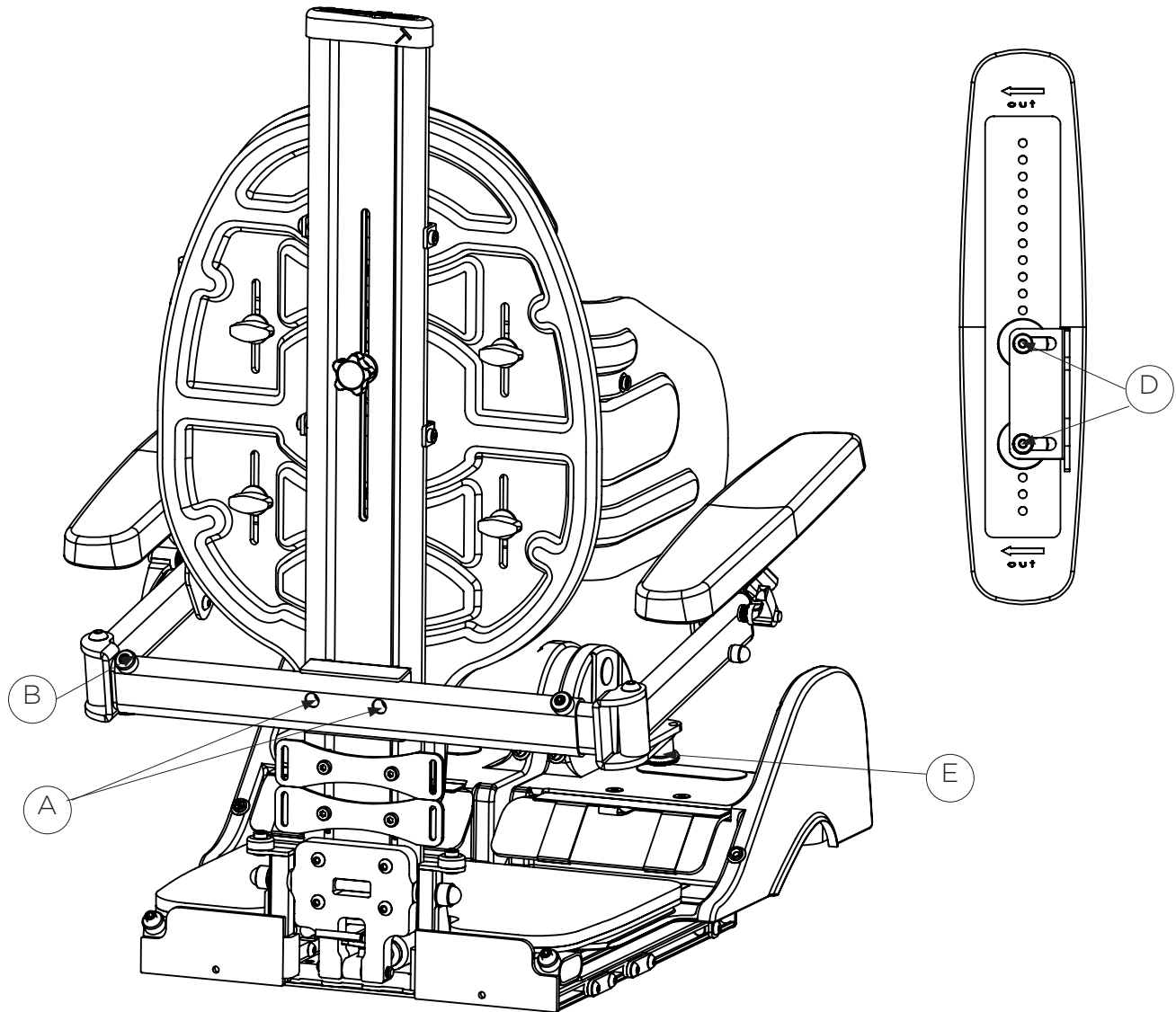

Trehullsposisjon
for å vinkle armstøtten

Overarmsstøtte

Montering av overarmsstøtte

Monter overarmsstøtten ved hjelp av håndskruer (A), skive (B), avstandsstykke (D) og skruer (E). Merk at skruen i bryststøtten må erstattes med den medfølgende lengre skruen. For en mer detaljert beskrivelse av hvordan du monterer (se avsnittet Bryststøtte). Sett skruen (E) gjennom bryststøtten og ryggplaten. På andre siden setter du på avstandsstykke ((D), overarmstøttebeslag (C), skive (B) og til slutt håndskruer (A).

Høydejustering av overarmsstøtte


For å justere høyden på overarmstøtten, løsne håndskruer (A) og juster deretter til ønsket høyde. Stram håndskruer (A) når du har oppnådd ønsket posisjon.

Breddejustering av overarmsstøtte

For å justere bredden på overarmstøtten, løsne skruene (E) og juster deretter ønsket bredde. Stram skruene (E) når du har oppnådd ønsket posisjon.

Polstring

Når polstringen må vaskes, kan du enkelt fjerne den fra overarmstøtteplaten ved å strekke strikken på baksiden av polstringen. For å sette polstringen på igjen, skyv polstringen over overarmstøtteplaten og pass på at den er sentrert på overarmstøtteplaten.

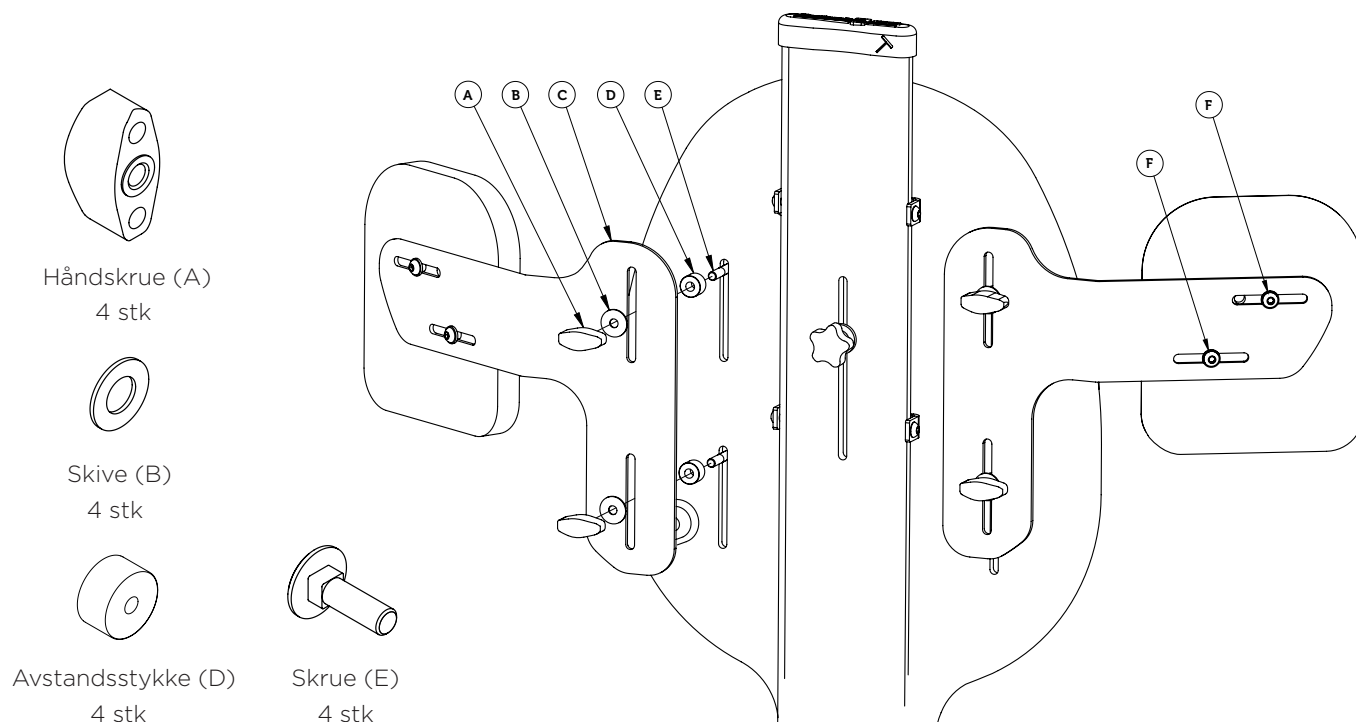


Skruen i bryststøtten skal skiftes ut med den medfølgende lengre skruen ved montering av overarmstøtten. Ved justering av overarmstøtten frigjøres også bryststøtten for justering.

Håndbøyle

Montering av håndbøyle

Bøylene skyves inn i røret under armstøtteplatene og låses med gantergrep (A) på begge sider. Bøylene kan skyves ut på brukers venstre side og roteres bort mens høyre side fortsatt er i festerøret.

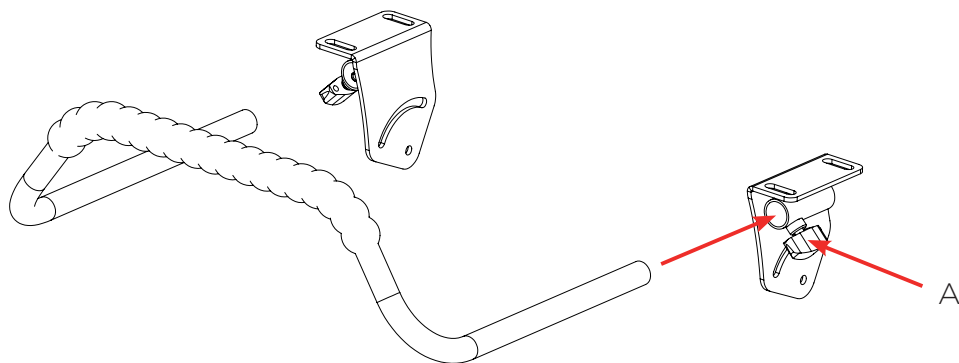

Bord, fast

Montering av bord

Plasser bordet på armstøtteplatene og juster bredden og dybden på armstøtten slik at de havner rett under bordet. Vri bordets låsearm under armstøtteplaten.


Bytte monteringshull

Det er 3 monteringsbredder å velge mellom. For å endre bredden brukes et hvilket som helst monteringshull under armstøttepolstringen i bakkant av bordet. I grunnutførelsen er låsearmen festet til midthullet.

For å skifte monteringshull må du først løfte polstringen i bakkant. Merkingene på ytre bakkant av bordet viser kun størrelsen på bordet.




Vær forsiktig så du ikke løftet bordet i forkant.

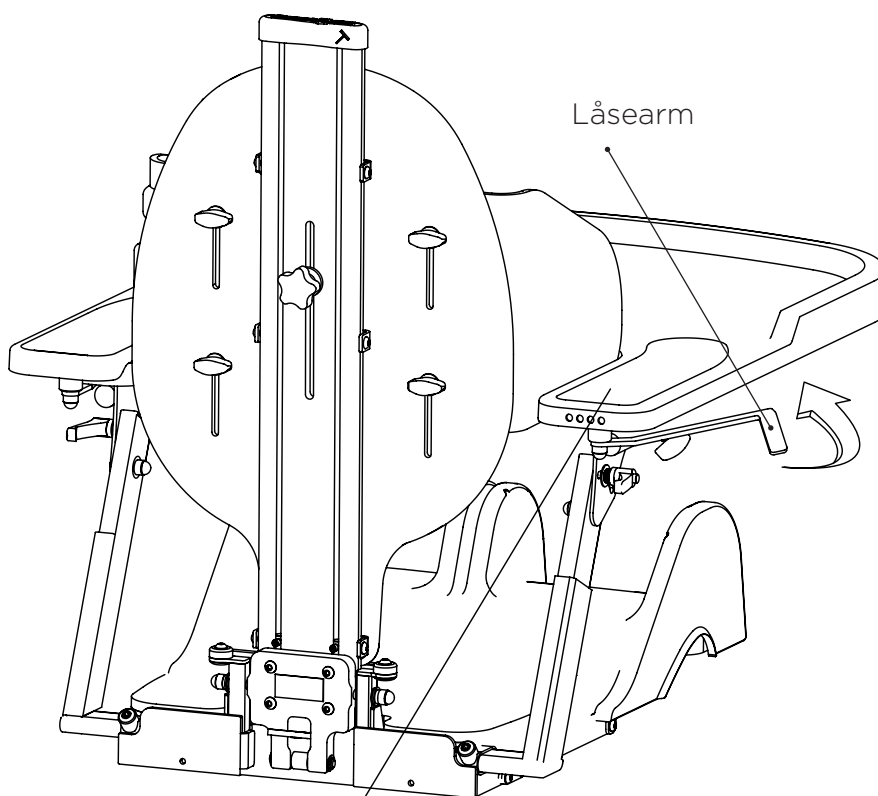

Monteringsbredder


Velg mellom tre forskjellige monteringshull

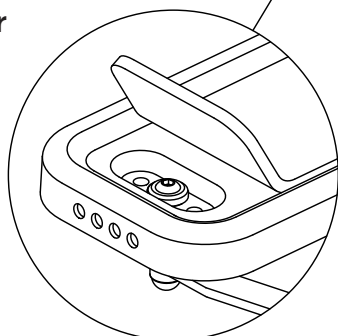

Bord, utsvingbart

Montering av bord, utsvingbart




For å montere det utsvingbare bordet, trer du bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er plassert under armstøtteplaten. Skyv bordet i ønsket posisjon og la det hvile på armstøtteplatene. Stram håndskrue (C) for å låse bordet.

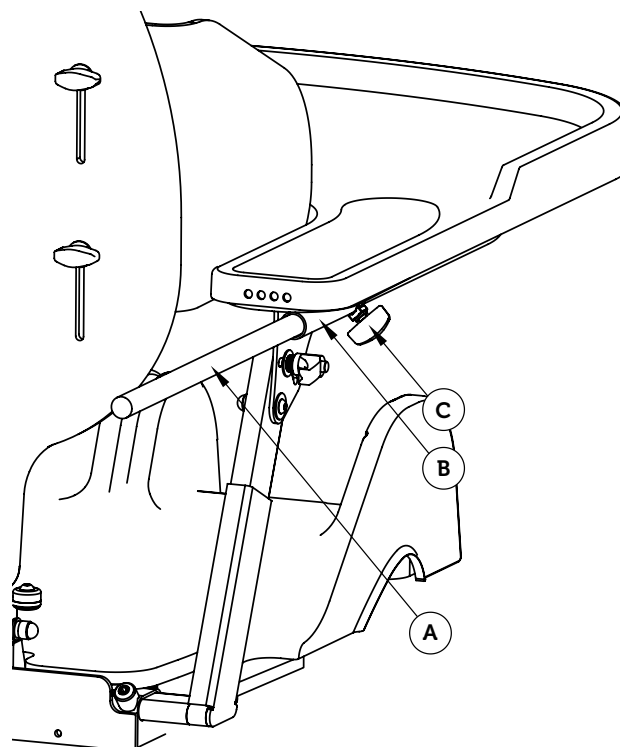

Å bruke den utsvingbare funksjonen

For å trekke bordet til siden, løsne først håndskrue (C) litt. Løft deretter bordet litt og trekk det fremover. Hev bordet ytterligere og trekk det til siden. Når bordet er i laveste posisjon, skyver du det tilbake igjen og stram håndskruen (C).

- 1) Trekk bordet fremover
- 2) Løft og trekk til siden
- 3) Fold helt ned slik at bordet henger og skyv deretter bordet tilbake mot den opprinnelige posisjonen

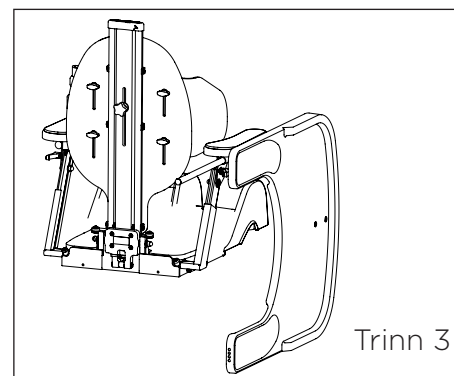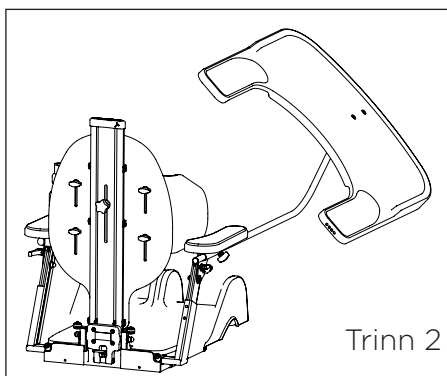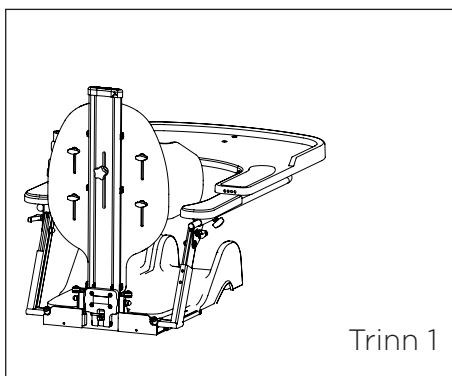

Ikke glem å stramme håndskrue (C) etter bordet er trukket bort. Dersom låsearmen brukes, drei dem under armstøtteplaten.



Pass på å trekke bordet langt nok fremover når du trekker bordet til siden slik at brukeren ikke blir skadet.

Bord, forsterket monteringsbrakett

Montering av forsterket bord

For å montere det forsterkede bordet, tre inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er plassert under armstøtteplaten.

Skyv deretter bordet i ønsket posisjon og la det hvile på armstøtteplatene.

Stram håndskrue (C) for å låse bordet.

Vri deretter inn låsearmen til den havner innenfor kanten av armstøtteplaten.

Breddejustering av forsterket bord

I stedet for å justere bredden på armstøtten kan du velge å justere bredden på bordets festebeslag slik at det passer mot festerørene i armstøttebeslaget.



For å justere bredden på bordet, løsne skruene (D) litt og juster etter ønsket posisjon. Stram deretter skruene (D).



Dersom breddejusteringen i bordets festebrakett ikke er tilstrekkelig, kan det være nødvendig å gjøre noe justering av armstøttens bredde.

Forsterket bord


nedenfra

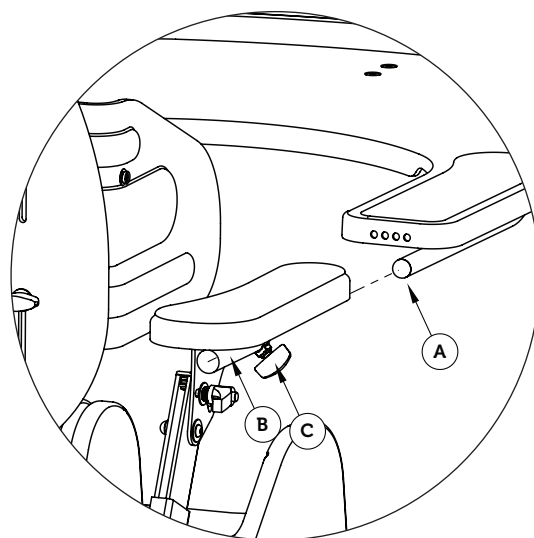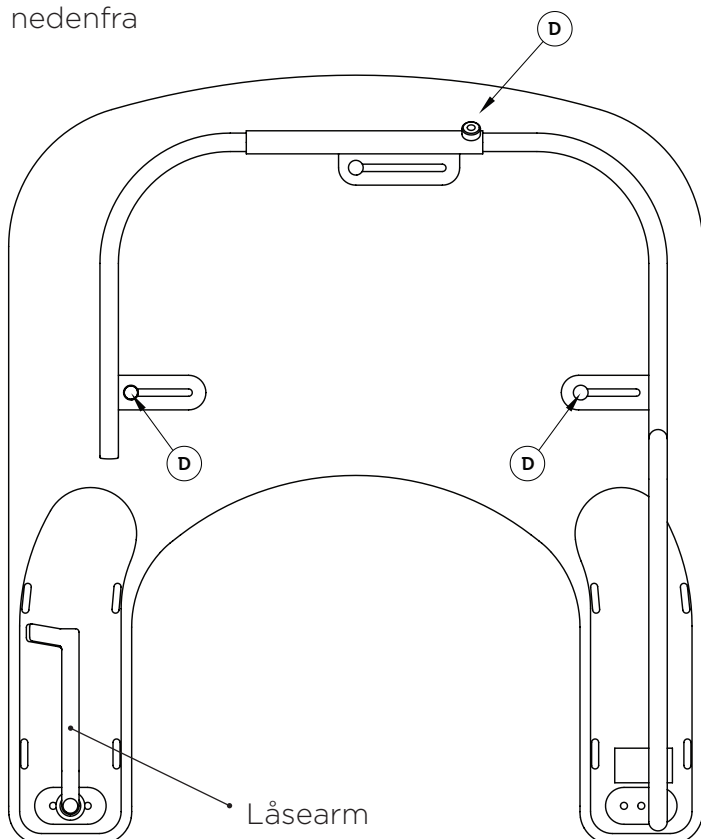

Støttebord

Montering av bordet

Plasser bordet på armstøtteplatene (B) og juster bredden og dybden på armstøttene slik at de havner rett under støttebordet. Vri deretter bordets låsearm (A) under armstøtteplaten.

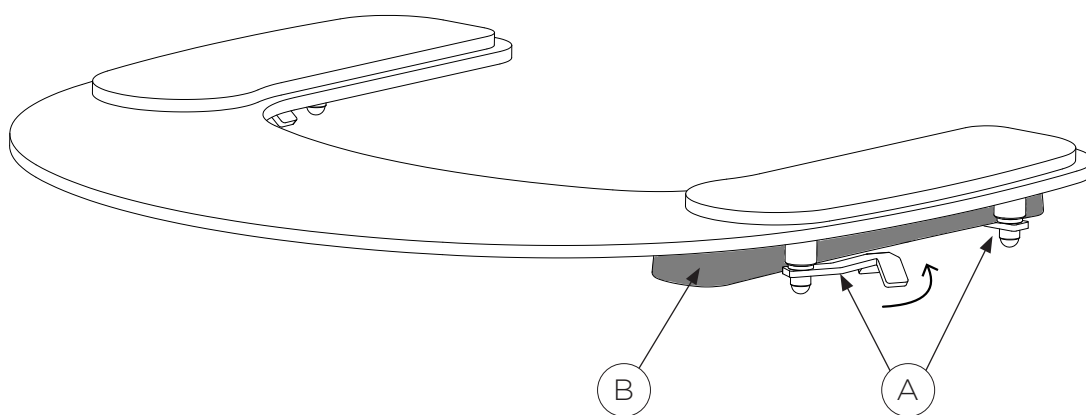

Fotstøtte

Montering av fotstøtte

Uavhengig av type fotstøtte skjer monteringen på samme måte. Start med å ta av endestykket (A) fra bendelerprofilen (B) og sett deretter inn tønnemutrene (C) slik at de ligger midt i de eksisterende hullene i bendelerprofilen (B). Fest deretter fotstøtten ved å skru den med skruene (D) inn i tønnemutrene (C) gjennom hullene på bendelerprofilen (B).



Du trenger ikke å fjerne bendeleren fra profilen for å montere fotstøtten.

Sikkerhetsstopp

En sikkerhetsstopp (G) i form av en tønnemutter er montert i bunnen av fotstøtteprofilen innenfor endestykket. Sikkerhetsstoppen (G) kan også brukes til å gå tilbake til en forhåndsinnstilt høydeposisjon.



Monter en ekstra sikkerhetsstopp over fotstøtten i sporet på fotstøtteprofilen for å enkelt finne tilbake til en alternativ høydeposisjon (for eksempel med eller uten sko).

Justering av vinkel ved kneleddet

Når fotstøtten er montert i bendelerprofilen er det mulig å vinkeljustere fotstøtten ved kneleddet. Løsne gantergrepet (E) litt og juster til ønsket vinkel. Stram deretter gantergrepet.

Justering av vinkel ved fotleddet

Når fotstøtten er montert i bendelerprofilen er det mulig å vinkeljustere fotstøtten i ankelleddet. Løsne skruen (F) litt og juster til ønsket vinkel. Stram deretter skruen.

Justering av fotplatens høyde


For høydejustering, slipp gantergepet (H) og juster fotplaten til ønsket høyde.

Alternativ montering av fotstøtte

Hvis du ønsker å komme nærmere kneleddet, fins det en alternativ monteringsmetode hvor du monterer fotstøttebraketten på motsatt side av bendelerprofilen (B).



For justering ved benlengdeforskjell eller abduksjon benyttes delt fotstøtte. Se kapittel Sittedel.

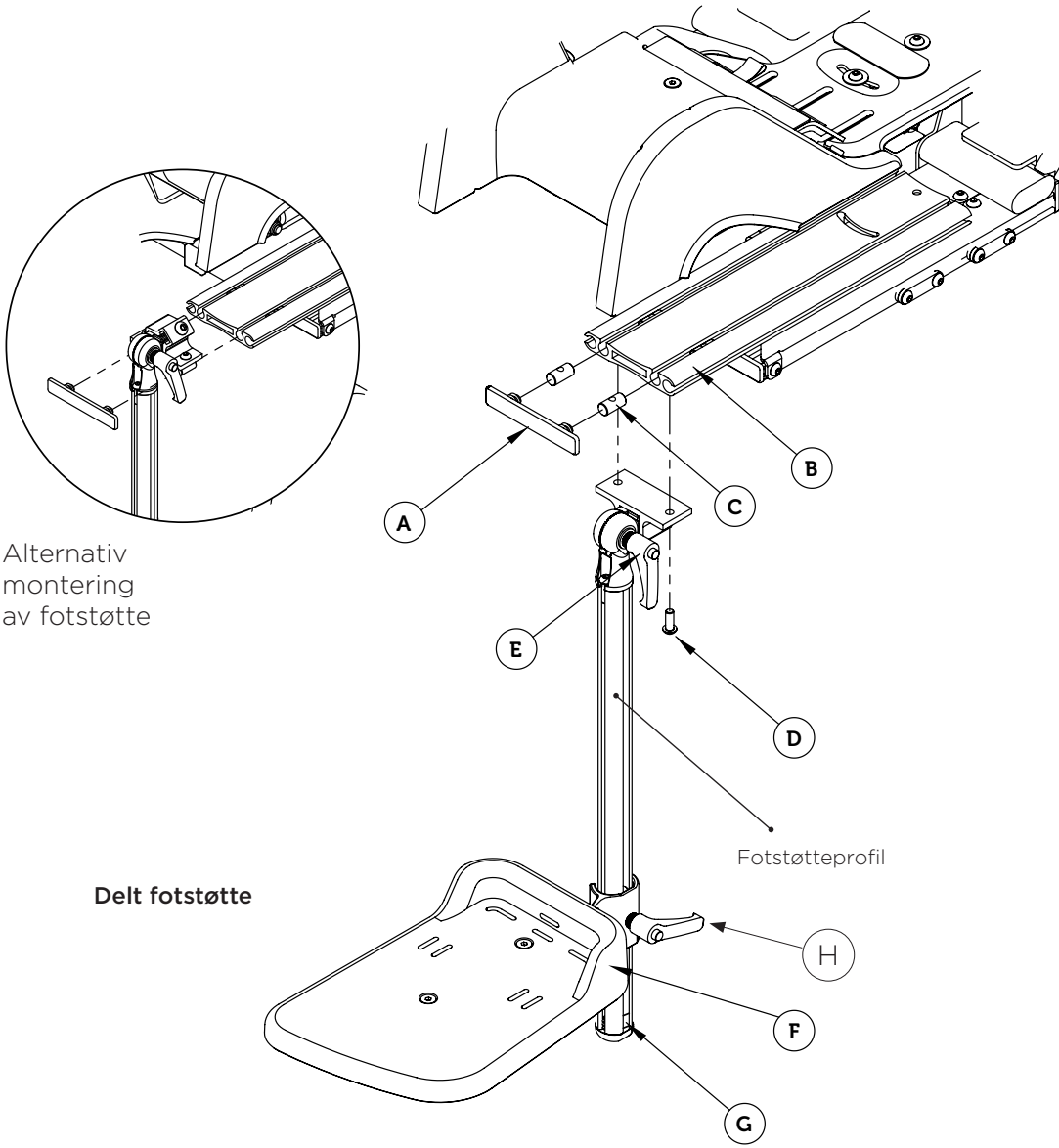


Alternativ
montering
av fotstøtte

Delt fotstøtte

Fotstøtteprofil

Hel fotstøtte

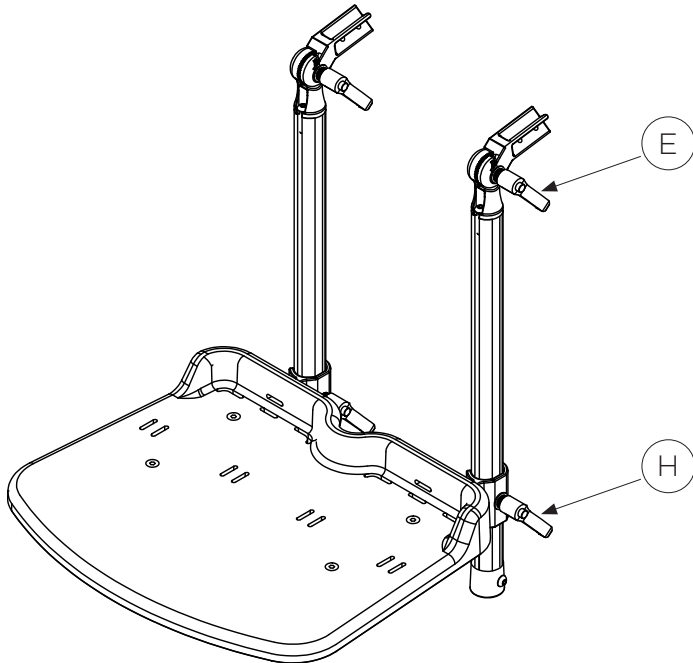

Fotstøttebrakett

Fast fotstøttebrakett (1)

For å justere høyden på fotstøtten, løsne gantergrepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Stram deretter gantergrepet.

For å justere vinkelen ved ankelen, løsne skrue (E) og juster til ønsket vinkel. Stram deretter skruen.

Fjærende fotstøtteadapter (2)

For å justere høyden på fotstøtten, løsne skrue (D) og eventuelt skrue (E) og juster til ønsket høyde. Stram skrue (D). Velg lengden på fjæringen ved å justere skrue (E) til ønsket posisjon og stram den.

For å justere vinkelen ved ankelen, løsne skrue (E) og juster til ønsket vinkel. Stram deretter skruen.



Fjærens motstand kan justeres med en skrutrekker ved å skru på skruen i fjærpakken (F).


Oppfellbar fotstøttebrakett (3)

For å justere høyden på fotstøtten, løsne gantergrepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Stram deretter gantergrepet. For å bruke den oppfellbare funksjonen løfter du fotstøtteplaten i framkant.

Kuleleddadapter (4)

For å justere høyden på fotstøtten, løsne gantergrepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Stram deretter gantergrepet.

For å bruke kuleleddfunksjonen, løsner du skruene (B) og (C) og justerer til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (B) og lås posisjonen med skrue (C).

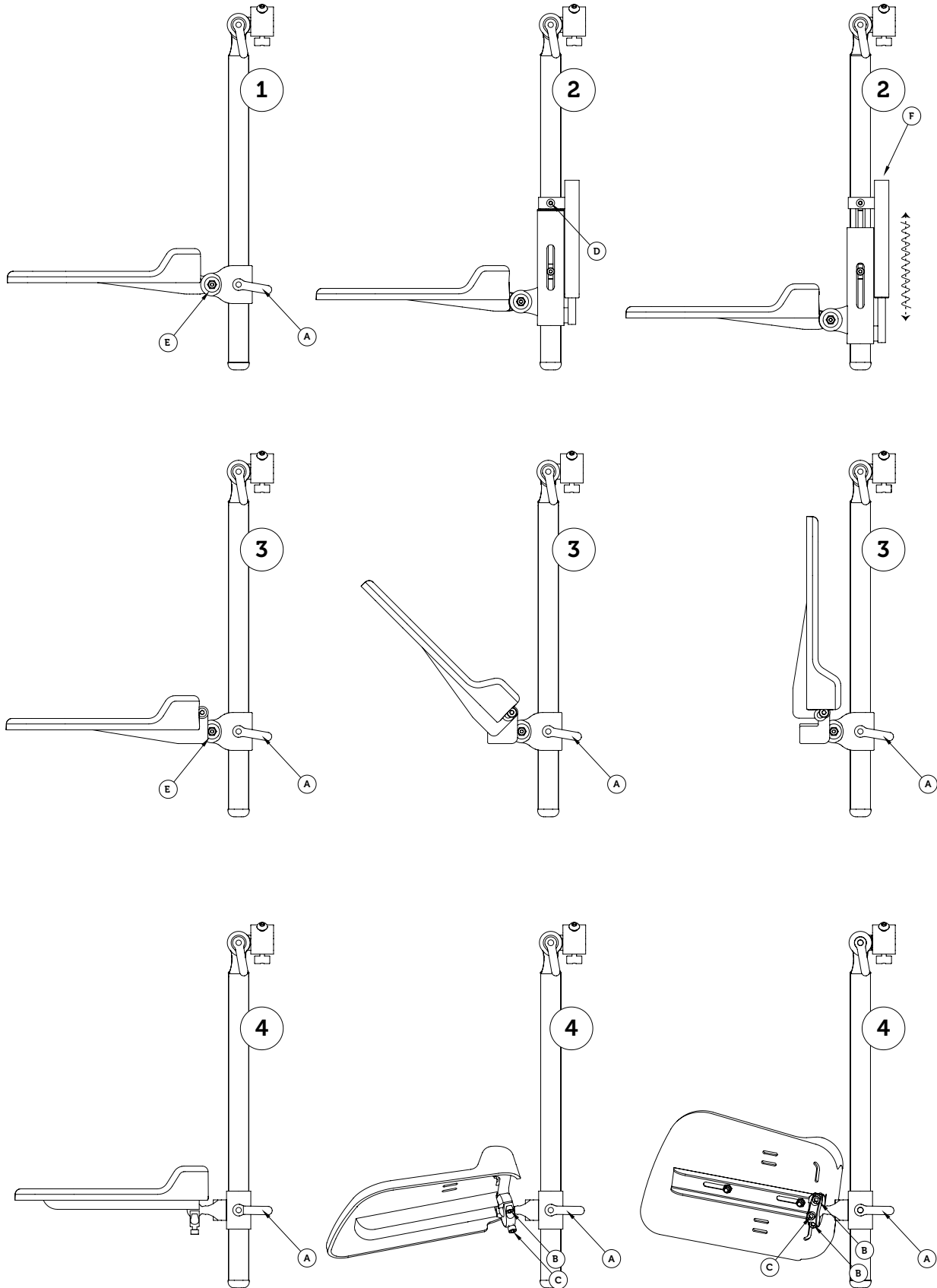


Fotstøtte dobbelstag

Montering av fotbrett ved etterbestilling

Bytt ut den nåværende fotplaten med den som følger med. Siden fotbrettet er utformet på en slik måte at den passer til både enkelstag og dobbelstag, må fotplaten bores avhengig av hvilken type fotplate du har.

For å montere fotbrettet, start med å skyve inn tønne-mutteren (A) på fotbrettet (B) inn i fotstøttestaget (C). Juster deretter fotstøtten (D) til ønsket høyde og stram gantergrepet (E). Still inn ønsket høyde og bredde på fotbrettet ved hjelp av skruene (F) og (G). Plaststaget (H) på fotbrettet skal føres gjennom sporet (I) på fotstøtteleplaten. Avslutt med å montere den medfølgende polstringen og sjekk at alle skruer er skikkelig strammet.



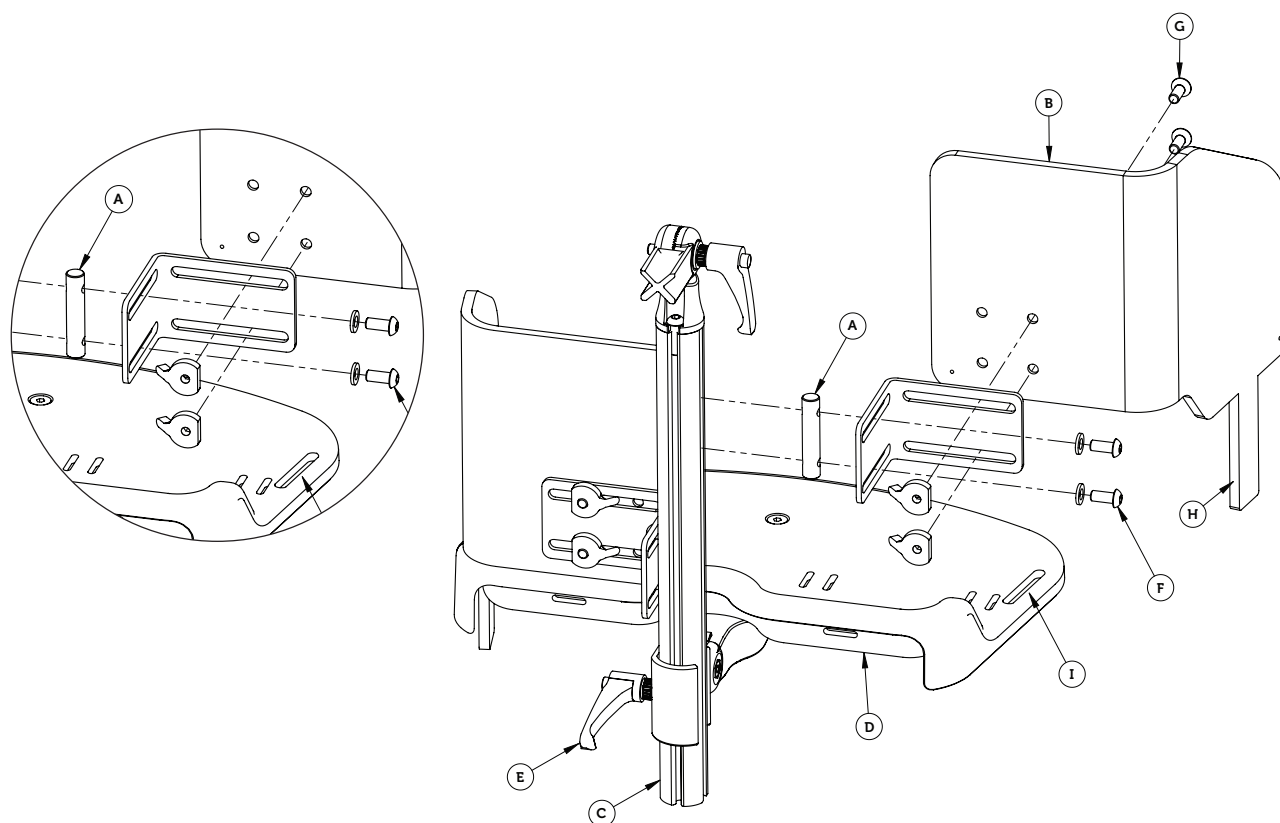


Etter justering til ønsket høyde kan plaststaget (H) kuttes eller varmes under fotstøtteleplaten etter eget ønske. Merking for borehull er markert under fotplaten.

Fra enkelstag til dobbelstag og omvendt

Som standard kommer fotbrett størrelse 2, 3 og 4 ferdigmontert for dobbelstag og størrelse 1 er ferdigmontert for enkelstag.

For å skifte mellom de ulike variantene, dreier vinkelplaten (A) 180 grader og bytter deretter side på tønne-mutteren (B).

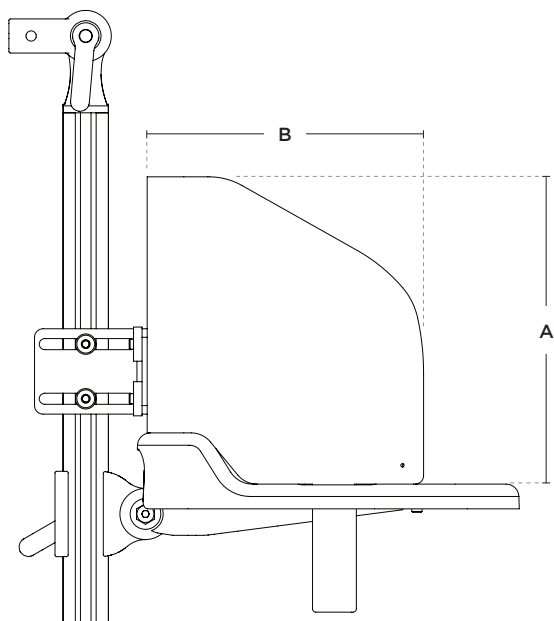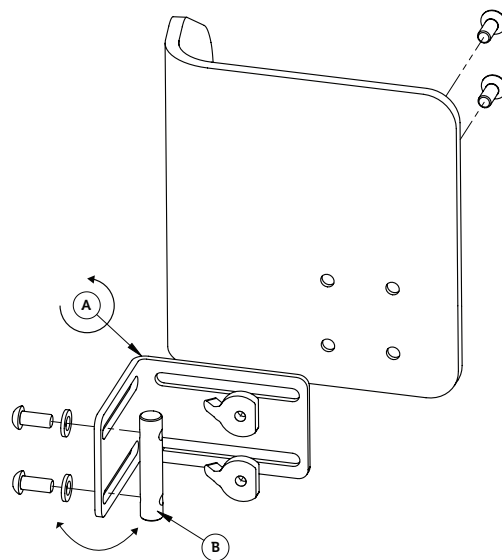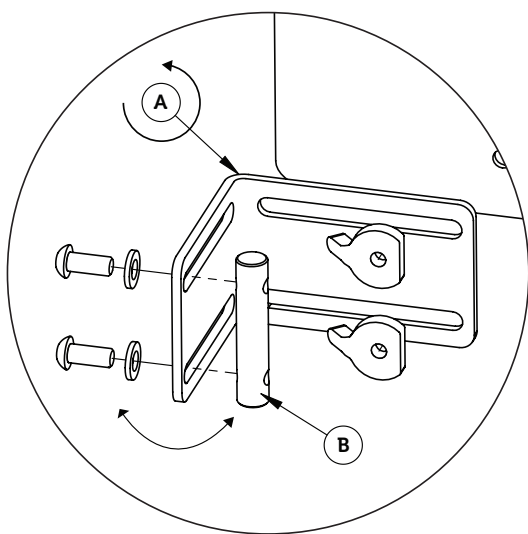

Teknisk data

For hel / delt fotplate	Størrelse	Høyde (A)	Dybde (B)
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm

Leggstøtte

Montering av leggstøtte

Før montering av leggstøtter kan utføres, må du først fjerne evt. fotstøtte. Start med å ta av endedekselet (G) og løsne deretter gantergrepet (F) som holder fotstøtten på plass på fotstøttestaget. Trekk deretter fotstøtteplaten og dens beslag nedover.

Monter leggstøtten ved å skyve tønnemutteren (C) inn i fotstøttestaget, juster til ønsket høyde og stram skruene (E). Monter deretter fotstøtten og endestykket (G) igjen.



For ettermontering av fotstøtter, se avsnitt Fotstøtte.

Høyde- og dybdejustering av leggstøtte



For å justere høyden og dybden på leggstøtten, løsne skruene (E) litt og juster deretter til ønsket høyde/dybde. Stram deretter skruene (E).

Breddejustering av leggstøtte

For å justere bredden på leggstøtten, løsne skruene (A) litt og juster deretter til ønsket bredde. Stram deretter skruene (A).




Ikke glem å erstatte fotstøtten og endestykket etter montering av leggstøtten.

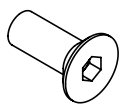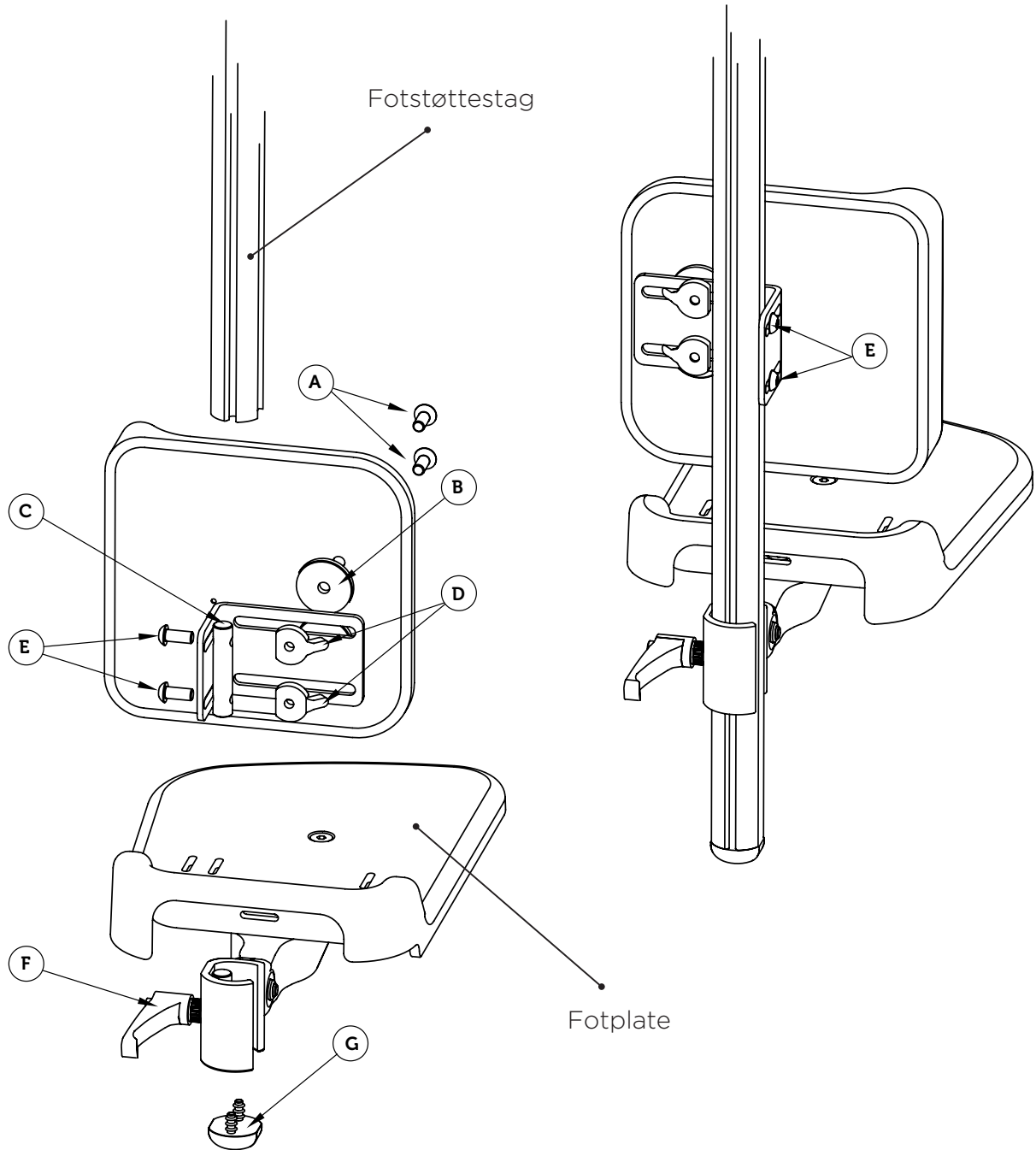


M6 Innfelt (A)

4 stk

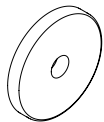


Avstandsstykke (B)

4 stk

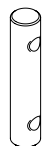


Tønnemutter (C)

2 stk

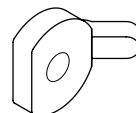

Spornmutter (D)

4 stk

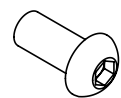

M6 Skruer (E)


4 stk

Kjørebøyle

Montering av kjørebøyle

Før montering av kjørebøylen kan utføres, må du først fjerne justeringsnøkkelen og eventuelle andre deler som kan være i veien. Disse delene kan for eksempel være hodestøtte og øvre monteringsbraketter.

Skyv kjørebøylens tønnemutter inn i sporet til ryggprofilen. Når du har nådd ønsket posisjon, stram skruene (A). Monter eventuelt delene du fjernet igjen for å kunne montere kjørebøylen.

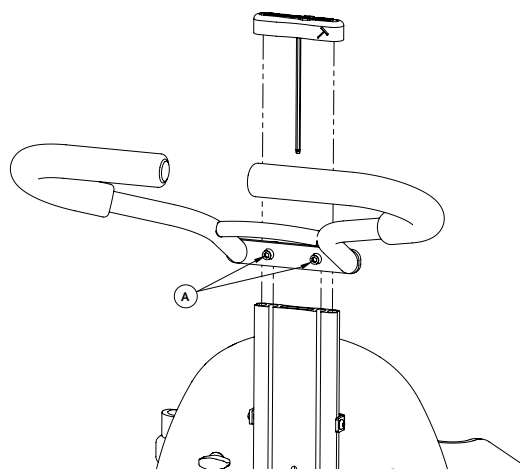

Høydejustering av kjørebøyle


For å justere høyden på kjørebøylen, løsne skruene (A) litt og flytt deretter kjørebøylen til ønsket høyde. Stram skruene (A) når ønsket høyde er nådd.



Du trenger aldri å løsne skruene helt for å justere høyden på kjørebøylen, det er nok å løsne dem litt.

Korsryggstøtte/korsryggstøtte med pumpe

- A) Ta bort ryggpolsteret.
- B) Fest korsryggstøtten til ryggpolsteret (innenfor det merkede området) med borrelåsen.
- C) Sett tilbake ryggpolsteret.

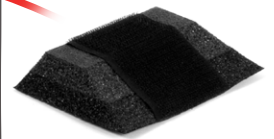

Korsryggstøttekile

Varmepolster

Varmepolster

Varmepakken holder kroppstemperaturen automatisk og hindrer nedkjøling i kaldt vær. Når kroppstemperaturen er nådd, slår varmekpakken seg av for å spare energi. Hvis temperaturen synker, aktiveres den igjen og varmes opp til kroppstemperatur.

Kontaktene som er montert er slik at det ikke skal være mulig å gjøre feil kobling. Kontakter, batterier eller ladere må ikke under noen omstendigheter utsettes for vann eller fuktighet.

Montering av varmepolster

Varmepolsteret monteres under sete- og ryggdelpolsteret med borrelås.

Varmepute

De monterte varmeputene har innebygd temperaturreglering med et temperaturområde fra +27° C til +32° C.

Isoleringen tåler både lave og høye temperaturer og påvirkes ikke av sollys, fuktighet eller kjemikalier. Materialet i puten er flammehemmende (FMVSS 302). Varmeputen er laget av ventilert materiale for å unngå kondens.

Batteri

Batteriet er oppladbart (Ni-MH) og kan kun lades med den medfølgende laderen. Når batteriet er utladet må det resirkuleres på din lokale gjenvinningsstasjon.



Batteriet må resirkuleres på din lokale gjenvinningsstasjon når det er utladet og ikke lenger kan brukes.

Lading av batteri

Følg trinnene nedenfor for å lade batteriet riktig:

1. Koble laderen til en 230V, 50Hz veggkontakt.
2. Koble ladekontakten til kontrolldekselet.
3. Når batteriet er tilkoblet, vil laderen sakte blinke gult for å starte med en langsom lading. Etter en stund går laderen over til hurtiglading, som indikeres med grønn hurtigblinking.
4. La batteriet være tilkoblet til lyset lyser konstant grønt, noe som indikerer at ladingen er fullført og batteriet går inn i vedlikeholdslading.
5. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten.
6. Koble ladekontakten fra kontrolldekselet.

Informasjon og veiledning vedrørende varmepolster, se separat bruksanvisning.

Batteriet blinker gult

Hvis batteriet er ødelagt, blinker lyset på laderen raskt med gult lys.

Oppsummering og etterkontroll

Etter montering og/eller justering er gjennomført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og at produktet fungerer som tiltenkt.

Kontroller innstillingene til produktet og dets tilbehør slik at brukeren har riktig sittestilling.

Etter all montering-, justering- eller servicearbeid må alle gantergrep, festeskruer og muttere kontrolleres og etterstrammes.

Kontroller at hjelpemiddelet er riktig balansert for å sikre at eventuell velterisiko er utelukket.

Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

Transport i kjøretøy

Ved transport i bil med Sharky Pro montert på understell, skal instruksjoner fra produsenten av understellet følges.

Sikkerhetsstropper

En sikkerhetsstropp leveres med med setet med den hensikt å strammes fra seteryggen og rundt understellets kjørebøyle. Pass på at denne stroppen alltid er stabil og stram under transport.

Krasjtestet og godkjent

Produktet er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 16840-4. Denne standarden gjør at sittesystemet kan brukes på understell som er godkjent i henhold til ISO 7176-19 samtidig som krasjgodkjenningen opprettholdes.



Krasjgodkjenning gjelder brukervekt opptil 75 kg.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

Dette produktet er et medisinteknisk utstyr beregnet for flergangsbruk. For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert og nå estimert levetid, er det viktig med tilsyn, vedlikehold og rengjøring. Ved utskifting av deler i forbindelse med vedlikehold og service skal det alltid benyttes originale deler fra Anatomic Sitt.

Definisjoner:

Generelt skilles det mellom utbedrende vedlikehold, service og forebyggende vedlikehold.

- **Utbedrende vedlikehold** refererer til tiltak for å reparere et ødelagt produkt, akutt vedlikehold, vanskelig å planlegge i tide og ofte avhengig av produktets bruk.
- **Service** refererer til en enklere overhaling som kan forlenge levetiden til produktet. Dette inkluderer for eksempel kontroll av skruer og festemidler, bevegelige deler, generell slitasje etc., samt mindre reparasjoner.
- **Forebyggende vedlikehold** refererer til handlinger forårsaket av forutsigbare begrensninger i produktets ytelse. Denne typen vedlikehold kan ses på som handlinger av engangskaraktter som planlegges med tanke på tid, art og omfang. For dette produktet er det ikke nødvendig med forebyggende vedlikehold i løpet av produktets forventede levetid.

Kontroller før bruk

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert, er tilsyn og renhold viktig.

Inspeksjon og kontroll må utføres før hver bruk i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt håndskruer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Sjekk produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel angående bevegelighet og låsing.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Hvis det oppdages mangler: ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

Renhold

Rengjøringsbehovet varierer og må vurderes basert på bruk av produktet, men minst en gang i uken anbefales.

Rengjør plast- og metaldeler med en klut/svamp og anitbakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende eller løsningsmidler.

Polster/trekk og belter/seler kan vaskes på 60°C finvask. Følg separate vaskerådsetiketter på produktene. For mer informasjon, se gjeldende bruksanvisning for de respektive posisjoneringshjelpemidlene.

Service og utbedrende vedlikehold

Service utføres primært for å forlenge produktets levetid og for å sjekke om det er behov for utbedrende vedlikehold. Behovet for inspeksjon/service varierer og kan vurderes fra sak til sak avhengig av produktets bruk og slitasje, men det anbefales minst en gang hver 6. måned.

Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsanvisninger i bruksanvisningen. Ved utskifting av ødelagte, slitte eller sprukne deler, bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt slik at produktet beholder CE-merket. Reservedeler kan bestilles etter egen reservedelsliste for det aktuelle produktet.

Ved enhver service skal det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at produktet er trygt å bruke. Hvis det er mangler som påvirker sikkerheten og ikke kan utbedres, må produktet tas ut av drift.

For rengjøring av produktet, se avsnittet Renhold.

Kontroller følgende og korriger om nødvendig:

- Kontroller produktets samtlige funksjoner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje eller skader.
- Kontroller at alle skruer, muttere og bolter er strammet skikkelig.
- Kontroller at alle grep er intakte og fungerer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller sikkerhetsbeltet på baksiden og at det er uskadd og låser seg riktig.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel. Både vedrørende justeringsmuligheter, mobilitet og låsning.
- Kontroller at stampelet låses i valgt posisjon.
- Kontroller eventuelle slitasjer på skjøter og braketter. Pass på at de låses ordentlig.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.
- Kontroller merker, etiketter og advarselsymboler slik at de er hele og leselige.

Etterkontroll

Når service utføres, sjekk at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer etter hensikten.

Resirkulering

Resirkulering gjøres hensiktsmessig dersom hjelpemiddelet er personlig og skal gis til ny bruker eller ved langtidslagring. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsinstruksjoner i bruksanvisningen.

Ved utskiftning av deler skal det brukes originaldeler fra Anatomic Sitt.

For informasjon om produktet og dets funksjoner, se bruksanvisningen på www.anatomicsitt.com. For mer informasjon om produktets levetid, se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen.

Sjekk alltid ved resirkulering at hjelpemiddelet ikke er spesialtilpasset før det sendes til ny bruker.

Ved hver resirkulering bør det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at det er trygt å bruke. Hvis det er mangler som ikke kan rettes opp, må produktet tas ut av drift og resirkuleres.

Rengjøring

Rengjør plast- og metaldeler med en svamp/klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slিপemidler, etsende eller løsningsmiddel.

Fjern polstring, trekk og belter/seler. Polstring er en forbruksvare og bør skiftes ut om nødvendig. Trekk og belter/seler kan vaskes på 60°C finvask. Følg separate vaskerådsetiketter på produktene. For mer informasjon, se gjeldende bruksanvisning for de respektive posisjoneringshjelpemidlene.

Produktet kan med fordel rengjøres på 60°C i maks 10 minutter. Fjern polster og belter/seler ved rengjøring av sittesystemet.

Tørk

Sittesystemet kan tørkes i skap ved maksimalt 60°C i opptil 10 minutter.

Kontroller ved resirkulering

Etter rengjøring og tørking, sjekk produktet for skader/slitasje. Vær oppmerksom på at produktets levetid er begrenset (se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen) når det skal vurderes om produktet er egnet for resirkulering.

Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes ut. Bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt. Reservedeler kan bestilles i henhold til egen reservedelsliste for gjeldende produkt. For at produktet skal beholde sin CE-merking kan hjelpemiddelet kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic Sitt AB.

Kontroller at alle skruer og muttere er strammet. Sørg for at bruksanvisningen og alle originale etiketter følger den nye bestillingen.

Etiketter/klistremerker

Ved behov for nye etiketter/klistremerker, kontakt Anatomic Sitt. For plassering på hjelpemiddelet, se www.anatomicsitt.com hvor du også finner bruksanvisninger.

Kontrollpunkter

Overordnet:

- Sjekk hele produktet og dets tilbehør for å identifisere ødelagte, sprukne eller slitte deler som skal byttes ut.
- Sjekk produktets samtlige funksjoner, eller slitte deler som skal byttes ut.

Sitte-/ryggdel:

- Sjekk at alle skruer og muttere er stramme.
- Sjekk at stolens justeringsmuligheter fungerer.
- Sjekk at ryggvinkelfunksjonen fungerer og at stemplene låses i valgt posisjon.
- Sjekk trekket og bytt om nødvendig.

Fotstøtte:

- Utfør funksjonskontroll av høyde- og vinkeljustering.
- Sjekk evt. slitasje på alle ledd og sørg for at de låses ordentlig.

Hodestøtte:

- Sjekk polsteret/trekket og bytt ved behov.
- Sjekk at hodestøtteleddet låses.
- Sjekk festet på hodestøtten og at den låses.

Armstøtte:

- Kontroller armstøttens justeringer for høyde, dybde og bredde.
- Kontroller armstøttefestene at de låser seg slik de skal.

Festesystem::

- Kontroller funksjonen slik at den låser seg.

Sikkerhetsstropp:

- Sjekk sikkerhetsstroppen på baksiden, at den ikke er skadet og at den låser seg.

Andre evt. tilbehør:

- Kontroller alle deler etter slitasje og bytt ved behov.
- Kontroller evt. låsninger og justeringsmuligheter.

Etterkontroll

Når resirkulering utføres, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som ment. Sjekk også at merking, etiketter og advarselssymbolene er komplette og lesbare.

Avfallshåndtering

Gjenvinning

En brukt del eller produkt må demonteres. Delene skal separeres etter materialtype og etterlates på gjenvinningsstasjon eller tilsvarende. Batteri- og gassfjærer sorteres som farlig avfall.

Garanti og retur

Garanti og reklamasjon

Garanti gjelder generelt i ett (1) år mot fabrikkfeil fra leveringsdato eller etter avtale. Det gis ikke garanti for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. Defekte varer må returneres for garantibehandling. Legg alltid ved følgeseddel.

For best mulig vurdering av reklamasjonen, må produktet være tørt og rengjort når det sendes tilbake.

Beskriv feilen og årsaken så grundig som mulig. Se garantireparasjon eller mulig erstatningsgaranti. Legg ved en kopi av fakturaen og oppgi at produktet skal returneres til deg etter reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamasjonsskjema kan lastes ned fra vår nettside.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Retur

Feilbestilte eller feilleverte varer skal returneres innen 20 dager fra leveringsdato. Legg alltid ved kopi av både følgeseddel og faktura. Skriv inn årsaken til at du returnerer varene dine. Returskjema er tilgjengelig på www.anatomicsitt.com.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Vær oppmerksom på at tilpassede produkter ikke kan returneres!

Revisjon

Følgende endringer er gjort i denne versjonen av bruksanvisningen.

Symboler

Nytt klemrisikosymbol s. 6

Produktmerking

Nytt etikettdesign s. 7

Monterings- og justeringsinstruksjoner

Benlengdeforskjell/sittedybde s. 22-23

Diverse tekstformuleringer endret

Revisjonsliste

ver. 2.0 - 2021-03-09

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-10-18

ver. 2.3 - 2021-12-21

ver. 2.3 - 2023-02-20

ver. 2.4 - 2023-09-13

SE

Anatomic Sitt AB (produsent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besøksadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

