



Zitzi  
Starfish Pro



# Bruksanvisning

Brukerhåndbok, monterings-/justeringsinstruksjoner,  
service og vedlikehold samt resirkulering





Denne bruksanvisningen refererer til Zitzi Starfish Pro med tilbehør. For fullstendig oversikt over tiltenkt tilbehør se produktets bestillingsunderlag

## Innholdsfortegnelse

<b>Produsent .....</b>	<b>4</b>	Rygg .....	19
<b>Spesialtilpasning .....</b>	<b>4</b>	Hoftevinkel.....	20
<b>Introduksjon .....</b>	<b>5</b>	Tilte sitteenhet.....	21
Innledning .....	5	Hoftestøtte .....	22
Korrespondanse - merking.....	5	Armstøtte rygg .....	23
CE-merking - klassifisering.....	5	Armstøtte understell .....	24
Samsvarserklæring.....	5	Bordfeste.....	25
<b>Tiltenkt bruk.....</b>	<b>5</b>	Støttebord .....	25
<b>Symboler.....</b>	<b>6</b>	Hodestøtte.....	26
<b>Produktmerking .....</b>	<b>7</b>	Kjørebøyle.....	26
<b>Sikkerhetsinstruksjoner .....</b>	<b>8</b>	Brystseler .....	27
Opplæring og kvalifikasjoner .....	8	Hoftbelte .....	28
Advarsler/Forholdsregler .....	8	Fotstøtte.....	29
Sjekk før bruk.....	10	Leggstøtte .....	31
Begrensninger .....	11	Tippesikring.....	32
Gjenværende risiko.....	12	Hjul .....	33
Godkjente kombinasjoner .....	12	Potte.....	33
Avvik/hendelser .....	12	Urinskjerm.....	34
<b>Teknisk data .....</b>	<b>13</b>	<b>Oppsummering og etterkontroll .....</b>	<b>35</b>
<b>Tilpasning og spesialtilpasning .....</b>	<b>14</b>	<b>Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner</b>	<b>36</b>
<b>Monterings- &amp; justeringsinstruksjoner ..</b>	<b>15</b>	Kontroller før bruk .....	36
Understell.....	16	Service og vedlikehold .....	37
Sittedel .....	17	Resirkulering.....	38
Abduksjons-/adduksjonsstøtte .....	18	<b>Avfallshåndtering.....</b>	<b>41</b>
		<b>Garanti og retur.....</b>	<b>42</b>
		<b>Revisjon.....</b>	<b>43</b>

# Produsent

Produktet er produsert av **Anatomic Sitt i Norrköping AB**

<b>Postadresse</b>	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
<b>Besøksadresse</b>	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
<b>Telefon</b>	011-161800
<b>E-post</b>	info@anatomicsitt.com
<b>Nettside</b>	anatomicsitt.com
<b>Instruksjonsfilmer</b>	youtube.com/anatomicsitt
<b>Følg oss på</b>	facebook.com/anatomicsitt

**Eudamed-registreringsnummer/SRN:** SE-MF-000002240

---

## Spesialtilpasning



Kryss av i ruten ved eventuell spesialtilpasning av produktet.

CE-merkingen slutter å gjelde for spesialtilpassede produkter.



# Introduksjon

## **Innledning**

Gratulerer med valg av hjelpemiddel. Vi håper du vil få stor glede av å bruke dette produktet. For at du skal få mest ut av produktet på en trygg og sikker måte, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye. Dette gjelder alle personer i brukerens nærhet.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra vår hjemmeside: [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). Revisjon er på forsiden sammen med datoen.

## **Korrespondanse - merking**

På produktetiketten finnes produktets artikkelnummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numrene skal angis ved korrespondanse med Anatomic Sitt angående produktene. Du finner serienummeret på forsiden av rammen.

## **CE-merking - klassifisering**

Hjelpemiddelet med dets tilbehør er et CE-merket medisinteknisk produkt, klasse I i henhold til klassifiseringsreglene i vedlegg VIII (EU) 2017/745.

## **Samsvarserklæring**

Produktet oppfyller kravet for medisintekniske produkter i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisintekniske produkter. Se aktuell EU-samsvarserklæring om overrenstemmelse for produktvarianter og tilbehør, se [www.anatomicsitt.com/dokument](http://www.anatomicsitt.com/dokument)

# Tiltenkt bruk

Zitzi Starfish Pro er en justerbar toalett- og dusjstol med hjul, designet for å muliggjøre personlig hygiene for personer med vansker ved bruk av standard toalett eller dusj. Stolen har flere justeringsmuligheter og kan utstyres med diverse tilbehør for å oppnå en bestemt sittestilling. Zitzi Starfish Pro er et gjenbrukbart produkt.

# Symboler

	<p>Dette symbolet finnes i bruksanvisningen og gjør leseren oppmerksom på f.eks viktig sikkerhetsinformasjon m.m.</p>	<p>Angir batchnummeret til produksjonen slik at batch kan identifiseres.</p>
	<p>Dette symbolet indikerer eventuell klemfare.</p>	<p>Angir at produktet er et medisinteknisk produkt.</p>
	<p>Instruksjoner og tips som forenkler bruken av produktet.</p>	<p>Angir produsentens referansenummer/ artikkelnummer slik at utstyret kan identifiseres.</p>
<p><a href="http://www.anatomicstitt.com">www.anatomicstitt.com</a></p>	<p>Angir at bruksanvisningen alltid bør leses før bruk. Nettadresse indikerer hvor dokumentet befinner seg elektronisk.</p>	<p>Angir produsentens serienummer slik at et spesifikt medisinteknisk produkt kan identifiseres.</p>
	<p>Angir at bruksanvisningen bør leses for å få viktig sikkerhetsinformasjon om f.eks advarsler som ikke finnes på etiketten til utstyret.</p>	<p>Unik produktidentifikator som muliggjør entydig identifikasjon av spesifikke medisintekniske produkter.</p>
	<p>Angir produsenten av det medisintekniske utstyret som definert i (EU) MDR 2017/745. Kan også brukes med produksjonsdato.</p>	<p>Indikerer at produktet er CE-merket i henhold til gjeldende EU-direktiver.</p>
	<p>Indikerer datoen da det medisintekniske produktet ble produsert.</p>	<p>Dekal på kjørehåndtak. Angir regulering for ryggvinkel.</p>
	<p>Indikerer at elektroniske produkter ikke skal håndteres som vanlig avfall.</p>	<p>Dekal på kjørehåndtak. Angir regulering for tiltvinkel.</p>
	<p>Etikett på rammen. Indikerer kontroller får låsing av ryggvinkel.</p>	
	<p>Etikett på armstøtten og hoftestøtten. Angir maksimal avstand støtten kan justeres i bredden.</p>	

# Produktmerking

## Etikett på hovedprodukt

The main product label contains the following information:

- MD** Hygienestol **Starfish Pro** (Type produkt)
- Zitzi Starfish Pro Hydraulisk, sittedel delt (Produktgruppe)
- REF** 689417 **SN** 48382 2021-05-11 (Produktnavn)
- Anatomic Sitt i Norrköping AB** (UDI-transportør)
- Terminalgatan 1
- SE-603 61 Norrköping
- UDI** (01)7322476894178(21)48382
- www.anatomicsitt.com Maxlast 150kg (Maks. belastningsvekt inkl. bruker)

## Etikett på tilbehør

The accessory label contains the following information:

- MD** Tilbehør **Zitzi Clozitt/Starfish** (Type produkt)
- Fotstøtte oppfellbar str. 2 - Starfish Pro (Produktgruppe/produktgrupper)
- REF** 689497 **LOT** FM701217 2021-05-11 (Produktnavn)
- Anatomic Sitt i Norrköping AB** (UDI-transportør)
- Terminalgatan 1
- SE-603 61 Norrköping
- UDI** (01)7322476894970(10)FM701217

# Sikkerhetsinstruksjoner












## Opplæring og kvalifikasjoner

- Montering, service og resirkulering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Vedtak om tilpasning/spesialtilpasning skal gjøres av kompetent medisinsk personell og utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Innstillinger, justeringer samt utprøving av hjelpemiddelet skal alltid utføres av kvalifisert medisinsk personell (fagperson på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om bruker og hjelpemiddel skal alltid være til stede for å prøve ut produktet og foreta en risikovurdering før førstegangsbruk.

## Advarsler/Forholdsregler

-  Les alltid bruksanvisningen før bruk.
-  Innstillinger skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Det er kun tillatt å gjøre innstillinger på den måten som beskrives i denne bruksanvisningen.
-  Sjekk produktet for feil og mangler før det leveres ut til bruker.
-  Den som foreskriver hjelpemiddelet er ansvarlig for å instruere brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø hvordan produktet anvendes på en sikker måte. Funksjonskontroller alltid produktet før bruk.
-  Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om brukeren skal balansere det valgte setet for å sikre at eventuell tipperisiko utelukkes. Tipperisikring kan bestilles om nødvendig.
-  Justeringer skal kun utføres slik som beskrevet i denne bruksanvisningen.
-  Etter all monterings- justerings eller servicearbeid skal alle festeskruer og muttere kontrolleres og strammes.



-  Bremsene skal alltid være låst ved inn- og utstigning.
-  Hjulene kan i noen tilfeller kollidere med fotplaten. Hjulenes styreevne kan dermed påvirkes og innstillingene til fotplaten kan da måtte endres.
-  Bruk aldri fotplaten ved inn- og utstigning fra hjelpemiddelet.
-  Vurder klemfaren når du hever og senker setehøyden og endrer tilten. Ikke ha hendene under setet når du foretar justeringer.
-  Vær forsiktig og vær oppmerksom på den økte risikoen for å velte når understellet brukes på skrånende underlag. Produktet må kun parkeres på vannrette og jevne overflater.
-  Løft alltid i understellet. Aldri løft hjelpemiddelet med brukeren i.
-  Utfør aldri service mens produktet brukes.
-  Vær oppmerksom på at dersom brukeren tar tak i gjenstander utenfor hjelpemiddelet eller lener seg for langt ut fra hjelpemiddelet, kan det oppstå en forskyvning av tyngdepunktet som kan føre til økt risiko for å velte.
-  Overbelast aldri hjelpemiddelet, se avsnitt Begrensninger for maksimal belastning.
-  La aldri brukeren være uten tilsyn når hjelpemiddelet er i bruk.
-  Sjekk alltid brukeren for rødhet eller trykkmerker etter bruk av hjelpemiddelet.

## Kontroller før bruk

Inspeksjon og kontroll skal utføres før hver bruk i henhold til punktene nedenfor:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader.  
Sjekk spesielt skruer og muttere, samt grep.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funksjonen til eventuelle tippesikringer.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Kontroller hjulenes tilstand og at de er sikre.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel, tilt, høydejustering osv. angående mobilitet og låsing.
- Kontroller justeringen av ledningen til tilten og ryggvinkelen slik at disse fungerer som de skal.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Dersom det oppdages feil og mangler, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp.

## Begrensninger

### Maks. vekt

Den høyeste belastningsvekten er 150 kg.

### Levetid

Forventet levetid for produktet er 5 år ved normal bruk i henhold til produktets tiltenkte bruk, forutsatt at instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Den faktiske levetiden varierer imidlertid avhengig av hvor ofte og intensivt produktet brukes, men det anbefales å ikke overstige 10 år.

### Gassfjærer

Om produktet skal lagres over en lengre periode, vurder følgende:

Gassfjærer bør brukes regelmessig for å opprettholde sin funksjon. Når produktet ikke brukes må gassfjæren aktiveres minst en gang hver 6. måned. I tillegg bør de lagres på en slik måte at gassfjærstangen er rettet nedover, ellers kan gassfjærens forsegling gå i stykker og den slutter å fungere.

## Gjenværende risiko

Vær oppmerksom på at produktet og dets tilbehør er riktig innstilt slik at brukeren ikke opplever ubehag eller får skader under bruk. Hvis dette skjer, foreta justeringer eller installer passende tilbehør.

## Godkjente kombinasjoner

For å opprettholde CE-merkingen på en sikker måte må hjelpemiddelet brukes sammen med produkter, tilbehør og reservedeler levert av Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingsskjema for mulige tilbehør og reservedeler.

## Avvik/hendelser




Dersom det inntreffer en hendelse som kunne ha ført til alvorlig skade, må det rapporteres til Anatomic Sitt AB og landets kompetente myndighet. Produktet skal også sendes til Anatomic Sitt i nåværende tilstand for videre undersøkelse.

# Teknisk data

## Starfish Pro

	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Passer til brukerlengde	ca. 120-145 cm	140-175 cm	170-200 cm
<b>Understell med fast setedel</b>	<b>Setedel fast str. 1</b>	<b>Setedel fast str. 2</b>	<b>Setedel fast str. 3</b>
Setedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Setebredde (med for) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Størrelse toalettåpning (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
<b>Understell med delt setedel</b>	<b>Setedel delt str. 1</b>	<b>Setedel delt str. 2</b>	<b>Setedel delt str. 3</b>
Setedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Setebredde (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredde bendeler med for (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Størrelse toalettåpning (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
<b>Klaring toalett, Man. understell</b>	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
<b>Klaring toalett, Hydraulisk/EI</b>	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
<b>Setehøyde, Man. understell**</b>	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
<b>Setehøyde, Hydraulisk/EI**</b>	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
<b>Tilt</b>	-5° till +30°	-5° till +30°	-5° till +30°
<b>Hofte-/ryggvinkel</b>	-10° till +35°	-10° till +35°	-10° till +30°
<b>Understell, bredde (H)</b>	540 mm	540 mm	590 mm
<b>Understell, lengde (I)</b>	690 mm	690 mm	790 mm
<b>Hjul</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Klaring</b>	65 mm	65 mm	65 mm
<b>Ca. vekt inkl. hodestøtte, fotstøtte, armstøtte</b>	31 kg	33 kg	35 kg
<b>Maks. br.vekt Man. understell:</b>	150 kg	150 kg	150 kg
<b>Maks. br.vekt Hydraulisk/EI:</b>	150 kg	150 kg	150 kg

\* Maks setebredde oppnås når setedelene er montert i ytre sporet på seteplassen \*\* ekskl. foder

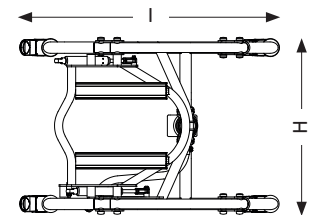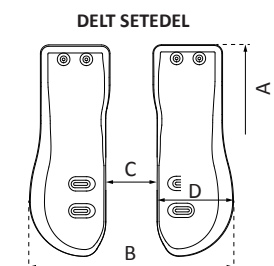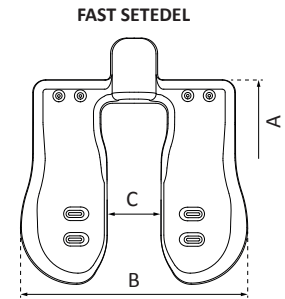

	RYGG Høyde (E)	BRYSTSTØTTE (mm)		
		Bredde (F)	Dybde (G)	Høyde (H)
Str. 1	460 mm	210-300	140	210
Str. 2	560 mm	240-340	170	230
Str. 3	660 mm	300-400	200	260

Bryststøttejustering +/- 85 mm

BORD	MÅL			
	A	B	C	D
<b>Bord std.</b>				
Str. 1	480 x 450	240 x 250		
Str. 2	540 x 515	260 x 290		
Str. 3	570 x 570	280 x 340		
Str. 4	660 x 600	320 x 385		
Str. 5	660 x 650	320 x 435		
<b>Søttebord</b>				
Str. 1	380 x 450	230 x 260		
Str. 2	430 x 510	260 x 300		
Str. 3	490 x 580	300 x 340		
Str. 4	540 x 640	330 x 380		
Str. 5	620 x 740	380 x 440		

FOTSTØTTE	mål B x D
Hel str. 1	345 x 225 mm
Hel str. 2	380 x 255 mm
Hel str. 3	380 x 310 mm
Delt str. 1	160 x 220 mm
Delt str. 2	180 x 255 mm
Delt str. 3	180 x 305 mm

Str.	1	2	3
Fotstagets lengde	30	40	40

ARMSTØTTE	
<b>Armstøtte fra rygg</b>	<b>mål mellom armstøttene</b>
Armstøtte str. 1	30 - 42 cm
Armstøtte str. 2	36 - 48 cm
Armstøtte str. 3	44 - 54 cm

HØFTESTØTTE	
<b>Bredde x Høyde</b>	
Str. 1-2	220 x 140 mm
Str. 3	260 x 165 mm

# Tilpasning og spesialtilpasning

## Anbefalinger

Hver gang produktet endres på noe vis må en vurdering gjøres på om det er en tilpasning eller spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammene for produktets CE-merking. Alt annet er spesialtilpasning. Tilpasninger kan kun gjøres av en kvalifisert fagperson og skal alltid utføres på en profesjonell måte.

## Tillatte tilpasninger innenfor rammen av CE-merking

Lengden på fotstøtteprofilen kan forkortes for å passe brukeren bedre.

Lengden på armstøtteprofilen kan forkortes for å passe brukeren bedre.

Lengden på ryggstøtteprofilen kan forkortes. Profilen må aldri være kortere enn at samtlige fester til ryggplaten kan monteres på den.

Urinskjermen kan kuttet til ønsket lengde.

## Risikoanalyse


Merk at en risikoanalyse alltid skal gjøres, både ved tilpasning og ved spesialtilpasning av et hjelpemiddel. Produktet må aldri være farlig for brukeren eller personer i dets nærhet, til bruk etter tilpasning.

## Merking

Ved merking skal det fremkomme om at det er en tilpasning til en spesifikk bruker, slik at det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

# Monterings- og justeringsinstruksjoner


Montering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddel-sentral eller tilsvarande). Instruer brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø om produktets funksjoner for at hjelpemiddelet skal kunne brukes på en sikker måte.

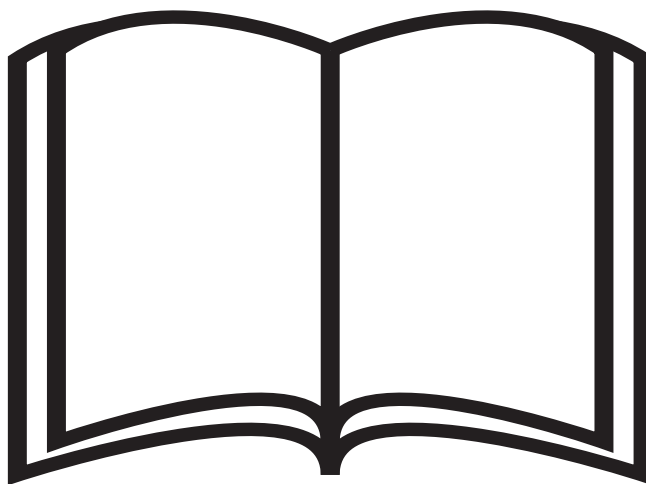

## Understell

### Manuelt understell

Seteenheten kan justeres til ønsket høyde før brukeren settes i setet. Løsne spaken (A) på begge sider, (posisjon (B) er ikke helt strammet, men hjelper til med å styre veien i sporet). Løft setet ut av sporet og sett setet inn i sporet for riktig høyde. Sørg for å skyve setet godt inn i sporene. Avslutt med å stramme spaken (A).

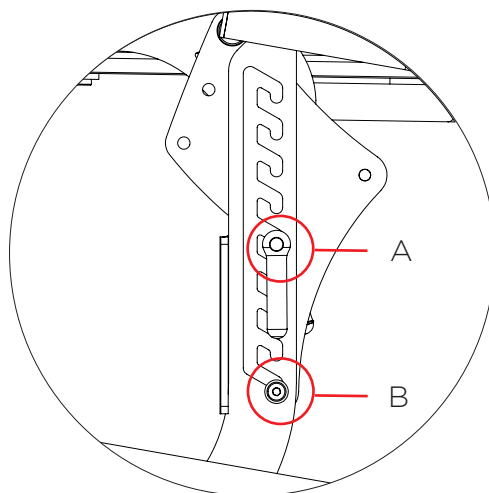


### Hev/senkbart understell - gassfjær

Seteenheten kan heves eller senkes til ønsket høyde. Dette gjøres ved å pumpe på pedalen (C). Sørg for å pumpe med jevne bevegelser slik at hevingen blir behagelig for brukeren. For å senke enheten, sett en fot under pedalen og skyv den opp.



Vær oppmerksom på mulig klemfare!

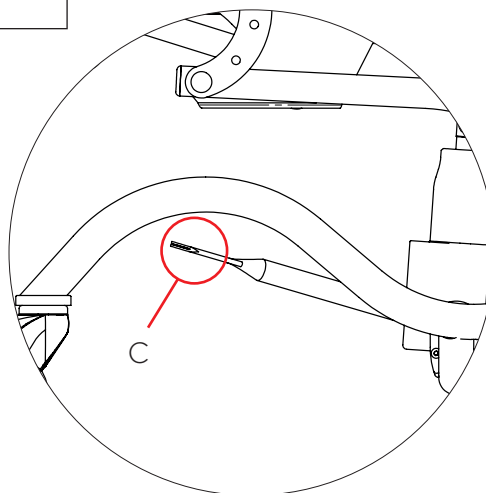



## Sittedel

### Justere sittedel


Setedybde, benlengdeforskjell og abduksjon av bena justeres enkelt. Fjern polstringen for å få tilgang til skruene.

### Justere setedybde/abduksjon:

Løsne skruene (A) slik at setedelene kan justeres for hånd. Juster setedelene. Lås skruene (A).



Vær forsiktig så du ikke skrur skruene helt ut!

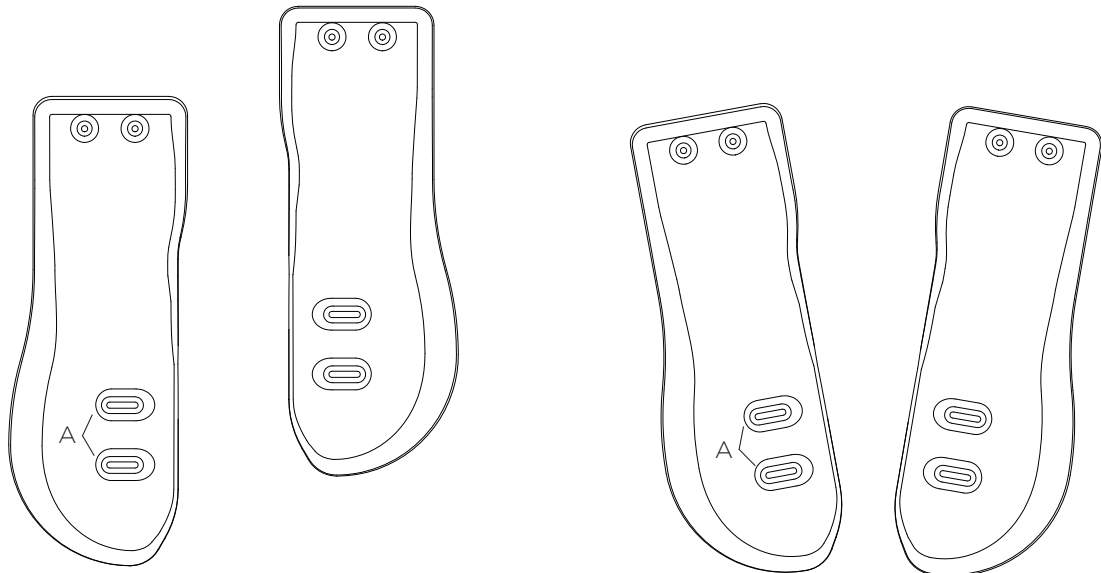


## Abduksjons-/adduksjonsstøtte

### Montering

Skru ut skruene (A) og sett inn støttene slik at du kan se hullene gjennom sporene på støttene. Skru deretter skruene gjennom sporene og inn i hullene for å feste støttene.

### Justering

Løsne skruene (A) litt slik at du kan skyve støttene sidelengs. Juster dem til ønsket posisjon og stram deretter skruene.

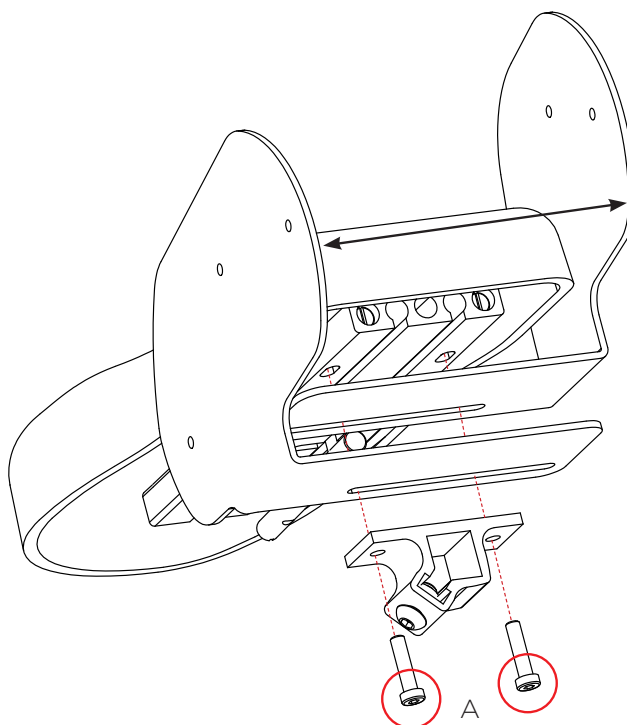


Ved demontering av abduksjons-/adduksjonsstøtten må skruene skiftes til de korte som er inkludert i fotstøttebraktetten.

## Rygg

For å justere rygg søylen (A), løsne de fire skruene (C) som fester søylen til ryggprofilen. Juster søylen til ønsket høyde og stram skruene (B).


Grovjuster høyden på brystbeslaget ved å løsne de fire skruene (C) som fester beslaget til ryggprofilen. Juster til ønsket høyde og stram skruene (C).

Bryststøttene kan nå finjusteres ved å løsne spaken (D). Juster bryststøttene til ønsket posisjon og stram spaken (D).

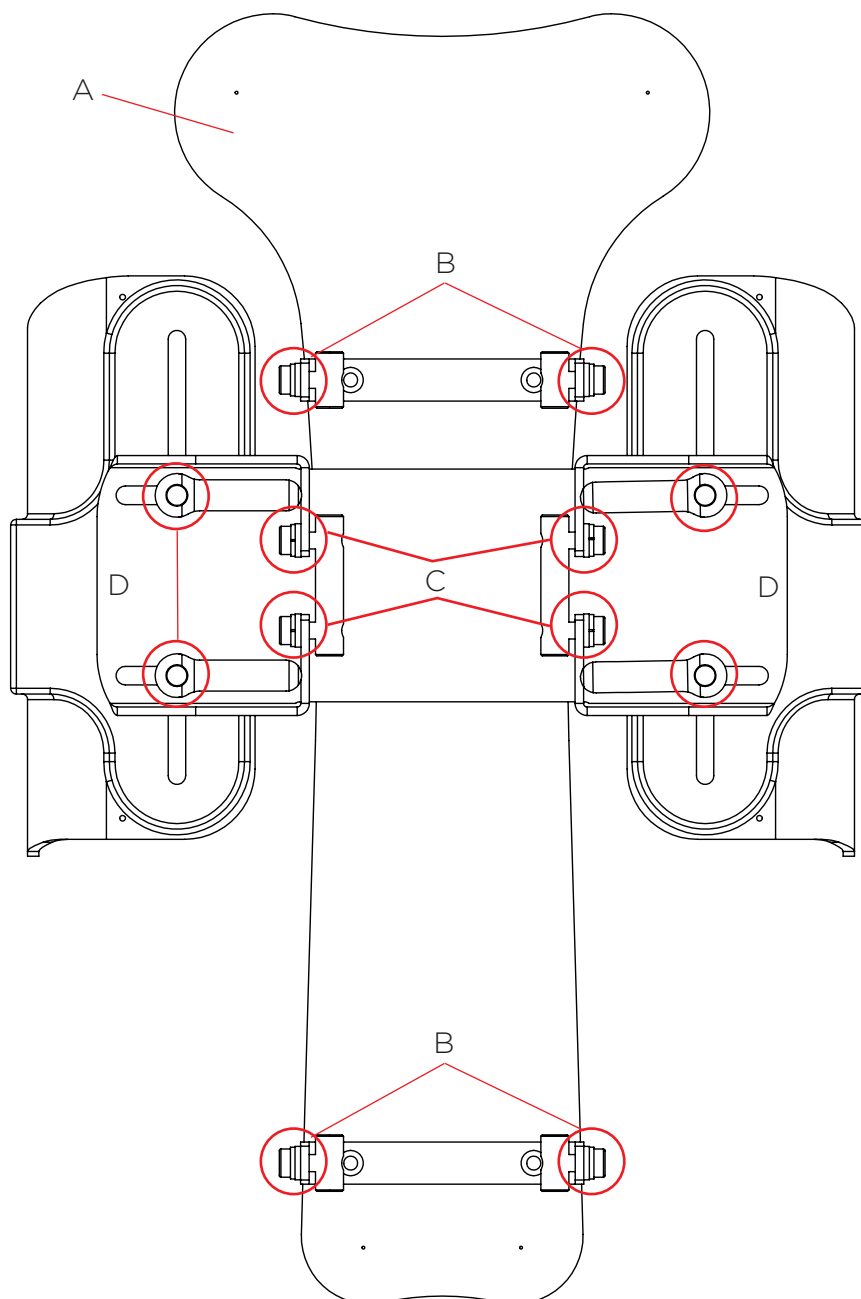

## Hoftevinkel


Ved justering av hoftevinkelen: start med å løsne på sikkerhetsgrepet (A). Sørg for å ha et fast grep om styret mens du trykker ned gassfjæren (B). Juster ryggen til ønsket vinkel og slipp utløseren (B). Avslutt med å stramme sikkerhetsgrepet (A).

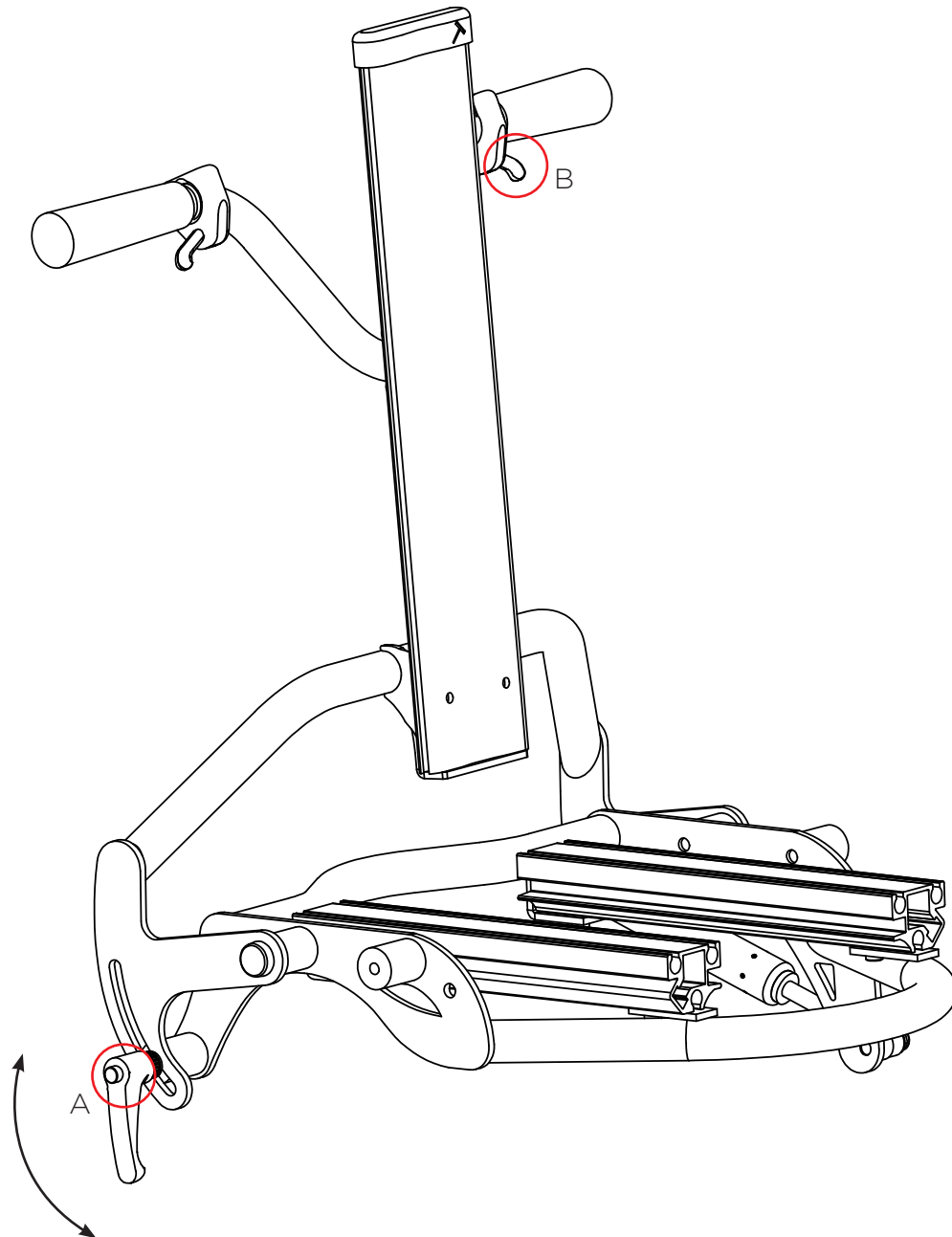

Pass på at ledninger på utløseren for gassfjæren alltid er frie etter justering og husk å stramme sikkerhetsgrepet!

## Tilte sitteenhet

Når du justerer setevinkelen, sørg for å ha et fast grep om styret mens du trykker på gassfjæren (A). Juster setet til ønsket vinkel og slipp utløseren (A). Hold øye med brukeren og sørg for at det ikke er klemfare eller risiko for å bli skadet på annen måte.

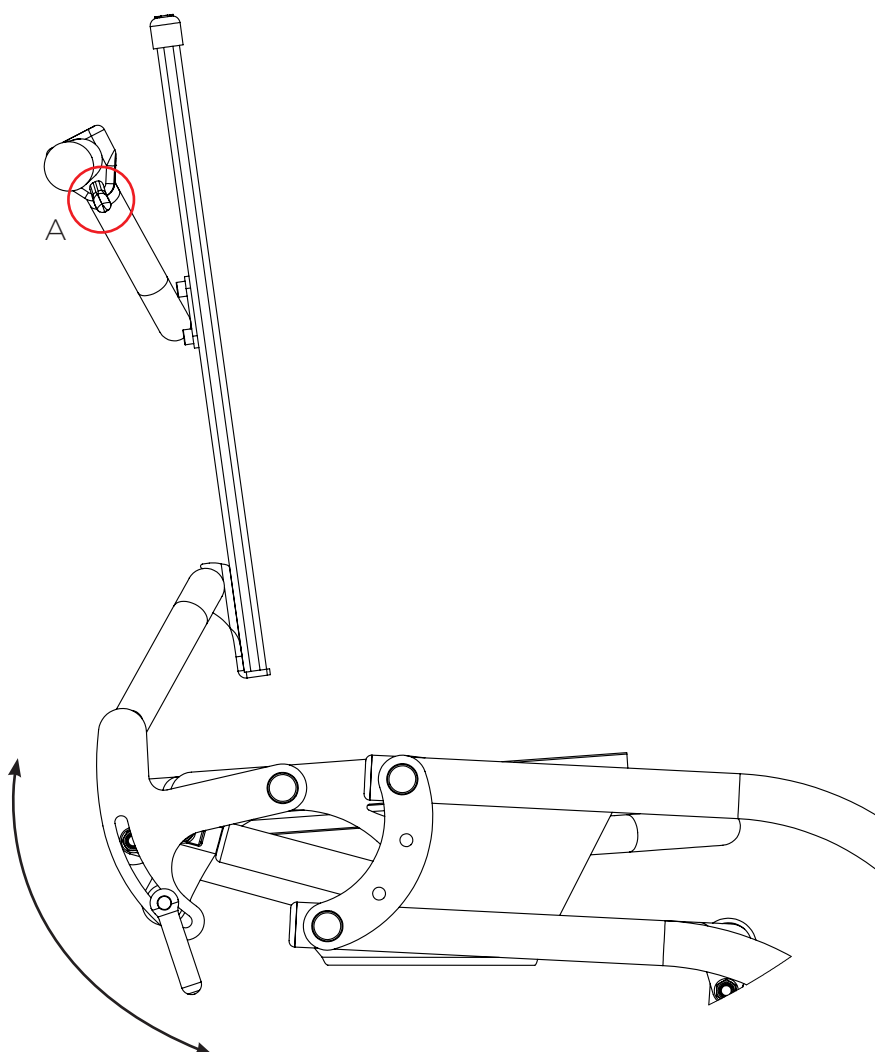

Sørg for at ledningene til utløseren til gassfjæren alltid er frie etter justering.

## Hoftestøtte

Hoftestøtten skal monteres i nedre kant av ryggprofilen over nedre ryggbøyle. Først må ryggplatens tønnemutter løsnes med skruene (A).

Skyv bakplaten opp nok til å avdekke skruen (B) og fjern skruen og mutteren (C).


Ryggprofilen løsnes fra rammen ved å løsne skruene (D).

Løft ryggprofilen ut av rammebraketten. Deretter må den nedre ryggbøyle fjernes ved å fjerne skruene (E). Sett deretter tønnemutrene inn i hoftestøttebeslaget (F) og skyv det opp til ønsket høyde under armstøttebeslaget. Stram skruene (G). Sett ryggbøyle (A) tilbake på ryggdelen og stram skruene.

Sett tilbake ryggprofilen i rammen og stram skruene (B, C og D). Skru ryggplaten med skruene (E) inn i ryggbøyle og juster den til ønsket høyde.

### Justering:

Juster hoftestøtten i høyden med skruene (G), sideveis med grep (H) og dybden med grep (I).

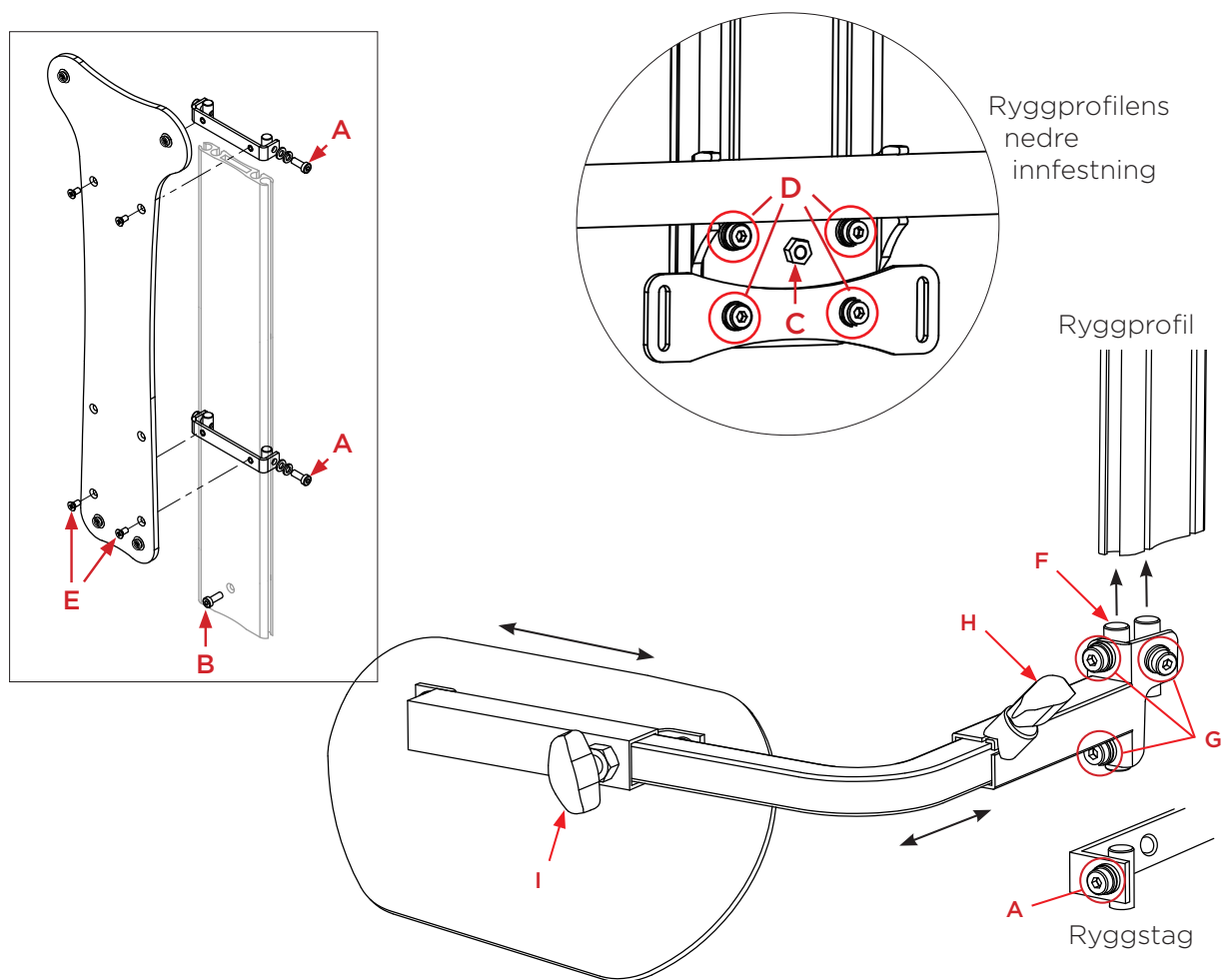

Hoftestøttens breddejustering må ikke skje utenfor MAX-markeringene.



## Armstøtte rygg

### Montering, armstøtte

Armstøtten skal monteres på ryggstøtten. Monter armstøttefestet i henhold til bildet. Juster til ønsket høyde. Stram deretter skruene (A).

### Justering av armstøttebredde


Løsne grepet (B). Juster til ønsket bredde. Stram deretter grepet.

### Dybdejustering, armstøtte


Løsne grepet (C). Juster til ønsket posisjon. Stram deretter grepet.

### Ta av/ta på armstøtten

Løsne grepet (B). Trekk ut armstøtten sidelengs. For å montere på, gjøres det omvendt.

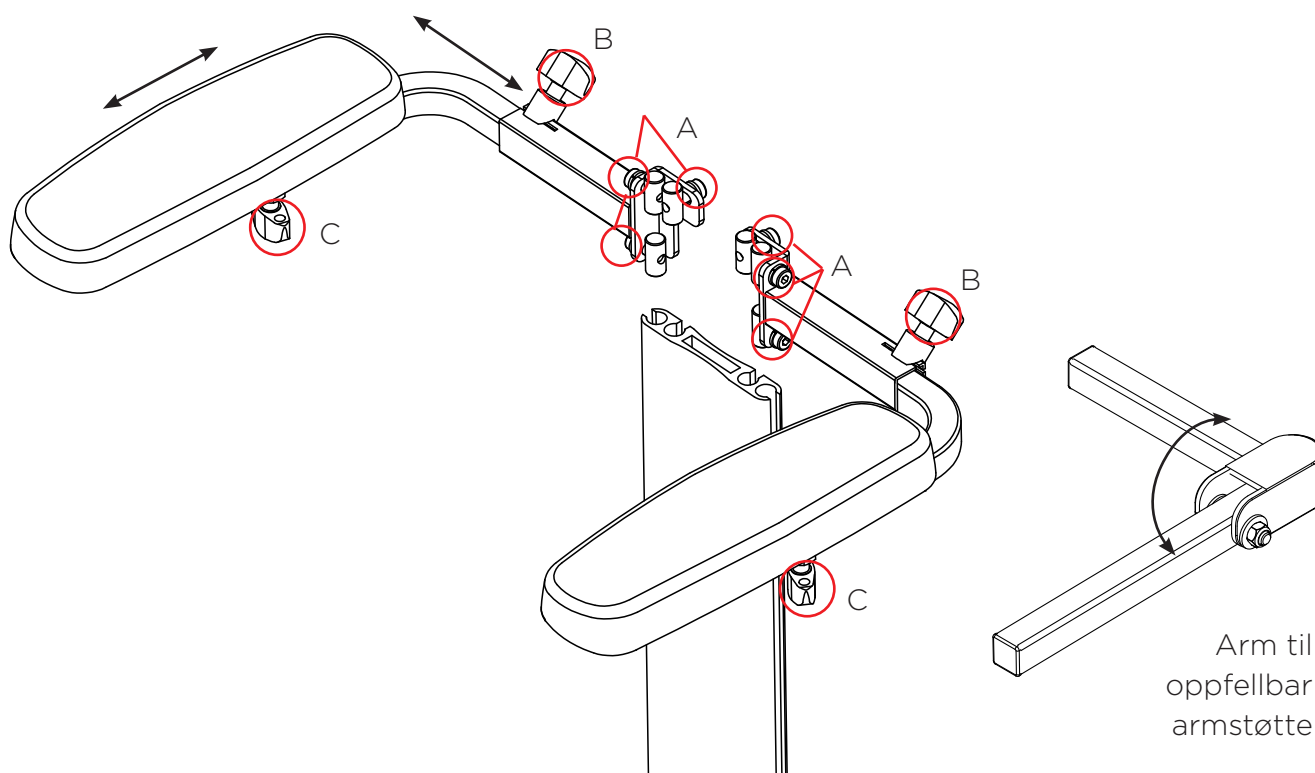

Armstøttens breddejustering må ikke skje utenfor MAX-markeringene.

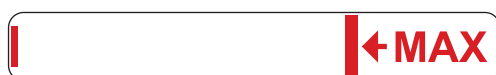


## Armstøtte understell

### Montering på manuelt understell

Armstøtten skal monteres på sideplaten (A). Monter skruene (B) gjennom de forsenede hullene på metallplaten, gjennom avstandsplaten (C) og inn i de gjengede hullene på armstøtten.

### Folde armstøtten

Armstøttene er nedfellbare. Trekk armstøtten diagonalt oppover og bakover. Roter deretter støtten bort fra understellet til støtten faller inn i neste hakk.

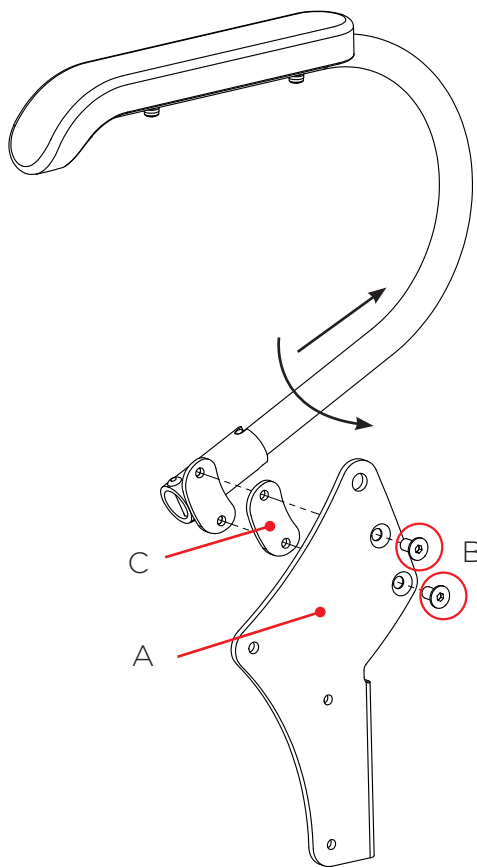


### Montering på hydraulisk/el understell

Armstøttene skal monteres på den ytre sideplaten (A). Monter skruene (B) gjennom de sentrale hullene på metallplaten og inn i de gjengede hullene på armstøtten.

### Folde ned armstøtten

Armstøttene er nedfellbare. Trekk armstøtten diagonalt oppover og bakover. Roter deretter støtten bort fra understellet til støtten faller inn i neste hakk.

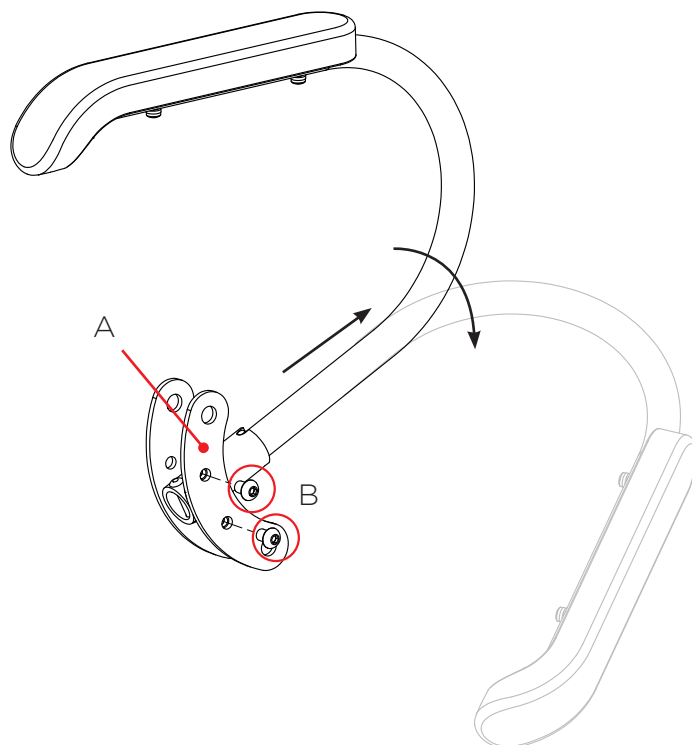




## Bord fast (passer kun armstøtte rygg)

### Montering av bord

Plasser bordet på armstøtteplatene (B) og juster bredden og dybden på armstøttene slik at de havner rett under bordet. Vri bordets låsearm (A) under armstøtteplaten.

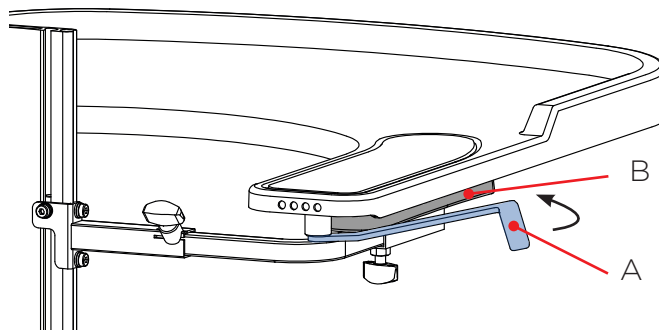

### Bytte festehull

Det fins 3 festebredder å velge mellom. For å endre bredden brukes et valgfritt monteringshull under armstøttepolstringen i bakkant av bordet. I grunnutførelsen er låsearmen festet til det midterste hullet.

For å skifte monteringshull må du først løfte polstringen i bakkant. Merkingene på ytre bakkant av bordet viser kun størrelsen på bordet.




Vær forsiktig så du ikke løfter bordet i framkant.

## Støttebord (passer kun armstøtte rygg)

### Montering av bordet

Plasser bordet på armstøtteplatene (B) og juster bredden og dybden på armstøttene slik at de havner rett under støttebordet. Vri deretter bordets låsearm (A) under armstøtteplaten.

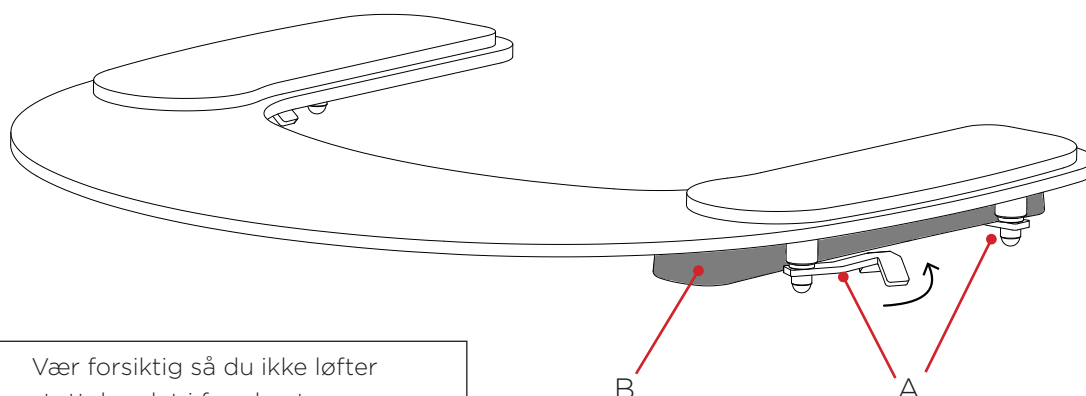


Vær forsiktig så du ikke løfter støttebordet i framkant.

## Hodestøtte

### Montering/justering av hodestøtte

- \* Fjern beskyttelsesdekselet på ryggstøtten.
- \* Monter hodestøttebraketten (B) til ryggstøtten.
- \* Løsne skruene (A) nok til å kunne justere for hånd.
- \* Plasser brukeren i setet og juster til ønsket posisjon.
- \* Stram alle skruer og grep og sett på beskyttelsesdekselet.

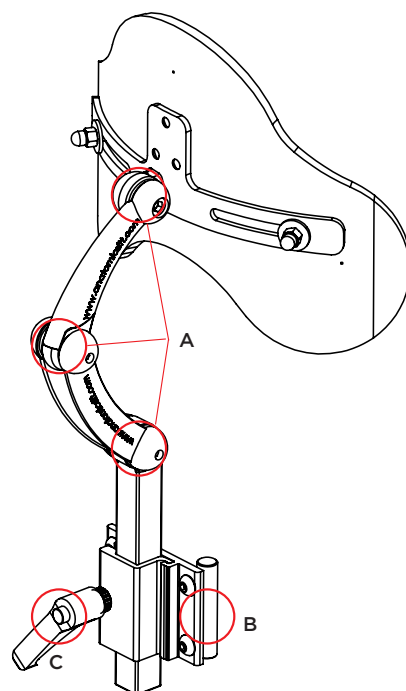


### Hodestøtten er enkel å ta av:


- \* Løsne grepet (C) for å fjerne hodestøtten.

## Kjørebøyle

Løsne skruene (A) nok til å kunne tre tønnemutrene (B) inn i profilen (C). Juster til ønsket høyde og stram skruene (A).

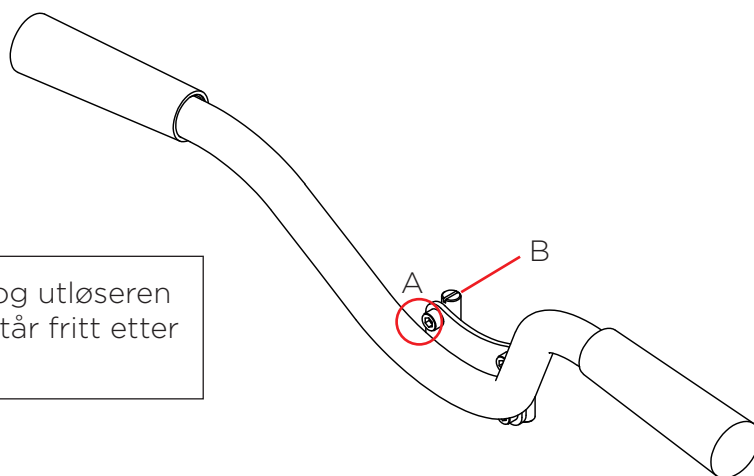

Pass på at ledninger og utløseren for gassfjæren alltid står fritt etter justering!

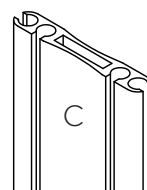


## Brystseler

### Montering av brystseler



#### Øvre feste for bryststøtte, H-sele (bilde 1):

- \* Fjern beskyttelsesdekselet på ryggstøtten.
- \* Monter øvre festestag iht. bilde 1.
- \* Åpne spennen (A), tre festestroppene gjennom hullet i beslaget og gjennom spennen, og lås spennen.

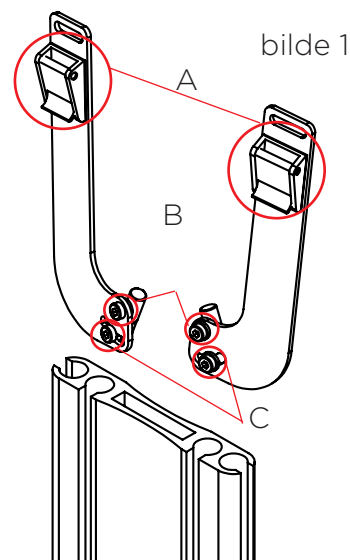

#### Nedre feste for Sternumstøtte H-sele: (bilde 2)

Den nedre braketten leveres ferdigmontert og følger med stolen. Lås båndet med "Tri-glide"-spennen iht. bilde 3.

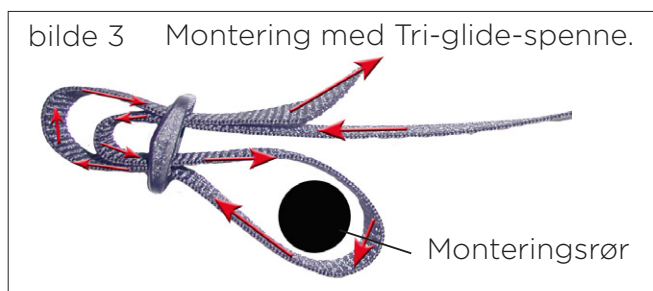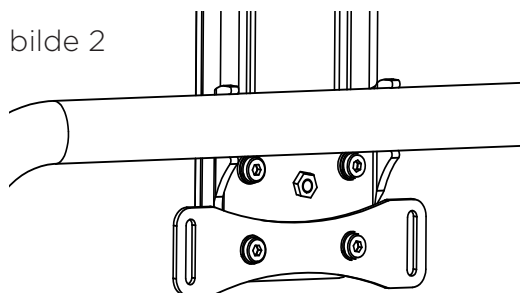

### Justering av brystseler (Sternumstøtte, H-sele)

Plasser brukeren i setet og løsne unbrakoskruen iht. pos. B & C, bilde 1. Juster armene slik at trekkretningen til de øvre festepunktene havner i samme høyde som skulderseksjonen.

- Skru inn skruen iht. pos. B, bilde 1.
- Juster til ønsket bredde ved å vinkle bøylen til høyre eller venstre. (Sørg for at det er nok plass til nakken).
- Stram skruen iht. pos. C, bilde 1.
- Juster setebelteputene i høyden for å gi optimal trykkavlastning.

### Etterkontroll:

- Pass på at det er nok plass til nakken.
- Presset på båndet.
- Plasseringen av setebelteputene.



Sørg for at det er nok plass til nakken!

## Hoftebelte

### Montering:

Monter festestroppene til beltet med de medfølgende "Tri-glide"-spennene rundt ett eller begge festepunktene som vist på bildet nedenfor.

Starfish Pro t.om. 2022



Anbefalte festepunkter




2-punktsbelte



4-punktsbelte

Starfish Pro etter 2022

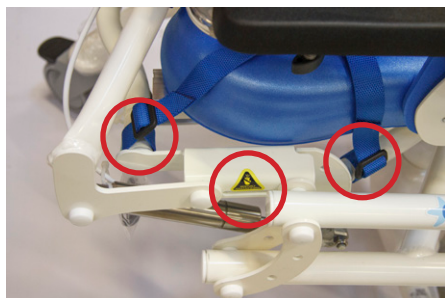

Anbefalte festepunkter




2-punktsbelte



4-punktsbelte

Bruk "Tri-glide"-metoden som vist på bildet til høyre.

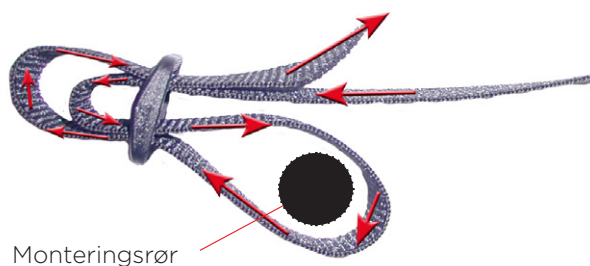


### Justering:

- \* Stram beltet på begge sider av spennen for å sentrere det.
- \* Juster belteputene for å gi optimal trykkavlastning.
- \* Hvis båndene er for lange, klipp av overflødig bånd og brenn endene.

## Fotstøtte

### Ta på/ta av fotstøtte

- Skyv inn fotstøtten iht. bilde.
- Stram grepet (A). Ønskes mer permanent innfesting, kan grepet byttes ut med skruer (C) (som følger med stolen ved levering).
- Fjerning skjer ved å løsne grepet (A) og trekke ut fotstøtten.

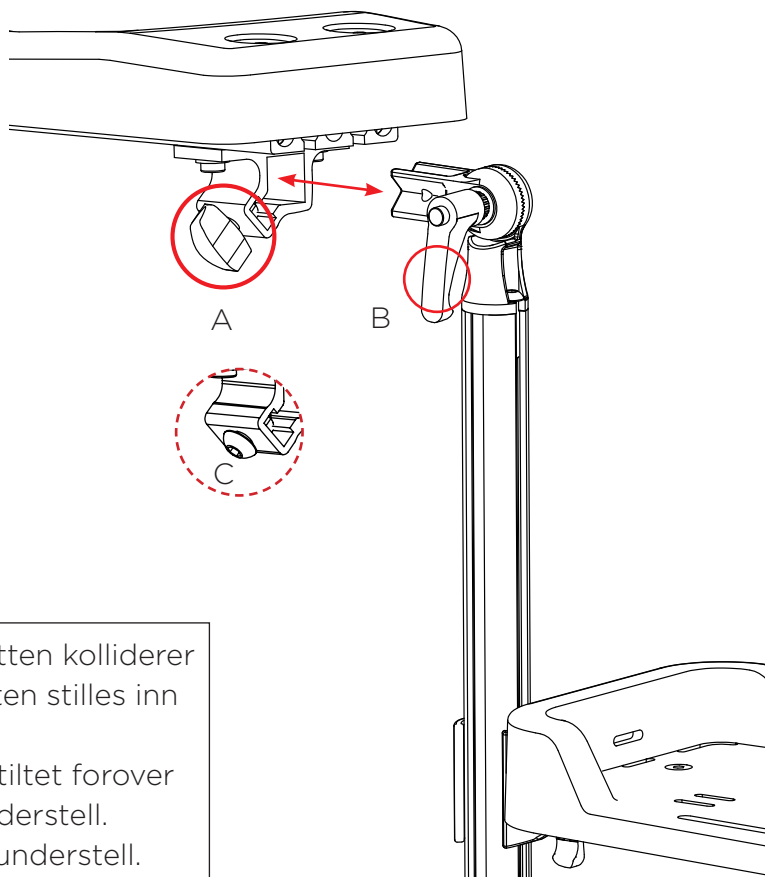

### Vinkeljustering ved kneledd

- Løsne grepet (B).
- Juster til ønsket vinkel.
- Stram deretter grepet.




For å unngå fare for at fotstøtten kolliderer med understellet, bør fotstøtten stilles inn når setet er:

- I lavest mulig posisjon og tiltet forover for hydraulisk/elektrisk understell.
- Tiltet forover for manuelt understell.

### Fast fotstøttebeslag

For å justere høyden på fotstøtten, løsne grepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Stram deretter grepet.

For å justere vinkelen ved ankelen, løsne skruen (B) litt. Juster til ønsket vinkel og stram deretter skruen (B).

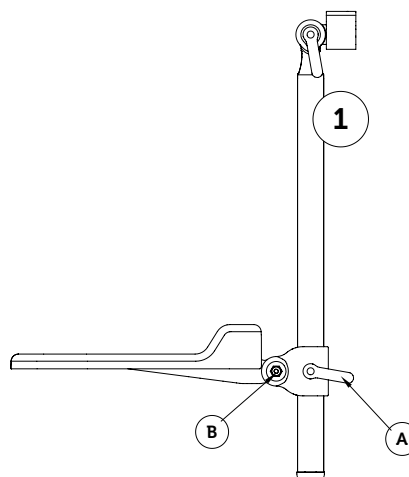


### Fjærende fotstøtteadapter

For å justere høyden på fotstøtten, løsne skruen (D) litt og juster deretter til ønsket høyde. Stram skruen (D).

For å justere vinkelen ved ankelen, løsne skruen (C) litt. Juster til ønsket vinkel og stram skruen (C).

**!** Fjæringens motstand kan justeres med en skrutrekker ved å skru på skruen i fjærpakken (E).

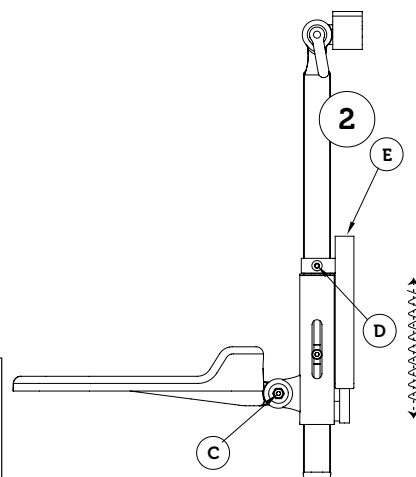


### Nedfellbart fotstøttebeslag

For å justere høyden på fotstøtten, løsne grepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Stram deretter grepet.

For å bruke den nedfellbare funksjonen løfter du fotstøtteplaten i framkant.

For å justere vinkelen ved ankelen, løsne skruen (B) litt. Juster til ønsket vinkel og stram skruen (B).

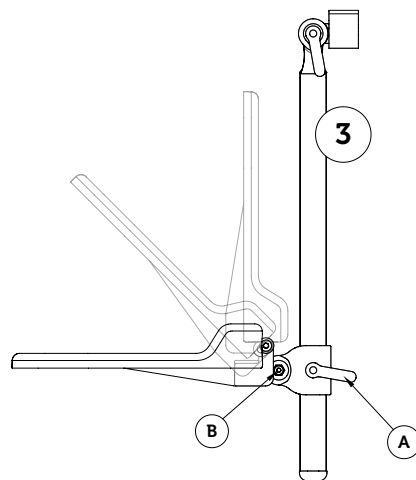


### Kuleleddadapter

For å justere høyden på fotstøtten, løsne grepet (A) litt og juster til ønsket høyde. Stram deretter grepet.

For å bruke kuleleddfunksjonen, løsne først skruene (B) og (C) og juster til ønsket posisjon. Stram deretter skruene (B) og sikkerhetslås posisjonen med skruen (C).

For å justere fotplaten i dybden, løsne skruene (D) litt. Juster til ønsket posisjon og stram deretter skruene (D).

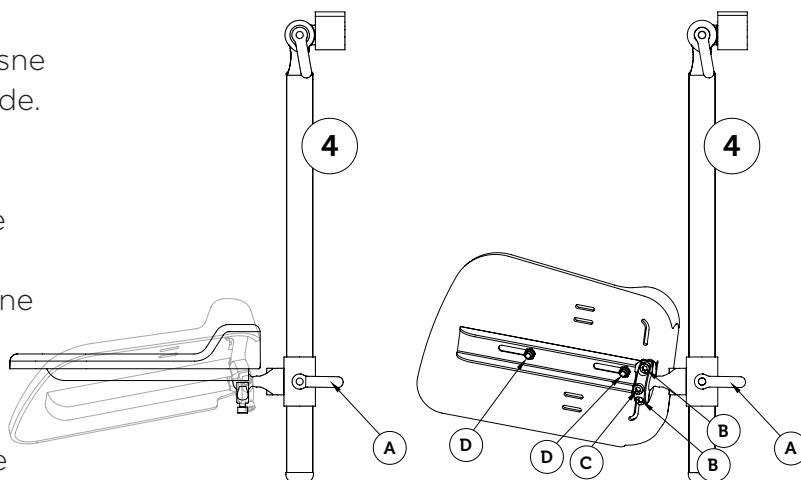

## Leggstøtte

### Montering

Før montering av leggstøtter kan utføres, må du først fjerne eventuelle fotstøtter. Løsne spaken (F) som holder fotstøtten på plass på fotstøttestaget. Trekk deretter fotstøtteplaten og dens beslag nedover.


Monter leggstøtten ved å skyve tønne-mutteren (C) inn i fotstøttestaget, juster til ønsket høyde og stram skruene (E). Monter deretter fotstøtten igjen.

### Høydejustering

For å justere høyden på leggstøtten, løsne skruene (E) litt og juster deretter til ønsket høyde. Stram deretter skruene (E).

### Breddejustering


For å justere bredden på leggstøtten, løsne skruene (A) litt og juster deretter til ønsket bredde. Stram deretter skruene (A).

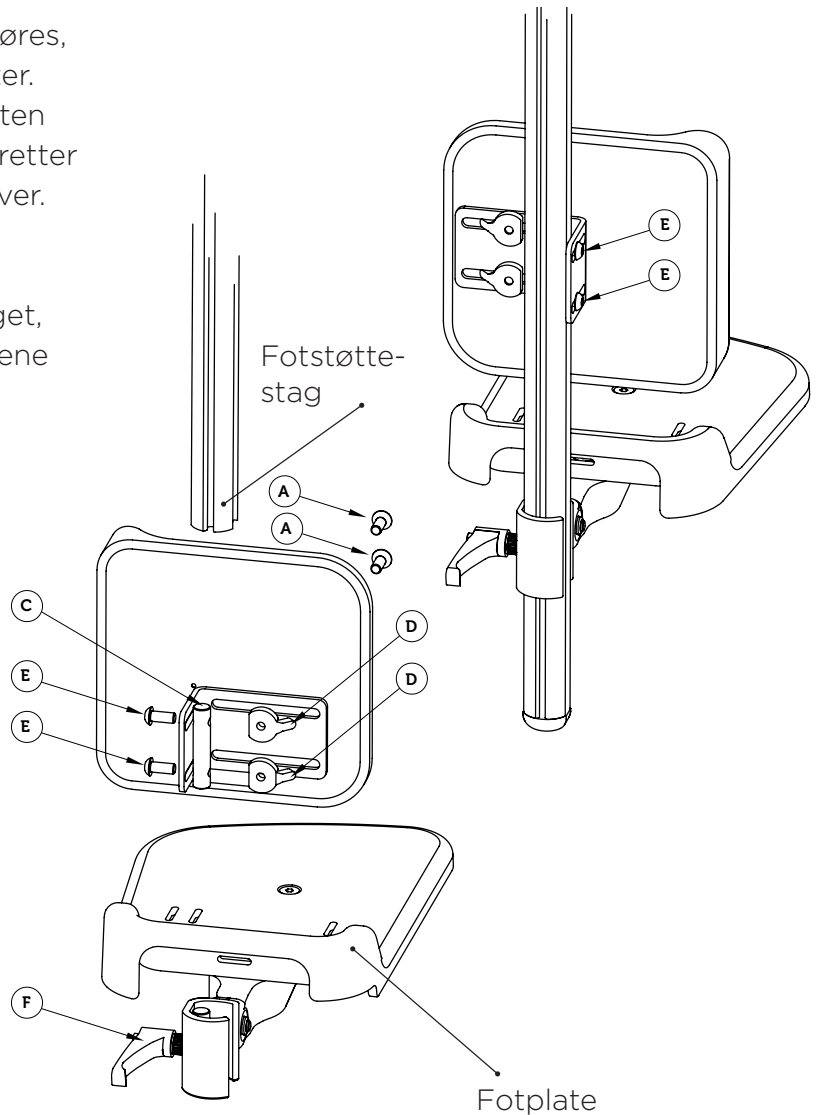

## Tippesikring

### Montering av tippesikring

Fjern hjulet ved å skru ut skruen (A) og skiven (B). Skru inn stoppskruen (C). Prøv å holde tippesikringen (D) slik at det store hullet hviler mot det større hullet i understellet og stoppskruen går inn i det mindre hullet på tippesikringen uten å stikke gjennom. Hvis stoppskruen stikker gjennom, skru den inn litt til. Hvis skruen er skrudd for langt inn slik at den ikke hindrer tippesikringen fra å rotere, skru den litt ut. Fortsett og holde tippesikringen på samme sted og sett skruen (A) gjennom skiven (B) og hjulet og tre deretter skruen gjennom tippesikringen og skru inn i understellet.

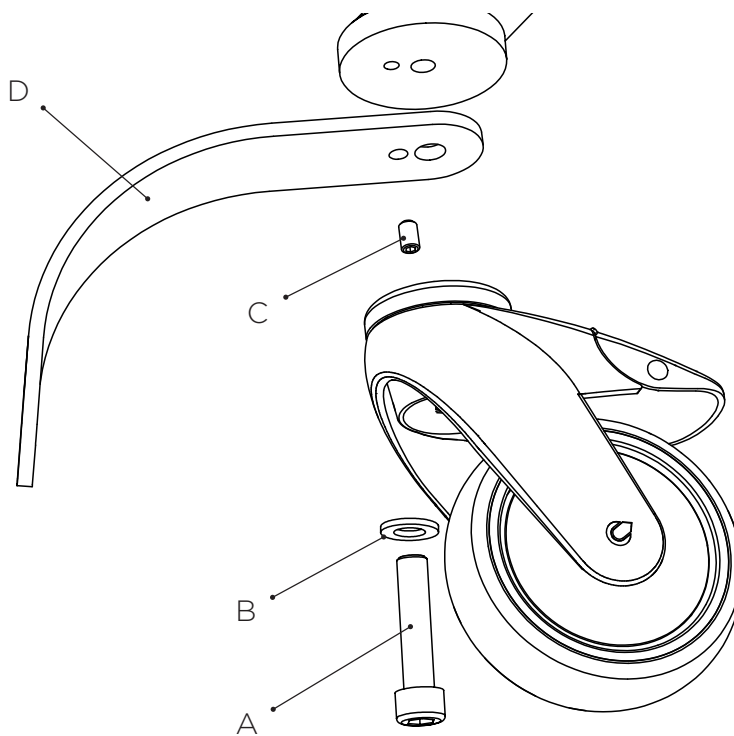




## Hjul

### Låsing av hjul

Trykk på bremsespaken (A) med foten for å låse hjulene (se bilde). Trekk spaken opp for å frigjøre hjulet.

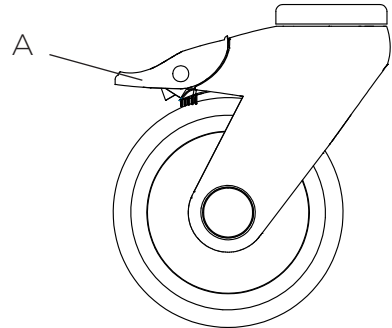


## Potte

### Montering

Monter potten ved å skyve kantene inn i sporene (A) på baksiden. Skyv potten til den mottar røret foran.




Ikke tilt stolen bakover når du bruker potten!

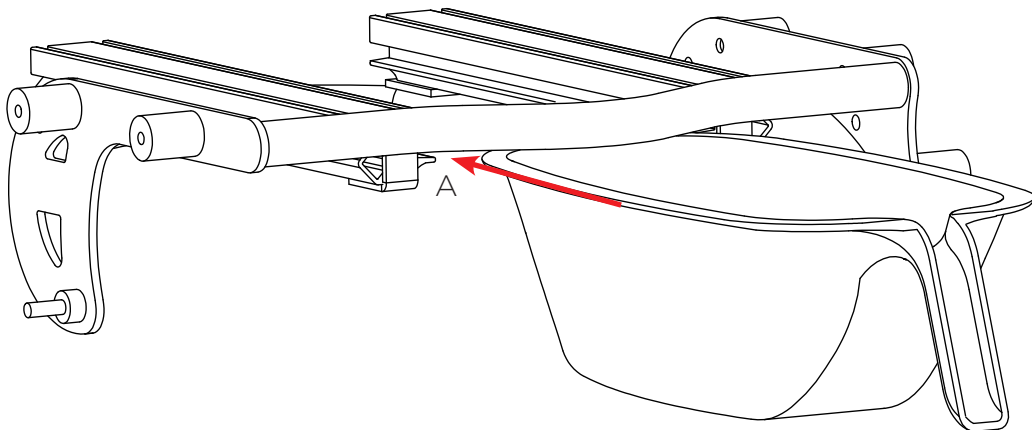

## Urinskjerm

### Urinskjerm uten stropp

Monter urinskjermen ved å kile det ned mellom bendelerne. Mål høyden på urinskjermen slik at den passer brukeren. Hvis potte brukes; kutt overflødig materiale i bunnen av lokket slik at underkanten hviler mot bunnen av potten.

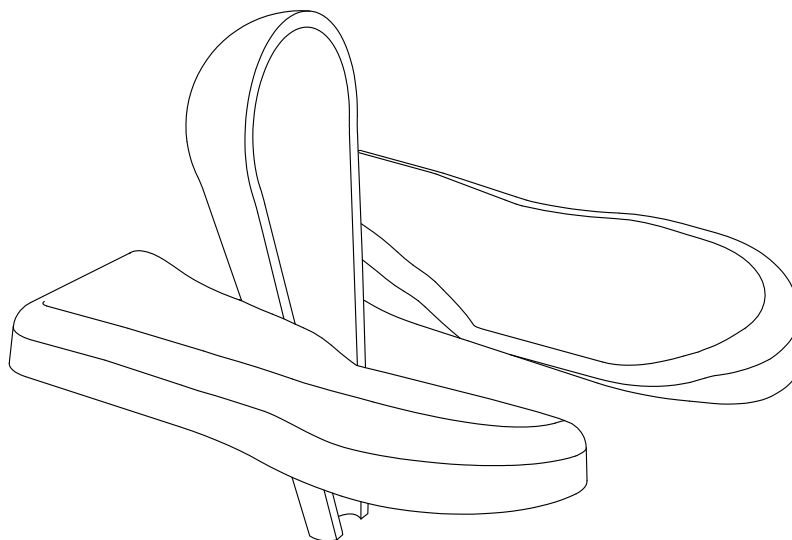

### Urinskjerm med stropp

Monter urinskjermen ved å kile den ned mellom bendelerne og stram stroppen rundt et rammerør for å plassere skjermen bedre. Mål høyden på urinskjermen slik at den passer til brukeren. Hvis potte brukes; kutt overflødig materiale i bunnen av lokket slik at underkanten hviler mot bunnen av potten.



Monter urinskjerm med stropp rundt rammerør ved delt sete.



Monter urinskjerm med stropp rundt rammerør ved helt sete.

## Oppsummering og etterkontroll

Etter montering og/eller justering er gjennomført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og at produktet fungerer som tiltenkt.

Kontroller innstillingene til produktet og dets tilbehør slik at brukeren har riktig sittestilling.

Etter all montering-, justering- eller servicearbeid må alle gantergrep, festeskruer og muttere kontrolleres og etterstrammes.

Kontroller at hjelpemiddelet er riktig balansert for å sikre at eventuell velterisiko er utelukket.

Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

# Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

## Kontroll før bruk

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert, er tilsyn og renhold viktig.

Inspeksjon og kontroll må utføres før hver bruk i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader.
- Kontroller spesielt skruer, muttere og håndskruer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funksjonen til eventuelle tippesikringer.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Kontroller hjulenes tilstand.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel, tilt, høydejustering etc. angående mobilitet og låsing.
- Kontroller justeringen av kabelen for tilt og ryggvinkel slik at disse fungerer som de skal.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Hvis det oppdages mangler: ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

## Renhold

Rengjøringsbehovet varierer og må vurderes basert på bruk av produktet, men minst en gang i uken anbefales.

Rengjør plast- og metaldeler med en klut/svamp og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende eller løsningsmidler.

Løsne alle trekk etter bading/dusjing slik at fuktighet og vann ikke samler seg under, og tørk produktet.

## Service og vedlikehold

Service utføres primært for å forlenge produktets levetid og for å sjekke om det er behov for utbedrende vedlikehold. Behovet for inspeksjon/service varierer og kan vurderes fra sak til sak avhengig av produktets bruk og slitasje, men det anbefales minst en gang hver 6. måned.

Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsanvisninger i bruksanvisningen. Ved utskifting av ødelagte, slitte eller sprukne deler, bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt slik at produktet beholder CE-merket. Reservedeler kan bestilles etter egen reservedelsliste for det aktuelle produktet.

Ved enhver service skal det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at produktet er trygt å bruke. Hvis det er mangler som påvirker sikkerheten og ikke kan utbedres, må produktet tas ut av drift.

For rengjøring av produktet, se avsnittet Renhold.

### Kontroller følgende og korriger ved behov:

- Kontroller produktets samtlige funksjoner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje eller skader.
- Kontroller at alle skruer, muttere og bolter er strammet skikkelig.
- Kontroller at alle grep er intakte og fungerer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller at eventuelle tippesikringer fungerer.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Funksjonstest og smør alle bevegelige ledd, ledninger, hjul, grep etc. Bruk egnet olje eller smøremiddel (f.eks CRC 5-56, teflonspray, etc.)
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, f.eks ryggvinkel, setetilt, høydejustering osv. Både angående justeringsmuligheter, mobilitet og låsning.
- Kontroller at stampelet låses i valgt posisjon.
- Kontroller at ledningene er riktig plassert og riktig justert.
- Kontroller hjulenes funksjon og at de sitter godt fast. På hjul med låsefunksjon, sjekk at dette fungerer. Hjulene skal ikke kunne rulle i låst posisjon.
- Kontroller at stolen ruller tilfredsstillende.
- Kontroller eventuelle slitasjer på skjøter og braketter. Pass på at de låses ordentlig.
- Sjekk belter og seler for slitasje, funksjon og feste.
- Kontroller merker, etiketter og advarselssymboler slik at de er hele og leselige.

### Tillegg for elektriske funksjoner

- Kontroller at aktuator og batterier er riktig montert og i god stand.
- Kontroller at kabler, kontakter og tetningsringer er intakte og uten synlige skader.
- Kontroller at håndkontrollen og laderen er i god stand og fungerer.

### Etterkontroll

Når service er utført, sjekk at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er montert riktig i henhold til bruksanvisningen og fungerer etter hensikten.

## Resirkulering

Resirkulering gjøres hensiktsmessig dersom hjelpemiddelet er personlig og skal gis til ny bruker eller ved langtidslagring. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsinstruksjoner i bruksanvisninger.

Ved utskiftning av deler skal det brukes originaldeler fra Anatomic Sitt.

For informasjon om produktet og dets funksjoner, se bruksanvisningen på [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com). For mer informasjon om produktets levetid, se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen.

Sjekk alltid ved resirkulering at hjelpemiddelet ikke er spesialtilpasset før det sendes til ny bruker.

ed hver resirkulering bør det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at det er trygt å bruke. Hvis det er mangler som ikke kan rettes opp, må produktet tas ut av drift og resirkuleres.

## Rengjøring

Rengjør produktet med en svamp/klut og antibakterielle og med milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende stoffer eller løsemidler.

Fjern polstring, belter og seler. Polstring er en forbruksvare og må skiftes ut ved behov. Trekk kan vaskes i vaskemaskin på maks 60°C. Maskinens trommel bør imidlertid være stor nok til at polstringen ikke mister formen, og polstringen skal heller ikke sentrifugeres. Trekket må lufttørkes (skal IKKE tørkes i tørketrommel, sentrifugeres eller tørkes i tørkeskap)

Belter og seler kan vaskes i 60°C finvask, men må ikke tørkes i tørketrommel eller i tørkeskap. Bruk vaskepose. Obs, se mer informasjon i gjeldende bruksanvisning for det respektive posisjoneringshjelpemiddelet.

Zitzi Starfish Pro kan med fordel rengjøres i et vaskeskap:

Starfish Pro manuell og hydraulisk: 90°C i 3 minutter.

Starfish Pro elektrisk: 60°C i 3 minutter.

Ved rengjøring av understellet i vaskeskap skal det festes og plasseres oppreist med låste hjul. Fjern polstring, belter og seler.

**Starfish Pro EI** - bruk rengjøringsmidler som ikke fjerner smørefettet.

Før vask: Kontroller at alle elektriske koblinger er plugget inn og lokk er lukket (de bør peke nedover for å unngå at vann samler seg). Senk understellet til laveste posisjon. Ikke bruk damprengjøring og ikke rett høytrykkspyler direkte mot de elektriske komponentene. Produktet er IP-klassifisert: IPX6.

### **Kontroller ved resirkulering**

Etter rengjøring og tørking, sjekk produktet for skader/slitasje. Vær oppmerksom på at produktets levetid er begrenset (se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen) når det skal vurderes om produktet er egnet for resirkulering.

Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes ut. Bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt. Reservedeler kan bestilles i henhold til egen reservedelsliste for gjeldende produkt. For at produktet skal beholde sin CE-merking kan hjelpemiddelet kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic Sitt AB.

Funksjonstest og smør alle bevegelige deler som ledd, kabler, hjul, grep etc. Bruk egnet olje eller smøremiddel (f.eks CRC 5-56, teflonspray, etc.).

Kontroller at alle skruer og muttere er stramme.

Sørg for at bruksanvisning og alle originaletiketter medfølger ved ny forskrivning.

### **Etiketter/klistremerker**

Ved behov for nye etiketter/klistremerker, kontakt Anatomic Sitt. For plassering på hjelpemiddelet, se [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com) hvor du også finner bruksanvisninger.

### **Etterbehandlingsmaling**

For å forhindre korrosjonsskader eller behandle riper, kan hvit etterbehandlingsmaling bestilles fra Anatomic Sitt AB.

Artikkelnummer: 689736, Etterbehandlingsmaling RAL9010 - Starfish Pro.

### **Kontrollpunkter**

Overordnet:

- Sjekk hele produktet og dets tilbehør for å identifisere ødelagte, sprukne eller slitte deler som skal byttes ut.
- Kontroller produktets samtlige funksjoner.

Understell/Stol:

- Kontroller at alle skruer og muttere er stramme.
- Kontroller at stolens justeringsmuligheter fungerer.
- Kontroller at tilt- og ryggvinkelfunksjonen fungerer og at stemplene låses i valgt posisjon.
- Kontroller at ledningene er riktig plassert og riktig justert.
- Kontroller at løftestempelet fungerer som det skal.

#### Hjul:

- Kontroller at skruene til hjulene er ordentlig strammet.
- Kontroller at hjulene fungerer etter sin hensikt.
- Kontroller at hjul med låsefunksjon fungerer. Hjulene skal ikke kunne rulle i låst stilling.
- Kontroller at stolen ruller tilfredsstillende.

#### Fotstøtte:

- Utfør funksjonskontroll av høyde- og vinkeljustering.
- Sjekk evt. slitasje på alle ledd og sørg for at de låses ordentlig.

#### Hodestøtte:

- Kontroller polsteret/trekket og bytt ved behov.
- Kontroller at hodestøtteleddet låses.
- Kontroller festet på hodestøtten og at den låses.

#### Armstøtte:

- Kontroller armstøttens justeringer for høyde, dybde og bredde.
- Kontroller armstøttefestene at de låser seg slik de skal.

#### Andre evt. tilbehør:

- Kontroller alle deler etter slitasje og bytt ved behov.
- Kontroller evt. låsninger og justeringsmuligheter.

#### Elektriske funksjoner:

- At motor og batterier er riktig montert og i god stand.
- Kontroller aktuatorer og batterifester for å forsikre deg om at ingenting mangler eller er ute av drift.
- Ledninger, koblinger og tetningsringer skal være intakte og uten synlige skader.
- At håndkontrollen og laderen er i god stand og fungerer.

### **Etterkontroll**

Når resirkulering utføres, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som ment. Sjekk også at merking, etiketter og advarselssymbolene er komplette og lesbare.



# Avfallshåndtering

## Gjenvinning

En brukt del eller produkt må demonteres. Delene skal separeres etter materialtype og etterlates på gjenvinningsstasjon eller tilsvarende. Batteri- og gassfjærer sorteres som farlig avfall.

# Garanti og retur

## Garanti og reklamasjon

Garanti gjelder generelt i ett (1) år mot fabrikasjonsfeil fra leveringsdato eller etter avtale. Det gis ikke garanti for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. Defekte varer må returneres for garantibehandling. Legg alltid ved følgeseddel.

For best mulig vurdering av reklamasjonen, må produktet være tørt og rengjort når det sendes tilbake.

Beskriv feilen og årsaken så grundig som mulig. Se garantireparasjon eller mulig erstatningsgaranti. Legg ved en kopi av fakturaen og oppgi at produktet skal returneres til deg etter reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamasjonsskjema kan lastes ned fra vår nettside.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

## Retur

Feilbestilte eller feilleverte varer skal returneres innen 20 dager fra leveringsdato. Legg alltid ved kopi av både følgeseddel og faktura. Skriv inn årsaken til at du returnerer varene dine. Returskjema er tilgjengelig på [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com).

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Vær oppmerksom på at tilpassede produkter ikke kan returneres!

# Revisjon

Følgende endringer er gjort i denne versjonen av bruksanvisningen.

## **Symboler**

Nytt klistremerke for klemfare	side 6, 16
Nytt klistremerke maks. justeringsområde arm-/hoftestøtte	side 6, 22, 23

## **Hoftebelte**

Tilleggstekst og bilde	side 31
------------------------	---------

## **Resirkulering**

Rengjøring Starfish Hydraulisk 90°C	side 41
-------------------------------------	---------

## **Revisjonsliste**

ver. 2.0 - 2020-06-11

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-12-21

ver. 2.3 - 2023-01-17

**SE**

**Anatomic Sitt AB (produsent)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

**Besøksadresse**

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

*World wide*

[anatomicsitt.com](http://anatomicsitt.com)

[info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com)

[facebook.com/anatomicsitt](https://facebook.com/anatomicsitt)

[youtube.com/anatomicsitt](https://youtube.com/anatomicsitt)

