



- Dynamisk sittestilling
- Bevegelsesfrihet

September 2023



Anatomic  **SITT**

ZITZI SHARKY PRO

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Zitzi Sharky Pro Dynamisk sittestilling

Bekken,- og benposisjonering

Kombinasjonen av riktig justert sittesystem, optimal setegrep, effektivt hoftebelte og en god støtte for korsbenet gir forutsetninger for redusert skjærkraft, noe som letter aktivitet og postural kontroll. Setet er trinnløst justerbart i setedybde og abduksjon/adduksjon, noe som muliggjør optimal individuell sittestilling og samtidig lar brukeren vokse med setesystemet.



Hoftebelteplassering

Et riktig justert posisjoneringsbelte gir forutsetninger for å posisjonere bekkenet og reduserer risikoen for å skli forover eller bakover. Vi tilbyr posisjoneringsbelter i flere ulike materialer, modeller og størrelser.



2-punktsbelte

Ett festepunkt på hver side




4-punktsbelte

To festepunkt på hver side



Antirotasjonsbelte





To festepunkt på hver side

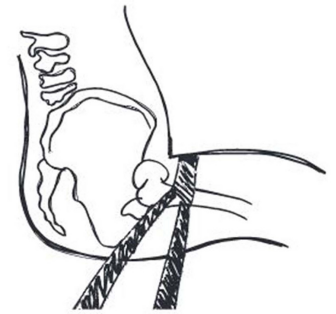

Riktig beltedrag

Trepunktsposisjonering

Justerbare kroppsstøtter sammen med for eksempel hoftestøtte, skaper en god forutsetning for posisjonering av overkroppen, noe som reduserer risikoen for feilstilling. God postural kontroll fører til bedre hodekontroll og øker mulighetene for aktivitet og årvåkenhet. Vi har dermed mulighet til å både korrigere og opprettholde posisjonen av overkroppen.

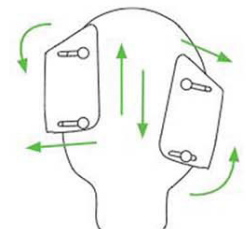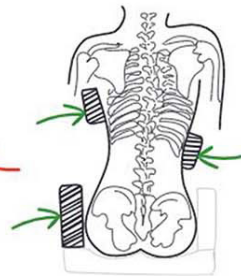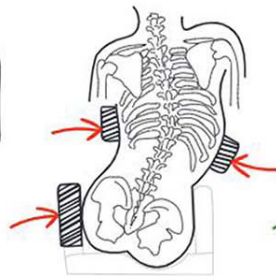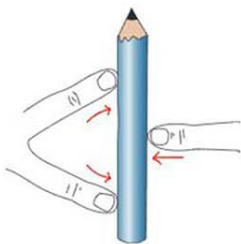

Posisjoneringssele

Sammen med hoftebeltet gir sternumstøtten eller H-beltet god støtte for posisjonering av overkroppen, noe som gir forutsetninger for bedre hodekontroll



Sternumstøtte


- Konsentrert støtte over brystbenet
- Motvirker fall fremover



H-sele

- Holderskulderpartiet på plass og motvirker rotasjon
- Passer godt de som bruker sonde

Flexfunksjon/hoftevinkeljustering

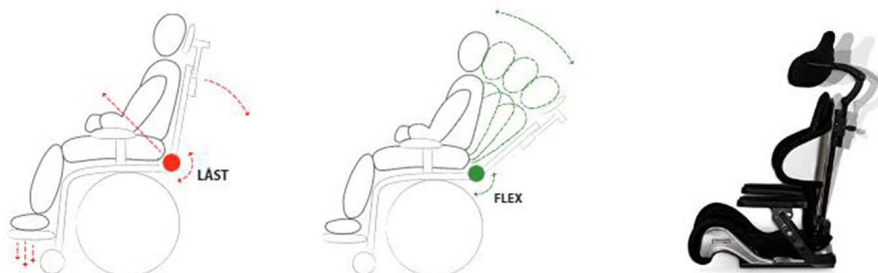

Dynamiske støtter gir bevegelsesfrihet, variasjon og kan gi en beroligende effekt ved ekstensjonsspastisitet. Sittesystemet er utstyrt med et flexledd som gjør ryggstøtten fleksibel. Ryggen er justerbar i hoftevinkelen, noe som bryter spastisiteten og flexleddet fanger opp kraften og dermed beholder posisjonen i sittende stilling.

Hodeposisjonering/Eksempel



Aktivt pannebånd



HeadActive



Heads Up



Pro Serie

Zitzi Sharky Pro

Sittesystemene er spesielt utviklet for brukere med sitteutfordringer. Zitzi Sharky Pro finnes i 2 størrelser og passer brukere fra ca. 150-195 cm.

Størrelser	2 størrelser
Abduksjon	18°
Brukerlengde	150-195 cm
Maks brukervekt	130 kg
Setebredde	27-38 cm
Setedybde	21-25 cm
Setebredde	36-49 cm
Setedybde	37-55 cm



Alle trekk kan vaskes på 60°C

OBS! Velg forsterket rygg når brukeren har høy tonus

- Stort utvalg av tilbehør.
- Mange justeringsmuligheter - vokser med brukeren.
- Passer til både utendørs og innendørs understell.
- Brukervennlig.
- Krasjtestet og godkjent.
- Det kreves ikke verktøy for justering av for eksempel fotstøtte, setestøtte og armlene.



Tilbehør - Zitzi Sharky Pro

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
374001	166644	Sternumstøtte Pro str. XS
374002	161711	Sternumstøtte Pro str. S
374003	167317	Sternumstøtte Pro str. M
374004	189445	Sternumstøtte Pro str. L
374015	164011	H-sele Pro str. XS
374016	164012	H-sele Pro str. S
374017	163993	H-sele Pro str. M
374018	164013	H-sele Pro str. L
153066	238632	Armstøtte udsvingbar str. 1
153067	238633	Armstøtte udsvingbar str. 2

Tilbehør - Zitzi Sharky Pro



Sternumstøtte Pro



H-sele Pro



Antirotasjonsbelte



Setebelte



Justerbar rygg



Integrert korsryggstøtte



Armstøtte fra sete



Armstøtte fra rygg



Nedfellbar armstøtte



Overarmsstøtte



Bekkenstøtte



Fotstøtte delt oppfellbar




Fotstøtte hel justerbart



Leggstøtte



Alcantara fôr (sort)

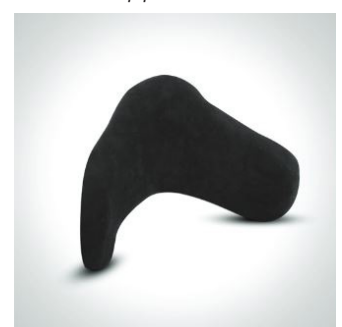

Hodestøtte



Pro Serie Voksen




Pro Serie Plush



Pro Serie Mini



Kjørebøyle

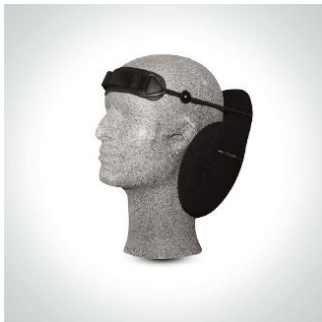

Pannebånd



Kalesje



Adaptersystem



Bord



Bord, oppfellbart



Bord, forsterket



Fotreim



Hoftestøtte



Regntrekk



Armlenplate kupert



Fotstøttestring

Zitzi **Sharky Pro**

Hvilken størrelse på sittesystem bør jeg velge?

Sharky Pro str. 1 - ca. 45-55 cm i setedybde/lengde ca. 150-180 cm

Sharky Pro str. 2 - ca. 50-60 cm i setedybde/lengde ca. 170-195 cm

Hvilken størrelse på understell bør jeg velge?

Sharky Pro str. 1 - Flipper G2 str. 4 / Flipper Flex G2 / Guppy G2 str. 3 / Seabass str. 2

Sharky Pro str. 2 - Flipper G2 str. 4 / Flipper Flex G2 / Guppy G2 str. 4 / Seabass str. 3



Understell

FLIPPER FLEX



Flipper Flex G2 er et understell som egner seg for både innendørs og utendørs bruk. Velg mellom 12" eller 16" hjul. Understellet er også utstyrt med gasstempel-tilt. Tilgjengelig i elektrisk eller manuell versjon. Tilt in space forbedrer vektfordelingen.

Størrelser	1 str.
Design	2 stk.
Belastningsvekt	95 kg
Tilt	0-30° alt. -5° -25°
Høydejustering	32-68 cm*
Totalbredde	64 cm
Totallengde	83 cm
Vekt	31 kg

* Dimensjonene angir høyden på understellet og endres avhengig av hvilket setesystem du velger

FLIPPER



Understellet er utstyrt med 125 mm hjul for enkelt å rulle over teppekanter, terskler og andre hindringer. Det fins to varianter for å lage en heve- og senkemekanisme, elektrisk eller manuell. Tilt in space forbedrer vektfordelingen.

Størrelser	3 st (stl. 2, 3 og 4)
Design	7 stk.
Belastningsvekt	50/75/130 kg
Tilt	0-30° alt. -5° -25°
Høydejusterbar	28-64cm/35-71 cm*
Totalbredde	59 cm
Totallengde	65/77/82 cm
Hjul, standard	125 mm

* Dimensjonene angir høyden på understellet og endres avhengig av hvilket setesystem du velger. De høye verdiene gjelder størrelse 4.

Zitzi SEABASS PRO



Velbalansert understell som passer til flere ulike sittesystemer og skreddersydde seter. Alle drivhjul har hurtigutløser-funksjon og finnes både som luft og solid.

Størrelser	3 str.
Hjul	12", 16", 20", 22", 24"
Belastningsvekt	135 kg
Tilt	35°
Sittehøyde	41/46 cm
Farge	Sort
Vekt	20 kg
Kollisjonstestet	Godkjent

