



daytot joey

BRUKSANVISNING

Les alle instruksjonene nøye før du bruker Joey. Alle instruksjoner finnes også på vår nettside: www.daytotjourneys.com sammen med videoer og FAQs.

Innhold

Avsnitt 1:	Tiltenkt bruk	02
Avsnitt 2:	Sertifisering	02
Avsnitt 3:	Advarsler og forsiktighetsregler	03
Avsnitt 4:	Vilkår for garanti	06
Avsnitt 5:	Sikkerhetsinformasjon	06
Avsnitt 6:	Forholdsregler og kontraindikasjoner	07
Avsnitt 7:	Rengjøring og vedlikehold	08
Avsnitt 8:	Daglig inspeksjon	09
Avsnitt 9:	Gjenbruke Daytot-produkter	10
Avsnitt 10:	Instruksjoner for bruk	11
	10.1 Pakke ut og monterer Joey	11
	10.2 Feste stabilisatoren	12
	10.3 Sette inn puten	13
	10.4 Justere innsatsen – Kun str. 2	14
	10.5 Feste trekkene	16
	10.6 Feste smekken	18
	10.7 Forberedelse og oppsett	19
	10.8 Bruke Joey	22
	10.9 Demontere Joey	23
	10.10 Tilbehør	23
Avsnitt 11:	Teknisk informasjon	24
	11.1 Produktmål	24
	11.2 Brukerstørrelse	25
	11.3 Størrelsestabell	26
Avsnitt 12:	Tabell over symboler	27
Avsnitt 13:	Ofte stilte spørsmål	28

AVSNITT 1: Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk

Joey er et produkt for spedbarn og barn med risiko for motorisk forsinket utvikling..

Joey hjelper med å forbedre motoriske ferdigheter, ved å oppmuntre til selvstendig bevegelse i liggende posisjon, de første 6 månedene. Joey støtter barnet, slik at det kan bevege seg selvstendig samtidig som det bygger det viktige grunnlaget for deres fremtidige fysiske og kognitive utvikling.

Indikasjoner for bruk

Joey er et produkt tilgjengelig for foreldre eller barnets terapeut, lege eller barnelege. Brukere kan være, men er ikke begrenset til premature spedbarn, spedbarn med en nevromuskulær medfødt eller kromosomal lidelse eller global utviklingsforsinkelse. Disse tilstandene påvirker vanligvis spedbarnets grovmotoriske ferdigheter og kroppsholdninger.

Joey er ment for å støtte spedbarnet i en liggende stilling, og lar hender og føtter være frie til å bevege seg. I denne posisjonen vil spedbarnet arbeide for å utvikle hode- og kroppskontroll, skulderstabilitet og vektbering av overkropp.






Bruk av Joey for terapeutiske resultater vil sannsynligvis passe med pågående intervensjoner fra en rekke tverrfaglige team for å utvikle spedbarnets fysiske, kognitive, sosiale og sensoriske ferdigheter.

AVSNITT 2: Sertifisering





Joey er en klasse I medisinsk enhet under EU og Storbritannias regelverk. Som produsent erklærer Daytot Ltd. at dette produktet er i samsvar med forskriften om medisinsk utstyr (2017/745) og forskriften for medisinsk utstyr i Storbritannia 2002.

AVSNITT 3: Advarsler og forsiktighetsregler




Pakke ut

	Ikke la plastemballasje være innen rekkevidde for barn - fare for kvelning. Oppbevar eller kast på riktig måte.
	Ikke la små deler være innen rekkevidde for barn - kvelningsfare. Oppbevar hensiktsmessig.
	Pass på å lese all instruksjonsinformasjon fullstendig før montering eller bruk. Digitale kopier av all informasjon relatert til produktet er tilgjengelig på Daytot sin nettside.
	Hvis du er i tvil om riktig bruk av produktet, vennligst avbryt bruken og kontakt Daytots kundeservice på: hi@daytotjourneys.com
	Vi anbefaler at du lufter aktivitetsmatten i 24 timer og vasker begge sider med varmt såpevann før førstegangs bruk.







Montering






	Påfør smekken på trekket og sørg for at det ikke er overflødig materiale samlet i hodeområdet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til blokkering av luftveiene.
	Sørg for at alle delene er riktig montert i henhold til <i>Avsnitt 10 'Instruksjoner for bruk'</i> .
	Unngå klem av fingre når du monterer/demonterer noen av de avtakbare delene. Pass på å holde deler unna tilkoblingsområdene.
	Sørg for at trekket er godt festet til kroppen før bruk, som vist i <i>Avsnitt 10 'Instruksjoner for bruk'</i> . Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at spedbarnet faller ut av produktet.

Oppsett for bruk




	Produktet skal kontrolleres daglig for å sikre at alle komponenter er sikkert festet og trygt for bruk. Se <i>Avsnitt 8 'Daglig inspeksjon'</i> .
	Sørg for at spedbarnet alltid støttes og plasseres riktig i produktet før bruk, som vist i <i>Avsnitt 10 'Instruksjoner for bruk'</i> . Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at spedbarnet faller ut av produktet.
	Sørg for at selen er godt festet rundt spedbarnet, og vær oppmerksom på borrelåsområdene. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at spedbarnet faller ut av produktet.

Bruk


	Produktet må kun brukes innendørs på en flat, fast og jevn overflate. Produktet skal ikke brukes på høye overflater (f. eks bord).
	Spedbarn bør ikke forlates uten tilsyn på noe som helst tidspunkt mens produktet brukes.
	Vær nøye med spedbarnets hodeposisjon. Sørg for at luftveiene deres alltid er klare.
	Sørg for at produktet alltid er stabilt under bruk og ikke kan velte med spedbarnet i produktet.
	Ikke løft produktet opp fra gulvet når spedbarnet er festet.
	Ikke la spedbarnet sove i produktet. Å sove på magen kan øke kvelningsrisikoen og antas å øke risikoen for krybbedød (SIDS). <i>Ref: NHS Guidelines and US Safe to Sleep® campaign.</i>

	Daytot Aktivitetsmatte kan brukes for å gi en ren og jevnt overflate. Alternative matter er ikke testet og anbefales ikke for bruk med produktet.
	Ingen andre enheter eller produkter skal brukes sammen med Joey.
	Sørg for at barnets hender/fingre/føtter/tær alltid holdes unna undersiden av produktet for å unngå skade.
	Legg merke til posisjoneringskravene for størrelse og sørg for at riktig konfigurasjon brukes for spedbarnet. Se <i>Avsnitt 10 'Instruksjoner for bruk'</i> .
	Joey-trekkene inneholder latex.

Rengjøring og oppbevaring

	Ikke fjern hjulene fra produktet.
	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	Ikke oppbevar produktet i direkte sollys eller i ekstreme temperaturer.

Avfallshåndtering

	Følg lokale avfallshåndteringsregler dersom du skal kaste produktet. Komponenter kan separeres for å gjøre avfallshåndteringen enklere.
---	---

AVSNITT 4: Vilkår for garanti

Produktet kan returneres til Daytot for garantireparasjon eller erstatning i opptil 12 måneder fra kjøpsdato. I alle tilfeller er det kundens ansvar å sørge for at varene som returneres er forsvarlig pakket, helst i originalemballasjen.

Kontakt Daytot kundeservice for å varsle oss og få en saksreferanse-ID før du returnerer produktet.

Kunden er ansvarlig for kostnadene ved returnerte varer. Når varen er returnert til oss, vil vi reparere eller erstatte varene dine og returnere dem til deg innen 14 dager uten kostnad.

AVSNITT 5: Sikkerhets- informasjon

Advarsel til bruker/operatør:
Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med en enhet skal rapporteres til produsenten og staten der brukeren og/eller operatøren er etablert.

Gener

- 6 v >%o f

‡

- f monter andre komponenter enn de som medfølger. Reservedeler er tilgjengelig ved å kontakte Daytots kundeservice på: hi@daytotjourneys.com

Oppsett for bruk

- Sørg for at det er en liten klaring mellom skulderstroppene og spedbarnets nakke.
- Hold borrelåsområder og upolstrede overflater unna spedbarnet, da de kan forårsake skader.

Bruk

- Hvis spedbarnet viser noen form for plager utover det som anses som normalt, ta barnet ut av produktet, raskt og trygt. Det kan ta tid for spedbarnet å venne seg til produktet.

- I tilfelle hudirritasjon eller uønskede reaksjoner, ta spedbarnet ut av produktet og varsle Daytots kundeservice.
- Sørg for at selen er godt festet under bruk. Hvis selen løsner, stopp bruken, reposisjoner og sikre spedbarnet på nytt.
- Sørg for at spedbarnet alltid kan bevege hodet fritt under bruk.
- Sørg for at alle hjulenheter er i kontakt med gulvet under bruk. De to ytre stabilisatorhjulene kan løfte seg opp et øyeblikk under bruk. Hvis du er i tvil om stabiliteten til spedbarnet eller produktet, slutt å bruke produktet og kontakt Daytot kundeservice.

Rengjøring og oppbevaring

- Sørg for regelmessig rengjøring av alle deler i henhold til *Avsnitt 7 "Rengjøring og vedlikehold"*. Unnlattelse av å følge disse instruksjonene kan føre til raskere slitasje/feilfunksjon av produktet eller uønsket bakterieoppbygging.
- Sørg alltid for at produktet er fullstendig rengjort før det brukes av forskjellige brukere.
- Oppbevares på et passende sted for å unngå å snuble eller falle over det, og oppbevares utilgjengelig for barn.

AVSNITT 6: Forholdsregler og kontraindikasjoner

Joey kan brukes fra 37 ukers svangerskapsalder (full termin). Joey kan brukes hjemme, på sykehus eller i klinisk setting.

Forholdsregler

- Faste deformiteter som skoliose eller kyfose.
- Alvorlig høy tonus (veldig stramme muskler).
- Alvorlige muskelkontrakturer.
- Alvorlig muskel- eller skjelettasymmetri inkludert hofteluksasjon.
- Progressive og muskelsvinnende forhold.
- Høy risiko eller nylig historie med benbrudd.
- Sterke, ukontrollerte bevegelsesmønstre.
- Dårlig kontrollert anfallsaktivitet.
- Spedbarn som er avhengig av bruk av perkutan endoskopisk gastronomi (PEG).
- Medisinsk ustabilitet inkludert kompromittert åndedretts- eller kardiovaskulær funksjon.
- Avhengig av tredjeparts livsoppretholdende apparater som f.eks oksygentanker.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner forbundet med bruk av Joey. Alle forhåndsregler tas etter skjønn av den forskrivende kliniker eller forelder.

Daytot anbefaler at en utdannet og erfaren kliniker er tilstede under innledende vurderinger, oppsett og når produktet utgis på nytt, for å minimere risikoen.

Terapeuter bør bruke listen over forholdsregler og kontraindikasjoner som en veiledning. Der foreskrivende terapeut føler at et spedbarn er egnet, ber vi om at de gjør en risikovurdering og går videre ut fra sin kliniske ekspertise.

AVSNITT 7: Rengjøring og vedlikehold

- Økt, daglig og ukentlig produktrengjøring anbefales.
- Demonter produktet og følg de spesifikke veiledningene for hver del.
- Ikke bruk blekemiddel til å rengjøre produktet eller noen av dets deler.
- Ikke belast produktet unødvendig ved å lagre det under andre enheter.
- Oppbevares på et egnet sted for å unngå å snuble over det.

Rengjøring

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller apparater.
- Om nødvendig, demonter og rengjør plastdelene med varmt vann, antibakteriell såpe og en ren, tørr klut.
- Ikke forsøk å fjerne hjulenheter for å rengjøre.
- Rengjør om nødvendig den bevegelige overflaten på hjulenheter med en ren, tørr klut. Bruk om nødvendig en liten mengde varmt vann for å fukte kluten. Sørg for at alle hjulenheter er frie og ikke hindres av skitt og møkk.

- Ikke legg produktet i vann.
- Sørg for at alle deler er helt tørre før de monteres/brukes igjen.

Trekk

- Må ikke tørkes i tørketrommel eller strykes med strykejern.
- Fjern flekker så raskt som mulig med en absorberende klut, håndkle eller svamp. Såpe- og svamp med varmt vann er effektivt for vanlig tilsmussing og mindre søl. Vær forsiktig så du ikke metter stoffet, da det kan føre til at flekken sprer seg.
- Trekkene kan vaskes i vaskemaskin på 40 grader. Fjern puten før vask.
- Smekkene kan vaskes i vaskemaskin på 40 grader.
- For å sikre at borrelåsen forblir "klebrig", fjern all lo med jevne mellomrom ved å bruke enten en tørr tannbørste, stålbørste/hundebørste eller en selvklebende lorulle.
- Sørg for at alle skumdeler er helt tørre før de monteres igjen.

Pute

- Bruk om nødvendig en klut med litt vann og antibakteriell såpe for å rengjøre skummet. Sørg for at puten er helt tørr før bruk.
- Skal ikke vaskes eller tørkes i vaskemaskin og tørketrommel.

Aktivitetmatte

- Tørk av med såpevann eller desinfiser med husholdningsdesinfeksjonsmiddel. Ikke bruk blekemiddel. Vask før første gangs bruk.

AVSNITT 8: Daglig inspeksjon

Følgende veiledning bør følges før hver økt. Hvis du er i tvil om sikkerheten til produktet, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt Daytots kundeservice på: hi@daytotjourneys.com.

- Sørg for at ingen plastdeler er skadet. Se etter store sprekker.
- Sørg for at trekket ikke er skadet. Se etter rifter, løse sømmer, tilsmussing og at elastiske deler fortsatt er stramme.

- Kontroller at stabilisatoren er godt festet og at knappen er stram og sikker. Hvis skrueregjengene krysses, kontakt Daytot kundeservice.
- Kontroller at alle hjulene beveger seg fritt i alle retninger og at de bevegelige flatene er fri for smuss.
- Sørg for at alle hjulene er i kontakt med gulvet når de er plassert på en flat overflate, unntatt det sentrale stabilisatorhjulet (1 mm klaring).
- Kontroller at puten og trekkene sitter riktig på plastdelene. Hvis de har blitt skadet, vennligst kontakt Daytot kundeservice.
- Kontroller at smekkene ikke er skadet og at de er ordentlig montert, slik at det ikke er overflødig materiale samlet i hodeområdet. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til blokkering av luftveiene.
- Følg med på hovedposisjoneringskravene for størrelsene og sørg for at riktig konfigurasjon brukes for barnet.

AVSNITT 9: Gjenbruke Daytot- produkter

Før et Daytot-produkt skal gjenbrukes, anbefaler vi at det desinfiseres ved å bruke følgende prosedyre:

- **Merk: Rengjør alltid produktet først for å fjerne skitt før desinfisering/desinfeksjon.**
- Alle harde overflater bør tørkes over med desinfiserende servietter eller flytende desinfeksjonsmiddel på en myk klut. Egnede produkter er 70% IPA, 70% alkohol eller antibakteriell vask eller varmt vann. Produsentens instruksjoner for det valgte produktet bør følges. Trekk og tekstiler skal rengjøres grundig i henhold til **Avsnitt 7**, "Rengjøring og vedlikehold".
- Sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. Hvis du er i tvil om fortsatt sikker bruk av ditt Daytot produkt eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet og kontakt Daytot kundeservice.


AVSNITT 10: Instruksjoner for bruk

10.1: Pakke ut og montere Joey

Pass på at du ikke skjærer gjennom boksen, da du kan skade delene inni. Delene vil være i poser. Fjern dem forsiktig fra esken og kontroller at du har alle delene som kreves.

Inkludert:


- A. Hoveddel
- B. Stabilisator inkl. skruknapp
- C. Dekse/pakke
- D. Pute
- E. Smekker (x3)
- F. Bruksanvisning

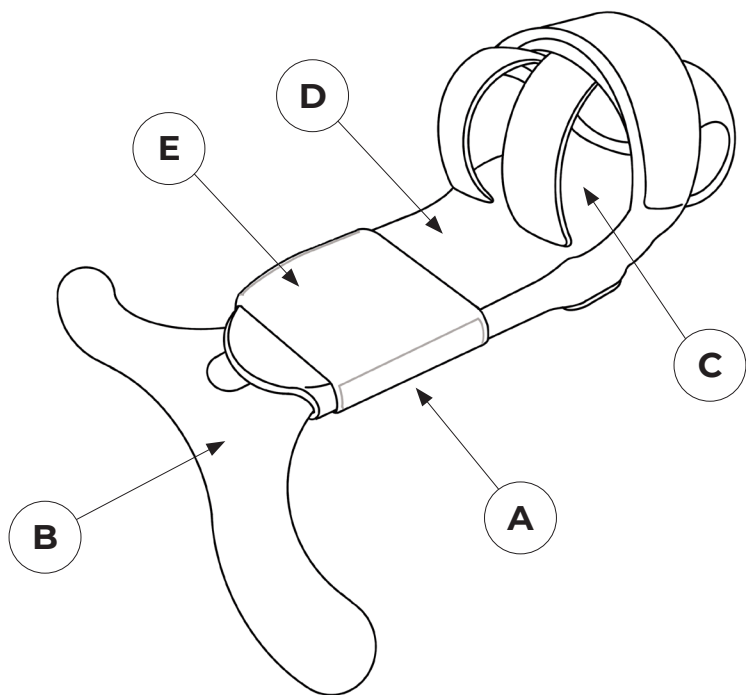


10.2: Feste stabilisatoren

10.2.1 Plasser hoveddelen på toppen av stabilisatoren.

10.2.2 Fest begge delene sammen ved å stramme skruknotten for hånd.

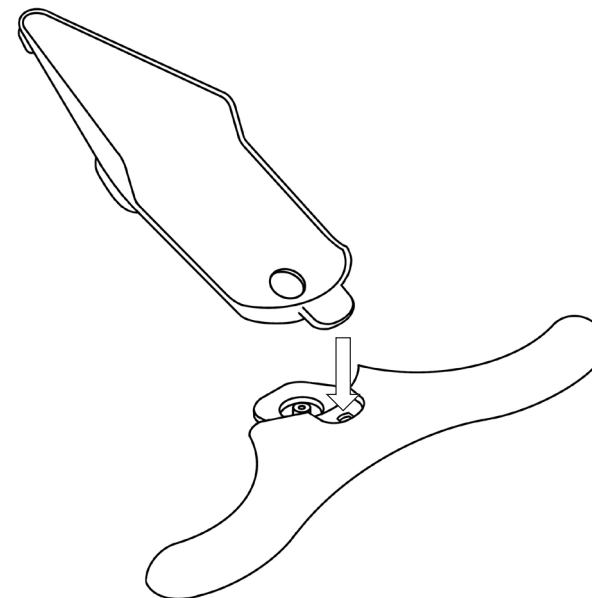

10.2.1

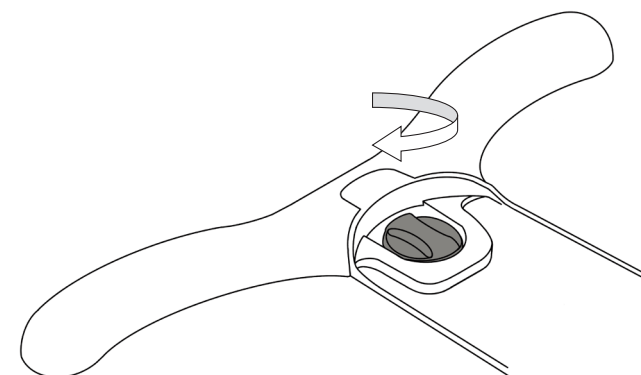


10.2.2


10.3: Sette inn puten

10.3.1 Størrelse 1 – Skyv puten under tappene på toppen og bunnen av trekket.

10.3.2 Størrelse 2 – Skyv puten under tappene øverst og nederst på trekket og innenfor begge midtre stropper (!)

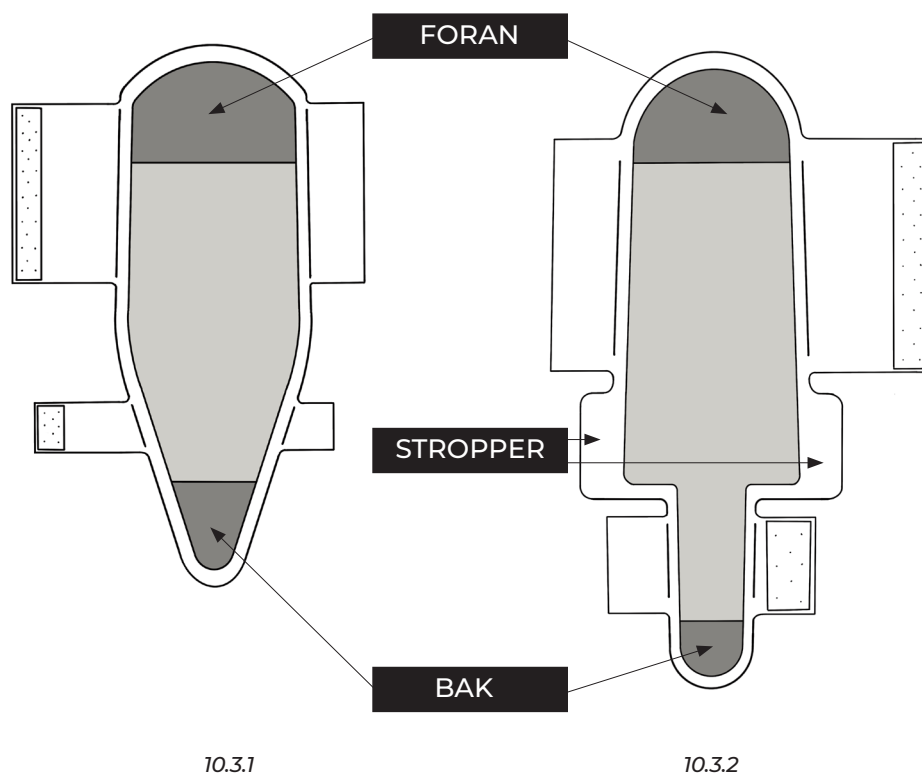
**10.4: Justere innsatsen - Kun str. 2**

10.4.1 Joey Størrelse 2 leveres med en innsats som kan brukes til å heve spedbarnets bekken opp fra gulvet. Dette vil være nødvendig etter hvert som de vokser. Innsatsen har to sider: **A** og **B**.

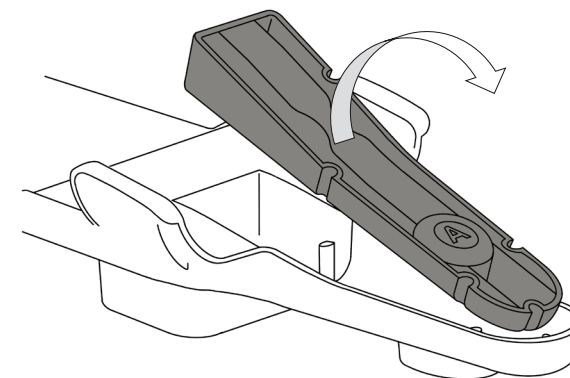

Side A bør brukes i første omgang ved overgang fra Joey størrelse 1. Dette er for å få plass til spedbarn i alderen 2-4 måneder (ca.). Denne innstillingen holder bekkenet lavt til bakken, slik at føttene til spedbarnet får kontakt med gulvets overflate.


10.4.2 **Side A** – Innsatsen skal være i flukt med produktet. Du vil se bokstaven "A" vendt oppover.

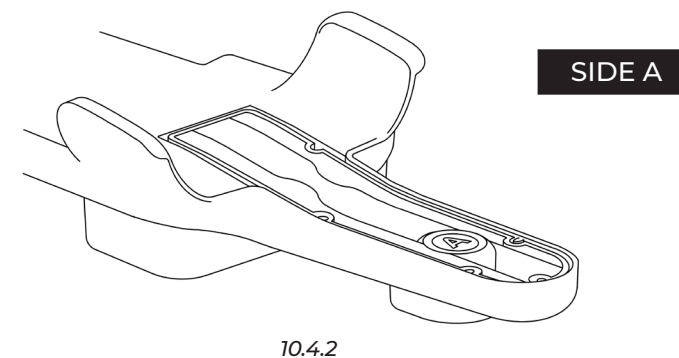


Side B bør innføres ved ca. 4 måneder gammel. Du bør gå videre til side B når spedbarnets knær berører gulvoverflaten, noe som igjen forhindrer full bøyning og ekstensjon av bena og/eller knærne (krypene bevegelser).

10.4.3 Side B – Snu innsatsen opp ned og plasser den tilbake i produktet som vist nedenfor. Du vil se bokstaven "B" vendt oppover. Dette vil heve bekkenet til spedbarnet med 15 mm.

10.4.4 Hvis du bruker innsats B, bør du også feste trykknappen på undersiden av selen til trykknappen på baksiden av dekselet.

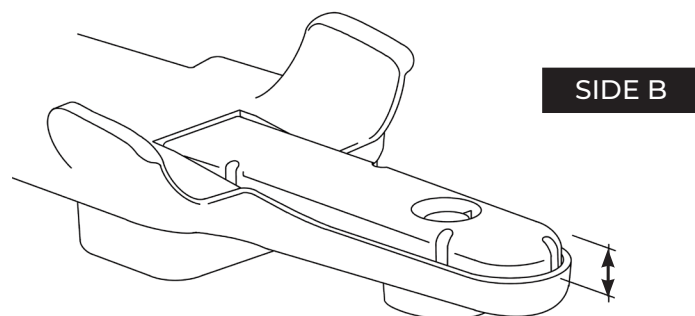

10.4.3

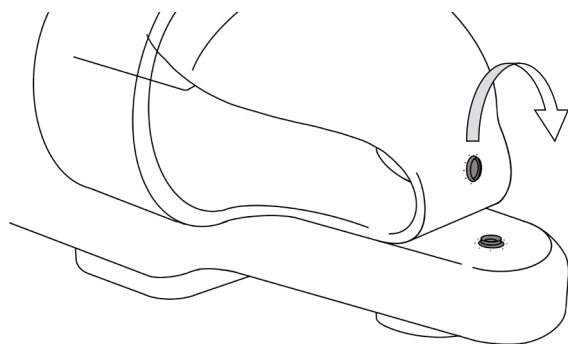

10.4.4

Hvis du har noen spørsmål angående innsatsen, vennligst se størrelsesguiden på nettsiden vår, ta kontakt med spedbarnets terapeut eller kontakt Daytots kundeservice.


10.5: Feste trekkene

Størrelse 1 Trekk:


10.5.1 Trekk ned trekket (med puten inni) over halen på baksiden av produktet som vist nedenfor.

10.5.2 Fest borrelåstappene foran og bak på produktet som vist.

Sørg for at borrelåsen er rett, flat og at undersiden av produktet er ryddig. Dette vil hindre at dekselet kommer i kontakt med gulvet.

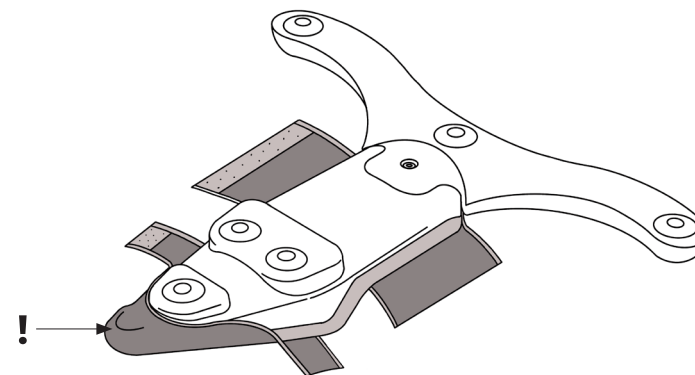

10.5.2

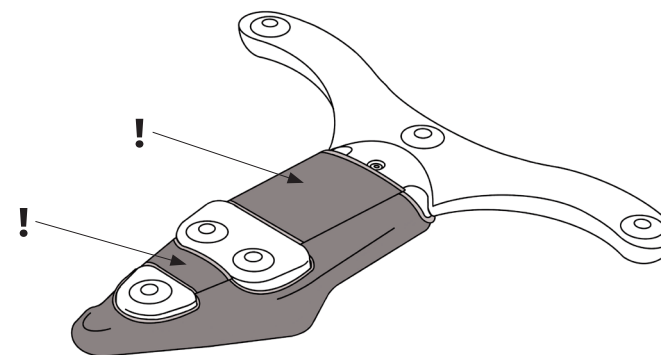


10.5.2


Størrelse 2 Trekk:

10.5.3 Trekk ned trekket (med puten inn) over halen på baksiden av produktet som vist nedenfor. Sett deretter de midterste stroppene på dekselet over produktet på hver side (1x2). Dette vil gjøre det lettere å feste borrelåsen.

10.5.4 Fest borrelåstappene foran og bak på produktet som vist. Sørg for at borrelåsen er rett, flat og at undersiden av Joey ligger pent. Dette vil hindre at dekselet kommer i kontakt med gulvet.

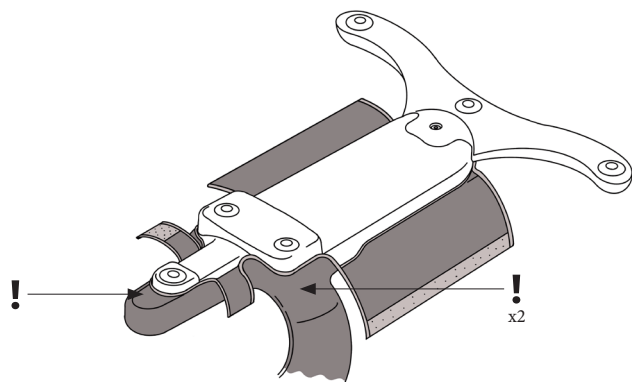

10.5.3

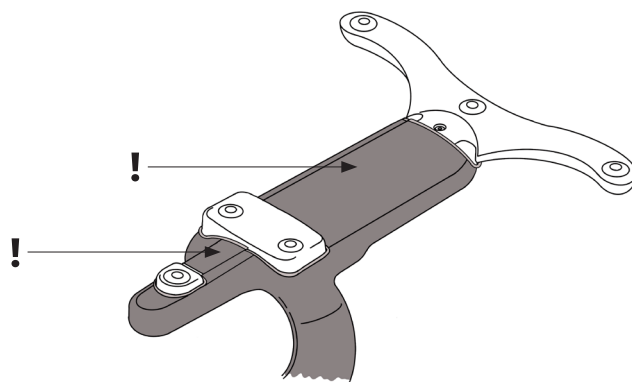


10.5.4


10.6 Feste smekken

10.6.1 Plasser en smekke på toppen av produktet der spedbarnets hode vil være. Trekk stramt på hver side slik at det ikke er bretter og fest ved å trykke godt rundt hver side.

10.6.2 Sørg for at smekken ligger glatt, sikkert og at det ikke er overflødig materiale som kan hindre spedbarnets luftveier.

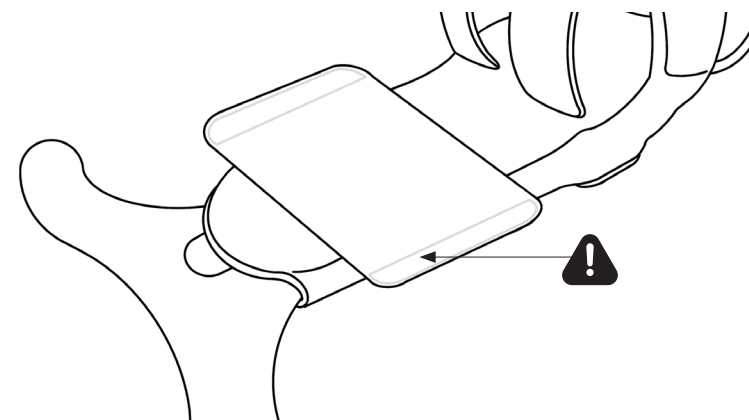

10.6.1

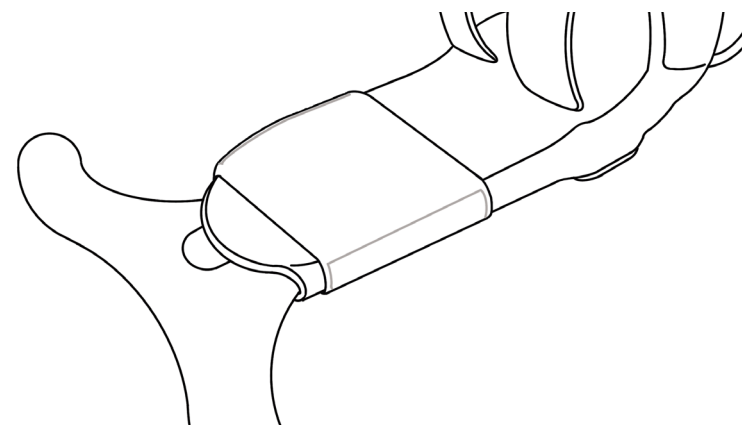

10.6.2

10.7: Forberedelse og oppsett

Vi anbefaler å bruke produktet før mating, eller vente minst 30 minutter etter at spedbarnet er matet i tilfelle fordøyelsesrefluks. Spedbarnet skal være i en rolig og våken tilstand.

Vi anbefaler at spedbarnet har på seg en body med frie ben og underarmer for å gi full bevegelse.

Spedbarnets føtter skal også være bare, uten sokker eller sko. Dette lar spedbarnet gripe overflaten når de presser i mot.

Plassere barnet i Joey

10.7.1 Åpne selen, midtre stroppen og skulderstroppene og legg dem flatt ut som vist.

10.7.2 Den voksne bør plassere seg bak produktet for å sikre at spedbarnet er sentralt justert. Plasser spedbarnet i en liggende stilling og støtt hodet og magen mens du senker dem forsiktig på produktet. Spedbarnet skal legges på magen med ansiktet til den ene siden. Juster spedbarnets skuldre litt forbi skulderstroppene (ca. 2,5 cm/1").


10.7.3 Støtt spedbarnet med en hånd mens du fester det på plass. Trekk selen opp mellom bena på ryggen. Sørg for at babyens ben kan bevege seg fritt og at føttene kan berøre gulvet. For mindre spedbarn kan toppen av selen stikkes inn under under selen.

10.7.4 Fest hver skulderreim diagonalt, en om gangen over spedbarnets kropp slik at de avsluttes som et kryss. Skulderstopper skal trekkes fast mot skulderområdet til spedbarnet og skape en fast overflate å presse mot.


10.7.5 Trekk den høyre stroppen godt over midten av spedbarnets rygg. Trekk deretter den venstre stroppen godt over til den andre siden og trykk ned borrelåsen. Sørg for at den midterste stroppen sitter jevnt over midten av spedbarnsryggen.

NB. Spedbarnet skal plasseres med hode og nakke bøyd, overkroppen godt sikret og armer og ben frie til å bevege seg. Selen skal være tetsittende.


For å kontrollere stabilitet og riktig innretting kan du gi spedbarnet en forsiktig svai fra side til side. Hvis barnet virker ustabil, ta spedbarnet ut av produktet og start prosessen på nytt.

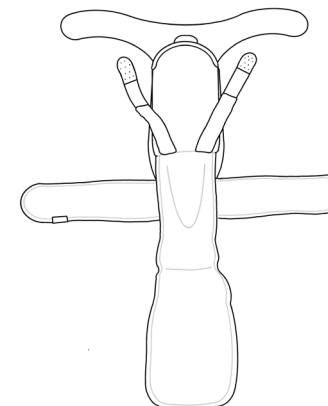


10.7.1

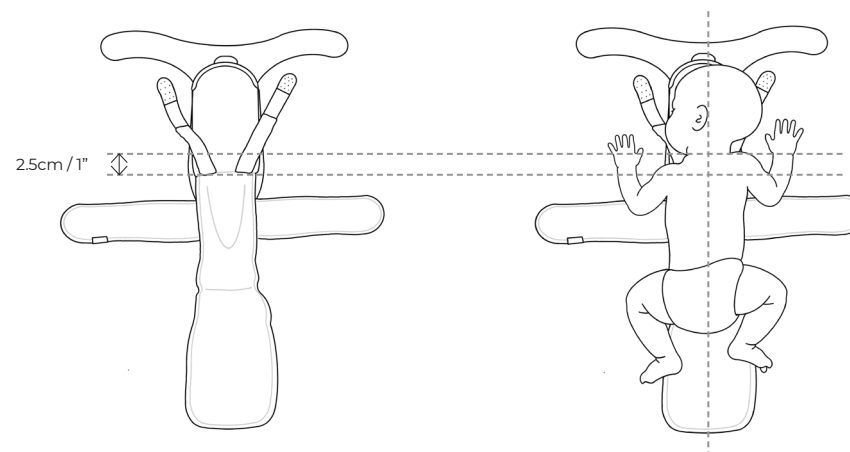


10.7.2

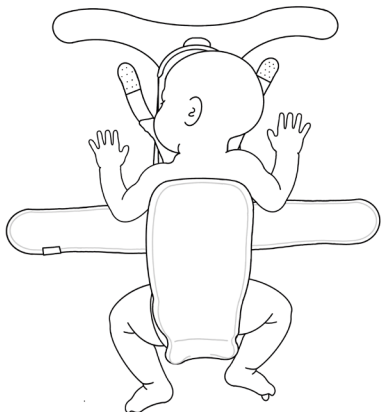

10.7.3

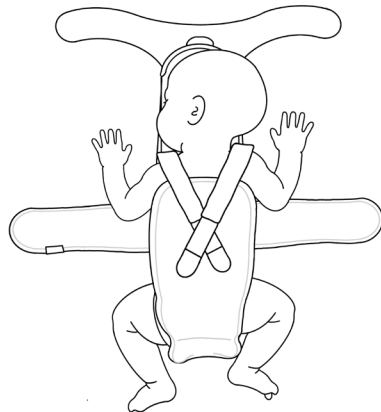

10.7.4

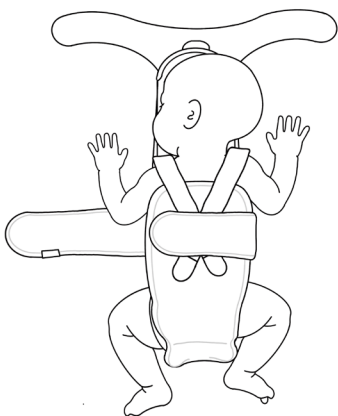

10.7.5

10.8: Bruke Joey

Når spedbarnet er sikkert plassert, gi det litt tid til å tilpasse seg det nye miljøet.

I starten kan den voksne legge baksiden av hånden bak fotsålene til spedbarnet (horisontalt) for å hjelpe dem å presse fra. Du kan også legge håndflatene på spedbarnets hender flatt hver gang de tar et skritt fremover, for å oppmuntre til vektbæring gjennom armene.

Produktet er designet for å oppmuntre til naturlig utvikling av gjensidig krypende bevegelse (venstre ben, høyre arm eller høyre ben, venstre arm). Derfor anbefaler vi at du veksler med hånden bak spedbarnet, en fot av gangen, til spedbarnet begynner å lære og sette i gang denne bevegelsen selvstendig.

Under økten

Den voksne kan stå i den andre enden av matten for å oppmuntre spedbarnet til å bevege seg framover (veksle mellom den voksnes posisjon på venstre og høyre side for spedbarn med en preferanse for å snu hodet, for å oppmuntre til rotasjon av hodet).

Du kan også foreslå leker for å fange oppmerksomheten til spedbarnet og oppmuntre til å bevege seg fremover.

Sørg for at spedbarnet komfortabelt kan snu hodet til siden under trening.

NB: Det er vanlig at spedbarn gråter når de beveger seg, spesielt før fylte 2 måneder på grunn av anstrengelsene for å bevege seg.

Hvis spedbarnet viser tegn på tretthet eller er oppriktig opprørt, bør du ta spedbarnet ut av Joey og prøve igjen senere.

Varighet av trening

En økt på 5 minutter per dag anbefales i de første øktene. Hvis det tolereres godt, kan økten utvides til 10 minutter per dag (2x5 minutters økter). Hvilepauser oppfordres.

Noen spedbarn kan forlenge bruken av produktet utover 6 måneder, avhengig av funksjonshemming, tilstand eller vekst. Du kan fortsette å bruke produktet til de vokser ut av denne størrelsen.

Dette kan identifiseres når:

- spedbarnets kropp er for lang, og hodet stikker ut over stabilisatorområdet.
- spedbarnets ben er for lange, og knærne berører matten/gulvet når de bøyer kneet/benet (hemmer bevegelser).
- spedbarnet begynner å vise tegn til vektbæring på alle fire.
- spedbarnet begynner å krabbe selvstendig.

10.9: Demontere Joey

For å demontere produktet, reverser trinnene fra henholdsvis 10.2 - 10.6.


10.10: Tilbehør

I tillegg til tilbehøret som er oppført i starten av avsnitt 10, er følgende tilbehør også tilgjengelig for kjøp fra Daytot sin nettside på www.daytotjourneys.com.



- Smekker (pakke på x3)
- Daytot Aktivitetsmatte
- Ekstra stofftrekksett


AVSNITT 11: Tekniske informasjon**11.1: Produktmål****Størrelse 1**

Str. 1 Produktvekt = 0.8kg / 1.8lbs

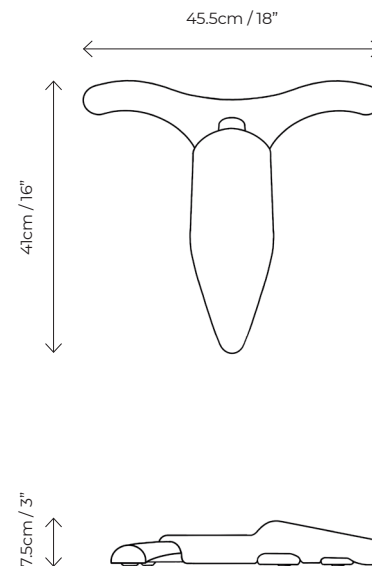**Størrelse 2**



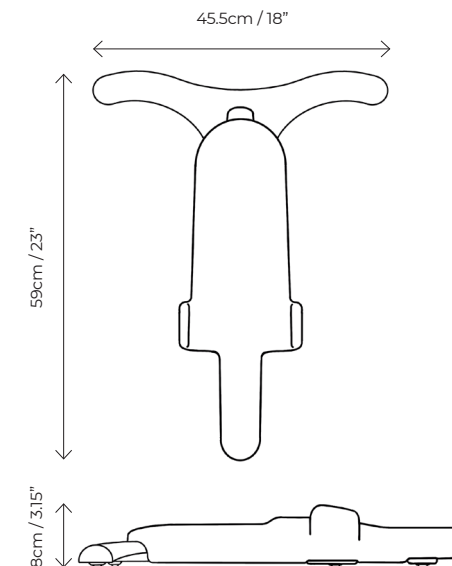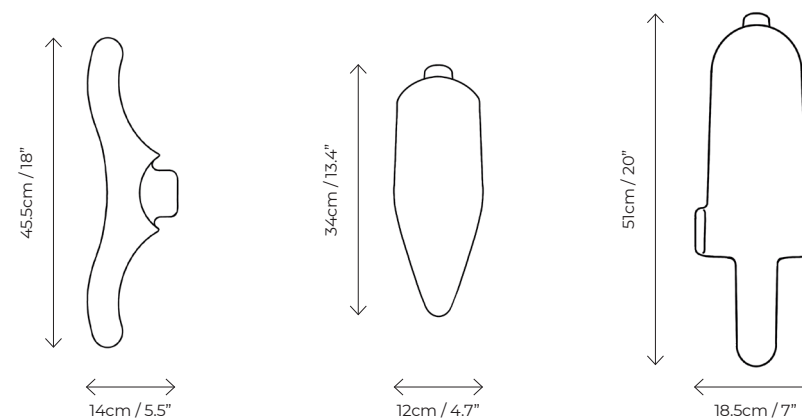

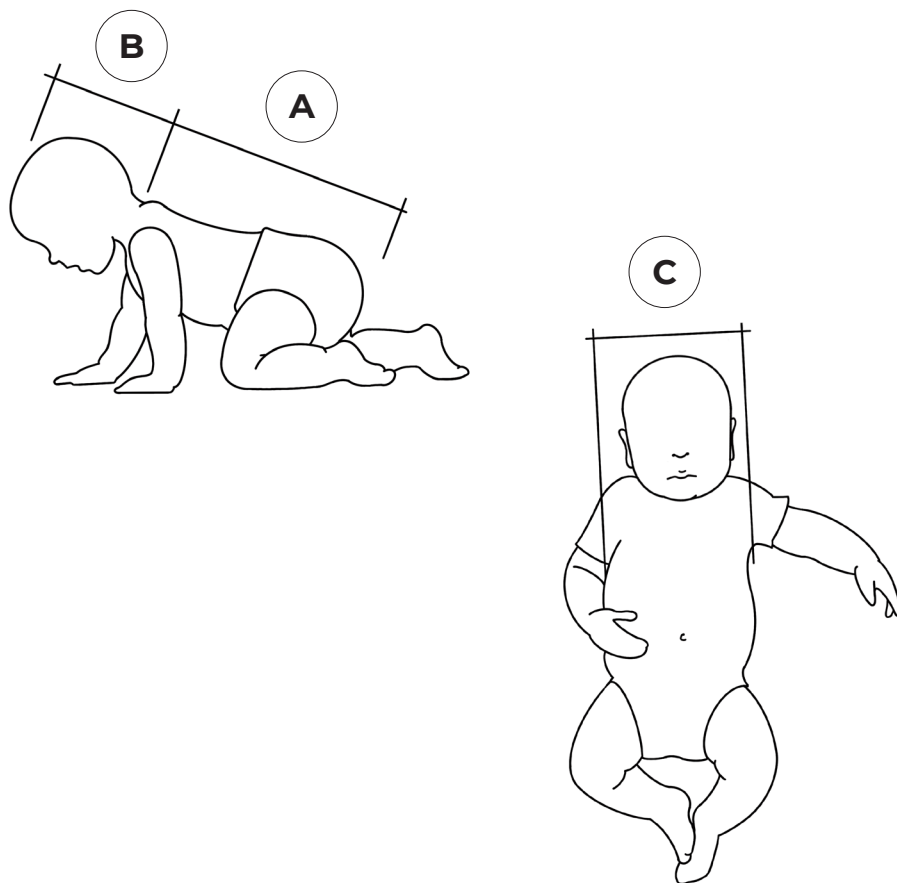




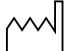







Str. 2 Produktvekt = 1.3kg / 2.9lbs

**Demontert**

11.2: Brukerstørrelse – nøkkeldimensjoner å måle**11.3: Størrelsestabell**

Dimensjon	Beskrivelse	S1	S2
Alder	Ca.	0-2 måneder	2-6+ måneder
Maks. brukervekt		Maks. 5kg / 11lbs	Maks. 10 kg / 22lbs
A	Skulder – Sete	Maks. 24cm / 9.4"	Maks. 27 cm / 10.6"
B	Toppen av hodet – Skulder	Maks. 17cm / 6.7"	Maks. 23 cm / 9.0"
C	Brystbredde	Min. 11 cm / 4.3"	Min. 15 cm / 5.9"

AVSNITT 12: Tabell over symboler

Symbol	Betydning
	Medisinsk utstyr
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE merke
	Advarsel
	Forsiktig
	Produsent
	Produktkode
	Serienummer
	Maks. brukervekt
	Produksjonsdato
	Inneholder lateks
	Unik enhetsidentifikasjon
	Maskinvask – vanntemperatur 40°C
	IKKE tørke i tørketrommel
	IKKE stryk med strykejern
	IKKE blekes
	IKKE renses

AVSNITT 13: Ofte stilte spørsmål

Hvordan vet jeg om Joey passer for mitt barn?

Joey er et produkt som skal bidra til tidlig krabbing og gi spedbarn en tidlig mulighet for selvstendig bevegelse. Tiltentk bruk fra 37 ukers svangerskapsalder (hel termin) til ca. 6 måneder.

Vennligst se vår størrelsetabell for å sjekke våre anbefalte brukerdimensjoner og vekt.

Er det noen grunner til ikke å bruke Joey?

Hvis spedbarnet har ekstrem tonus eller nylig har vært operert (for eksempel for ryggrads-defekter), anbefaler vi at du søker råd fra din terapeut og/eller lege før du bruker Joey. En fullstendig liste over forholdregler i avsnitt 6 i bruksanvisningen.

Hvor mange ganger per dag bør jeg bruke Joey?

Dette kan variere avhengig av spedbarnets alder, evner, humør og tidspunkt på dagen. Bli veiledet av spedbarnet, men unngå å la dem bli trette, da dette kan påvirke evnene deres i andre daglige aktiviteter.

Spedbarnet kan like å bruke Joey ofte, i så fall kan det være aktuelt med to ganger daglig bruk av 5 minutters økter. Hvis spedbarnet har ekstrem tonus eller sensoriske problemer, kan du oppleve at du trenger å gå saktere fram og kan bygge opp toleranse over tid.

Mitt barn har ekstrem høy/lav muskeltonus. Er de egnet?

Hvis spedbarnet har ekstreme tonus, kan de finne det vanskelig å bruke Joey i hele den anbefalte varigheten av daglig bruk. I dette tilfellet kan Joey brukes til å bygge styrke og toleranse for denne posisjonen som kan bygges opp over tid. Hvis du er i tvil om barnets egnethet, ta kontakt med din terapeut.

Barnet mitt klarer ikke å gripe gulvet med føttene. Hva bør jeg gjøre?

Vi anbefaler alltid å bruke Joey med bare føtter, da dette vil hjelpe barnet til å gripe gulvoverflaten. Hvis gulvflaten du bruker er for glatt, anbefaler vi at du prøver å bruke Daytot Aktivitetsmatte, eller en annen flat og glatt overflate i hjemmet for å se om det hjelper.

Barnet mitt beveger bena, men armene trekkes bakover. Hva bør jeg gjøre?

Vi ønsker å oppmuntre til gjensidig bevegelse av naturlig krabbing der det er mulig. Hvis du jobber med et barn med lav overkroppsstyrke eller tonus, kan du støtte dem ved å plassere håndflatene deres for hvert steg de tar.

Prøv å veksle fra å jobbe med spedbarnet bakfra, til å jobbe med dem forfra. Jobb med dem for å få armene ved siden av dem, med underarmene eller håndflatene flatt på gulvet.

Barnet mitt sitt ben trekkes bakover som om det "svømmer" i luften. Hvordan kan jeg oppmuntre det til å senke hoftene?

Dette tyder på at spedbarnets hofter er hevet for høyt, og det er sannsynligvis på grunn av at spedbarnet er plassert for langt opp på produktet, eller på grunn av bruk av feil størrelse.

Følg disse trinnene:

1. Se størrelsetabellen for å sjekke egnethet.
2. Sjekk innsatsinnstillingen. Hvis du har gått fra størrelse 1 til størrelse 2, bør du bruke innstilling A. Du bør se bokstaven "A" vendt oppover. Hvis du nettopp har kjøpt størrelse 2, bør du begynne med innsats A og sjekke hvor mye klaring det er mellom spedbarnets kne når det bøyes, for å sjekke om innsatsen er tilstrekkelig hevet. Se måltabellen for ytterligere veiledning om krav til innsatsstørrelse.
3. Prøv å flytte spedbarnet litt lenger ned i produktet slik at føttene deres kan komme i kontakt med gulvflaten. Pass på at skuldrene ikke faller under toppen av skulderstroppene, da dette kan forårsake ustabilitetsproblemer.

For ytterligere råd om størrelse, ta kontakt med spedbarnets terapeut, eller kontakt Daytots kundeservice.

Barnet mitt ser ikke stødig ut, hva skal jeg gjøre?

De to ytre stabilisatorhjulene kan løfte seg under bruk. Dette er normalt. Det er imidlertid viktig å sørge for at spedbarnet er trygt, sikkert og komfortabelt i produktet. Joey bør kun brukes innendørs på en flat, fast og jevn overflate.

Hvis du er i tvil om stabiliteten til spedbarnet eller produktet, se avsnitt 10.7 "Forberedelse og oppsett" for å sikre riktig oppsett og plassering av spedbarnet på produktet.

Hvor ofte bør jeg rengjøre Joey?

Vi anbefaler daglig og ukentlig rengjøring slik at du får mest mulig ut av produktet ditt, nå og i fremtiden.

Sørg alltid for produktet er fullstendig rengjort før det brukes av forskjellige brukere. Du finner råd i *Avsnitt 7 'Rengjøring og vedlikehold'* i bruksanvisningen.

Hvilken fremgang vil barnet mitt gjøre med Joey?

Fremgangen med Joey vil variere fra barn til barn. Det avhenger av mange ting, for eksempel barnets funksjonshemming/tilstand, om det er noen underliggende (eller assosierte) helsetilstander, og hvor ofte de bruker Joey. Vi anbefaler at du snakker med terapeuten din for å få hjelp til å sette passende mål og milepæler for barnets utvikling.

