

- Sammenleggbart
- Sidekollisjonsbeskyttelse
- Opptil 50 kg
- 100 - 150 cm

Desember 2024

Testet i henhold til
den nye
sikkerhetsstandarden
R129 -
sidekollisjonsbeskyttelse
inkludert!



HERCULES SMALL

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne



Hercules Small

"Ett skritt foran når det gjelder sikkerhet"

Vi er glade for å introdusere det nye Hercules Small bilsete - en trygg løsning for barnet ditt når dere skal på reise.

Dette bilsetet overholder ikke bare gjeldende sikkerhetsstandarder, men er også designet for å møte fremtidige krav som trådte i kraft fra september 2023. Hercules Small, som er testet i henhold til nyeste **R129 standarden** som tar hensyn til både **front- og sidekollisjoner**, tilbyr et høyt sikkerhetsnivå og effektiv beskyttelse for barnet ditt.

Hercules Small er utstyrt den med viktige tilleggsfunksjoner som sidekollisjonsbeskyttelse, bekken- og benføringer og hodestøtte. Hvert av disse elementene spiller en nøkkelrolle for å oppfylle de strenge sikkerhetsstandardene samtidig som de sikrer barnets komfort og støtte.



Bilsetestandarden R129 legger spesiell vekt på økt beskyttelse ved sidekollisjonsulykker og stiller høyere krav til bilbeltesystemet og forankringen av barnesetet i kjøretøyet. Bortsett fra kollisjonssikkerhet er andre aspekter som brukervennlighet, ergonomi og bruk av materialer med lavt forurensningsnivå også utsatt for strengere tester.

Med helt nye funksjoner




SIDESTØTTEBESKYTTELSE

gir spesielt god sidekollisjonsbeskyttelse - de absorberer kreftene på best mulig måte, spesielt i hode- og skulderområdet.



Testet i henhold til den nye sikkerhetsstandarden R129

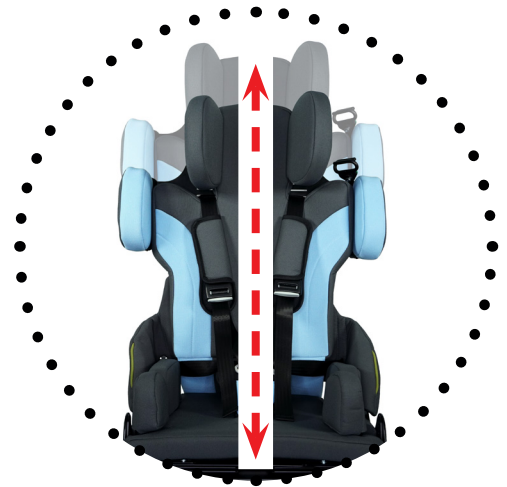

RYGGHØYDE

Ryggstøtten kan justeres trinnløst i høyden med 25 cm, slik at den til enhver tid kan tilpasses barnets vekst. Hodet holdes i en optimal posisjon med hodestøtten. Det store utvalget av tilbehør som vokser med produktet, sørger for lang brukstid.




BENFØRING

Smale og brede brukere med setebredde fra 29 cm til 38 cm sitter godt støttet til enhver tid. Bekken- og benføringene som vokser med brukeren er trinnløse og individuelt justerbare på hver side - også asynkront.

HODESTØTTE

er asynkront justerbart i bredde (8,5 cm) og høyde (3 cm). Via separat tilbehør kan den også justeres i dybden, noen som gjør at stimulusoverbelastning kan forhindres.

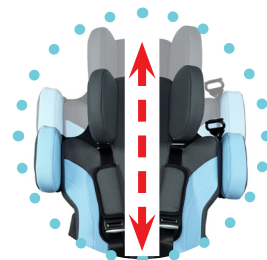

RYGGHØYDE

kan justeres (24 cm). Dermed tilpasser setet seg barnet og gir lang brukstid.



SIDESTØTTEBESKYTTELSE

gir spesielt god sideskollisjonsbeskyttelse - de absorberer kreftene på best mulig måte, spesielt i hode- og skulderområdet. **Testet i henhold til den nye sikkerhetsstandard R129**



TILBEHØR: RYGGVINKEL

kan justeres med ryggstøtten med to hurtighåndtak - helt uten verktøy: kun bruk de røde quick release-klemmene.



5-PUNKTSSELE

gir ekstra støtte og en god og sikker sittestilling under turen med de myke skulderputene - riktig beltelengde justeres raskt og enkelt med de to spennene.



SETEPUTE

med tykk polstring for behagelig sittekomfort uten irriterende svetting. Det pustende trekket kan tas helt av og vaskes på 40° C - uten å løsne stroppene.

BELTESPENNE

Skulderstroppene kan klikkes individuelt inn i hurtigspennen, noe som betyr enklere fastspenning for forelder eller ledsager.

BELTESPENNEPOLSTER

reduserer trykket fra beltespennen på det følsomme mageområdet og skjuler spennen.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

BENFØRING (VENSTRE OG HØYRE)


brukes for å støtte og posisjonere lårområdet. Disse justeres asynkront.



SETEDYBDE

kan justeres trinnløst med 6 cm for individuell tilpasning for barnets vekst.

Valg av to fargedesign:

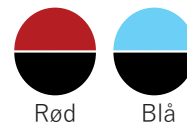

Rød

Blå

TILPASSET SIKKERHET: VÅRT TILBEHØR TIL DIN HERCULES SMALL

Funksjonelle baser



For å takle overføringen av barn som vokser, er roteringsplate en stor lettelse for ryggen. Utløseren er montert i frontområdet for å sikre at det utføres komfortabelt.



I tilfeller med brukere med svak overkropp og hodekontroll (hypotonisk, "slapp"), er den justerbare setetilten en viktig støtte for å hindre i å tippe fremover. Barnet sitter i en avslappende hvilestilling og trenger ikke å anstrenge muskler. Den passende vinkelen kan justeres etter behov.

TRIGGER (fig. under)

forenkler overføringen, eventuelt kan setet nås til høyre eller venstre. Utløser for rotasjon (Fig. over)

TILTFUNKSJON

for setetilt i flere trinn for en avslappet hvilestilling under kjøring (0 - 10° eller med forlengelse 12,5 - 20°).

Stabilitet for rehab bilsete



SEATFIX (bak setet)

holder setet sikkert på plass, også når man kjører uten en bruker i setet.



STABILISERINGSBUE

sikrer et sikkert grep om setet når det ikke er isofix i kjøretøyet.

Setet utsettes for ekstra påkjenninger, spesielt når rotasjon- og tiltfunksjonene brukes daglig. Nyttig tilbehør bør brukes for å stabilisere setet i bilen - for bedre håndtering og mer sikkerhet for bruker og ledsager.

Sikker støtte for hode og føtter



ANDRE BELTEFØRING (over)

som et praktisk alternativ for bruk av 3-punkts sikkerhetsbelte enten til høyre eller venstre.



HODESTØTTE EKSTRA FORLENGELSE (side)

beskytter barnet mot sensorisk overbelastning under bilturen.



FOTSTØTTE (nedfellbar)

gjør det lettere å komme inn og ut, og hindret at setet sklir ut (høyde- og vinkeljusterbar).

Hercules Small

Festigkeitsnachweis durch Crashtest in Anlehnung an

ECE R129/03

Frontaufprall

Test-Nr. S230301002

Seitenaufprall

Test-Nr. S230302001

Proof of strength by crash test in accordance to

ECE R129/03

Front impact

Test-No. S230301002

Side impact

Test-No. S230302001

KOLLISJONSTESTET

vellykket bestått i henhold til R129.

God sittestilling



SIDESTØTTE (faste)

gir fast sidestøtte og støtter brystet.



SIDESTØTTER (svingbare)

gir fast sidestøtte for brystet og letter overføringen.



SKULDERPUTER

for å redusere bredden på skulderen.



EKSTRA FORLENGELSE (høyde hodeområde)

gir et større område for barnet og hvile hodet mot.



ARMSTØTTER

gir god støtte for armene.



BORD

sørger for at barnet kan sitte oppreist og gir en ekstra sikkerhet (kan brukes med armstøtter).



TILLEGGSPUTE HODE

gir en enda mykere kontaktflate for hodet. Fyllet er avtagbart.



ABDUKSJONSFØRING

forbedrer benkontrollen og hindrer bena i å krysse hverandre.

Bruker og kjøretøy trygt beskyttet



BELTEFØRING (enkelt og alltid riktig)

Intuitiv, sikker bruk av 3-punktsselen. Det er ikke mulig å tre gjennom eller få knute. Krasjtestet!



BRYSTKLIPS

stanser farlig vridning av belter og holder beltene på plass.



PUTE FOR FUNKSJONELL BASE

sikrer maksimal støtteflate mellom kjøretøysetet og den funksjonelle basen for enklere forflytning.

En fullstendig oversikt over tilbehør finner du på bestillingsskjemaet på hjemmesiden vår.

STORT BLIR HÅNDTERBART



KUN 21.7 x 9.1 x 23.6"/55 x 23 x 60 cm

Med bare noen få håndgrep, foldes Hercules Small rehab bilsetet sammen slik at den tar mindre plass og er enkelt å håndtere. Dette forenkler ikke bare monteringen i bilen, men sikrer også at setet enkelt kan transporteres og oppbevares på en plassbesparende måte selv i mindre bagasjerom (eksempelfigur: VW Polo)



YouTube

Se videoen:
Så raskt og enkelt
monteres Hercules Small
i bilen.

Dimensjoner og mål

	Hercules Small
Setedybde	31 - 42 cm / 12,2 - 16,5"
Setebredde	29 - 38 cm / 11,4 - 15"
Rygg høyde (innside sete)	57 - 80 cm / 22,4 - 31,5"
Hode høyde (sete-nedre kant av hodepute)	Rygg min: 33,5 - 36,5 cm / 13,2 - 14,4" Rygg maks: 57 - 60 cm / 22,4 - 23,6"
Skulder høyde (belteføring)	33 - 60 cm / 13 - 23,6"
Skulder bredde (med skulderføring)	26 - 36,5 cm / 10,2 - 14,4"
Ryggvinkel (maks.)	90° - 145°
Setetilt (basismodell) (med tiltbase 10°) (med tiltbase 20°)	0° 0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10° 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Nedre benlengde (med fotstøtte)	16 - 42 cm / 6,3 - 16,5"
Høyde laterale sidestøtter (øvre kant)	28 - 34 cm / 11 - 13,4"
Avstand sidestøtter (maks.)	20 - 33 cm / 7,9 - 13"
Maks. totale dimensjoner (b x h x d)	55 x 85 x 34 cm / 21,7 x 33,5 x 13,4"
Min. foldet dimensjoner (b x h x d)	55 x 23 x 60 cm / 21,7 x 9,1 x 23,6"
Setevekt (basismodell)	11,6 kg / 25,6 lbs
Kroppsstørrelse av bruker	100 - 150 cm / 40 - 59"
Maks. brukervekt	50 kg / 110,2 lbs

Standardfunksjoner:

Rygg med integrert høydejustering; sete med integrert setedybdejustering og setebreddejustering; kontinuerlig justering av ryggvinkel med quick release spak; pustende trekk med flammehemmende trekkstoff; hodestøttepute, ryggpute, bekkenpute, benføring, setepute, skrittpute; 5-punktsbelte inkludert myke stropper; belteføring for 3-punkts bilbelte (kan brukes til høyre eller venstre); Sidekollisjonsbeskyttere; forberedte monteringsmuligheter for alt tilbehør; avtakbare trekk, maskinvaskbar opp til 40°C



Tilbehør

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
TH475		Svingfunksjon
TH476	326809	Tiltfunksjon 10 ^o
TH477		Forlengelse av tilt 12,5 ^o til 20 ^o
TH479		Seatfix Adapter*
TH421	313672	Stabiliseringsbøyle bak*
TH480		Stabiliseringsstag front**
TH481		Fotbrett oppfellbar**
TH483	326810	Skulderputer
TH486		Sidestøtter (fast)****
TH487	314643	Sidestøtter utsvingbare****
TH488		Abduksjonskloss
TH489		Armstøtter
TH491		Bord
TH490		Ekstra belteføring - skulder
TH494	326811	Tilleggspute hode
TH495		Ekstra forhøyning hodestøtte
TH496		Nakkestøtte - 4 cm dypere
TH423	313674	Beltesamler (brystklips)
TH433		Setebeskyttelse front
TH497		Inkontinenstrekk
TH513		Pute for base***
TH814		Setematte med rygg til bil
9800004980000		Spenne m/pute og magnetlås

* *Seatfix-adapter og stabiliseringsbøyle kan ikke brukes i kombinasjon.*

** *Stabiliseringsstag og fotstøtte kan ikke brukes i kombinasjon.*

*** *Pute anbefales for kjøretøyseter med setefordypning for å kompensere for funksjonsplatens og kjøretøysetets kontaktflate.*

**** *Sidestøtter (fast) og utsvingbare sidestøtter kan ikke brukes i kombinasjon.*

